


sensio

Vozono™ Speaker

Bruksanvisning

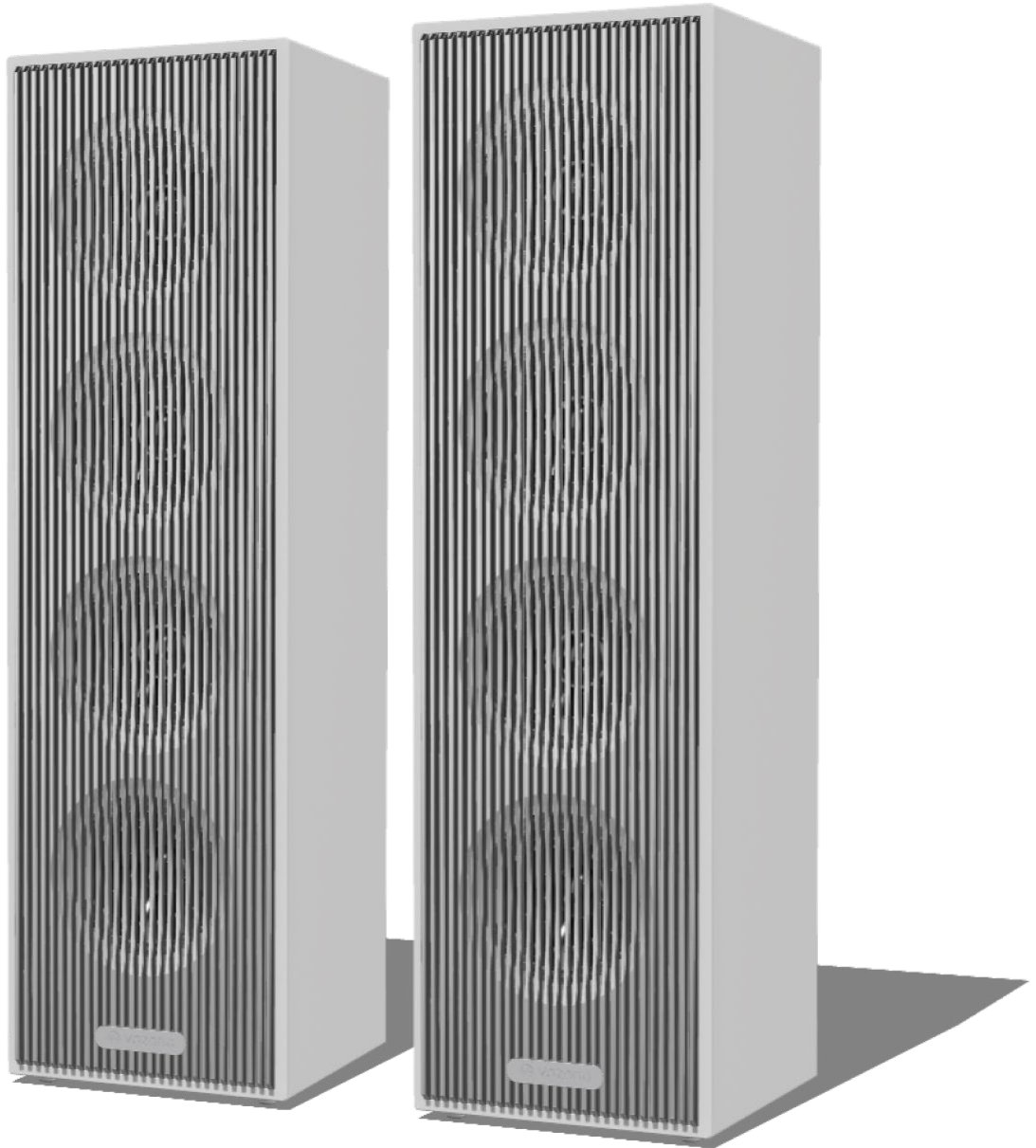

Innhold

Sikkerhetsråd	3
Introduksjon	4
Montering	5
Spesifikasjoner	7
Vedlikehold	7
Resirkulering	8
Symboler	8
Godkjenninger	9
Support	10

Sikkerhetsråd

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys


Introduksjon

I esken

- Vozono Speaker
- Høytalerkabel
- Veggbraketter
- Bruksanvisning

Produktbeskrivelse

Høytalerne benyttes til Vozono lydutjevningsanlegg. Denne enheten sammen med Vozono Base og Vozono mikrofoner bidrar til god og tydelig talelyd i rommet det er montert. Vozono Speaker er beregnet for montering på vegg med medfølgende veggbrakett, eller på høytalerstativ.

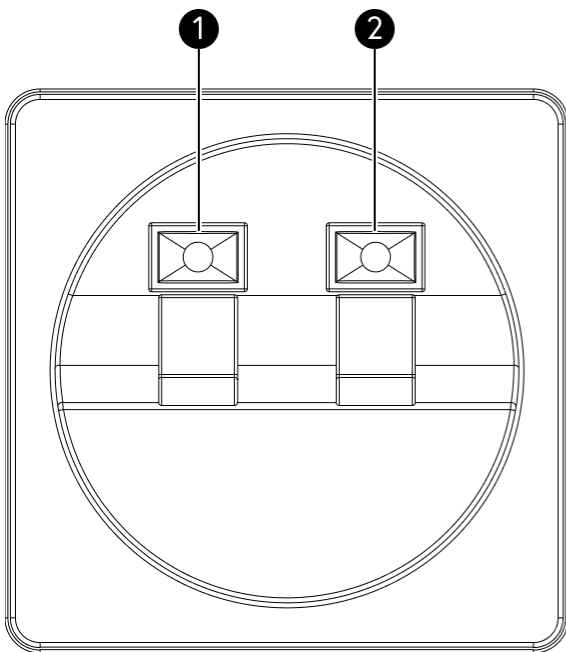


1. Høytalerinngang -
2. Høytalerinngang +

Montering

Plassering

Monter Vozono Speaker foran i rommet, én på hver side med:

- minimum 50 cm inn fra sidevegg
- 200 cm fra gulv til underside av Vozono Speaker
- Høytaler vinkles mot midten av gulvlisten bak i rommet.

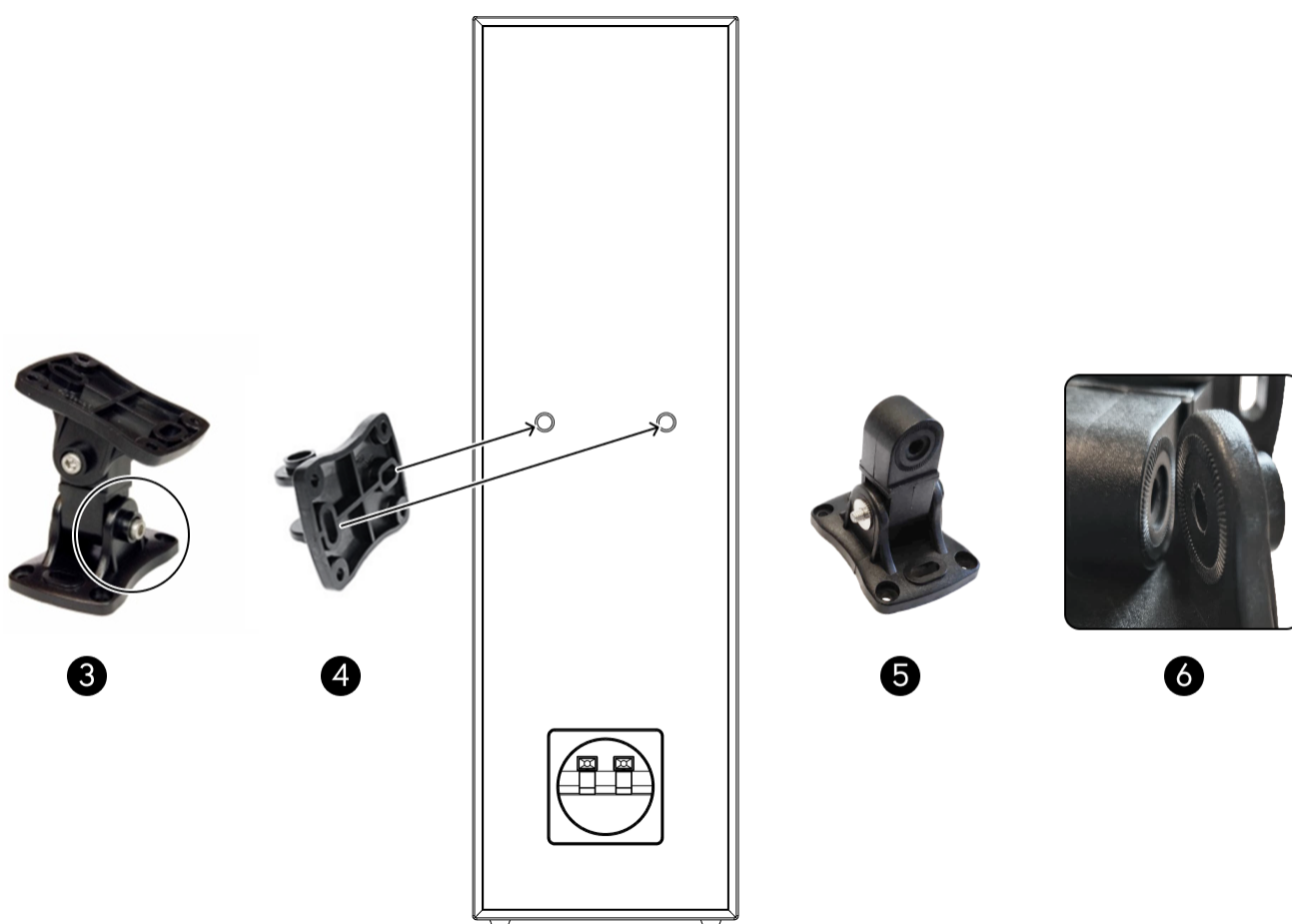

Montering på vegg

1. Skru braketten ③ fra hverandre ved å løsne en av skruene
2. Løsne de to skruene på baksiden av Vozono Speaker ④
3. Fest høyttalerfestet på baksiden av Vozono Speaker med skruene fra punktet over ④
4. Fest brakettens monteringsplate på veggen slik at rillene på de to delene vil komme mot hverandre ⑤ og ⑥.
5. Koble høyttalerkablene til Vozono Speaker, med lik polaritet som på Vozono Base
6. Løft høyttaleren opp til veggfestet og skru de to brakett delene sammen
7. Juster vinklingen på høyttaleren slik at de peker mot midten av gulvlisten bakerst i rommet, og stram til skruene.

Montering på stativ

Festepunkt for stativ finnes på undersiden av høyttaler. Se bruksanvisning for stativ for fullstendig montering.

Spesifikasjoner

Tekniske data

- Temperatur: 0 °C – 40 °C
- Impedans: 4 ohm
- Effekt: maks. 28 Watt

Dimensjoner

- Høyde: 450 mm
- Bredder: 130 mm
- Dybde: 140 mm
- Vekt: 3,5 kg

Vedlikehold







Rengjøring





Tørk av med en lett fuktet klut.

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Symboler

Symbol	Beskrivelse
	Varenummer
	Serienummer
	Batch-nummer
	Unikt identifikasjonsnummer
	Les bruksanvisning og monteringsanvisning
	Produsent
	Produksjonsdato

Symbol	Beskrivelse
	Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.
	Vær forsiktig
	Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.
	Produktet er i samsvar med (EU) 2017/745 – forordning om medisinsk utstyr (MDR).

Godkjenninger

MDR

Medical Device Regulation (MDR) er en forskrift som regulerer produksjon og distribusjon av medisinsk utstyr i EU. For brukeren sikrer MDR at medisinsk utstyr oppfyller strenge sikkerhets- og kvalitetskrav, noe som beskytter pasientenes helse og sikkerhet.

Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

[Se hele samsvarserklæringen på Sensio Vestfolds nettsider](https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering)

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS, avdeling Vestfold

- E-post: post@vestfoldaudio.no
- Nettside: vestfold.sensio.io
- Telefon: +47 33 47 33 47