



Synshjelpemidler AS
Norges Blindeforbund



Brukerhåndbok

lese-TV

Clear View C Basic

(ClearView C 24 HD og ClearView C One)



Innholdsliste

Innledning	3
Om denne bruksanvisningen	3
1. ClearView C	4
1.1. Innholdet i esken	4
1.2. Bli kjent med ClearView C	4
1.3. Utpakking og installasjon	5
1.4. Bytte oppsett for bord og skjerm	5
2. Bruk av ClearView C	6
2.1. Generelt	6
2.2. Friksjonsregulering for XY-bordet	6
2.3. Basic betjeningpanel	6
2.3.1. Av/ På-knappen	6
2.3.2. Justere forstørrelsen	7
2.3.3. Velge visnings-type	7
2.4.2. Oversiktsfunksjon (posisjonsmarkering)	7
2.5. Batteriene i betjeningspanelet	8
2.6. Parring av betjeningspanel	9
4. Justere skjermen	10
5. Bærehåndtaket	10
Feilsøking og feilretting	11
Appendix A: Anbefalinger for økt sikkerhet	12
Appendix B: Godkjenninger	13
Appendix C: Tekniske spesifikasjoner	14

Innledning.

Gratulerer med din nye ClearView C! Dette er en Lese-TV med for deg som ønsker å forstørre tekst og bilder for at det skal være enklere å lese, og se detaljer.

Lese-TV-delen, som omtales i Del A av bruksanvisningen, vil hjelpe deg med å lese, skrive, se på fotos, utføre arbeidsoppgaver og mye mer, alt dette med forstørrede, forbedrede visninger på skjermen. Bilder av gjenstander eller ark kan vises i mange fargekombinasjoner med høy kontrast, og apparatet er ellers enkelt i bruk i hjemmet, på arbeidsplassen og på skolen.

ClearView C er sammensatt av moduler og har ergonomisk utforming med fokus på enkel, behagelig bruk og stort arbeidsrom. Apparatet er utstyrt med enkelt betjeningspanel med store, tydelige knapper, og du kan ved hjelp av XY-bordet enkelt flytte gjenstander eller dokumenter under kameraet. Utformingen av ClearView C bidrar til en god, behagelig arbeidsstilling og apparatet vil gli fint inn i de fleste hjem.

Om denne bruksanvisningen.

Optelec har alltid for øye å forbedre sine produkter og deres funksjoner. Følgelig er det en mulighet for at denne bruksanvisningen ikke er siste utgave, og ved behov ber vi deg derfor å laste ned nyeste utgave fra Support-fanen på www.optelec.com.

Ved hjelp av denne bruksanvisningen kan du bli kjent med funksjonene på ClearView C og dens betjening. Vi anbefaler at du leser gjennom denne bruksanvisningen før maskinen tas i bruk.

Legg merke til at ClearView C leveres i flere utstyrsvarianter og at denne bruksanvisningen dekker alle variantene. På denne måten kan det skje at apparatet ditt ikke innehar alt utstyret eller alle funksjonene som omtales.

Hvis du har spørsmål eller forslag angående bruk av Optelec ClearView C, ber vi deg kontakte leverandøren. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om lesemaskinen, og vi håper du vil ha glede av den.

1. ClearView C.



Den enestående C-formede designen på Optelec ClearView C sørger for mer behagelig bruk og større arbeidsrom enn det du finner på lese-TVer med tradisjonell utførelse.

Med ClearView C Basic får du en lese-TV med enkle funksjoner samt tekstgjenkjenning og opplesning, mens med ClearView C Standard får du en lese-TV med avanserte funksjoner samt tekstgjenkjenning.

Vi håper at du vil sette pris på å jobbe med ClearView C.

1.1. Innholdet i esken.

Når du mottar din ClearView C, skal du følgende være med:

- Selve apparatet ClearView C med skjerm og XY-bord.
- Nettkabel.
- Betjeningspanelet, sitter fremst på XY-bordet.
- Bruksanvisning på sortskrift.
- Laminert hurtigguide.

Dersom det ved levering mangler noe i esken, må du ta kontakt med leverandøren.

1.2. Bli kjent med ClearView C.

Figurene nedenfor viser en oversikt for hovedkomponentene på ClearView C.



1.3. Utpakking og installasjon

ClearView C leveres i én kartong og er ferdig montert når du mottar den. På **ClearView C Basic** er alt du trenger å gjøre før du tar apparatet i bruk å koble til strøm ved hjelp av den medfølgende nettkablelen, mens på **ClearView C Standard** i tillegg må slå på hovedstrømbryteren på venstre side av kameraboksen.

1.4. Bytte oppsett for bord og skjerm.



Kompakt-oppsett.



Komfort-oppsett.

ClearView C kan settes opp på to forskjellige måter, det forholdsvis smale Kompakt-oppsettet og det bredere Komfort-oppsettet. I Komfort-oppsettet flyttes XY-bord og skjerm lenger ut på armen, og dersom du driver med håndarbeid eller har behov for å lese store dokumenter, er det mest behagelig å benytte Komfort-oppsettet. Gå frem som følger for å skifte oppsett:

a) Bytte fra Kompakt- til Komfort-oppsett:

1. Fjern skjermen.
2. Løs de to justeringshendlene helt ut ved å føre dem fra hverandre, og flytt bordplaten helt til høyre.
3. Løsne den svarte festeskruen.
4. Skyv bordplaten tilbake til utgangspunktet, og lås bordplaten ved å føre de to justeringshendlene helt mot hverandre.
5. Hold bordet godt fast og dra armen mot venstre til du hører et klikk.
6. Løs igjen de to justeringshendlene helt ut, flytt bordplaten helt mot høyre og skru fast den svarte festeskruen.
7. Fjern dekslet på den øvre enden av armen og løsne festeskruen du finner her.
8. Skyv kameraboksen ut til høyre, fest skruen igjen og legg dekslet tilbake på plass.
9. Sett skjermen tilbake på plass på skjermfestet.

b) Bytte fra Komfort- til Kompakt-oppsett:

1. Fjern skjermen.
2. Løs de to justeringshendlene helt ut ved å føre dem fra hverandre, og flytt bordplaten helt til høyre.
3. Løsne den svarte festeskruen.
4. Skyv bordplaten tilbake til utgangspunktet, og lås bordplaten ved å føre de to justeringshendlene helt mot hverandre.
5. Hold bordet godt fast og skyv armen mot høyre til du hører et klikk.
6. Løs igjen de to justeringshendlene helt ut, flytt bordplaten helt mot høyre og skru fast den svarte festeskruen.
7. Fjern dekslet på den øvre enden av armen og løsne festeskruen du finner her.
8. Skyv kameraboksen ut til høyre, fest skruen igjen og legg dekslet tilbake på plass.
9. Sett skjermen tilbake på plass på skjermfestet.

2. Bruk av ClearView C.

2.1. Generelt.

Når du arbeider med din ClearView C, vil det det være avlastende for armer og hender dersom du plasser håndbakene fremst på XY-bordet slik at du får lett tilgang til knappene på betjeningspanelet og enkelt kan bevege bordplaten.

Betjeningspanelet på "Standard"-varianten kan tas av og kan vendes i to retninger. Dersom du vender dette panelet slik at Optelec-logoen vender mot deg, har du tilgang på "Basic"-funksjonene på ClearView C. Dersom du vender panelet slik at Optelec-logoen vender fra deg, har du tilgang til apparatets avanserte knapper. Betjeningspanelet på "Basic"-varianten sitter fast, og du har kun tilgang til "Basic"-funksjonene.

2.2. Friksjonsregulering for XY-bordet.

Med de to justeringshendlene som sitter fremst på bordplaten, kan du justere tregheten i dens bevegelse eller blokkere bevegelsen helt. Når hendlene er plassert så langt fra hverandre som mulig, kan bordplaten bevegges fritt i alle retninger, både til venstre, høyre, oppover og nedover. Dersom du flytter hendlene mot midten av bordplaten, vil bevegelsen gradvis bli tregere, den venstre hendelen styrer bevegelsen venstre/ høyre mens den høyre styrer bevegelsen oppover/ nedover. Skyv begge hendlene så langt de går mot midten av bordplaten for å blokkere bevegelsen av bordplaten både i høyre/ venstre- og oppover/ nedover-retningene. Dersom du f.eks. skyver den høyre hendelen helt mot høyre og den venstre hendelen inn mot midten av bordplaten, vil du blokkere oppover/ nedover-bevegelsen mens bordplaten kan bevegges fritt i høyre/ venstre-retningen. Justering av tregheten eller full blokkering av bevegelsen kan være praktisk når du skriver, driver med håndarbeid, tegner eller når ClearView C rett og slett ikke er i bruk.

2.3. Basic betjeningspanel.

"Basic"-betjeningspanelet sitter korrekt på plass når Optelec-logoen vender mot deg og den røde "Av/ På"-knappen og "Zoom"-rattet er synlige på panelets overside.



2.3.1. Av/ På-knappen.



Trykk på den runde, oransje "Av/ På"-knappen ute til høyre på betjeningspanelet for å slå på ClearView C. Apparatet vil startes i samme visningstype som ble brukt da det ble slått av.

Det vil ta ca. fem sekunder før bilde vises på skjermen. I tilfelle ClearView ikke slår seg på, må du kontrollere at nettkabelen sitter godt på plass i begge ender.

Trykk igjen på “Av/ På”-knappen for å slå av ClearView C.

2.3.2. Justere forstørrelsen.



“Zoom”-rattet, som er plassert midt på betjeningspanelet, brukes til å endre forstørrelsen. Vri rattet med solen for å øke forstørrelsen og mot solen for å minske den.

2.3.3. Velge visnings-type.



Ved å trykke på “Modus”-knappen, som er den hvite knappen inne i “Zoom”-rattet, vil du veksle mellom inntil fem forskjellige visningstyper avhengig av hvordan apparatet er satt opp.

1. **Fargevisning:** I denne visningen vises fotos og tekst slik de er på dokumentet eller gjenstanden. Denne visningen kan ikke endres på noen måte.
2. **Høykontrastvisning 1:** I denne visningen forsterkes kontrasten mellom for- og bakgrunn. Fotos og tekst vil bli vist i de valgte bak- og forgrunnsfargene, ved levering er dette svart tekst på hvit bakgrunn. Fra menyen kan bruker velge hvilken fargekombinasjon som skal benyttes. Denne visningen kan ikke slås av.
3. **Høykontrastvisning 2:** I denne visningen gjelder det samme som for høykontrastvisning 1, med unntak av at ved levering er fargekombinasjonen hvit tekst på svart bakgrunn og at denne visningen kan slås av.
4. **Høykontrastvisning 3:** I denne visningen gjelder det samme som for høykontrastvisning 1, med unntak av at denne visningen ved levering er slått av, men kan aktiveres ved behov.
5. **Høykontrastvisning 4:** I denne visningen gjelder det samme som for høykontrastvisning 1, med unntak av at denne visningen ved levering er slått av, men kan aktiveres ved behov

2.4.2. Oversiktsfunksjon (posisjonsmarkering).



Oversiktsfunksjonen gir deg et kjapt overblikk over dokumentet du arbeider med, slik at du raskt finner de mest interessante avsnittene i teksten.

Trykk på “Oversikt”-knappen for å benytte denne funksjonen. ClearView C vil nå zoome ut til laveste forstørrelse, og et siktemerke midt på skjermen vil indikere hvor dokumentet til sammenligning er plassert. Bruk XY-bordet og flytt på dokumentet slik at det du ønsker å lese blir vist i siktemerket, når du nå trykker på “Oversikt”-knappen igjen, zoomer apparatet automatisk inn på ønsket sted med samme forstørrelse som du hadde i utgangspunktet.


2.5. Batteriene i betjeningspanelet.

Betjeningspanelet på ClearView C drives av to knappebatterier av typen CR2025. Levetiden for disse batteriene er to til tre år. Hvis betjeningspanelet ditt skulle slutte å virke og din ClearView C er mer enn to år gammel, eller det er mer enn to år siden batteriene eller betjeningspanelet ble skiftet, er det derfor sannsynlig at batteriene i betjeningspanelet er defekte og må skiftes. Trekk batteriholderen ut av betjeningspanelet, skift de to batteriene og skyv batteriholderen forsiktig tilbake på plass.

2.6. Parring av betjeningspanel.

Dersom betjeningspanelet skulle bli borte eller må skiftes ut av en eller annen grunn, må det nye betjeningspanelet parres med din ClearView C. Gå da frem på følgende vis:

1. Slå ClearView C på.
 2. Hold betjeningspanelet på høykant og hold dets nedre ende inntil kameraboksens nedre, høyre hjørne slik det vises på figuren til høyre.
 3. Et ikon som viser at parringen er i gang vil vises på skjermen.
 4. Trykk på "Av/ På"- og "Oversikt"-knappene samtidig og hold dem nede i fem sekunder før du slipper dem opp igjen.
 5. Dersom parringen ble gjennomført uten feil, vil nå "parring"-ikonet skifte til grønn farge før det blir borte fra skjermen.
 6. Dersom ClearView C ikke gjenkjenner eller ikke oppdager det nye betjeningspanelet, vil parringen avbrytes etter ca. 30 sekunder. "Parring"-ikonet vil da skifte til rød farge før det blir borte. Gjenta punktene 1 til 5 inntil parringen er blitt gjennomført på korrekt vis.
- Mulige årsaker til at parring ikke kan gjennomføres er:
- Batteriene på det nye betjeningspanelet er defekte.
 - Du trykte på feil knapper for å starte parringen.
 - Det nye betjeningspanelet er defekt.

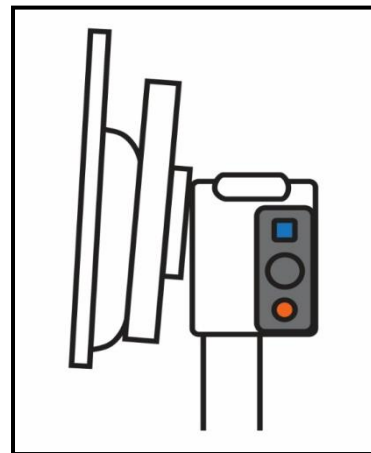

4. Justere skjermen.

For at du skal kunne sitte i en grei arbeidsstilling når du bruker ClearView C, kan høyden på skjermen og dens lesevinkel justeres. I tillegg til at skjermen kan flyttes opp- eller nedover, kan den også skråstilles.

Flytt skjermen opp- eller nedover ved å ta et godt, fast grep i den og trekke eller skyve den opp- eller nedover. Still den samtidig i ønsket vinkel slik at du har best mulig lesevinkel når du bruker ClearView C.

ClearView C er utstyrt med spesialføtter som gjør at å dreie eller skyve den på en bordplate blir enklere. Ta et fast grep i stativet på ClearView Speech og skyv eller trekk apparatet til ønsket plassering slik at du oppnår optimal arbeidsavstand og synsvinkel.

Advarsel:

Før du flytter på ClearView C, må du forsikre deg om at det er tilstrekkelig ledig plass på bordet til at den kan flyttes, at det ikke står saker og ting i veien og at nettkabelen er lang nok. Kontrollér også at bordplaten er vannrett så langt som mulig. Ikke flytt ClearView C utenfor bordplaten, da dette vil kunne forårsake skader dersom apparatet faller ned.

5. Bærehåndtaket.

ClearView C er utstyrt med eget bærehåndtak, dette er plassert rett bak skjermen. For å unngå skader både på apparatet og deg selv, må du passe på at selve bærehåndtaket og XY-bordet låses før du forsøker å løfte apparatet etter håndtaket. Du låser håndtak og XY-bord på følgende vis:

- Flytt skjermen til nederste stilling.
- Løft håndtaket oppover, når det kommer til øverste stilling, låses det og blir stående fast i denne stillingen.
- Skyv begge de to justeringshendlene for XY-bordet inn mot midten av bordplaten slik at bordet låses, og kontrollér til slutt at bordet ikke kan flyttes.
- Nå kan du ta tak i bærehåndtaket og løfte ClearView C.

Frigjøre bærehåndaket:

- Håndtaket frigjøres automatisk når skjermen flyttes oppover.

Feilsøking og feilretting.

Sette innstillingene tilbake slik de var ved levering.

- Dersom du opplever vansker med bruken av ClearView C, kan du når som helst sette innstillingene tilbake til verdiene de hadde ved levering fra fabrikken. Dette gjøres ved å trekke ut nettkabelen, vente tre sekunder, koble nettkabelen til igjen og deretter holde "Av/ På"-knappen nede i 10 sekunder. Som alternativ til dette kan ClearView C Standard settes tilbake til fabrikkinnstillingene fra menyen.

Bilde vises ikke på skjermen etter at apparatet blir slått på.

- Kontrollér at alle kabler er forsvarlig tilkoblet.
- Dersom du har en "Standard"-utgave av ClearView C, må du kontrollere at strømbryteren på venstre side av kamera-boksen er slått på.

Ingen av knappene på betjeningspanelet virker.

- Kontrollér at batteriene i betjeningspanelet er i orden. Disse batteriene har en levetid på to til tre år.
- Kontrollér at betjeningspanelet er parret med ClearView C. Hvis ikke må de to parres med hverandre.

Bildet er uklart.

- Dette punktet gjelder ikke for Basic-varianten: Dersom det vises et "blyant"-ikon nederst i høyre hjørne av skjermen, bruker apparatet manuell fokusering. Trykk på "Auto-fokus"-knappen for å gå tilbake til automatisk fokusering.
- Rengjør skjermen med en myk klut, såvidt fuktet i mildt såpevann.

Bilder og tekst er grå og har dårlig contrast.

- Trykk på "Modus"-knappen for å skifte til høykontrast-visning.
- Dette punktet gjelder ikke for Basic-varianten: Justér bildeskarpheiten ved å bruke tasten lengst til venstre på betjeningspanelets forside.
- Dette punktet gjelder ikke for Basic-varianten: Justér lysstyrke-nivået fra menyen.

Bilde fra tilkoblet PC vises ikke.

Dette punktet gjelder ikke for Basic-varianten.

- Kontrollér at HDMI-kabelen fra PCen er tilkoblet i kamera-boksen på ClearView C, kabelen skal ikke kobles direkte til i skjermen.
- Kontrollér at skjermopløsningen på PCen er satt til 1920x1080.
- Sjekk om PCen har en feil ved å koble den direkte til skjermen.






XY-bordet beveger seg ikke eller går tregt.

- Kontrollér at de to justeringshendlene er ikke skjovet innover mot midt av XY-bordet.
- Kontrollér at ikke XY-bordet er blokkert av gjenstander som sitter fast i mekanismen.

Appendix A: Anbefalinger for økt sikkerhet.

- Behandle ClearView C med omtanke. Uvøren behandling vil skade lesemaskinens innebygde deler.
- Ikke prøv å utføre reparasjoner på din ClearView C på egen hånd. Ta kontakt med leverandøren dersom du har spørsmål om bruken av maskinen eller trenger service.
- **Ikke åpne ClearView C eller fjern deler** fra apparatet, dette vil ugjenkallelig oppheve leverandørens garantiansvar.
- For å minske faren for brann må ikke ClearView C utsettes for høye temperaturer eller direkte sollys.
- For å unngå fare for at det oppstår elektriske feil, må din ClearView C holdes borte fra væsker og kjemikalier.
- I forbindelse med rengjøring skal ClearView C alltid kobles fra strømmettet. Bruk en myk klut så vidt fuktet i mildt såpevann til å tørke av maskinen. Bruk av tekniske rensmidler og vaskemidler med slipende virkning må ikke anvendes da slike vil skade apparatet.
- ClearView C er produsert av materialer som er gjennomgående testet og oppfyller kravene i relevant sikkerhetslovgivning. Likevel kan det ikke garanteres mot mulige allergiske reaksjoner hos brukerne.
- Av sikkerhetshensyn må ClearView C plasseres på stabilt underlag og holdes borte fra kjæledyr. Dersom apparatet skulle falle ned, kan dette medføre skade på både selve utstyret og personer.
- ClearView C er produsert med innendørs bruk i hjemmet, på arbeidsplassen eller i undervisning for øyet. Ikke plassér apparatet i nærheten av elektiske ovner, radiatorer eller i direkte sollys, og ikke utsett apparatet for store forandringer i temperatur eller luftfuktighet. Slike forhold kan forårsake skader på de elektroniske og optiske delene av ClearView C.
- XY-bordet, bærehåndtaket og skjermfestet inneholder bevegelige deler. Vær forsiktig så ikke fingre, klesplagg, smykker og andre småsaker setter seg fast i disse mekanismene når du flytter på XY-bordet, justerer skjermen eller trekker ut håndtaket.
- Bruk bærehåndtaket når ClearView C skal flyttes. Pass på at skjermen er flyttet til nederste stilling og at XY-bordet og bærehåndtaket er låst før du løfter det. Husk at apparatet er tungt og at det kan være lurt å spørre andre om hjelp til dette.
- Bruk kun kabler som ble levert sammen med apparatet, og sørg for at alle kabler og kontakter sitter forsvarlig på plass.

Legg merke til informasjonen på produktetiketten:

	Vær snill å bruke ClearView C som beskrevet i bruksanvisningen.		Advarsel.
	WEEE logoen (vist til venstre) på produktet eller dens emballasje, indikerer at dette produktet ikke må kastes sammen med vanlig restavfall. Du er selv ansvarlig for at alt ditt avfall fra elektrisk eller elektronisk utstyr blir levert til innsamlingspunkt for gjenvinning av slikt farlig avfall.		Holdes borte fra fuktighet.
	Stand-by.		

Appendix B: Godkjenninger.

Kassering av produktet og merknad om WEEE.

Direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE), som ble vedtatt som europeisk lov den 3. desember 2008, resulterte i store endringer i behandlingen av elektrisk avfall etter endt levetid.

Formålet til dette direktivet er, som første prioritet, å begrense avfallsmengden fra elektrisk utstyr og dernest å oppfordre til gjenbruk, resirkulering og gjenvinning av slikt avfall for å redusere ressursene som går til spille.



WEEE logoen (vist til venstre) på produktet eller dets emballasje, indikerer at dette produktet ikke må kastes sammen med vanlig restavfall. Du er selv ansvarlig for at alt ditt avfall fra elektrisk eller elektronisk utstyr blir levert til innsamlingspunkt for gjenvinning av slikt farlig avfall. Sortert innsamling og korrekt håndtering av slikt avfall vil hjelpe til med å ta vare på naturressursene. I tillegg vil korrekt resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr bidra til forbedret helse og miljø. For mer informasjon om håndtering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, gjenvinning og innsamlings- og gjenvinningspunkter for slikt avfall, kan du ta kontakt med kommunen der du bor, utsalgsstedet der du kjøpte produktet eller importøren eller produsenten av produktet.

RoHS-oppfyllelse.

Dette produktet samsvarer med Direktiv 2011/65/EC fra Europa-Parlamentet og fra Council of 1st July 2011, om begrensning av bruk av enkelte skadelige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS).

Merknad for den Europeiske Union.

Produkter med CE-merking samsvarer med EMC Direktivet (2004/108/EC) og Lavspennings Direktivet (2006/95/EC) utgitt av Europa-Kommisjonen.

Samsvar med disse direktivene impliserer samsvar med følgende internasjonale standarder:

EMC: EN55022; EN55024; EN60601-1-2

Sikkerhet: IEC 60950-1; EN60601-1-1

FCC: FCC kapittel 15 Class B



Denne enheten er utstyrt med CE- og FCC-merke.

Merknad om FCC:

Dette produktet er testet og er i samsvar med grenseverdiene for en digital enhet i Klasse B i henhold til FCC-reglens kapittel 15. Disse grenseverdiene er satt opp for å gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i et privat hjem. Produktet genererer, benytter og kan avgi radiostråling. Dersom det ikke installeres i henhold til beskrivelsen, kan det forårsake forstyrrelser på radio-kommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil oppstå under gitte forhold i enkelte installasjoner. Hvis dette utstyret forårsaker forstyrrelser på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsene med ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytt antennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen kurs enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker for hjelp.

For å forsikre at produktet alltid samsvarer med aktuelt regelverk, skal det ved tilkobling til PCer eller annet datautstyr kun benyttes skjermede forbindelseskabler med monterte ferritt-kjerner.

Eventuelle endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av selskapet som er ansvarlig for samsvar med reglene, kan sette brukeren i fare for å miste bruksretten til produktet.

Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-reglene, bruken er underlagt følgende to vilkår:

- (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og
- (2) Denne enheten må tolerere all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket virkning.

Appendix C: Tekniske spesifikasjoner.

Fokusertingsmetode:	Automatisk fokusering.
Fast fokusering:	Ja.
Forstørrelsesnivå:	1,5 X – 75 X på en 24" skjerm.
Oppløsning:	1920x1080.
Plassbehov, apparatets fotavtrykk:	42 x 51 cm (Kompakt-oppsett). 42 x 62 cm (Komfort-oppsett).
Størrelse XY-bord:	42 x 32 cm (Kompakt-bord). 42 x 42 cm (Komfort-bord).
Strømforsyning:	Innebygget 110 - 240 Volt AC.
Nettfrekvens:	50 - 60 Hz.

Bruksområde:

Temperatur:	+10°C to +35°C
Luftfuktighet:	< 70%, ingen dråpedannelse.
Lufttrykk:	700 – 1060 hPa.

Forhold ved oppbevaring og transport:

Temperatur:	-10°C to +40°C
Luftfuktighet:	< 95%, ingen dråpedannelse.
Lufttrykk:	500 – 1060 hPa.

Garantibetingelser:

Optelec garanterer at ClearView C ved leveringen ikke innehar feil på materialer eller sammensetning. ClearView C er produsert med tanke på privat bruk i hjem eller på kontor. Optelec forbeholder seg retten til å reparere eller erstatte enhver ClearView C med et lignende eller bedre produkt. I tilfelle feil på produktet, består brukers mulighet til utbedring kun i utskifting av tilbehør. Optelec eller Otelecs agenter kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader som måtte oppstå som følge av anvendelse av dette produktet, og Optelec påtar seg heller ikke ansvar dersom det blir anvendt på annen måte en det som omtales i denne håndboken. Garantien gjelder kun i samme land som produktet opprinnelig ble solgt i og kun dersom produktets forseglinger er intakte. Ved reparasjoner utenfor garantitiden, ber vi deg ta kontakt med leverandøren.

Egne notater:

Dersom du skulle ha behov for ytterligere opplysninger om ClearView C, ber vi deg ta kontakt med Synshjelpemidler AS på telefon 23215555 eller sende en e-post til info@synshjelpemidler.no.

