

sensio

ML SoundLinker

Auracast transmitter

Bluetooth 5.3

Bruksanvisning



Produktnummer: 606536

Dokument:

Innhold

Innhold	2
Sikkerhet	3
Introduksjon	3
Innstillinger og bruk	4
Spesifikasjoner	5
Vedlikehold	6
Resirkulering	6
Symboler	6
Godkjenninger	7
Support	7

Sikkerhet

Sikkerhetsråd

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys

Introduksjon

I esken

- Soundlinker Auracast transmitter Bluetooth 5.3
- 3,5 mm audiokabel
- USB-C kabel
- USB-C strømadapter
- Mikrofon vindbeskytter
- USB-C strømadapter

Produktbeskrivelse

ML Soundlinker er en mikrofon som sender direkte til Bluetooth Auracast mottakere. Den støtter både Auracast CIS og BIS innstillinger, med lydoverføring av god kvalitet og med lav tidsforsinkelse.

Auracast BIS (funksjon for kringasting): Denne funksjonen muliggjør kringasting til flere mottakere.

Auracast CIS (funksjon for kommunikasjon): Denne funksjonen benyttes ved en-til-en kommunikasjon.



1. Innebygd mikrofon
2. 3,5 mm Audio linjeinngang og tilkobling av ekstern mikrofon
3. LED strømindikator
4. LED funksjonsindikator
5. USB Audio og ladeport
6. Funksjonsvelger (Power ON/OFF og modusbryter)
7. Beltefeste

Innstillinger og bruk

Overføringsmodus

1. Trykk og hold funksjonsvelgeren i ca. 3 sekunder til LED lyset slås på.
2. Velg modus for Auracast lydoverføring:
 - BIS (Kringasting): Trykk 3 ganger på funksjonsvelgeren. LED-lyset blinker lilla. Kompatibler Auracast mottakere kan nå tilkobles.
 - CIS (kommunikasjon): Trykk 2 ganger på funksjonsvelgeren. LED-lyset blinker blått. Når kompatibel mottaker er tilkoblet blinker lyset to ganger hvert femte sekund.

LED indikatorer

Overføringsmodus (TX):

Strømstatus

- Lavt batteri: Rødt lys blinker hvert 5. sekund.
- Lading pågår: Fast rødt lys
- Lading ferdig: Fast blått lys

BIS (kringastingsmodus)

- Tilkobling: Blinkende lilla lys
- Mikrofon avslått: Fast rødt lys

CIS (kommunikasjonsmodus)

- Tilkobling: Blinkende blått lys
- Tilkobling ferdig: Blinkende blått lys 2 ganger hvert 5. sekund.
- Frakoblet: Blinkende blått lys en gang hvert 3. sekund.
- Mikrofon avslått: Fast rødt lys.

Spesifikasjoner

- Modell: AMP10
- Blåtann versjon: 5.3
- Blåtann enkoder: SBC, AAC, LC3
- Lydinngang: 3,5mm Linjeinngang, USB, innebygd mikrofon
- Tidsforsinkelse: 40ms
- Ladetid: 2 timer
- DC inngang: 5V/100mA
- Brukstil: Opp til 24 timer
- Overføringsdistanse: 50m i luftlinje
- Dimensjoner: 47.3*36.3*21.2mm

Vedlikehold

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Symboler

Symbol	Beskrivelse
--------	-------------

REF	Varenummer
------------	------------

SN	Serienummer
-----------	-------------

LOT	Batch-nummer
------------	--------------

GTIN	Unikt identifikasjonsnummer
-------------	-----------------------------

Symbol Beskrivelse



Produsent



Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.



Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.

Godkjenninger

Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse til gjeldene krav for CE-merking. Se samsvarserklæring på Sensio sine nettsider for ytterligere informasjon.

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS, Møllergata 4, 0179 Oslo

- E-post: post@vestfoldaudio.no

- **Nettside:** vestfold.sensio.io
- **Telefon:** +47 33 47 33 47