



User manual
Body Dryer

BANO LIFE

Først og fremst vil vi uttrykke vår oppriktige takk for at du har valgt vårt produkt. Før installasjon og bruk, vennligst les denne manualen grundig. Vennligst overhold advarslene og forholdsreglene angitt i denne manualen.

Produktoversikt

Dette produktet bruker et blåsetørkesystem for å raskt tørke kroppen. Kombinert med negativ ionefunksjon, låser det inn hudfuktighet, opprettholder hudens hydrering, forhindrer tørrhet og sprekkdannelse i huden, samt reduserer dannelsen av flass og statisk elektrisitet. Det forhindrer effektivt ulike kryssinfeksjoner forårsaket av gjentatt bruk av håndklær og badehåndklær på offentlige steder, samtidig som det unngår hudirritasjon forårsaket av lo fra håndklær. Det er mye brukt i husholdninger, hoteller, leiligheter, bad og badehus. Denne nye metoden for personlig hygiene sikrer en renere og mer komfortabel kropp.

1. Produktspesifikasjoner

- 1.1 Produktnavn: Kroppstørker
- 1.2 Modellnummer: TX3001
- 1.3 Nominell spenning/frekvens, effekt: (220-240)V~/(50-60)Hz, 3300W


2. Hovedytelse

- 2.1 Luftutløpstemperatur: 48°C-58°C (omgivelsestemperatur >18°C)
- 2.2 Vindhastighetsinnstillinger: 4 nivåer
- 2.3 Varmeelement: Spiraltrådsoppvarming
- 2.4 Sikkerhetsbeskyttelse: Overopphetingsbeskyttelse, lekkasjebeskyttelse

3. Installasjons- og bruksanvisning

3.1 Installasjonsmetode:

3.1.1 Fest de to metallbaksidene fra tilbehørspakken til veggen som vist i diagrammet.


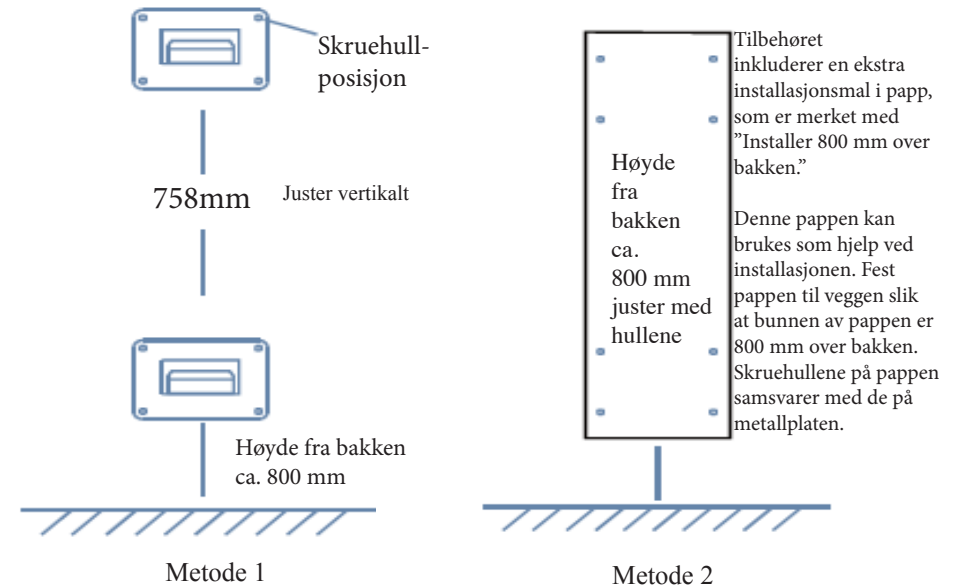


3.1.2 Etter at metallbakplaten er installert, sett kroppstørkeren inn i metallbakplaten, som vist i diagrammet til høyre.

3.2 Oppstart av enheten: Sett inn strømkontakten. Displayet vil lyse opp på dette tidspunktet.

3.3 Bruksanvisning:

3.3.1 Berøringsskjermens displaypanel er vist i diagrammet nedenfor.

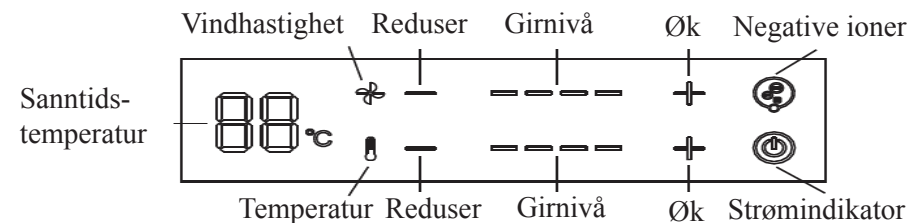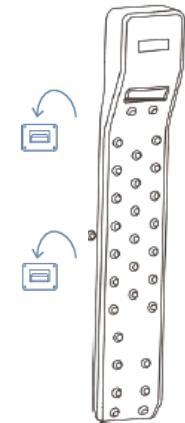

3.3.2 Strømindikator: Etter at enheten er slått på, lyser strømindikatorlampen. Trykk på strømindikatoren for å starte maskinen. Etter oppstart, trykk på strømindikatoren igjen for å slå av maskinen.

Når maskinen slås av, slutter indikatoren for negative ioner å blinke, og viften stopper etter noen sekunder. (Merk: Etter at du har trykket for å stoppe, vil maskinen slå seg av med en forsinkelse, og viften vil fortsette å gå i noen sekunder for å senke temperaturen på varmeelementet.)

3.3.3 Indikatorlys for negative ioner: Når maskinen er i drift, aktiveres de negative ionene automatisk. Indikatorlyset blinker under drift og slutter å blinke når maskinen er slått av.

3.3.4 Sanntidstemperatur: Området på høyre side av displayet viser sanntidstemperaturen og viser luftutløpstemperaturen.

3.3.5 Økning/reduksjon av vindhastighet: Trykk på den tilsvarende øke-/reduser-knappen for å justere vindhastigheten.

3.3.6 Økning/reduksjon av temperatur: Trykk på den tilsvarende øke-/reduser-knappen for å justere temperaturen.

3.3.7 Beskrivelse av spesialfunksjon: Etter at startknappen er trykket, vil kroppstørkeren automatisk kjøre på høyeste temperatur og laveste vindhastighet i 50 sekunder. Etter 50 sekunder øker vindhastigheten til nivå 2 og fortsetter å operere i 40 sekunder, deretter øker den til nivå 3 og fortsetter å operere i ytterligere 40 sekunder.

Til slutt stabiliseres enheten på høyeste vindhastighet og temperatur for en maksimal driftstid på 10 minutter.

I løpet av denne perioden, hvis brukeren manuelt justerer temperaturen eller vindhastighetsnivået, vil spesialfunksjonsmodusen avsluttes, og brukerens innstillinger vil tre i kraft.

4. Forholdsregler

4.1 Kroppstørkeren er et husholdningsapparat med høy effekt. Før bruk, sjekk at spenningen samsvarer med spesifikasjonen på typeskiltet, og inspiser strømkabelen og pluggen for eventuelle skader. Kroppstørkeren bruker en strømkilde på 220V~, 50Hz og skal kobles til en jordet stikkontakt med en kapasitet på 16A eller høyere. Kroppstørkeren skal ikke dele stikkontakt med andre apparater.

4.2 Ikke bøy, dra eller knyt strømkabelen for å unngå overoppheting.

4.3 Under bruk må kroppstørkeren plasseres vertikalt og være sikkert festet for å forhindre at den velter og forårsaker skade eller fare.

4.4 Det er strengt forbudt å tørke klær på kroppstørkeren eller dekke maskinen med noen gjenstander.

4.5 Under bruk må man ikke sette fingre eller ledende gjenstander inn i maskinen for å unngå elektrisk støt. Spesiell oppmerksomhet må rettes mot barn, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.

4.6 Feil oppstart av kroppstørkeren kan forårsake brann, så ikke bruk tidsur, automatiske påslagsenheter eller andre eksterne enheter for å styre kroppstørkeren.

4.7 Ikke koble til strømforsyningen før kroppstørkeren er fullt montert for å unngå ulykker.

4.8 Før du trekker ut støpselet, slå av strømmen. Ikke trekk ut strømkontakten med våte hender for å unngå risiko for elektrisk støt.

4.9 Hvis strømkabelen er skadet, må den byttes av produsenten, deres reparasjonsavdeling eller annet kvalifisert personell for å unngå fare.

4.10 Kroppstørkeren er ikke egnet for personer med fysiske, sensoriske eller mentale funksjonsnedsettelse, eller for personer uten tilstrekkelig erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn av noen som kan sikre deres sikkerhet og har lest instruksjonene på forhånd.

4.11 Ikke berør overflaten på maskinen over lengre tid etter at den er slått på for å unngå brannskader, spesielt vær oppmerksom på barn.

4.12 Det er forbudt å dekke maskinens overflate med brennbare materialer, og luftinntaks- og utløpskanalene må ikke blokkeres.

4.13 Det er ikke tillatt å slå maskinen av og på ved å trekke ut og sette inn strømkabelen.

4.14 Før du flytter maskinen, trekk ut strømkontakten, og vær forsiktig ved flytting. Ikke dra i strømkabelen for å flytte maskinen.

4.15 Under bruk må ikke strømkabelen henge over maskinens overflate for å unngå forbrenning.

4.16 Ved installasjon, plasser maskinen i et romslig område for å sikre god luftsirkulasjon.

4.17 Det er strengt forbudt å spraye vann på maskinens kropp, og vann må ikke dryppe inn i kontrollpanelene.

4.18 Maskinen må ikke demonteres eller modifiseres på noen måte for å unngå fare.

4.19 Når du forlater hjemmet eller ikke bruker maskinen over lengre tid, trekk ut strømkontakten fra stikkontakten.

4.20 Ved rengjøring og vedlikehold, slå først av strømforsyningen, og rengjør deretter med en fuktig, myk klut eller en myk børste.

4.21 Hvis det oppstår en feil, vennligst kontakt det lokale ettermarkedsservicesenteret. Ikke demonter maskinen for reparasjon uten autorisasjon for å unngå fare.

4.22 Hvis unormale lukter eller røyk oppdages under bruk, slå umiddelbart av strømmen og kontakt ettermarkedsservicepersonell.

4.23 Denne enheten kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller de som mangler erfaring og kunnskap, dersom de har fått tilsyn eller instruksjon om sikker bruk av enheten og forstår de involverte risikoene. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

5. Rengjøring og vedlikehold

5.1 Før du utfører vedlikehold, trekk ut strømkontakten.

5.2 For rengjøring og vedlikehold, bruk en myk klut eller en myk børste for å tørke av maskinens overflate. Hvis det er flekker, bruk en fuktig klut med en liten mengde mildt rengjøringsmiddel for å tørke dem bort. Ikke bruk alkohol, aceton, bensin eller andre kjemiske løsemidler, da dette kan skade maskinens overflatebelegg.

6. Feilsøkingssguide

Problem 1: Motoren roterer ikke, ingen oppvarming

Mulig årsak 1: Strømmen er ikke tilkoblet

Løsning: Koble til strømmen

Mulig årsak 2: Berøringsbryteren er ødelagt

Løsning: Kontakt ettermarkedstjenesten for utskifting av berøringsbryteren

Problem 2: Motoren roterer, men det er ingen oppvarming

Mulig årsak 1: Temperaturinnstillingen er satt til romtemperatur

Løsning: Still inn temperaturinnstillingen til oppvarmingsmodus

Mulig årsak 2: Varmeelementet er skadet

Løsning: Kontakt ettermarkedstjenesten for utskifting av varmeelementet.

1. Innledning

Denne manualen beskriver serviceprosedyrer og vedlikeholdsoppgaver for Kroppstørker TX3001. Regelmessig vedlikehold og korrekt service sikrer at enheten fungerer optimalt og forlenger levetiden.

2. Tekniske spesifikasjoner

- Modellnummer: TX3001
- Nominell spenning/frekvens: 220-240V~ / 50-60Hz
- Effekt: 3300W
- Luftutløpstemperatur: 48°C-58°C (omgivelsestemperatur >18°C)
- Vindhastighetsnivåer: 4 nivåer
- Varmeelement: Spiraltrådsoppvarming
- Sikkerhetsfunksjoner: Overopphetingsbeskyttelse, lekkasjebeskyttelse

3. Serviceprosedyrer

3.1 Inspeksjon

- Utfør visuell inspeksjon for skader på strømledning og pluggen.
- Kontroller at luftinntak og utløp ikke er blokkert av støv eller smuss.
- Test berørings skjermens funksjonalitet.

3.2 Feilsøking

Problem 1: Motoren roterer ikke, ingen oppvarming

- Sjekk om enheten er tilkoblet strøm.
- Test berøringsbryteren, byttes ut ved behov.

Problem 2: Motoren roterer, men ingen oppvarming

- Kontroller temperaturinnstillingen.
- Varmeelementet byttes hvis nødvendig.

Problem 3: Enheten slår seg av uventet

- Undersøk om overopphetingsbeskyttelsen er aktivert.
- Sjekk luftinntak og rens ved behov.

4. Vedlikeholdsprosedyrer

4.1 Rengjøring

- Slå av og trekk ut strømpluggen før rengjøring.
- Bruk en myk, fuktig klut for å tørke av enhetens overflate.
- Ikke bruk alkohol, aceton, bensin eller andre sterke kjemikalier.
- Rengjør luftinntak og utløp med en myk børste for å fjerne støv og smuss.

4.2 Forebyggende vedlikehold

- Kontroller strømledning og plugg for tegn til slitasje hver 6. måned.
- Sjekk varmeelementet og utfør nødvendige rengjøring.
- Sørg for at enheten er godt festet til veggen og at monteringskruser er intakte.

5. Reservedeler og utskifting

- Berøringsbryter – Byttes ved funksjonssvikt.
- Varmeelement – Byttes hvis varmeeffekten reduseres betydelig.
- Strømledning – Må erstattes av kvalifisert tekniker ved skader.

6. Sikkerhetshensyn

- Enheten må ikke brukes av barn under 8 år uten tilsyn.
- Må ikke dekkes til eller brukes til tørking av tekstiler.

7. Kontakt for service

Ved behov for service eller reparasjon, kontakt: Bano Life Berghagan 7, 1405 Langhus E-post: post@banolife.com Tlf.: 64 91 80 60

Garantikort

Dette produktet leveres med ett års gratis garanti fra salgsdatoen. Skader forårsaket av egen demontering og reparasjon dekkes ikke av garantien, men selskapet tilbyr fortsatt reparasjonstjenester.

Kostnaden for deler og reparasjoner bæres av brukeren.



Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere din brukte enhet, vennligst benytt retur- og innsamlingsystemer eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan sørge for miljøvennlig resirkulering av produktet.



BANO LIFE

Sammen ønsker vi å gjøre en forskjell!

Med spesialtilpassede hjelpemidler ønsker vi å gjøre en forskjell i hverdagen for barn, ungdom, voksne og eldre med forskjellig funksjonsnivå.

Bano Life
Berghagan 7, 1405 Langhus
post@banolife.com
tlf. 64 91 80 60

banolife.no