



**Synshjelpemidler AS**  
Norges Blindforbund

# **Bruksanvisning Tempovox**

## **lommeur med norsk tale**



Meningen med dette uret er at det skal være enkelt å bruke og enkelt å forstå. Det leser opp tiden i timer og minutter på digital måte, og forteller deg i tillegg hvilken dag, dato og måned det er. Uret har også valgfrie funksjoner som kan skrues av og på etter behov. Disse funksjonene er alarm, automatisk varsling hvert minutt og automatisk varsling hver time. Sistnevnte funksjoner kan jo være praktisk når du f.eks. skal koke egg, vente på bussen e.l. Hvis du har alarm aktivert, skrur du den av med taleknappen når den vekker deg.

### **HVORDAN BRUKE KLOKKEN:**

Uret har en stor, grønn trykknapp, to små justeringshull samt en justeringsskrue for lydstyrken.

Legg uret på bordet foran deg, slik at den store, grønne knappen som vi kaller **taleknappen** er i venstre hjørne lengst fra deg. De to justeringshullene som betjenes med en tynn gjenstand f.eks. en tannstikker, sitter nå i det høyre hjørnet lengst fra deg. For ordens skyld kaller vi hullet nærmest deg for **knapp 1**, og hullet lengst fra deg for **knapp 2**. Justeringsskruen for lydstyrken er plassert i det runde hullet på den buede enden nærmest deg. Nå som vi vet hvor alle knapper er plassert, skal vi se litt på hvordan de brukes.

Trykker du raskt på **taleknappen**, vil klokken fortelle deg klokkeslettet på digital måte. Fortsetter du å holde taleknappen inne, vil den fortsette med dag, dato og måned samt alarmtidspunktet dersom alarmen står på.

### **Gå fram på følgende måte for å stille inn uret:**

Juster lydstyrken til ønsket nivå med en liten skrutrekker. Lydstyrken er i utgangspunktet innstilt til normal lydstyrke, men ønsker du høyere eller lavere nivå, vrir du skruen gjentatte ganger med klokken for høyere nivå eller mot klokken for lavere nivå.

For innstilling av alarm, klokkeslett og dato må vi bruke de to knappene nede i justeringshullene. Du starter justeringsprosedyren ved å trykke på **knapp 1**, klokken vil da f.eks. si «**alarmen er satt til, timer, 12 01**». Når justeringsprosedyren er startet, bruker du **knapp 1** og **2** til å stille til ønsket verdi. Du bruker **taleknappen** for å bekrefte og gå til neste menypunkt. Skal du justere mange timer kan du holde knapp **1** eller **2** inne, og du vil da høre ett pip for hvert hopp klokken gjør. På denne måten kan du raskere og mer effektivt gjøre dine justeringer. Dersom du vil la en verdi stå uendret, trykker du direkte på **taleknappen** for å gå videre til neste menypunkt.

Det er følgende ni menypunkter:

- **Alarm timer**, varsles med f.eks. «alarmen er satt til, timer, 12 01».
- **Alarm minutter**, varsles med f.eks. «alarmen er satt til, minutter, 12 01».
- **Alarmsignal** - varsles ved at gjeldende alarmsignal spilles av.
- **Tidsinnstilling timer** - varsles med f.eks. «innstilling timer, 14 15».
- **Tidsinnstilling minutter** - varsles med f.eks. «innstilling minutter, 14 15».
- **Innstilling ukedag** - varsles med f.eks. «innstilling ukedag, fredag».
- **Innstilling dato** - varsles med f.eks. «innstilling dato, 29.».
- **Innstilling måned** - varsles med f.eks. «innstilling måned, mars».
- **Innstilling årstall** - varsles med f.eks. «innstilling årstall, 1 9».

Når du har gått gjennom hele menyen vil du høre to korte pip. Dette varsler om at hele menyen er gjennomgått og at innstillingene blir lagret.

Venter du mer enn ett minutt med å trykke på knappene når du er inne i justeringsprosedyren, vil klokken automatisk koble over til vanlig klokkefunksjon igjen. Ønsker du da å fortsette justeringsprosedyren må du starte den på nytt ved å trykke på **knapp 1**.

Når det gjelder å slå alarmen av eller på, automatisk varsling hvert minutt og automatisk varsling hver time, styres disse enkelt med **knapp 2**. Ved å trykke gjentatte ganger på **knapp 2**, vil meldingene «Alarmen er slått av», «Alarmen står på», «Automatisk varsling hvert minutt» eller «Automatisk varsling hver time» leses opp i rekkefølge. Den sist oppleste meldingen er alltid den som gjelder. Dersom du ønsker å slå alarmen av eller på, trykker du en eller flere ganger på **knapp 2**, til henholdsvis meldingen «alarmen står på» eller «alarmen er slått av» er blitt lest opp. Dersom du ønsker å ha automatisk varsling hvert minutt eller hver time, trykker du på samme måte en eller flere ganger på **knapp 2** til henholdsvis meldingen «automatisk varsling hvert minutt» eller «automatisk varsling hver time» er blitt lest opp. Legg merke til at for «automatisk varsling hvert minutt» og «automatisk varsling hver time», vil du varsles med et lydsignal hver gang det er gått henholdsvis ett minutt eller en time siden fra funksjonen ble aktivert.

Klokken leveres med bæresnor slik at den kan bæres rundt nakken. Den drives av to stk AAA batterier. For å skifte disse må du først løsne de tre skruene på baksiden av klokken, og deretter løfte av frontdekselet slik at du får tilgang til batteriene. Sett inn nye batterier, legg frontdekselet på plass igjen og fest til slutt de tre skruene på klokkes bakside. **Ikke stram skruen ved snorfestet altfor hardt. Da kan snorfestet sprekke.** Husk at den flate enden av batteriene skal vende mot batterirommets fjærer. Dersom du klarer å sette de nye batteriene på plass innen ett minutt, slipper du å stille klokkeslett og dato på nytt etter batteriskift.

Ønsker du ytterligere opplysninger om klokken, kan du ta kontakt med hjelpemiddelsentralen der du bor, ringe Synshjelpemidler AS på telefon **23215555**, eller sende en e-post til [info@synshjelpemidler.no](mailto:info@synshjelpemidler.no).