

sensio

Armbåndssender og -mottaker

Bruksanvisning

606299 ARM Portable Alerter Button

606318 ELLA Portable Call Button

Dokument: 9147-1



Sikkerhet

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer eller andre direkte varmekilder.

Produktbeskrivelse

ARM Portable Alerter Button og ELLA Portable Call Button sender varsel til FlexiBlink-mottakere.

ARM er en kombinert sender og mottaker og den vibrerer når den tar imot signaler fra FlexiBlink-systemet.


Standard ARM og ELLA varsler *Assistanse ønskes*.

Vibrasjonsmønster (ARM)

Brann



Dørklokke

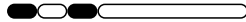

Røykvarsler



Porttelefon




Alarmer



Annet



Telefon

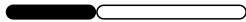

ARM varsler med vibrasjon om hendelser som oppstår i boligen.

Varslingsmønstrene repeteres.

Statusindikasjon

Når ARM eller ELLA er i bruk, vises statusen i lysindikatoren:

-  **Grønt lys:** Varsel sendt
-  **Blinkende rødt/grønt lys:** Lad ARM/ELLA
-  **Blinkende rødt lys etter trykk:**
Ikke koblet sammen med et FlexiBlink-system

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS

vestfold.sensio.io

Fant du ikke det du lette etter?

Skann QR-koden for å finne ut mer!



sensio®

Produktinfo

Bruks- og monteringsanvisning

Hjelpvideoer