

sensio

Armbåndssender og -mottaker

606299 ARM Portable Alerter Button

606318 ELLA Portable Call Button

Bruks- og monteringsanvisning



Innhold

Innhold	1
Sikkerhet	3
Introduksjon	3
Kom i gang	4
Bruk	5
Feilsøking	6
Spesifikasjoner	7
Vedlikehold	8
Resirkulering	8
Symboler	9
Godkjenninger	10
Support	10

Sikkerhet

Sikkerhetsråd

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer eller andre direkte varmekilder

Introduksjon

I esken

- ARM Portable Alerter Button / ELLA Portable Call Button
- Strømadapter
- USB-ladekontakt
- Armbånd
- Halssnor til ELLA
- Bruksanvisning

Produktbeskrivelse

ARM Portable Alerter Button og ELLA Portable Call Button sender varsel til FlexiBlink-mottakere. Standard ARM og ELLA varsler Assistanse ønskes.

ARM er en kombinert sender og mottaker som vibrerer når den tar imot signaler fra FlexiBlink-systemet.



1. Lysdiode (rød/grønn)
2. Varslingsknapp

Kom i gang

Sammenkobling

Alle FlexiBlink-enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles. Enhetene må være i samme rom under sammenkoblingen. For å sammenkoble et FlexiBlink-system, må det alltid være en stasjonær mottaker som hovedenhet, som f.eks. IRIS alerter, ALMA alerter eller BRITT bed shaker, i systemet. Hvis det kun er portable mottakere i systemet, som JUNIOR Assist Portable Alerter eller NORA Alert Watch, kan en av disse velges som hovedenhet. For sammenkobling, følg beskrivelsen under:

1. På hovedenheten: Velg **Inviter** via skjermen eller trykk 2 ganger på **Pairing**-knappen.
2. På ARM eller ELLA: Hold varslingsknappen på ARM eller ELLA inne i 10 sekunder, til du får tre små vibrasjoner og tre små grønne blink. Trykk deretter raskt 1 gang på varslingsknappen. Begge blinker da grønt eller viser status på skjerm i opptil 1 minutt.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder eller ved beskjeden «Vellykket sammenkobling»

Skal du sammenkoble flere enn to enheter, gjenta punkt 1 til 3, ved å benytte samme hovedenhet

Testing

Test ARM eller ELLA ved å trykke på knappen ② og se at det kommer riktig varsel i FlexiBlink-mottakerne. For å teste at ARM mottar varsling, utløs en annen sender i FlexiBlink-systemet og kjenn at ARM vibrerer.

Bruk

Varsling

ARM varsler med vibrasjon om hendelser som oppstår i boligen.

Vibrasjonsmønster (Gjelder ARM)

Varslingsmønstrene repeteres.

Brann




Røykvarsler




Alarmer (som komfyrvakt eller sykesignal)



Telefon

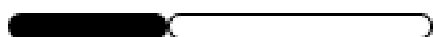

Dørklokke

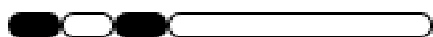

Porttelefon



Annet



Statusindikasjon

Når ARM eller ELLA er i bruk, vises statusen i lysindikatoren:

- **Slukket:** Standby
- **Grønt lys:** Varsel sendt
- **Blinkende rødt/grønt lys:** Lad ARM/ELLA
- **Blinkende rødt etter trykk:** Ikke koblet sammen med et FlexiBlink-system

Feilsøking

Det varsler ikke i mottakerne

- Batteriet er tomt. Lad ARM/ELLA
- Enhetene er ikke riktig sammenkoblet. [Slett sammenkoblingen](#) og [sammenkoble på nytt](#)
- Avstanden mellom sender og mottaker er for lang. Sett da enhetene nærmere hverandre, eller sett inn repeater. Test ved å trykke på ARM/ELLA og sjekk at det varsler i FlexiBlink-mottaker

Sammenkoblingen er feil

1. Slett sammenkoblingen: Hold varslingsknappen nede i 10 sekunder til ARM/ELLA gir tre små vibrasjoner og tre små grønne blink. Trykk deretter 5 ganger på varslingsknappen. Enheten svarer med rødt og grønt blinkende lys. Sammenkobling er slettet
2. [Sammenkoble på nytt](#)

Rødt lys i enheten ved sammenkobling

Sammenkobling mislyktes. [Slett sammenkoblingen](#) og [sammenkoble](#) på nytt.

Spesifikasjoner

Tekniske data

- **Batteri:** Innebygd litium, 3V
- **Temperatur:** -10 °C – 40 °C
- **IP-grad:** IP67
- **Radiofrekvens:** 2400,0 – 2483,5 MHz
- **Sendereffekt:** maks 20 mW
- **Batteritid:** ELLA: 30 dager, ARM: 3 dager

Dimensjoner

- **Høyde:** 40 mm
- **Bredde:** 16 mm
- **Dybde:** 11 mm
- **Vekt:** 6 g / 19g med armbånd
- **Passer til håndledd med omkrets:** 14 – 20 cm

Vedlikehold

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Oppdateringer

For å oppdatere FlexiBlink-enheter må GURO Gateway være tilknyttet boligen. Se oppdateringer på Sensio sine nettsider.

<https://vestfold.sensio.io/update>

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Symboler

Symbol Beskrivelse



Varenummer



Serienummer



Batch-nummer



Unikt identifikasjonsnummer



Les bruksanvisning og monteringsanvisning



Produsent



Produksjonsdato



Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.



Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.

Godkjenninger

Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse til gjeldene krav for CE-merking. Se samsvarserklæring på Sensio sine nettsider for ytterligere informasjon.

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS, Møllergata 4, 0179 Oslo

- **E-post:** post@vestfoldaudio.no
- **Nettside:** vestfold.sensio.io
- **Telefon:** +47 33 47 33 47