

- ▶ Trinnløs setedel
- ▶ Dynamisk støtte
- ▶ 4 størrelser



# ZITZI DELFI PRO

HJELPEMIDLER FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE

# Zitzi Delfi Pro

## Dynamisk sittestilling

### Bekken,- og benposisjonering

Zitzi Delfi Pro er en seteenheter med trinnløs setedel, dynamisk støtte og leveres i fire størrelser. Et korrekt tilpasset sittesystem med hensiktsmessig setegrop, riktig plassert hoftebelte og god støtte for korsbenet bidrar til bedre stabilitet, økt komfort og lettere aktivitet og postural kontroll. Setet er trinnløst justerbart i setedybde samt abduksjon og adduksjon. Seteenheten er krasjetestet og godkjent for bruk med flere av våre understell.



Abduksjon/Adduksjon/Windswept

## Forutsetninger for en god sittestilling

### ► Hoftebelteplassering

Et riktig plassert hoftebelte er en forutsetning for posisjonering av bekkenet i sittende. Hoftebeltet er med på å redusere risikoen for å skli forover eller bakover, og opprettholde en god posisjon av bekkenet. Vi tilbyr hoftebelter i flere ulike materialer, modeller og størrelser.




**2-punktsbelte**  
Ett festepunkt på hver side



**4-punktsbelte**  
To festepunkt på hver side




**Antirotasjonsbelte**  
To festepunkt på hver side

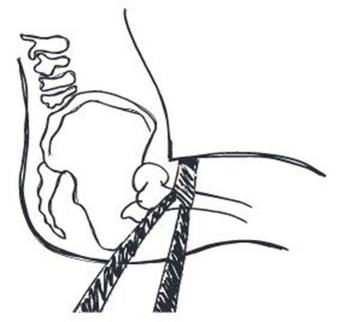

**Riktig beltedrag**

## ► Trepunktsstøtte

Justerbare kroppsstøtter sammen med for eksempel hoftestøtte, danner grunnlaget for god posisjonering av overkroppen. Riktige støttepunkter reduserer risikoen for utvikling av feilstillinger og er en forutsetning for postural kontroll. God postural kontroll fører til bedre hodekontroll og øker mulighetene for aktivitet og årvåkenhet. Vi har dermed mulighet til å både korrigere og opprettholde posisjoneringen av overkroppen.

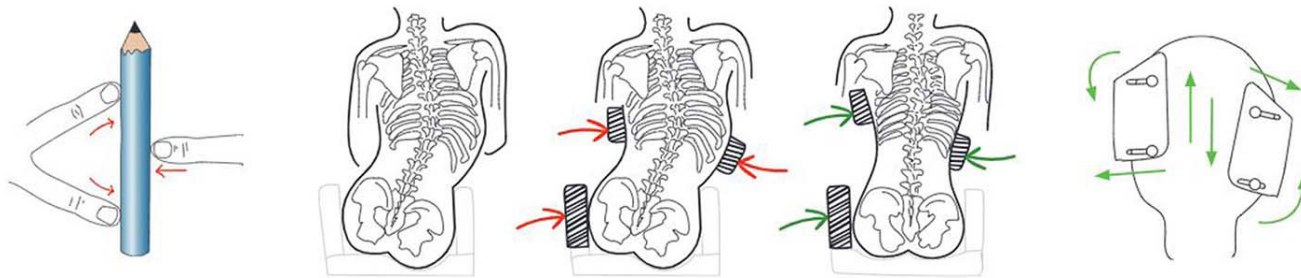

## ► Posisjoneringsseler

Sammen med hoftebeltet gir sternumstøtten eller H-selen god støtte til overkroppen, som er en forutsetning for bedre hodekontroll.



### Sternumstøtte


- Konsentrert støtte over brystbenet
- Motvirker fall fremover



### H-sele

- Holder skulderpartiet på plass og motvirker rotasjon
- Passer godt de som bruker sonde

## ► Flexfunksjon/hoftevinkeljustering

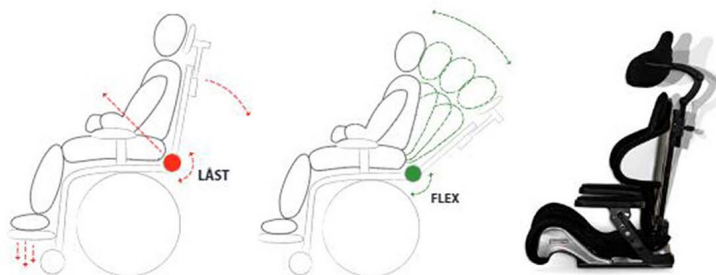

Dynamiske hoftevinkler gir bevegelsesfrihet, variasjon og kan gi en beroligende effekt ved ekstensjonsspastisitet. Sittesystemet er utstyrt med et flexledd som gjør ryggstøtten fleksibel. Ryggen er justerbar i hoftevinkelen, som kan være med på å bryte et spastisk mønster, og flexleddet fanger opp kraften og dermed hjelper til å beholde posisjonen i sittende stilling.

## Eksempler på ulike nakkestøtter



*Aktivt pannebånd*



*HeadActive*



*Heads Up*



*Pro Serie*

Teknisk data	Str. 0	Str. 1	Str. 2	Str. 3
Setebredde	24-30 cm	24-30 cm	28-34 cm	32-38 cm
Setedybde	14-20 cm	17-26 cm	24-33 cm	31-40 cm
Ryggbredde	17-26 cm	17-26 cm	21-30 cm	23-32 cm
Rygg høyde	36-46 cm	36-46 cm	41-51 cm	46-59 cm
Egenvekt	6,9 kg	7 kg	8,3 kg	10 kg
Maks. brukervekt	90 kg			
Art. nr.	284010K	284011K	284012K	284013K
HMS. nr.	334044	334045	334046	334047



Alle trekk kan vaskes på 60°C

**OBS!** Velg forsterket rygg når brukeren har høy tonus



## Fakta

Setesystemet er spesielt utviklet for brukere med sittestillingsutfordringer

Setesystemet vokser med brukeren

Verktøy for justeringer er integrert i ryggen og dermed alltid tilgjengelig

Krasjtestet og godkjent

### Hvilket understell bør jeg velge?

- Delfi pro str. 0** - Flipper G2 str. 2 / Guppy G2 str. 1
- Delfi pro str. 1** - Flipper G2 str. 2 / Guppy G2 str. 1
- Delfi pro str. 2** - Flipper G2 str. 2 / Guppy G2 str. 1
- Delfi pro str. 3** - Flipper G2 str. 3 / Guppy G2 str. 1,2\*
- Buster understell** - 1 størrelse

\* avhengig av hjulstørrelse

For mer informasjon ved valg av understell, ta gjerne kontakt med en av våre fagkonsulenter