

sensio

Vozono™ Nearsound Package

Bruksanvisning



Innhold

Introduksjon	3
Kom i gang	6
Bruk	7
Feilsøking	7
Spesifikasjoner	8
Vedlikehold	8
Resirkulering	9
Symboler	9
Godkjenninger	10
Support	11


Introduksjon

I esken


- Vozono Uno
- Strømforsyning Vozono Uno
- Vozono beltpack
- USB-C strømforsyningskabel med adapter
- Kabel med miniXLR- 3,5mm jack
- Bruksanvisning

Produktbeskrivelse

Denne nærlydspakken kan benyttes sammen med et Vozono lydanlegg. Vozono Uno er oppladbar og plasseres nært den som har behovet.

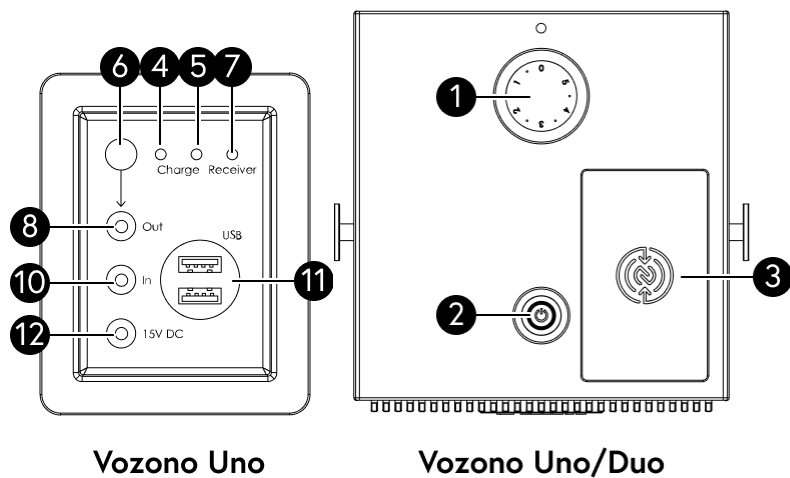

1. Volumkontroll
2. Av/på-knapp med lysindikasjon
3. NFC-felt
4. Rød lysindikator for lading pågår
5. Grønn lysindikator for lading ferdig
6. Nivåjustreing for "out 1"
7. Lysindikator for aktive mikrofoner
8. Out 1
9. Ikke i bruk
10. Linjeinngang
11. USB × 2
12. Tilkobling for ladekabel

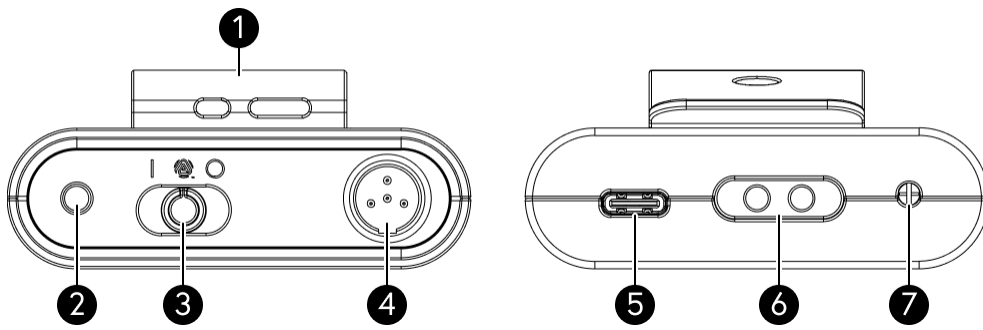

1. Belteklips
2. Lysindikator
3. Funksjonsbryter
4. Tilkobling for mikrofon
5. USB ladekontakt
6. Ladekontakter for lademodul
7. Følsomhetsjustering

Kom i gang

Sammenkobling

For at Vozono nærlydspakke skal fungere må Vozono Uno og Vozono Beltpack sammekobles.

1. Sett in strømkabel i Vozono Uno
2. Slå på Vozono Uno med av/på-knappen, og vent på fast grønt lys i av/på-knappen.
3. Sett funksjonsbryteren ③ på beltpack i posisjon 1
4. Lysindikator ② på mikrofonen begynner å blinke, gult lys ved først gangs oppkobling, grønt lys hvis allerede sammenkoblet til annet system.
5. Plasser beltpack med NFC-feltet og Uno pekende mot hverandre. Et grønt lys på beltpack tennes og lyser i 3 sekunder for å bekrefte sammenkobling.

Sammenkoblingen er gjennomført.

Montering

1. Vozono Beltpack tilkobles Vozono Base med medfølgende miniXLR-3,5 mm Jack kabel til en av utgangene på Vozono Base.
2. Vozono Beltpack tilkobles fast strømforsyning med medfølgende USB-C kabel på en av følgende måter:
 - a. Tilkobles en av de to USB-A på Vozono Base
 - b. Tilkobles med medfølgende strømforsyning til vanlig stikkontakt
3. Sett bryter på beltpack i posisjon I

Testing

1. Bruk en av mikrofonene tilkoblet Vozono Base og snakk i denne
2. Sjekk at lampe ⑦ på Vozono Uno lyser
3. Juster volum på Vozono Uno og kontroller at det er lyd

Anlegget er klart til bruk.

Bruk

Betjening

Vozono Uno plassers nært personen som skal benytte denne:

- Vozono Uno slås på med av/på-knapp og ønsket volum stilles inn

Feilsøking

Det er ikke lyd i Vozono Uno

- Sjekk at Vozono Uno er påslått og at det lyser fast grønt i av/på-knapp ②
- Sjekk at gult lys ⑦ på Vozono Uno lyser
- Kontroller at Vozono Beltpack er tilkoblet lydutgang på Vozono Base

Spesifikasjoner

Tekniske data

- **Audiofrekvens:** 125 – 16 000 Hz
- **Rekkevidde:** 15 meter, fri sikt
- **Batteri:** LiPO 11,1 V (Vozono Uno) / LiFePO4 3,2 V (Vozono Beltpack)
- **Brukstid:** 10 timer
- **Radiofrekvenser:** ISM bånd 2,4 GHz og 5,725 GHz
- **Sendereffekt:** opptil 200 mW

Dimensjoner

Vozono Beltpack:

- **Høyde:** 98 mm
- **Bredde:** 73 mm
- **Dybde:** 27 mm
- **Vekt:** 100 g

Vozono Uno:

- **Høyde:** 188 mm
- **Bredde:** 132 mm
- **Dybde:** 96 mm
- **Vekt:** 1,8 kg

Vedlikehold







Rengjøring





Tørk av med lett fuktet klut.

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Symboler

Symbol	Beskrivelse
	Varenummer
	Serienummer
	Batch-nummer
	Unikt identifikasjonsnummer
	Les bruksanvisning og monteringsanvisning
	Produsent
	Produksjonsdato

Symbol	Beskrivelse
	Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.
	Vær forsiktig
	Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.
	Produktet er i samsvar med (EU) 2017/745 – forordning om medisinsk utstyr (MDR).

Godkjenninger

MDR

Medical Device Regulation (MDR) er en forskrift som regulerer produksjon og distribusjon av medisinsk utstyr i EU. For brukeren sikrer MDR at medisinsk utstyr oppfyller strenge sikkerhets- og kvalitetskrav, noe som beskytter pasientenes helse og sikkerhet.

Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

[Se hele samsvarserklæringen på Sensio Vestfolds nettsider](https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering)

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS, avdeling Vestfold

- **E-post:** post@vestfoldaudio.no
- **Nettside:** vestfold.sensio.io
- **Telefon:** +47 33 47 33 47