

# Håndholdt mikrofon, trådløs

## HÅND100-S

### Bruksanvisning

Art. Nr.: 1713



#### 1. Virkemåte «Normal» (LS)

Mikrofonen betjenes med av/på-bryteren (2). Trykk én gang på knappen for å slå på mikrofonen og én gang for å slå av.

#### 2. Virkemåte «Trykk-for-tale» (PTT)

Knappen (2) holdes inne mens man prater.

#### 3. Praktisk bruk

Mikrofonen er beregnet for gjengivelse av tale. Plasser mikrofonens topp mellom munnen og hakespissen, og prat naturlig uten å heve stemmen.

Mikrofonen kan plasseres i tilhørende mikrofonholder, da den ikke er i aktiv bruk (medfølger i egen eske).

#### 4. Batteri

Som standard leveres mikrofonen med et AA NiMh oppladbart batter, som lades i mikrofonen. Batteriet er integrert og ikke beregnet for utskifting.


#### 5. Lading

Lading må bare gjøres med en Sensio Vestfold mikrofonlader, type MIKLAD1 eller MIKLAD-M.

Slå av mikrofonen ved lading.

Indikatorlampen på laderen lyser rødt når mikrofonen settes i ladebrønneren. Lampen på laderen lyser grønt når batteriet er oppladet.

#### 6. Kanalvalg

	<p>Håndmikrofonen og korresponderende mottaker må være innstilt på samme kanalbank og kanal.</p> <p>Slik stiller du inn:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mikrofonen skal være av. Ta av batteridekselet (3) ved å vri det mot klokka.</li><li>2. Still inn kanalband og kanal med en liten, flat skrutrekker.</li><li>3. Sett på batteridekselet.</li></ol>
---	--

Det kan benyttes flere mikrofoner på samme kanal, men kun én mikrofon kan være «på» av gangen.

Hvis flere mikrofoner skal være «på» samtidig, må de benytte egne kanaler og mikrofonmottakere.

#### Kanaloversikt

Kanalene er fordelt på 3 banker med 16 + 16 + 5 kanaler slik

Bank 1: Kanal 0 – F

Bank 2: Kanal 0 – F


Bank 3: Kanal 0 – 4

Bank 4 – 9: Ikke i bruk

## 7. Funksjonsinnstillinger

Ta av batteridekselet og ta ut batteriet. Vipp batteriet ut i den øverste enden først.

Under batteriet finnes:

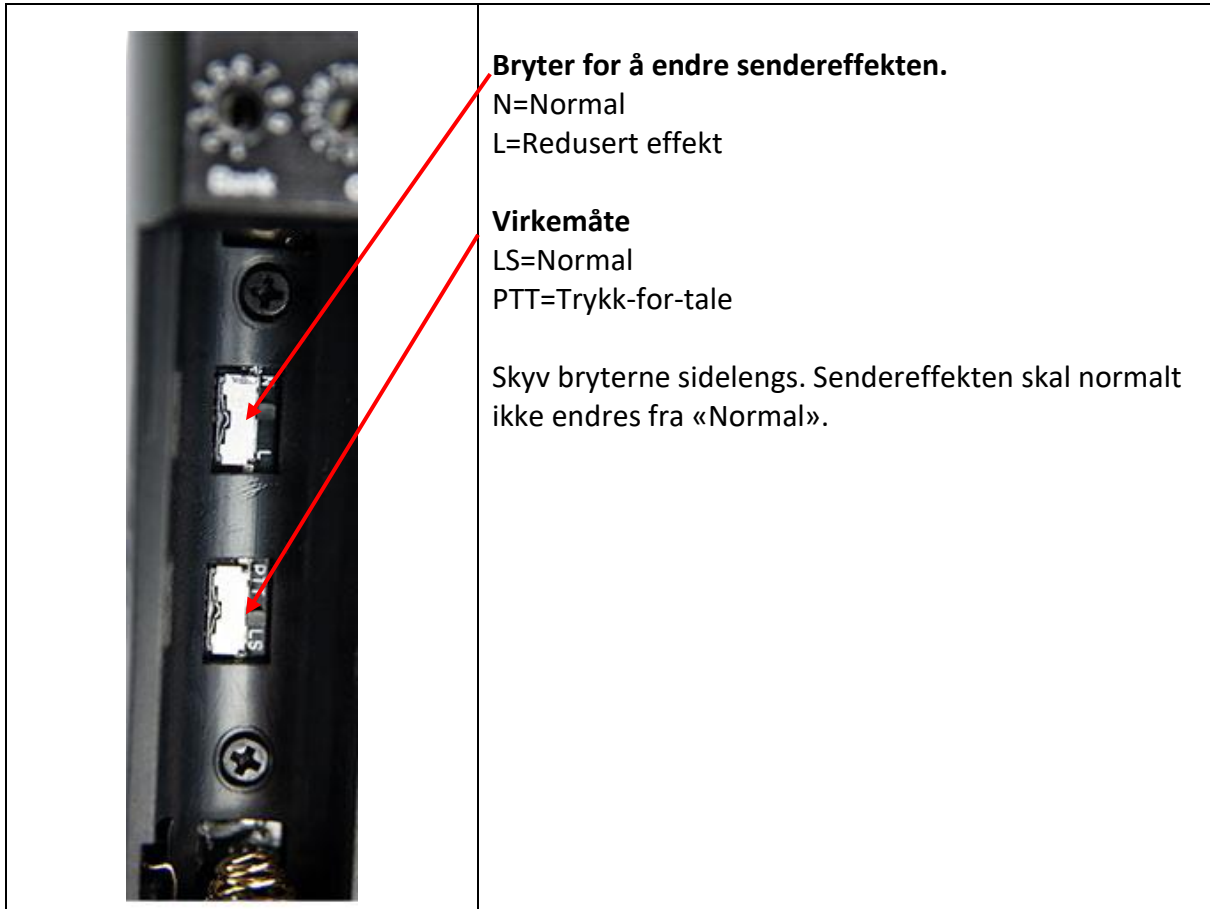

## 8. Enkel Feilretting

1. Ikke lys i (1)

Lad mikrofonen eller bytt batteri.

2. Ikke lyd i høyttalere.

Kontrollere om mikrofonen og mottaker er innstilt på samme kanal.

3. Rødt blinkende lys betyr at kanal eller kanalbank er valgt utenfor gyldig valg.

4. Grønt blinkende lys betyr at batteriet er på vei til å bli utladet.

## 9. Vedlikehold

Mikrofonen kan rengjøres med myk klut oppvridd i lunkent, mildt såpevann. Unngå søl eller sprut i mikrofonhodet. Mikrofonen kan rengjøres med desinfeksjonssprit, men på sikt kan dette slite ned plastoverflaten. Dette dekkes ikke av garantien.

## 10. Tekniske data

Audio frekvens.: 100 – 11000 Hz  
Radio båndbredde: 823 – 832 MHz  
Sendereffekt: 5 – 20 mW  
Rekkevidde: Opp til 120 meter, fri sikt  
Batteri: AA (NiMh)  
Brukstil: 13t  
Dynamikk: >95dB  
Vekt: 132g  
Mål: 180x40 mm

## 11. Sikkerhet

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder.  
Produktet må ikke kortsluttes eller skruses fra hverandre.  
Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

## 12. Leverandør

Sensio AS, avd. Vestfold  
Nordre Fokserød 12  
3241 Sandefjord

## 13. Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.  
Samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:  
[www.sensio.vestfold.io/samsvar](http://www.sensio.vestfold.io/samsvar)

## 14. Resirkulering

Mikrofonen skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Riktig håndtert vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

## 15. Oppbevaring

Mikrofonen bør ikke oppbevares ved et vindu med direkte sollys. Det påvirker overflatebehandlingen, og bør unngås.

