



BeMe

brukerveiledning



Støtter
barn



Leckey BeMe er konstruert for å gi postural posisjonering, i tillegg til funksjon og mobilitet. Denne brukerveiledningen viser hvordan du raskt og enkelt kan bruke alle funksjonene på en trygg måte. Sikkerhet og vedlikehold gjør at du vil ha glede av dette produktet i lang tid fremover.

INNHold

1.	BRUKSOMRÅDE	p.03
2.	SAMSVARERKLÆRING	p.06
3.	ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER	p.07
4.	GARANTIVILKÅR	p.08
5.	PRODUKTHISTORIE	p.09
6.	PRODUKTOPPLÆRING	p.09
7.	SIKKERHETSINFORMASJON	p.10
8.	FORHOLDSREGLER OG KONTRAINDIKASJONER	p.12
9.	RÆGELMESSIGE JUSTERINGER FOR DAGLIG BRUK	p.13
10.	RENGJØRINGS- OG VEDLIKEHOLDSINFORMASJON	p.30
11.	DAGLIG INSPEKSJON AV PRODUKT	p.31
12.	ÅRLIG INSPEKSJON AV PRODUKT	p.31
13.	GJENBRUK AV LECKEY PRODUKTER	p.32
14.	SERVICE	p.33
15.	TEKNISK INFORMASJON - METRISK	p.34
16.	HVORDAN PAKKE UT OG SETTE SAMMEN SETESYSTEMET	p.40
17.	FESTE TREKK OG PUTER	p.82
18.	KLINISK OPPSETT FOR POSTURAL KONTROLL	p.99

SEKSJON 01: BRUKSOMRÅDE

Leckey BeMe kan brukes sammen med forskjellige mobilitetsunderstell, slik beskrevet nedenfor. Leckey BeMe er et setesystem for postural støtte som er beregnet for barn med nedsatte funksjonsevner. Setesystemet kan brukes hjemme, på skolen eller utendørs (sammen med et understell beregnet for utendørs bruk).

Leckey BeMe er tilgjengelig i fire størrelser:

- Seteskall størrelse 1 er egnet for barn med en maksimal brukervekt på 35 kg.
- Seteskall størrelse 2 er egnet for barn med en maksimal brukervekt på 50 kg.
- Seteskall størrelse 3 er egnet for barn med en maksimal brukervekt på 70 kg.
- Seteskall størrelse 4 er egnet for barn med en maksimal brukervekt på 80 kg.
- Ryggstøtte størrelse 1 er egnet for barn med en maksimal brukervekt på 35 kg.
- Ryggstøtte størrelse 2 er egnet for barn med en maksimal brukervekt på 50 kg.
- Ryggstøtte størrelse 3 er egnet for barn med en maksimal brukervekt på 70 kg.
- Ryggstøtte størrelse 4 er egnet for barn med en maksimal brukervekt på 80 kg.
- Størrelse 1 manuell innendørs/utendørs understell Understell med justerbar høyde og tilt, maksimal brukervekt 35 kg.
- Størrelse 1 elektrisk innendørs understell Understell med justerbar høyde og tilt med elektrisk hevefunksjon, maksimal brukervekt 35 kg.
- Størrelse 1 elektrisk innendørs/utendørs understell Understell med justerbar høyde og tilt med elektrisk hevefunksjon, maksimal brukervekt 35 kg.
- Størrelse 2 manuell innendørs understell Understell med justerbar høyde og tilt, maksimal brukervekt 50 kg.
- Størrelse 2 manuell innendørs/utendørs understell Understell med justerbar høyde og tilt, maksimal brukervekt 50 kg.
- Størrelse 2 elektrisk innendørs understell Understell med justerbar høyde og tilt med elektrisk hevefunksjon, maksimal brukervekt 50 kg.
- Størrelse 2 elektrisk innendørs/utendørs understell Understell med justerbar høyde og tilt med elektrisk hevefunksjon, maksimal brukervekt 50 kg.

- Størrelse 3 manuell innendørs understell Understell med justerbar høyde og tilt, maksimal brukervekt 70 kg.
- Størrelse 3 manuell innendørs/ utendørs understell Understell med justerbar høyde og tilt, maksimal brukervekt 70 kg.
- Størrelse 3 elektrisk innendørs understell Understell med justerbar høyde og tilt med elektrisk hevefunksjon, maksimal brukervekt 70 kg.
- Størrelse 3 elektrisk innendørs/ utendørs understell Understell med justerbar høyde og tilt med elektrisk hevefunksjon, maksimal brukervekt 70 kg.
- Størrelse 4 manuell innendørs understell Understell med justerbar høyde og tilt, maksimal brukervekt 80 kg.
- Størrelse 4 manuell innendørs/ utendørs understell Understell med justerbar høyde og tilt, maksimal brukervekt 80 kg.
- Størrelse 4 elektrisk innendørs understell Understell med justerbar høyde og tilt med elektrisk hevefunksjon, maksimal brukervekt 80 kg.
- Størrelse 4 elektrisk innendørs/ utendørs understell Understell med justerbar høyde og tilt med elektrisk hevefunksjon, maksimal brukervekt 80 kg.



Sikkerhetsinformasjon -

Den maksimale brukervekten for systemet skal være **den nedre vekten** for

- Seteskall
- Ryggstøtte
- Ramme

For mer informasjon, se seksjon 8 Forholdsregler og kontraindikasjoner.

Setesystemet er modulært og kan brukes med et utvalg understell til innendørs og utendørs bruk. Hi-Low-understellet er utformet for å brukes med Leckey BeMe, og er tilgjengelig som en utelukkende innendørsmodell, samt som utendørsmodeller. Utendørsmodellen kan brukes utendørs på jevne underlag.

Leckey BeMe kan brukes sammen med forskjellige mobilitetsunderstell, slik beskrevet nedenfor.

Leckey BeMe	Mobilitetsunderstell	Nødvendig grensesnitt
Størrelse 1	Zippie Iris	150-1760
	Quickie Iris	150-1760
	Quickie SR45	150-1760
	Q300 M Base	150-1771
	Q300 M Base med elektrisk tilt og løft	150-1772
Størrelse 2	Zippie Iris	150-2760
	Quickie Iris	150-2760
	Quickie SR45	150-2760
	Q300 M Base	150-2771
	Q300 M Base med elektrisk tilt og løft	150-2772
	Q400	150-2771
	Q400 med elektrisk tilt og løft	150-2772
Størrelse 3	Quickie Iris	150-3760
	Quickie SR45	150-3760
	Q300 M Base	150-3771
	Q300 M Base med elektrisk tilt og løft	150-3772
Størrelse 4	Quickie Iris	150-3760
	Quickie SR45	150-3760
	Q300 M Base	150-3771
	Q300 M Base med elektrisk tilt og løft	150-3772

Du finner full informasjon på nettsiden til Leckey: www.leckey.com

Indikasjoner på bruk

BeMe er et modulært setesystem som dekker behovet til barn med forskjellige funksjonsnedsettelse, som påvirker deres evne til å sitte på egenhånd uten eksterne posturale støtter. Det er hovedsakelig beregnet for bruk hjemme, innendørs på skoler, eller utendørs, dersom det brukes på et mobilitetsunderstell. Det er fire størrelser som passer personer med en maksimal vekt på henholdsvis 35 kg, 50 kg, 70 kg og 80 kg.

Den konfigurerbare posturale støtten som tilbys av BeMe-setet er beregnet for barn med milde til komplekse posturale behov [GMFCS III-V].

SEKSJON 02: SAMSVARSERKLÆRING

BeMe er klassifisert som medisinsk utstyr klasse I i henhold til forordninger i EU og Storbritannia. Produsenten James Leckey Design Ltd har eneansvar og erklærer at Leckey BeMe er i samsvar med kravene i Direktiv 93/42/EØF, Forordning om medisinsk utstyr 2017, Forordning om medisinsk utstyr 2002 fra Storbritannia, og EN 12182 Hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne.

Informasjon til bruker og/eller pasient:
Alle alvorlige ulykker som har oppstått med enheten skal rapporteres til produsenten og gjeldende myndighet der hvor brukeren og/eller pasienten oppholder seg.

SEKSJON 03: ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

Merk: Hvis disse instruksjonene ikke følges kan det føre til personskade, produktskade eller miljøskade!

- **Advarsel - Veltefare:** Stabiliteten vil reduseres dersom Hi-Low-understellet og setet brukes i ekstreme stillinger. Når et Hi-Low-understell brukes, må setehøyden eller -vinkelen kun være i den maksimale stillingen når rullestolen står på et jevnt underlag (med en helling på under 2 grader). Når setet brukes i hellinger eller på ramper (med en helling på inntil 10 grader), må seteryggen rettes opp og setehøyden senkes ned til den laveste stillingen.
- **Fare for å klemme fingrene:** Pass på så fingrene til personen eller barn på gulvet ikke klemmes i mekanismene som hever og senker det elektriske Hi-Low-understellet.
- **Advarsel - Brukersikkerhet:** Sørg for at det brukes et 2-punkts belte, hvor beltebandet tres gjennom sporet i seteskallet, over kamlåsen.
- **Advarsel - Brukersikkerhet:** Sørg for at alle av personens seler, spesielt hoftebeltet, er strammet og justert for å holde personen trygt på plass før setet beveges.
- **Advarsel - Brukersikkerhet:** Dynamiske ryggstøtter skal stilles til "fast" når BeMe brukes under transport.
- **Forsiktig - Fare for å klemme fingrene:** Vær forsiktig når du monterer eller justerer setedelene så du ikke klemmer fingrene dine, for eksempel når du setter setedeler på plass eller strammer festeanordninger.
- **Forsiktig - Daglige kontroller:** Setesystemet må kontrolleres daglig før bruk for å forvise om at alle seler og seteelementer er forsvarlig festet til setet og understellet. Kontroller også at ladekabelen til batteriet ikke er skadet, før den brukes. Se seksjon 11 for detaljer om kontrollene.
- **Forsiktig - Snubelfare med elektrisk understell:** Sørg for at ladekabelen til det elektriske understellet er fjernet fra setesystemet før setet flyttes.
- **Forsiktig - Rengjøring:** Rengjør setesystemet regelmessig for å forhindre at det samler seg smuss på setedelene og understellet. Oppsamling av smuss kan gjøre at seteputene slites ut raskt, eller at understellet ruster. Ved rengjøring anbefaler vi at det kun benyttes vaskemiddel uten slipemiddel sammen med en fuktig klut. Ikke bruk rennende vann på trekket mens det fortsatt er festet til setet. Se seksjon 10.
- **Forsiktig - Rengjøre med høytrykkspyler/slanger:** Ikke bruk slanger eller en høytrykkspyler til å rengjøre rammedelene. Det elektrisk hevbare setesystemet ikke er forseglet mot rennende vann og kan derfor skades av vann som trenger inn. Se seksjon 10.

- **Forsiktig - Service/reparasjon av elektroniske komponenter på elektrisk Hi-Low-understell:** Ingen av komponentene på det elektriske Hi-Low-understellet kan vedlikeholdes av personen. Service og reparasjoner skal kun utføres av personer som er autorisert av Leckey.
- **Forsiktig - Deponering:** Setesystemet skal kun deponeres på en avfalls plass. De elektriske komponentene skal tas av og deponeres separat.
- **Forsiktig - Ta setesystemet i bruk:** Når setesystemet skal brukes etter å ha stått til oppbevaring, må det stå i romtemperatur i minst to timer før det tas i bruk. Tørk av eventuell kondens som oppstår på produktet.

SEKSJON 04: GARANTIVILKÅR

Garantien gjelder kun hvis produktet er brukt i henhold til de spesifiserte forholdene og de tiltenkte formålene, ved å følge alle anbefalinger fra produsenten (se også generelle betingelser for salg, leveranse og betaling på vår nettside [<https://www.leckey.com/terms-and-conditions-of-sale>]).

Alle produkter og komponenter produsert av Leckey har tre års garanti, med unntak av trekk og seteputeskum, som har ett års garanti.

SEKSJON 4.1: EKSTRA INFORMASJON OM GARANTIEN

Produkter som er produsert av Sunrise Medical Pty Ltd i Australia kommer med en garanti fra Sunrise Medical som ikke kan utelukkes i henhold til den australske forbruksloven. Du har krav på et nytt produkt eller pengene tilbake ved en eventuelt stor feil, samt kompensasjon for tap og skade som med rimelighet kunne vært forutsett. Du har også krav på å få produktene reparert eller erstattet dersom de ikke har akseptabel kvalitet, og så lenge feilen ikke utgjøre en alvorlig feil. Fordelene med denne garantien er i tillegg til dine andre rettigheter og rettsmidler i henhold til loven for produktene som garantien gjelder for.

SEKSJON 5: PRODUKTHISTORIE

Ditt Leckey-produkt er et medisinsk utstyr, og bør derfor kun foreskrives, installeres og re-installeres av en teknisk kompetent person som har mottatt opplæring i å bruke dette produktet. Leckey anbefaler å opprettholde en skriftlig oversikt over alle installasjoner, kontroller ved overføring av produktet til en annen person samt årlige produktkontroller.

SEKSJON 6: PRODUKTOPPLÆRING

(foreldre, lærere og omsorgspersoner)

Ditt Leckey-produkt er et foreskrevet medisinsk utstyr i klasse 1, og Leckey anbefaler at foreldre, lærere og pleiere som bruker utstyret gjøres kjent med følgende seksjon i denne brukermanualen av en teknisk kompetent person:

- **SEKSJON 7** Sikkerhetsinformasjon
- **SEKSJON 9** Regelmessige justeringer for daglig bruk
- **SEKSJON 10** Rengjøring
- **SEKSJON 11** Daglig inspeksjon av produkt

Leckey anbefaler å opprettholde en skriftlig oversikt over alle som har mottatt opplæring i bruk av dette produktet.

SEKSJON 7: SIKKERHETSINFORMASJON

7.1 Les alltid brukermanualen før bruk.

7.2 Vi anbefaler at personen aldri forlates uten tilsyn når han/hun bruker Leckey-utstyret.

7.3 Bruk kun komponenter godkjent av Leckey sammen med produktet. Modifiser aldri produktet på noen måte. Dersom disse retningslinjene ikke følges kan det medføre risiko for personen eller omsorgsperson og vil gjøre garantien for produktet ugyldig.

7.4 Hvis du er i tvil om Leckey-produktet er trygt å bruke, eller hvis noen av delene går i stykker, må du umiddelbart stoppe å bruke produktet og snarest ta kontakt med Kundeservice.

7.5 Juster alle nødvendige stillinger og sørg for at de er forsvarlig festet, før personen plasseres i produktet. Enkelte justeringer kan kreve bruk av verktøy, som leveres med produktet. Hold alt verktøy utenfor barns rekkevidde.

7.6 Når personen plasseres i setesystemet, må hoftebeltet alltid festes først. Dette vil sørge for at personen sitter riktig og trygt.

7.7 Når produktet står stille, sørg for at alle svinghjul er låst og peker ut fra understellet, da dette vil øke produktets stabilitet. Dette er spesielt viktig når tilt-in-space brukes eller ryggen er lent bakover.

7.8 Når setet brukes med et Hi-Low-understell, må du sørge for at høydejusteringspedalen og tilt-in-space-spaken er låst så de ikke kan justeres ved et uhell av andre barn.

7.9 Når Leckey-setesystemet brukes med et Hi-Low-understell, anbefaler vi ikke at personen flyttes over ujevne overflater når han/hun sitter i setet. Vær ytterst forsiktig når personen forflyttes inn og ute av setet.

7.10 Bruk kun kjørehåndtakene til å styre og flytte setet fra ett sted til et annet. Bruk aldri bordet eller hodestøtten til dette formålet.

7.11 Produktet inneholder komponenter som kan utgjøre en kvelningsfare for små barn. Kontroller alltid at låsekottene og boltene som er innenfor barns rekkevidde er strammet og sikret.

7.12 Leckeys produkter overholder forskriftene om brannsikkerhet i samsvar med EN12182. Produktet er utstyrt med plastdelene og bør derfor holdes utenfor alle direkte varmekilder, inkludert flammer, sigaretter og gassbrennere.

7.13 Ikke plasser gjenstander som er varmere enn 40 °C på bordet.

7.14 Når produktet ikke er i bruk, bør det oppbevares på et tørt sted som ikke utsettes for ekstreme temperaturer. Det sikre temperaturområdet for bruk av produktet er +5 til +40 °C.

7.15 Kontroller alltid at plastkottene på kjørehåndtaket er forsvarlig strammet før du flytter setet, og at kjørehåndtaket er festet til understellet ved bruk av to skruer.

7.16 Før setesystemet brukes, kontroller alltid at seteskallet er helt koblet til understellet. Hvis seteskallet ikke er forsvarlig tilkoblet, kan setet løsne og forårsake alvorlige personskader til barnet eller pleieren.

- 7.17** Vær oppmerksom på åpningen under bordet, hvor barnet kan stikke fingrene sine inn mellom metallbraketten og basen på plastbordet.
- 7.18** Den maksimale brukervekten for systemet skal være **den nedre** vekten for setet, ryggen og understellet.
- 7.19** Når du bruker tilt-in-space-mekanismen, hold alltid i håndtakene, eller fest setet så det ikke rykker når mekanismen aktiveres.

Leckey BeMe – Kollisjonstest

Leckey BeMe er kollisjonstestet og godkjent for bruk i kjøretøy, og overholder kravene i ISO16840, del 4. Hvis du ønsker mer informasjon kan du kontakte kundeavdelingen vår. Setet er testet i sin komplette konfigurasjon på et understell med en påmontert Leckey-hodestøtte.

Hvis Leckey BeMe-setet brukes i et kjøretøy, må følgende punkter overholdes:

- Leckey BeMe-setet må peke forover i kjøretøyet.
- Det må brukes sammen med et Unwin Restraint System og en hodestøtte som står i riktig stilling til enhver tid under transporten.

Viktig

Disse kollisjonstestdetaljene gjelder kun Leckey BeMe og grensesnittplaten. Hvis du bruker Leckey BeMe på et mobilitetsunderstell, se kollisjonstestdetaljene i brukermanualen til rullestolen.

KOMBINASJONER AV MEDISINSK UTSTYR

Leckey BeMe kan kombineres med ett eller flere medisinske utstyr eller andre produkter. Du finner informasjon om hvilke kombinasjoner som er mulige på nettsiden www.leckey.com. Alle oppførte kombinasjoner er godkjent i forhold til å oppfylle de generelle kravene til sikkerhet og ytelse, del 14.1 i forordningen om medisinsk utstyr 2017/745.

Veiledning om kombinasjonen, slik som montering, finner du på www.leckey.com

SEKSJON 8: FORHOLDSREGLER OG KONTRAIKASJONER

Forholdsregler

- Faste ryggdeformiteter, som skoliose eller kyfose
- Kraftige muskelkontrakturer
- Kraftig muskulær asymmetri eller skjelettasymmetri, inkludert hofteleddsluksasjon
- Progressiv og muskelsvinnende sykdom
- Høy fare for eller historikk med beinbrudd
- Høy fare for trykksår/skader eller åpne sår
- Kraftige, ukontrollerte bevegelsesmønstre
- Dårlig kontrollert anfallsaktivitet
- Barn som er avhengig av å bruke PEG-slange
- Medisinsk ustabilitet, inkludert kompromitterte luftveier eller kardiovaskulær funksjon
- Avhengig av livsnødvendige apparater fra tredjeparter, som oksygentanker
- Kraftige lærevansker og/eller atferdsproblemer

Kontraindikasjoner

Det finnes ingen kontraindikasjoner forbundet med Leckey BeMe-produktet.

Alle forholdsregler og kontraindikasjoner skal tas etter skjønn av den foreskrivende terapeuten. Leckey anbefaler at en terapeut som er godt kjent med produktet er tilstede under den innledende vurderingen, oppsettet, konfigurasjonen og gjenutstedelsen, for å redusere eventuell risiko.

SEKSJON 9: REGELMESSIGE JUSTERINGER FOR DAGLIG BRUK

(terapeuter/pleiere/foreldre)

Foreldre og pleiere skal vises hvordan de utfører regelmessige justeringer, samt gjøres kjent med sikkerhetskontrollene i seksjon 7 av en tekniske og klinisk kompetent person som har mottatt opplæring i å bruke produktet. Leckey anbefaler å skrive en liste over alle foreldre og pleiere som har mottatt opplæring i å bruke dette produktet.

SEKSJON 9.1: FLYTTE BARNET INN OG UT AV SETET

Før barnet plasseres i setet, må du utføre de daglige kontrollene slik beskrevet i seksjon 11 i denne brukermanualen.

Sett setet i en vinkel som gjør det komfortabelt å flytte barnet inn og ut av det. Lås alle svinghjul og sørg for at de peker utover, så produktet er mest mulig stabilt.


Hvis setet har utvipbare bryststøtter, brystbelte eller fleksible støtter, må disse først flyttes ut av veien (se seksjon 9.2).

Åpne hoftebeltet eller bekkenvuggen i midten, åpne borrelåsen på siden av bekkenvuggen, og la selen åpnes opp slik at barnet kan flyttes. Åpne til sist reimene på sandalene, hvis disse er montert. Du kan nå flytte eller heise barnet inn i setet.

Hoftebeltet og bekkenvuggen festes ved bruk av den midtre spennen og borrelåsen på siden (ved bruk av bekkenvugge). Sørg alltid for at spennen er forsvarlig lukket når barnet sitter i setet.

SEKSJON 9.2: FLYTTE UTSVINGBARE SIDESTØTTER



For å flytte de utsvingbare sidestøttene, trekk i pinnen **A** slik vist på bildet nedenfor.

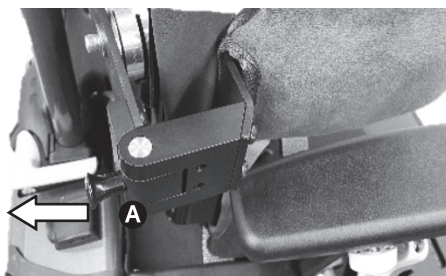


For å gjøre det lettere å flytte barnet, kan trekket på den fleksible omslagsstøtten trekkes ut midlertidig og fester under de elastiske stroppene.

SEKSJON 9.3: MONTERE, DEMONTERE OG JUSTERE 4-PUNKTS BELTE

For å feste et 4-punkts belte, før det grå båndet gjennom den øvre åpningen på setet **A** og deretter gjennom kamspennene. Tre båndet rundt den interne glidestangen, og før det ut gjennom den hengslede enden på spennen **B**. Trekk i båndet for å stramme det, og fest deretter kamspennene ved å lukke dem. Trekk det sorte båndet gjennom kamspennene på forsiden **C**. Kontroller at polstringen i beltet vender mot barnet.

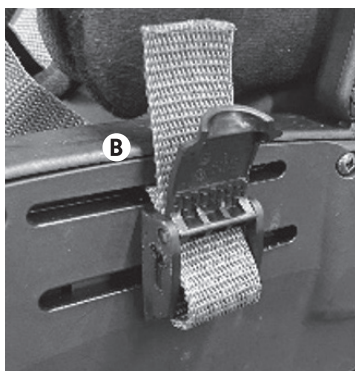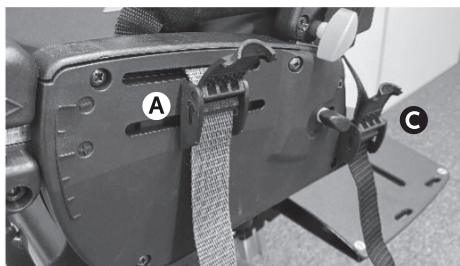

Fest spennen **D** på forsiden, slik at barnet sitter trygt i setet.

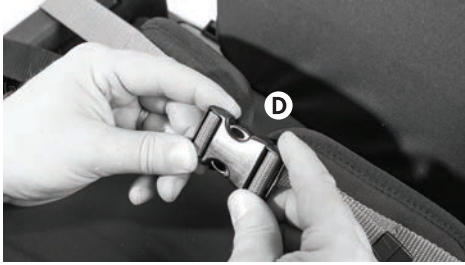


Fest alltid hofstroppen først, før du foretar noen andre justeringer.

Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere 4-punkts beltet.



Sikkerhetsinformasjon:

Når 4-punktsbeltet brukes, anbefales det å legge stroppen over siden av setekjernen i stedet for gjennom åpningen, dersom ekstra lengde på beltet er nødvendig.

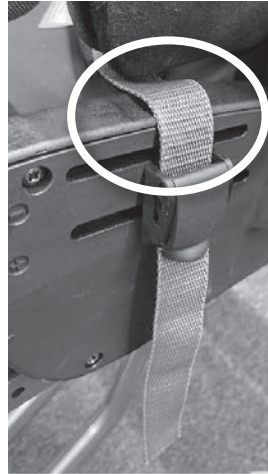


SEKSJON 9.4: JUSTERE BEKKENVUGGE

Bekkenvuggen kan strammes eller løsnes for å gi barnet bedre komfort og stabilitet ved hjelp av det grå båndet foran **A**, eller ved å bruke de nedfellbare låsene på siden og bak **B** og **C**.

For å justere kamlåsene, åpne lokket og trekk beltet gjennom den indre kamglideren **D**.

Bekkenvuggens posisjon kan også justeres med borrelåspaden **E**.

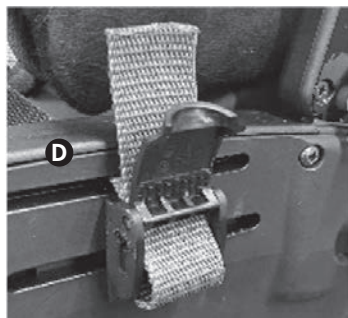

SEKSJON 9.5: JUSTERE HØYDEN PÅ UNDERSTELLET - HYDRAULIKK (PUMPING)

For å heve setet, pump fotpedalen gjentatte ganger til du oppnår ønsket høyde (stolen vil heves hver gang du pumper med foten). For å senke stolen, plasser foten under pedalen, og løft pedalen forsiktig opp (stolen vil automatisk senkes ned).



SEKSJON 9.6: JUSTERE HØYDEN PÅ UNDERSTELLET - ELEKTRISK

Det elektriske understellet kan lett justeres ved bruk av håndkontrollen. Høyden kan justeres når personen sitter i stolen. Understellet kan heves og senkes, og det tar ca. 17 sekunder å heve eller senke understellet helt opp eller ned (260 mm).




Når håndkontrollen ikke er i bruk, må den oppbevares slik vist **A**:



Vi anbefaler at batteriet lades helt opp i 12 timer før produktet brukes for første gang. For å gjøre dette, plugger du den medfølgende batteriladeren inn i kontrollenhet med trykknapper **B**, og deretter i et vegguttak. Du vil se et lys på batteriladeren som viser statusen.

- Grønt: Koblet til strømuttak;
- Gul: Opplading;
- Tilbake til grønt: når batteriet er fulladet.

Når batteriet er fulladet, trekk ledningen ut fra vegguttaket, fjern adapterpluggen, og koble ledningen fra batteriet. Husk å koble batteriladeren fra batteriet før du flytter setet. Batteriet bør lades opp hver dag i ca. 1 time. Den elektriske setehøydejusteringen kan brukes mens batteriet lades opp.

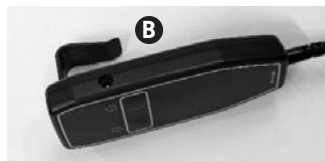

Før bruk, kontroller at kabelen til håndkontrollen ikke har satt seg fast eller er viklet seg rundt noen av rammedelene.

Pass på så ikke du eller barn på gulvet har fingrene i løftearmen for setet.

Kontroller at batteriladeren er koblet fra batteriet før du flytter setet.



Batteriets driftssyklus: To minutters drift i løpet av 20 minutter (dvs. la batteriet kjøles ned i 18 minutter hvis det er brukt kontinuerlig i to minutter).

De elektriske komponentene er IP51-rangert, og er ikke vanntette. Rengjør kun med en fuktig klut - ikke bruk rennende vann, da det kan trenge inn i kabelforbindelsene.

Hvis produktet tas ut av et kjølig oppbevaringsrom, la det stå i to timer for å komme opp i romtemperatur, og tørk av eventuell kondens som oppstår før produktet brukes.


SEKSJON 9.7: 10.2 TILT-IN-SPACE INNENDØRS UNDERSTELL

Finn tiltjusteringen **A**. Bruk pekefingeren til å betjene sikkerhetslåsen som frigjør hovedspaken for tilt **B**. Trykk hovedspaken for tilt helt ned, og la mekanismen tilte til ønsket vinkel er oppnådd **D**.

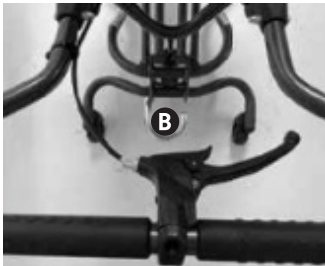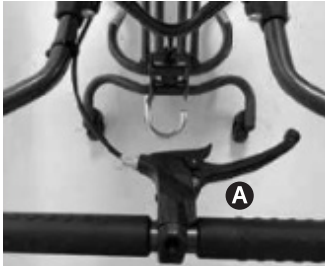

SEKSJON 9.8: TILT-IN-SPACE INNENDØRS- UTENDØRS UNDERSTELL

Finn tiltjusteringsspaken på siden av kjørebøylen **A**. Trykk hovedspaken for tilt helt ned, og la mekanismen tilte til ønsket vinkel er oppnådd **B**.

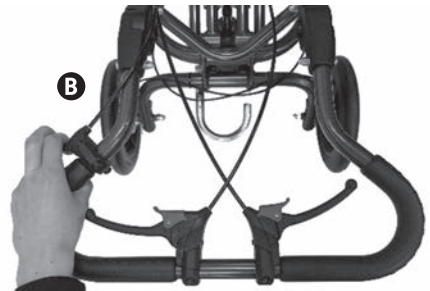

SEKSJON 9.9: JUSTERE DYNAMISK RYGGMOTSTAND

Motstanden for å øke ryggvinkelen justeres ved å endre lufttrykket, og det skal fastsettes av personens vekt, setestilling, setedesign og personlig preferanse.

Lufttrykket justeres ved bruk av en luftpumpe **A** (som leveres med hver dynamiske rygg) i hovedventilen på den dynamiske mekanismen **B**.




For å øke lufttrykket, pump luft inn i ventilen til ønsket trykk er oppnådd. For å redusere trykket, trykk på utløserventilen på pumpen til ønsket trykk er oppnådd.



Advarsel: Trykkområdet er mellom 50 og 250 psi. Lufttrykket i det ukomprimerte fjæringssystemet må aldri overstige 250 psi. Hvis det maksimale lufttrykket på 250 lbs/tomme overstiges, kan det føre til alvorlig personskade.

SEKSJON 9.10: JUSTERE DYNAMISK RYGGHASTIGHET


For å justere returhastigheten til den dynamiske ryggen, vri det røde hjulet **A** på den dynamiske støtdemperen. Vri hjulet med urviseren for å senke returhastigheten, og vri det mot urviseren for å øke returhastigheten.

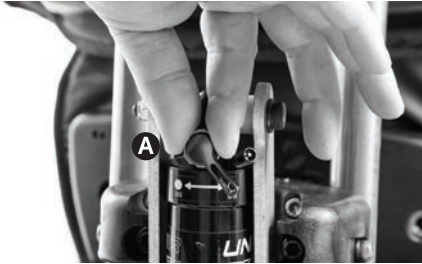

Hvor stor returkraft som er nødvendig kommer an på personens vekt, fjæring (som stilles inn av lufttrykket), bruksmengde, sittestil og personlig preferanse. Den beste måten å justere returstyrken på er å redusere den helt, og teste den ved å plassere personen i setet. Øk styrken forsiktig til personen føler seg komfortabel og trygg, uten at fjæringen flytter personen for langt forover.

SEKSJON 9.11: STILLE DEN DYNAMISKE RYGGEN TIL "FIRM"

For å låse den dynamiske ryggen, still den blå spaken på den dynamiske støtdemperen til låst stilling («Locked») **A**. For å låse opp den dynamiske ryggen, still spaken til åpen stilling ("Open") **B**.

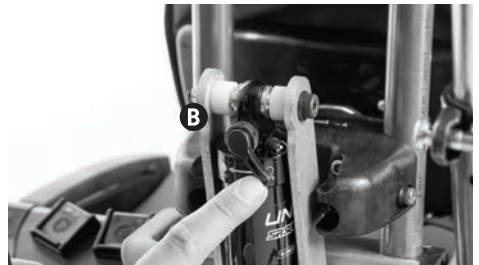

Sikkerhetsinformasjon: Den blå spaken kan stilles til "Firm" (fast) når BeMe brukes under transport.


SEKSJON 9.12: JUSTERE SOMMERFUGLSELEN

For å justere sommerfuglselen, kan du enten endre hvor mye av båndet som trekkes gjennom kamspennene bak på setebasen **A** eller øverst på ryggstøtten **B**. Du kan også juster båndlengden på selestroppene i de fire hjørnene på selen **C**.



SEKSJON 9.13: MONTERE OG DEMONTERE BORDET

Før bordet monteres, kontroller at fingerskruen **A** foran på hvert armlen er løstnet. For å feste bordet, skyv rørene på bordet inn i åpningen midten på armlenene, og kontroller at rørene på bordet stikker ut på den andre siden på mottakeren. Når bordet står i ønsket stilling, må fingerskruene **A** strammes forsvarlig.

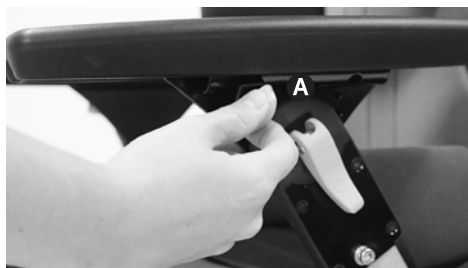

Vær alltid forsiktig for å forhindre at barnets hender eller armer klemmes når bordet monteres.

Bruk aldri bordet til å styre eller skyve stolen.

Ikke plasser gjenstander som er varmere enn 40 °C på bordet.

Bordet skal kun brukes av personen. Ikke len deg på bordet, eller plasser gjenstander som veier mer enn 8 kg på det.




Vær oppmerksom på åpningen under bordet, hvor barnet kan stikke fingrene sine inn mellom metallbraketten og basen på plastbordet.

Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere bordet.


SEKSJON 9.14: JUSTERE VINKEL PÅ BORD

For å justere vinkelen på armlenet, finn først kamspaken **A** midt på armlenet. Hev kamspaken for å låse opp og sette bordet/ armlenet **B** i ønsket vinkel. Fest ved å senke kamspaken til låst stilling **C**.

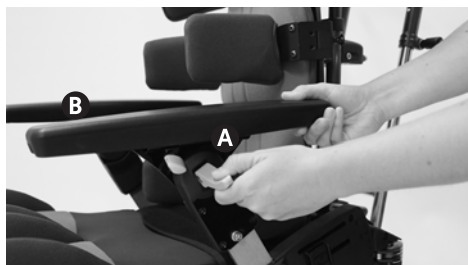

SEKSJON 9.15: JUSTERE VINKEL PÅ ARMLEN

For å justere vinkelen på armlenet, finn først kamspaken **A** midt på armlenet. Hev kamspaken for å låse opp og sette armlenet **B** i ønsket vinkel. Fest ved å senke kamspaken til låst stilling **C**.

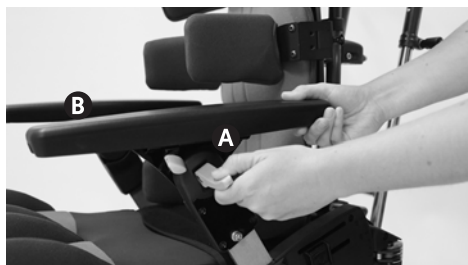

Vær alltid forsiktig for å forhindre at barnets hender eller armer klemmes når bordet monteres.

Bruk aldri bordet til å styre eller skyve stolen.

Ikke plasser gjenstander som er varmere enn 40 °C på bordet.

Bordet skal kun brukes av personen. Ikke len deg på bordet, eller plasser gjenstander som veier mer enn 8 kg på det.

SEKSJON 9.16: BRUKE UTVIPPBAR FOTPLATE

For å vippe opp den hele fotplaten, finn spaken **A** på undersiden av fotplaten, og trekk den ut for å frigjøre pinnen. Roter fotplaten oppover og slipp opp spaken. Pinnen vil stå opp i låst stilling.




Gjør denne fremgangsmåten i motsatt rekkefølge for å senke den hele fotplaten.

Individuelle fotplater har ikke en låsemekanisme. For å vippe opp de individuelle fotplatene, vri hver fotplate opp.


SEKSJON 9.17: JUSTERE SANDALER

For å plasseres barnets føtter i sandalene, fest de medfølgende borrelåsreimene så føttene holdes på plass. Reimene skal plasseres over vristen **A** og tærne **B**. Den fremre reimen kan mates gjennom et av to spor på begge sider av sandalene, avhengig av størrelsen på barnets føtter.

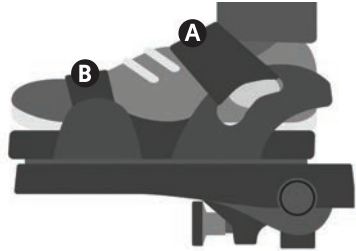


Hvis barnet har på seg sandaler eller lett fotføy, kontroller at reimene ikke irriterer huden.

For å justere plasseringen av sandalen på fotplaten, skru opp knotten **C** og flytt sandalen til ønsket stilling **D**. Stram knotten for å låse sandalen i stilling.

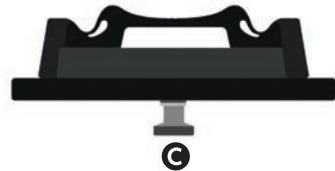


SEKSJON 9.18: JUSTERE ANKELREIMER

For å justere ankelreimen, tilpass borrelåsreimene rundt vristen på foten **A** og rundt ankelen **B**.

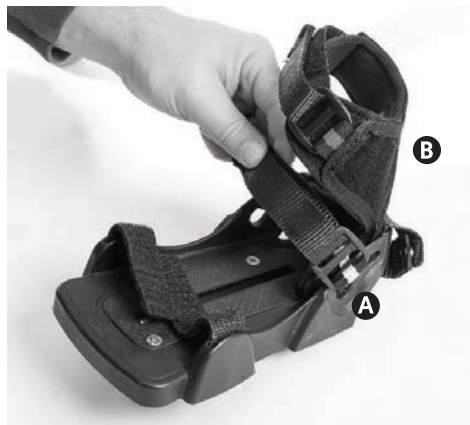


SEKSJON 9.19: JUSTERE ANKELSKINNER

For å justere ankelskinnen, tilpass borrelåsreimen rundt ankelen **A**, samt lengden på reimen gjennom spennen **B**.

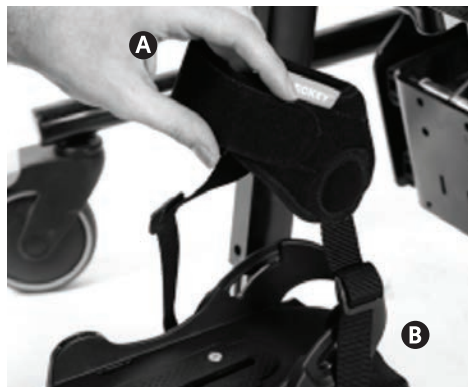


SEKSJON 9.20: KOBLE INN BREMSENE

For å bruke bremsene på et innendørs understell, trykk foten ned på bremsepedalen **A** til du hører et klikk. Gjør dette på alle de fire svingjulene. For å frigjøre bremsene, trykk på toppen av bremsepedalen med foten, så pedalen vipper tilbake til utgangsstillingen sin.

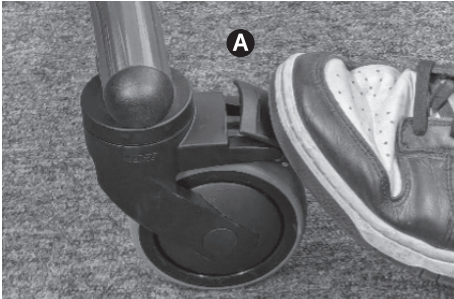

For å aktivere bremsene på et transittunderstell, grip og klem de to svarte bremsepakene som sitter på kjørehåndtaket **B**. For å frigjøre, trekk i de to røde sekundære låsespakene. Et transittunderstell har ikke bremsere på framjulene.

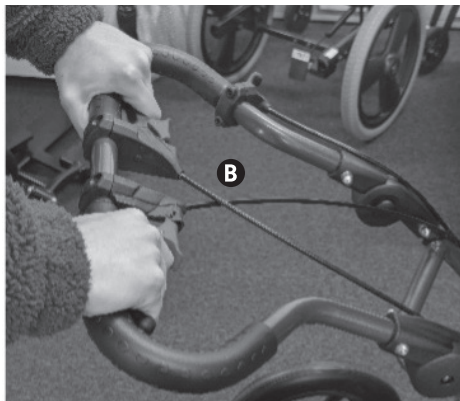

SEKSJON 9.21: JUSTERE HØYDEN PÅ KJØREHÅNDTAKET


Kun kjørehåndtaket skal brukes til å flytte rullestolen. Det skal legges ned når det ikke er i bruk. For å bruke det, trykk på begge knappene **D** på innsiden av håndtaket. For å endre posisjonen på håndtaket manuelt, vri den øvre delen ned. Trekk håndtaket opp for å folde det ut til du hører et klikk, og sørg for at det sitter på plass.



SEKSJON 9.22: MONTERE OG DEMONTERE ABDUKSJONSKLOSS

Abduksjonsklossen kan kun festes til basic sete. **Den tynne enden på abduksjonsklossen skal peke mot barnet i setet.**


For å feste abduksjonsklossen, åpne kamlåsen foran på setet **A**, og sett abduksjonsklossbraketten gjennom åpningen i seteputen og inn i mottakersporet på setet **B**. For å låse bøylen, skyv spaken **C** kraftig ned. Plasser abduksjonsklossen så den sitter eksternt på seteområdet.

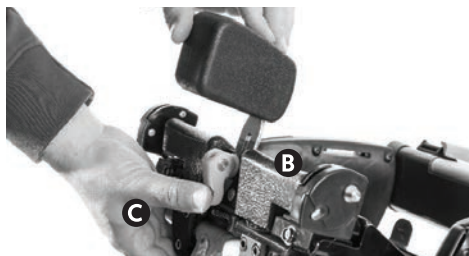

Hvis festemekanismen blir løs over tid, kan den strammes ved å stramme skruen (med urviseren) i kamspaken når den er hevet opp **A**. Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere abduksjonsklossen.

SEKSJON 9.23: MONTERE OG DEMONTERE BENLEDERE

For å montere lårstøtten, skyv stammen på støtten **A** inn i mottakeren på setet **B**, og trykk den ned. Kontroller at benledeerne er låst i stilling ved å trekke oppover.


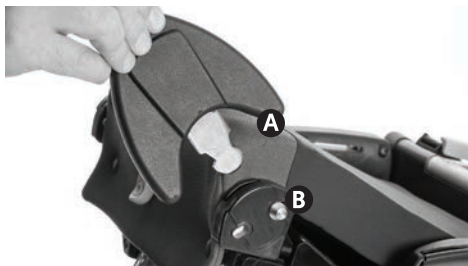


For å demontere lårstøtten, skyv den sølvfargede utløserknappen diagonalt oppover **C**, og trekk lårstøtteskinnen ut av sporet.



SEKSJON 9.24: MONTERE OG DEMONTERE RYGGEN

For å montere ryggen, finn ryggmottakeren på baksiden av setebasen **A**. Åpne låseklaffene **B** på mottakeren bak på setebasen ved å trekke **klaffene fra hverandre horisontalt**, og deretter rotere de oppover.

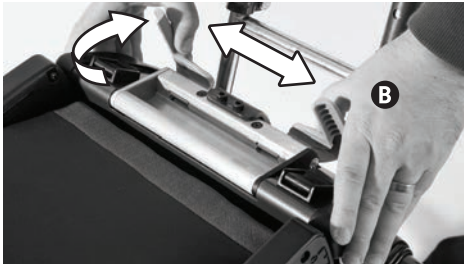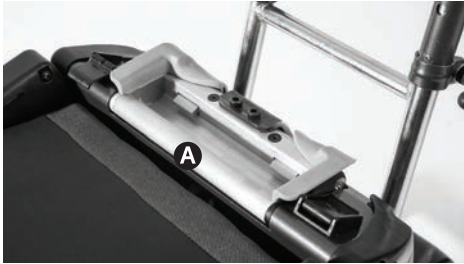

Sett basen på ryggen **C** så langt inn i mottakeren som den går. Vri klaffene nedover **D** og skyv **E** innover for å feste ryggen på plass.



For å demontere ryggen, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.



Kontroller alltid at setebasen er forsvarlig festet.

Kontroller at ryggen er forsvarlig festet ved å trekke den oppover, og deretter vippe den forover og bakover.

SEKSJON 10: RENGJØRINGS- OG VEDLIKEHOLDS- INFORMASJON

Vedlikehold:

Ved rengjøring anbefaler vi at det kun benyttes varmt vann og et vaskemiddel uten slipemiddel. Bruk aldri organiske løsemidler eller rensesvæsker.

Trekk og stoff

Setetrekkene kan tas av og vaskes i maskin på 60 °C (bruk en lav sentrifugeringshastighet hvis det lar seg gjøre), og tørkes på lav temperatur i tørketrommel. Vær oppmerksom på at stretchstoffet kan bli misfarget etter flere vask på 60 °C. Dette vil derimot ikke påvirke stoffets funksjon. Du kan forhindre dette ved å vaske trekket på en lavere temperatur.

Ta ut skumfyllet i følgende trekk før vask:

- Standardrygg
- Seteputer

Alle andre trekk kan legges hele i vaskemaskinen etter at festeanordningene er fjernet.

1. Trekk og stoff kan også vaskes for hånd når det er festet til produktet. Ved rengjøring anbefaler vi at det kun benyttes varmt vann og et vaskemiddel uten slipemiddel.
2. Innovativ funksjon - vårt stretchstoff er vanntett i 30 minutter etter at det er sølt væske på stoffet, for å gi deg tid til å tørke det opp.

3. Flekker bør fjernes så raskt som mulig ved bruk av en absorberende klut, et håndkle eller en svamp. Rutinemessig bruk av varmt vann, såpe og en svamp vil være effektivt mot flekker og mindre søl. Pass på så stoffet ikke blir for vått, da dette vil gjøre at flekkene sprer seg.
4. Antibakterielle rengjøringsmidler kan brukes på kraftigere flekker. Det kan være nødvendig å bruke isopropylalkohol eller mineralsprit.
5. Hofte- og brystbeltet kan vaskes i maskin på 60 °C. Sørg for at alle bolter og festeanordninger er fjernet først, da de kan skade vaskemaskinen. Oppbevar disse på et trygt sted utenfor barns rekkevidde.
6. Pass alltid på at produktet er tørt før bruk

Metall- og plastkomponenter

1. Vann og såpe, eller antibakteriell spray, kan brukes til daglig rengjøring.
2. Understellet skal rengjøres med en fuktig klut. Ikke bruk rennende vann.
3. Ikke bruk løsemidler til å rengjøre plast- eller metallkomponentene.
4. Pass på at enheten er tørr før den brukes.

SEKSJON 11: DAGLIG INSPEKSJON AV PRODUKT

[Terapeuter, foreldre, omsorgspersoner]

Vi anbefaler at terapeuter, omsorgspersoner eller foreldre foretar visuelle kontroller daglig for å forsikre om at produktet er trygt å bruke. De daglige kontrollene som anbefales er beskrevet nedenfor.

1. Kontroller at ingen av de bevegelige delene vakler eller beveger seg sidelengs. Kontroller at alle justeringsknotter og bolter er forsvarlig festet på plass.
2. Kontroller at trekk og borrelåser ikke er slitt eller skadd.
3. Kontroller at alle svinghjulene kan bevege seg fritt og at de låses forsvarlig.
4. Kontroller at setet er forsvarlig festet til understellet. Kontroller også at låsespaken for den tilbakelente ryggen er koblet helt inn.
5. Kontroller at hoftebeltet er forsvarlig festet rundt barnet, så barnet ikke kan skli forover i setet.
6. Kontroller at fotplaten er forsvarlig festet.

Hvis du er i tvil om Leckey-produktet er trygt å bruke, eller hvis noen av delene går i stykker, må du umiddelbart stoppe å bruke produktet og snarest ta kontakt med Kundeservice.

SEKSJON 12: ÅRLIG INSPEKSJON AV PRODUKT

[terapeuter, teknikere, Leckey- produktspesialister, forhandlere]

Leckey anbefaler at hvert produkt gjennomgår en grundig kontroll minst én gang i året, samt hver gang produktet skal gjenbrukes. Denne kontrollen skal utføres av en teknisk kompetent person som har mottatt opplæring i å bruke produktet. Det er nødvendig å kontrollere minst følgende punkter.

1. Kontroller at ingen av de bevegelige delene vakler eller beveger seg sidelengs. Kontroller at alle justeringsknotter og bolter er forsvarlig festet på plass.
2. Kontroller alle skrallehåndtak, knotter, muttere, bolter og plastspenner sitter der de skal. Erstatt deler som mangler. Vær spesielt oppmerksom på følgende enheter:
 - Låsebolter for hodestøtte.
 - Bolter for justering av ryggghøyde og -vinkel.
 - Bolter for justering av setedybde.
 - Festeordninger for hoftebelte/hoftestøtter.
 - Justering av høyde og vinkel på benstøtte.

3. Kontroller at høydejusteringsmekanismen for Hi-Low-understellet fungerer som den skal. Hvis understellet styres med en fotpedal, kontroller at setehøyden ikke endres når pedalen slippes opp. Kontroller også at låsepinnen låses forsvarlig, for å forhindre at høyden på understellet kan endres ved et uhell.
4. Juster setet til den maksimale innstillingen for tilt-in-space, og kontroller at låsepaken låser setet forsvarlig på forskjellige punkter i denne prosessen.
5. Kontroller at det ikke er synlig slitasje på metallkomponentene der hvor setet og understellet møtes.
6. Løft opp understellet for å kontrollere hvert svinghjul individuelt. Kontroller at de beveger seg fritt, og fjern eventuell smuss fra gummi hjulene. Kontroller at bremsene låser hjulene på forsvarlig måte.
7. Sjekk produktets struktur, og kontroller spesielt at sveiseskjøtene på rammen ikke er slitte eller skadde rundt skjøtene.
8. Leckey anbefaler å opprettholde en skriftlig oversikt over alle årlige produktkontroller.

Hvis du er i tvil om Leckey-produktet er trygt å bruke, eller hvis noen av delene går i stykker, må du umiddelbart stoppe å bruke produktet og snarest ta kontakt med Kundeservice.

SEKSJON 13: GJENBRUK AV LECKEY PRODUKTER

[Terapeuter, foreldre, omsorgspersoner]

De fleste Leckey-produkter er vurdert og bestilt for å dekke behovet til en bestemt person. Før et produkt overføres til en ny person, anbefaler vi at terapeuten som foreskriver produktet utfører en kontroll for å se om produktet er kompatibelt med den nye personen, og forsikrer seg om at produktet som skal overføres er fritt for modifiseringer og spesialutstyr.

Det bør foretas en detaljert, teknisk undersøkelse av produktet før det brukes av en ny person. Undersøkelsen utføres av en teknisk kompetent person som har mottatt opplæring i å bruke og kontrollere produktet. Se seksjon 12 for informasjon om kontrollene som må utføres.

Sørg for at produktet er nøye rengjort i samsvar med instruksjonene i seksjon 10 i denne brukermanualen.

Merk: Rengjør alltid produktet først for å fjerne smuss og flekker før det desinfiseres.

1. Vi anbefaler å bruke et automatisert tåkesystem for å dekke alle overflatene på produktet med desinfiseringsmiddel, dersom det er mulig. Les igjennom og følg produsentens instruksjoner for det valgte systemet før bruk og følg disse nøye.

2. Hvis et automatisk desinfeksjonssystem ikke er tilgjengelig, skal alle overflatene tørkes over med desinfiserende servietter eller et flytende desinfeksjonsmiddel på en myk klut. Produkter som er egnet til dette formålet er 70 % IPA, 70 % alkohol eller fortennet blekemiddel. Følg produsentens instruksjoner for det aktuelle produktet. Produktets trekk og stoffdeler må rengjøres nøye i henhold til instruksjonene i avsnittet "Rengjørings- og vedlikeholdsinformasjon" i denne brukermanualen.

Sørg for at brukermanualen leveres med produktet. Du kan be om en kopi fra nettsiden vår: leckey.com

Leckey anbefaler å opprettholde en skriftlig oversikt over alle produktkontroller som er utført når produktet skal gjenbrukes.

Hvis du er i tvil om Leckey-produktet er trygt å bruke, eller hvis noen av delene går i stykker, må du umiddelbart stoppe å bruke produktet og snarest ta kontakt med Kundeservice.

SEKSJON 14: SERVICE

Service på ethvert Leckey-produkt skal kun utføres av teknisk kompetent personell som har fått opplæring i bruk av produktet.

Kontakt Sunrise Medical AS på tlf 66963800 og Kundenservice vil bistå deg i forhold til ditt servicebehov.

For mer informasjon om Leckey-forhandlere, besøk nettsiden vår: **www.leckey.com**.

SEKSJON 15: TEKNISK INFORMASJON - METRISK

Seteskall og seter				
	Størrelse 1	Størrelse 2	Størrelse 3	Størrelse 4
Setedybde (mm) *	170-270	225-350	320-430	400-540
Sete og konturert pute, maks bredde (uten hoftestøtter) (mm)	280	325	410	475
Lårstøttebredde på delt sete (mm)		90-125	110-160	135-170
Maksimal vektgrense (kg) **	35	50	70	80 kg

Ryggstøtte				
	Størrelse 1	Størrelse 2	Størrelse 3	Størrelse 4
Ryggghøyde (mm)	300-400	350-470	400-530	475-650
Ryggghøyde med kontursete (mm)	300-400	350-470	400-530	475-650
Bredde på standard hoftestøtte (mm)	145-215	175-260	245-350	290-405
Bredde på smal hoftestøtte (mm)	170-240	200-285	270-375	315-430
Sidestøtter, bredde (mm)	130-230	200-300	225-350	350-450
Innvendig sideveis bredde (mm)	80-180	150-250		
Ryggvinkel (grader)	+10 til -25	+10 til -25	+10 til -25	+10 til -25
Maksimal vektgrense (kg) **	35	50	70	80 kg

Benstøtte				
	Størrelse 1	Størrelse 2	Størrelse 3	Størrelse 4
Legglengde (mm)	170-270	225-350	320-440	400-540
Maksimal dorsalfleksjon (grader)	15	15	15	15
Maksimal plantarfleksjon (grader)	15	15	15	15

Ramme		
	Innendørs [150-#MHT-1] Innendørs elektrisk [150-#MHT-PWR-1]	Utendørs-innendørs [150-#MHT-1B] Utendørs-innendørs elektrisk [150-#MHT-PWR-1B]
Fotavtrykk, bredde (mm)	610	640
Fotavtrykk, lengde (mm)	825	910
Tiltområde (grader)	-15 til 25	-15 til 25
Gulv til sete ****minimal størrelse 1 (mm)	330	330
Gulv til sete, minimal størrelse 2 (mm)	430	430
Gulv til sete, minimal størrelse 3 (mm)	430	430
Gulv til sete, minimal størrelse 4 (mm)	480	480
Gulv til sete, maksimal størrelse 1 (mm)	870	910
Gulv til sete, maksimal størrelse 2 (mm)	900	940
Gulv til sete, maksimal størrelse 3 (mm)	900	940
Gulv til sete, maksimal størrelse 4 (mm)	950	990
Maksimal vektgrense (kg) ***	80 kg	80 kg

*Alternativet 120 til 145 krever avstandsstykke, 145 eller lavere er ikke kompatibelt med konturerte setealternativer.

** Systemets maksimale brukervekt skal være det

minste for sete, understell og rygg.

*** Maksimal vektkapasitet bare for understellet

**** Med korte benstammer

TEKNISK INFORMASJON - BRITISKE MÅLEENHETER

Seteskall og seter				
	Størrelse 1	Størrelse 2	Størrelse 3	Størrelse 4
Setedybde (tommer) *	6,7-10,6	8,9-13,7	8,9-16,9	15,8-21,3
Setebredde, maksimum (uten hoftestøtter) (tommer)	11,0	13,0	15,8	18,7
Lårstøttebredde på delt sete (tommer)		3,5-4,9	4,3-6,3	5,3-6,7
Maksmial vektgrense (lbs) **	77,2	110,2	154,3	176,4

Ryggstøtte				
	Størrelse 1	Størrelse 2	Størrelse 3	Størrelse 4
Rygg høyde (tommer)	11,8-15,8	13,8-18,5	15,8-20,9	18,7-25,6
Rygg høyde med kontursete (tommer)	11,8-15,8	13,8-18,5	15,8-20,9	18,7-25,6
Bredde standard hoftestøtte (tommer)	5,7-8,5	6,9-10,2	9,7-13,8	11,4-16,0
Bredde smal hoftestøtte (tommer)	6,6-9,4	7,8-11,2	10,6-14,8	12,4-16,9
Sidestøtter, bredde (tommer)	5,1-9,0	7,8-11,8	8,9-13,8	13,8-17,7
Innvendig sideveis bredde (tommer)	3,2-7,1	6,0-9,8		
Ryggvinkel (grader)	+10 til -25	+10 til -25	+10 til -25	+10 til -25
Maksmial vektgrense (lbs) **	77,2	110,2	154,3	176,4

Benstøtte						
	Størrelse 1	Størrelse 2	Størrelse 3	Størrelse 4		
Legglengde (tommer)	6,7-10,6	8,9-13,8	12,6-17,3	15,8-21,3		
Maksimal dorsalfleksjon (grader)	15	15	15	15		



Seteskall og seter		
	Innendørs (150-#MHT-1) Innendørs elektrisk (150-#MHT-PWR-1)	Utendørs–innendørs (150-#MHT-1B) Utendørs–innendørs elektrisk (150-#MHT-PWR-1B)
Fotavtrykk, bredde (tommer)	24,0	25,2
Fotavtrykk, lengde (tommer)	32,4	35,8
Tiltområde (grader)	-15 til 25	-15 til 25
Gulv til sete ****, minimal størrelse 1 (tommer)	13,0	13,0
Gulv til sete, minimal størrelse 2 (tommer)	16,9	16,9
Gulv til sete, minimal størrelse 3 (tommer)	16,9	16,9
Gulv til sete, minimal størrelse 4 (tommer)	18,9	18,9
Gulv til sete, maksimal størrelse 1 (tommer)	34,3	34,3
Gulv til sete, minimal størrelse 2 (tommer)	35,4	37,0
Gulv til sete, minimal størrelse 3 (tommer)	35,4	37,0
Gulv til sete, minimal størrelse 4 (tommer)	37,4	38,0
Maksimal vektgrense (lbs) ***	176,4	176,4

*Alternativet 120 til 145 krever avstandsstykke, 145 eller lavere er ikke kompatibel med konturerte setealternativer.

** Systemets maksimale brukervekt skal være det minste for sete, understell og rygg.










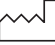



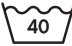




*** Maksimal vektkapasitet bare for understellet

**** Med korte benstammer

TEKNISK INFORMASJON

Funksjon	Parameter	Verdi
Merke og modell	Aktuator	LINAK 321245-00
	Batteri	LINAK CB8001A60-00
	Håndholdt kontroll	HB41A00-000001
	Batterilader	LINAK CH01 Bruk kun den medfølgende batteriladeren
Seteløft	Arbeidssyklus	Maks. Maks. 10 % eller 2 minutters bruk, etterfulgt av 18 minutter pause.
	Aktuatorkraft	6000 N skyv
Omgivelsesmodus	IP-vurdering	IP51 (ikke vanntett, rengjør kun med en fuktig klut)
	Bruk	+5 °C til +40 °C 20-80 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende
	Transport og oppbevaring	-10 °C til +50 °C 20-80 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende
		La enheten stå i romtemperatur i to timer før den brukes når den er flytte fra oppbevaring
Elektrisk informasjon	Aktuator, driftsspenning	24 V
	Aktuator, driftsstrøm	Maks. 3,5 A
	Lader, inngangsspenning	100 – 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
	Lader, utgangsspenning	28 V +0,3 V/-0,6 V
	Ladestrøm	Maks. 500 mA
	Ladeindikasjon på lader	Grønt lys - tilkoblet strøm Gult lys - batteriet lades opp, skifter til grønt lys når batteriet er fulladet
Sertifisering	EMC	IEC60601-1-2:2014 for bruk hjemme
	Elektrisk sikkerhet	IEC60601-1:2005/A1:2012

TABELL OVER SYMBOLER

Symbol	Betydning
	Medisinsk utstyr
	Les instruksjonene for bruk
	CE-merking
	UKCA-merke
	Advarsel
	Produsent
	Serienummer
	Produktkode
	Maksimal brukervekt
	Produksjonsdato
	Inneholder ikke lateks
	Utstyrsidentifikasjonskode (UDI)
	Kollisjonstestet
	Vaskes i maskin på 40 °C
	Tørkes i tørketrommel på lav varme
	Må ikke strykes
	Skal ikke blekes
	Elektrisk/elektronisk utstyr kastes i henhold til WEEE-forskriften.

SEKSJON 16: HVORDAN PAKKE UT OG SETTE SAMMEN SETESYSTEMET

Kontroller alle deler

Når du kjøper et Leckey BeMe-setesystem, vil alle delene være pakket i plastposer, tydelig merket med etiketter. Ta de forsiktig ut av esken og kontroller alle delene du har bestilt.

Noe av utstyret må settes sammen før du fester setet til understellet du har kjøpt. Hvis setet skal monteres på et mobilitetsunderstell, må du først montere grensesnittplaten på understellet. Instruksjoner om hvordan du fester grensesnittet til bestemte understell, følger med grensesnittplaten. Når du har kontrollert alle delene, er du klar til å sette sammen BeMe-setesystemet og feste det til understellet.



Sikkerhet først: Hold plastposene unna barn.

Verktøy

Noen av justeringene krever bruk av multiverktøy eller en unbrakonøkkel med langt håndtak, som følger med setet.



SEKSJON 16.1: MONTERE OG DEMONTERE SETEENHETEN PÅ UNDERSTELLET



Hev understellet helt opp for å unngå å skade ryggen din når du monterer setebasen. Se seksjon 9 for informasjon om hvordan du justerer høyden på understellet.

Før du monterer setebasen, kontroller at låsehaspen på forsiden er åpen **A**. Hvis låsehaspen er lukket **B**, må du gjøre følgende:



Bilde av låsehaspe i låst stilling.

Finn de grå utløserknappene på høyre og venstre låsehaspe foran på setet **C**. Vri knappene mot midten av setet samtidig **D**, og trykk de deretter innover **E**. Du vil høre et klikk når haspene kobles ut.

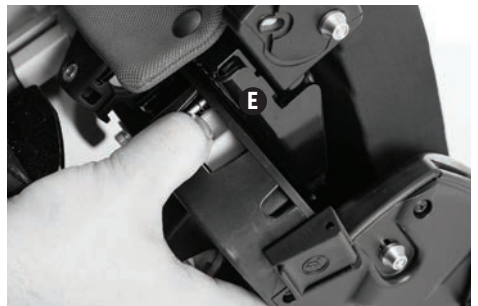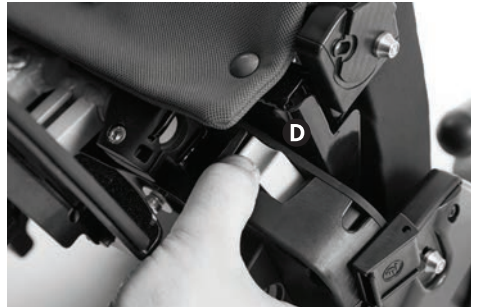

Når låsehaspene er koblet ut, kan setebasen settes på understellet. Løft setebasen ved å ta tak på hver side av setet med begge hender. Det er to kroker **F** på baksiden av setebasen, som skal stilles på linje med det bakre røret på understellet **G**. Roter framsiden på setet ned **H**, og trykk deretter kraftig ned til du hører et klikk når låsehaspene låses.

Kontroller at setebasen er forsvarlig festet ved å trekke opp forsiden og baksiden på seteskallet.




Kontroller alltid at setebasen er forsvarlig festet.

Vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene dine når du fester setet.

For å demontere setet, finn og frigjør låsehaspene, slik vist i **C**, **D** og **E**. Deretter gjør du trinnene i **H**, **G** og **F**.

SEKSJON 16.2: MONTERE OG DEMONTERE UTTREKKBART KJØREHÅNDTAK

Setekonstruksjonen er festet til HiLo-understellet med 4 bolter **A**

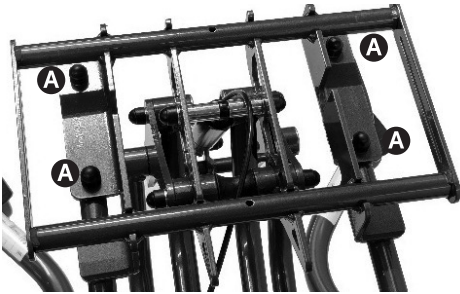


For å fjerne setekonstruksjonen, klipp av kabelfestene som holder tilt- og bremsekablene til HiLo-understellet **B**.



Fjern skruene som fester aktiveringsspakene til styret **C**.





Til slutt fjernes de fire boltene som holder kjørehåndtaket fast til HiLo-understellet **D**.

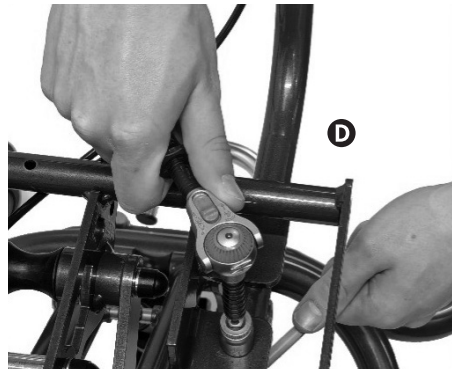


SEKSJON 16.3: MONTERE OG DEMONTERE LÅRSTØTTER



Aller først, fest utstyret til de to buede åpningene foran på undersiden av setebasen **A**. Sørg for at den delte pakningen **B** plasseres mellom den store pakningen og hodet på bolten. Plasser låseplaten **C** mellom formen og mutteren. Fest mutteren slik at enden på bolten sitter på linje med enden på mutteren. Låseplaten skal kunne beveges fritt langs bolten mellom delen og mutteren. Plasser låseplaten slik at den korte enden peker forover.

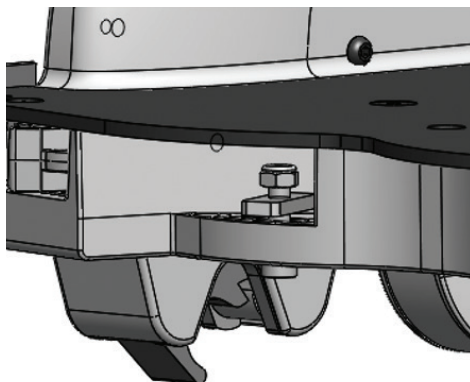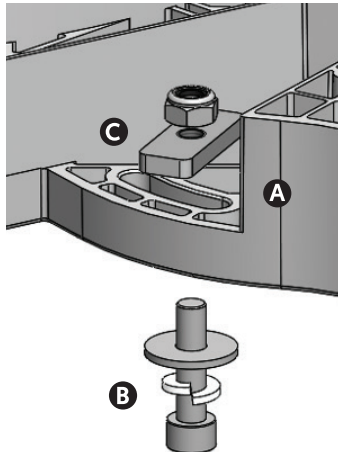

Stengene til lårstøtten kommer som et høyre og venstre par. Sørg for at høyre og venstre stenger monteres med den **D**

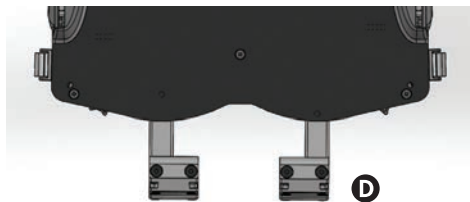


Sett lårstangen inn i åpningen i setebasen **E**. Sørg for at låseplaten holdes i lårstangen. Sett den nedsenkte skruen inn i dekkplaten **F** i setebasen, og fest den med den medfølgende mutteren i sporet på delen på undersiden. Gjenta på den andre siden.


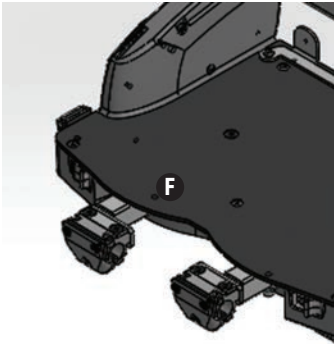
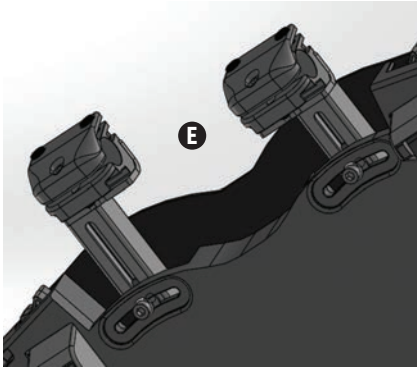


For å demontere lårstengene, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 16.4: MONTERE OG DEMONTERE BENSTANGEN


Før du fester benstammene, kan det være nødvendig å løsne femoralstengene **A** med bolten under setet **B**, slik at begge kan monteres. Plasser platen **C** med tommelpinnen **D** inn i femoralmottakeren **E**, hvor tommelpinnen peker innover. Deretter plasserer du den runde utstikkeren på benstammen i femoralmottakeren, setter **F** skiveutstikkeren **G** på motsatt side, og skrur den fast.



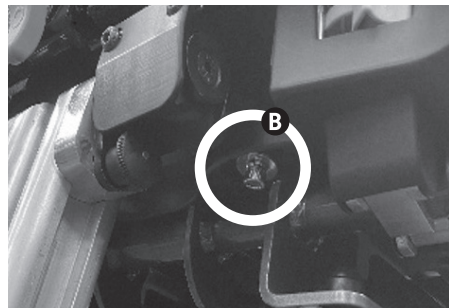


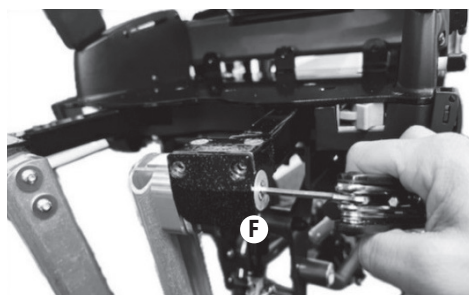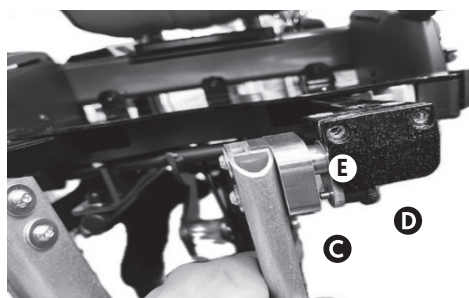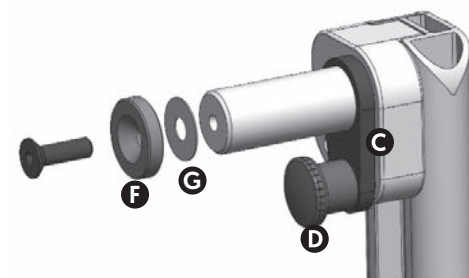

SEKSJON 16.5: MONTERE OG DEMONTERE BASIC SETE, SPLIT SETE OG CONTOURED SETE

Før du fester seteutstyret, se avsnitt 16.4 og sørg for at benstammene er montert på femoralstengene, da dette ikke kan gjøres etter at seteutstyret er festet. Den fremre seteplaten på Basic sete, Split sete og Contoured sete festes til mottakerne på setebasen. Finn først de nedadgående flensene foran på setplaten **A**, og den øvre åpningen i mottakerne **B** på enden av femoralstengene. Skyv flensene inn i venstre og høyre mottakere, og sørg for at de to hullene på hver side står på høyde med hverandre. Det kan være du må justere plasseringen av lårstangen, slik at mottakerne kan plasseres riktig. For å gjøre dette, skru opp bolten **C** på undersiden av setebasen, og flytt den til en annen stilling. Når setplaten er på plass, stram den godt med de 4 boltene og unbrakonøkkelen **D**.

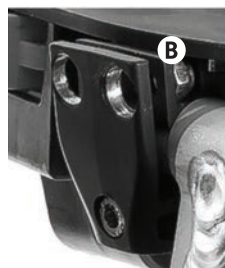

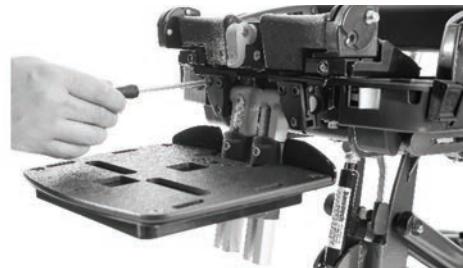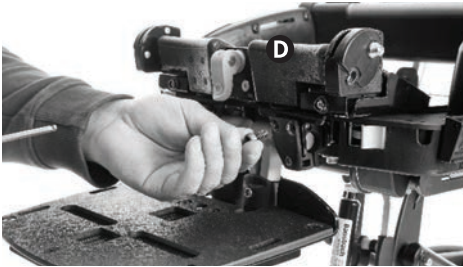
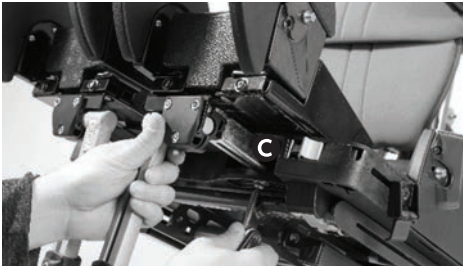


For å demontere seteplaten, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 16.6: MONTERE OG DEMONTERE CONTOURED SETE

Den konturformede puten er festet til seteplaten ved bruk av borrelås på undersiden av puten, **A**, og på toppen av seteplaten **B**.

Bilder er nødvendige, inkludert borrlås og justering foran.

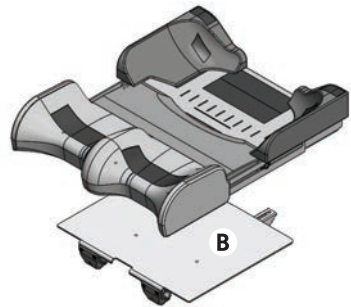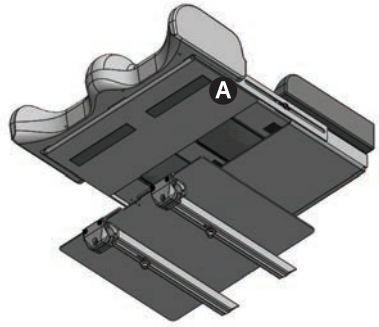


For å feste Contoured sete til setebasen, sett fronten på setebaseplaten på linje med skummet i kontursetet. Trykk ned for å feste borrelåsen.

For å demontere Contoured sete, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.



SEKSJON 16.7: MONTERE OG DEMONTERE RYGGEN

For å montere ryggen, finn ryggmottakeren på baksiden av setebasen **A**. Åpne låseklaffene **B** på mottakeren bak på setebasen ved å trekke **klaffene fra hverandre horisontalt**, og deretter rotere de oppover.

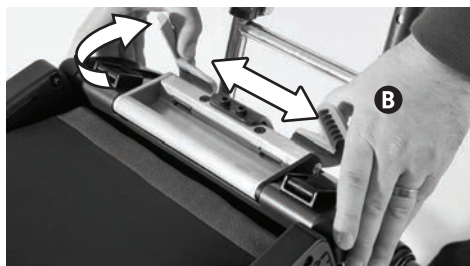

Sett basen på ryggen **C** så langt inn i mottakeren som den går. Vri klaffene nedover **D** og skyv **E** innover for å feste ryggen på plass.

Kontroller at ryggen er forsvarlig festet ved å trekke den oppover, og deretter vippe den forover og bakover.

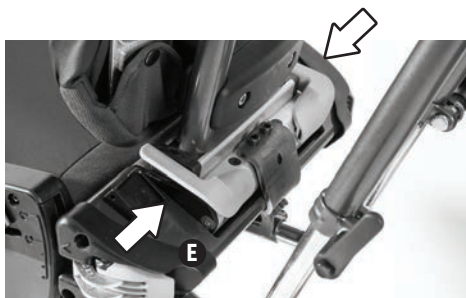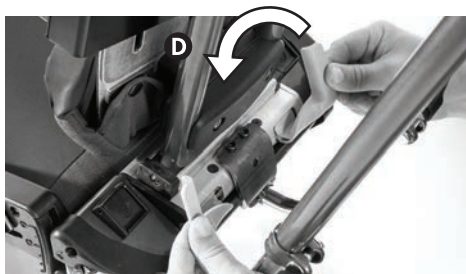

For å demontere ryggen, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.




Kontroller alltid at setebasen er forsvarlig festet.

SEKSJON 16.8: MONTERE OG DEMONTERE FOTSTØTTEN

For å feste benstøtten, juster fremspringet **A** med benstammen. Trekk i tommelpinnen **B** og skyv fremspringet over benstammen. Plasser benstøtten og slipp tommelpinnen **C**. Når den er på plass, stram stjerneknotten **D** for å feste den.



De individuelle fotstøttene kan festes hver for seg, mens den hele fotplaten må festes ved å skyve de to nedre benstengene inn på de øvre benstengene samtidig **E**.

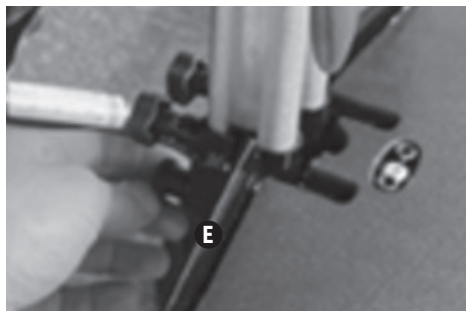

For å demontere fotstøtten, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.



Kontroller alltid at fotplaten er forsvarlig festet.

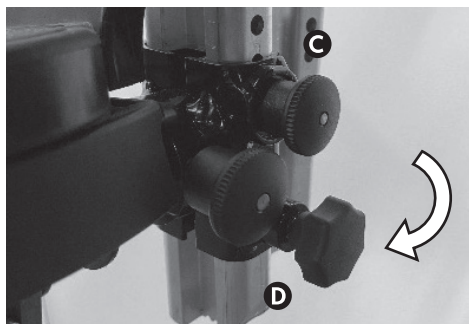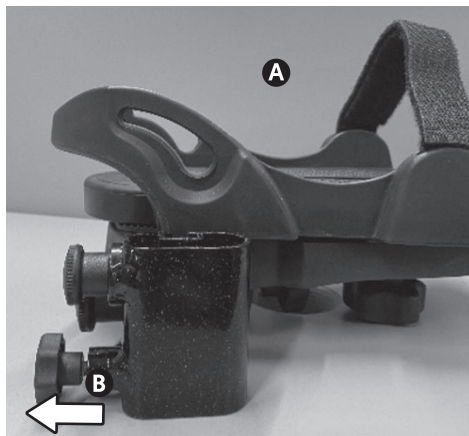

SEKSJON 16.9: MONTERE OG DEMONTERE ARMLENET

For å feste armlenet, finn sporet på sidene av setebasen **A**, og plasser armlenet med justeringskruen pekende utover **B**. Sørg for at tommelskruen i setebasen er løsnet **C**, plasser armlensstammen i sporet og trykk den ned. Kontroller at armlenet er låst på plass ved å trekke det oppover. Når den er i sporet, stram tommelskruen **C**.





For å ta av armlenet, løsne tommelskruen, skyv det fremover **C** mot setets forside, og trekk armlenet deretter ut av sporet.





SEKSJON 16.10: MONTERE OG DEMONTERE SANDALER


Sett festebolten **A** langs festeplaten **B**. Legg et gummilokk, **C**, på oversiden og undersiden av sandalen. Fest ved bruk av de fire skruene **D** som følger med. For å demontere sandalene eller erstatte festebolten, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

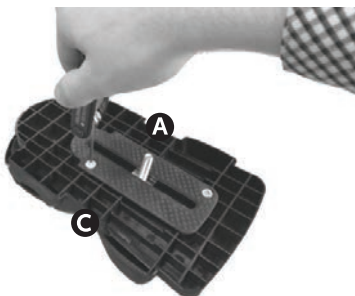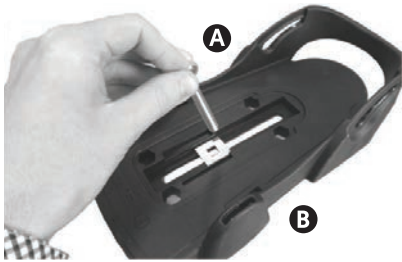

For å demontere festeboltene på sandalene, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

For å feste sandalen **A**, sett den på fotplaten **B** slik at festebolten, **C**, går igjennom sporet på fotplaten. For å feste sandalen, plasser gummipakningen, metallpakningen og knotten **D** på festebolten på undersiden av fotplaten, og stram deretter bolten.

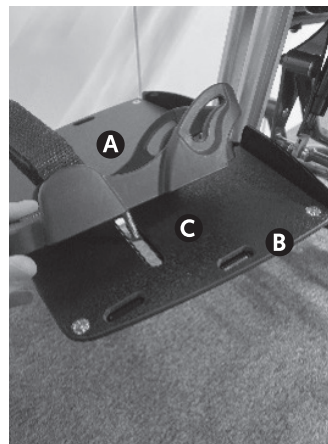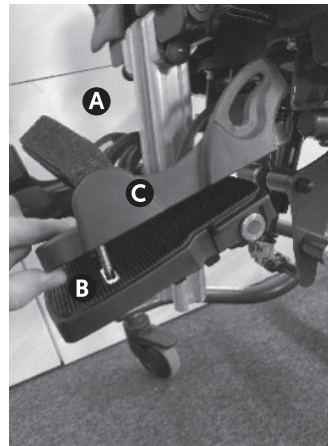



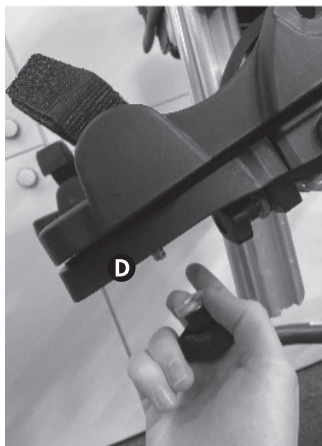


For å demontere sandalene, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 16.11: MONTERE OG DEMONTERE ANKELSKINNER


For å feste ankelskinnene, skyv båndet gjennom sideåpningen på sandalen **A**. Trekk båndet tilbake i en bue, opp og gjennom den nedre delen og deretter den øvre delen på spennen

B. Trekk til sist båndet gjennom den nedre delen på spennen på nytt for å feste det **C**. Kutt båndet til ønsket lengde.

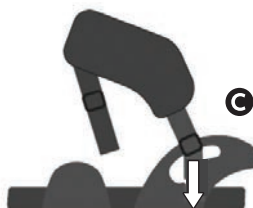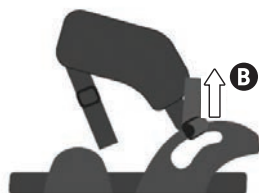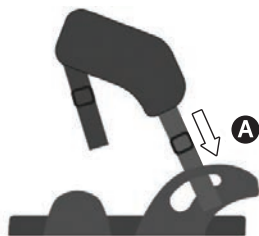

For å demontere ankelskinnene, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

Du kan også feste ankelskinnene til en hel eller delt fotplate. Skyv båndet gjennom åpningene, og fest det med spennen som leveres med alle ankelskinner.

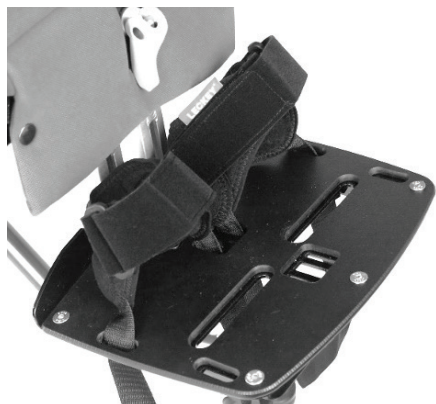


SEKSJON 16.12: MONTERE OG DEMONTERE ANKELREIMER

For å feste ankelreimen, mat de nedre **A**, og de øvre **B** knappene på ankelreimen under og over den bakre buen på sandalen, og trykk de sammen **C**.



Skyv spennen **D** som er festet til det svarte og hvite båndet gjennom sidesporet i sandalen. Skyv det svarte og hvite borrelåsbåndet **E** gjennom det andre sporet i sandalen. Mat enden på dette beltet gjennom spennen, og bøy de tilbake for å feste det mot borrelåsen **F**.

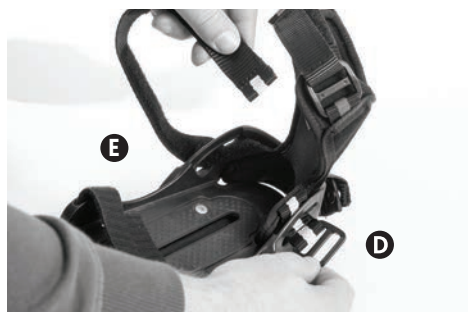

For å demontere ankelreimene, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.



SEKSJON 16.13: MONTERE OG DEMONTERE STØVLER


For å feste støvlene, trekk båndet gjennom sporene i fotplaten. For å feste, før den ene siden av båndet gjennom begge sporene i spennen **A**, og gjenta for andre siden av båndet.



SEKSJON 16.14: MONTERE OG DEMONTERE SIDESTØTTER - BASIC RYGG

For å feste sidestøtter til basic sete, sett T-mutteren **A** inn i det vertikale sporet fra forsiden på ryggplaten. Hvis ryggputene er montert, kan de flyttes ut av veien. Klem sammen de to sidene på de runde klemmene (med krokodilletenner), **B** og plasser pakningene på hver side av de runde klemmene. Metallpakningen **C** settes på siden av den runde klemmen, og plastpakningen **D** settes på siden av ryggstøtten. Deretter plasseres fremspringet i sporet på braketten. Stikk den andre spissen på den runde klemmen inn i sporet på ryggen, mens du passer på at den runde klemmen sitter på kant med platens overflate. Kontroller at T-mutteren sitter mellom de to overflatene på den runde klemmen foran på ryggen.

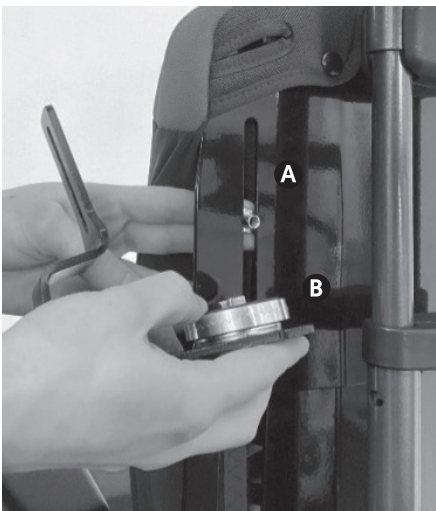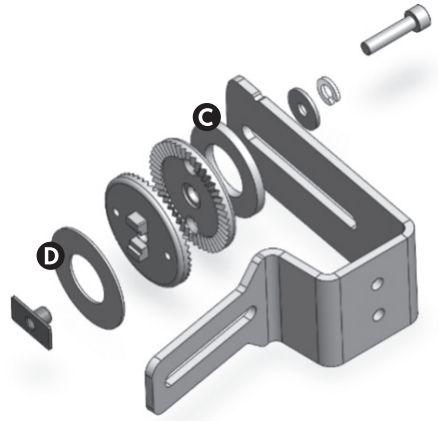

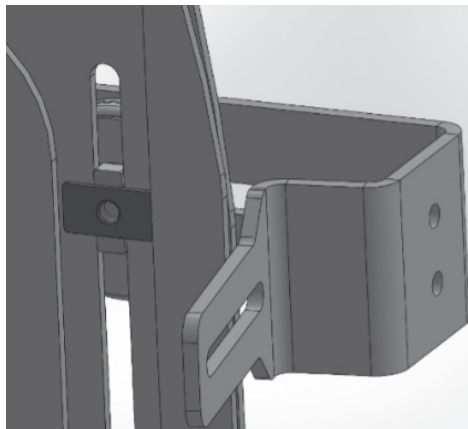

Sett først den delte pakningen, så den enkle pakningen, på bolten, og stikk den gjennom hullet i den runde klemmen **E**, slik at gjengene på T-mutteren festes. Stram med unbrakonøkkel.





For å demontere sidestøtter, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 16.15: MONTERE OG DEMONTERE SIDESTØTTER – MODERATE OG COMPLEX RYGG



For å feste sidestøtter til moderate og complex rygg, sett T-mutteren **A** inn i sporet på sidebraketten. Klem sammen de to sidene på de runde klemmene, og stikk spissen på den runde klemmen inn i sporet på motsatt side på sidebraketten, **B**. Kontroller at T-mutteren sitter mellom de to overflatene på den runde klemmen.

Sett de runde klemmene inn i åpningen foran på brystdelen **C**, mens du passer på at spissen på den runde klemmen sklir ned i det vertikale sporet. Hvis ryggputene er montert, kan de flyttes ut av veien.

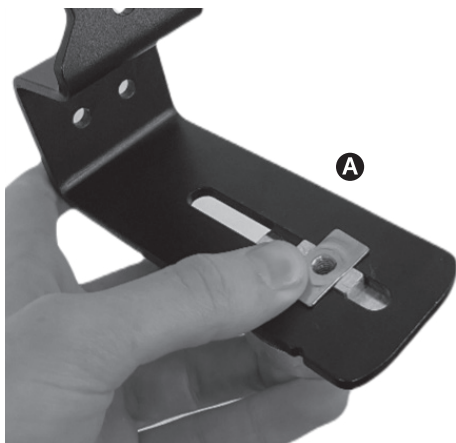

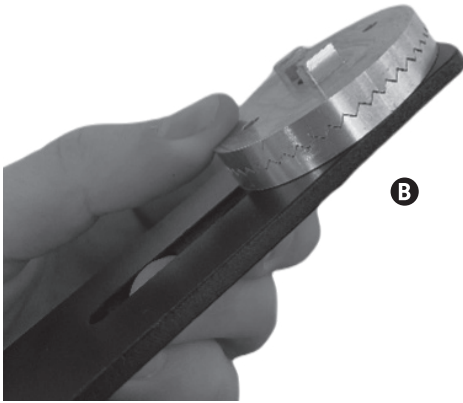



Sett først den delte pakningen og deretter den enkle pakningen på bolten, og stikk den gjennom den vertikale åpningen bak på brystdelen, **D**, så gjengene på T-mutteren festes. Stram med unbrakonøkkel.

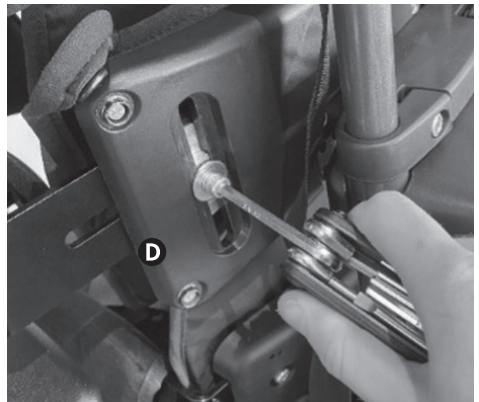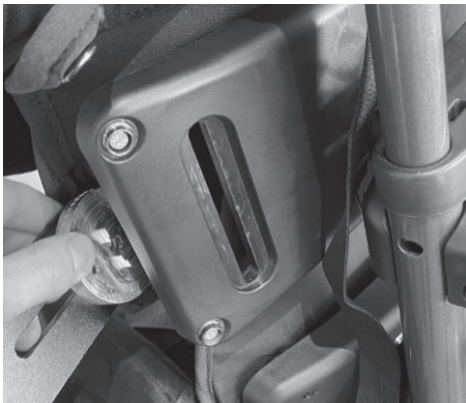


For å demontere sidestøtter, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 16.16: MONTERE OG DEMONTERE SMAL SIDESTØTTE

For å feste den smale sidestøtten til sidebraketten, sett først opphøyningen inn i det korresponderende sporet på den smale sidestøtten i plast **A**. Sett denne montasjen mot overflaten på innsiden av sidebraketten, slik at braketten sitter i fordypningen på plastputen, og den maskinerte delen sitter i sporet på sidebraketten **B**.

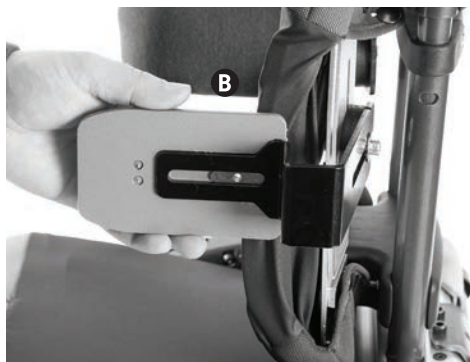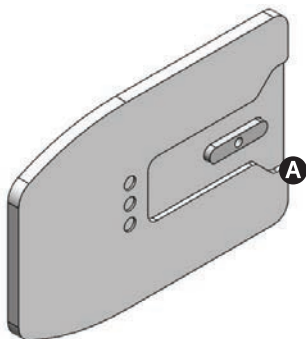

Sett først den delte pakningen og deretter den enkle pakningen på bolten, og stikk den gjennom hullet i den maskinerte delen **C**. Stram med unbrakonøkkel.

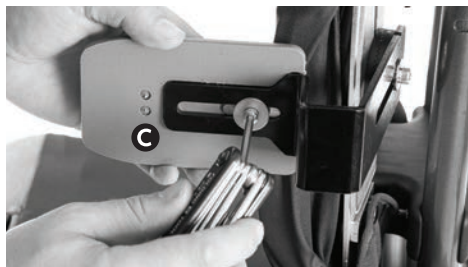

For å demontere, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 16.17: MONTERE OG DEMONTERE KOMPLEKS SIDESTØTTE

For å feste den komplekse sidestøtten til sidebraketten, sett først mutteren inn i fordypningen på sidestøtten i plast **A**. Sett denne montasjen mot overflaten på innsiden av sidebraketten, slik at braketten sitter i fordypningen på plastdelen **B**.





Sett først den delte pakningen og deretter den enkle pakningen på bolten, og stikk den gjennom hullet på delen **C** så gjengene i mutteren festes. Stram med unbrakonøkkelen.



For å demontere den komplekse sidestøtten, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 16.18: MONTERE OG DEMONTERE FLEKSIBEL SIDESTØTTE

Når du skal feste den fleksible sidestøtten, må du bruke det samme festutstyret som til smale sidestøtter. For å feste den smale sidestøtten til sidebraketten, sett først opphøyningen inn i det korresponderende sporet på den smale sidestøtten i plast **A**. Sett denne montasjen mot overflaten på innsiden av sidebraketten, slik at braketten sitter i fordypningen på plastputen, og den maskinerte delen sitter i sporet på sidebraketten **B**.

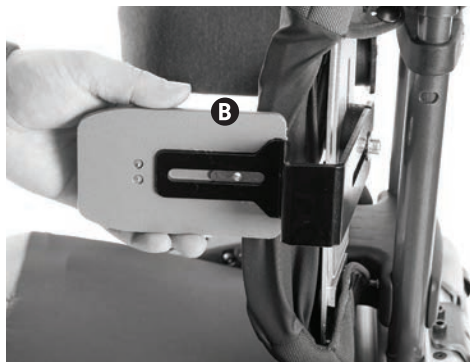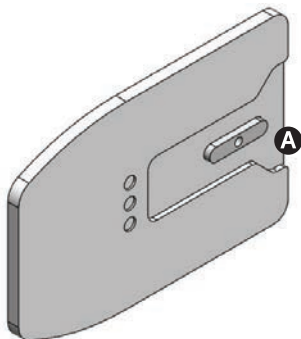



Sett først den delte pakningen og deretter den enkle pakningen på bolten, og stikk den gjennom hullet i den maskinerte delen **C**. Stram med unbrakonøkkelen.



For å demontere, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 16.19: MONTERE OG DEMONTERE PROTRAKSJONSPUTE



For å feste protraksjonsputen, still de to hullene i platen for protraksjonsputen på linje med de korresponderende hullene i sidebraketten, **A** husk at den bøyde delen i platen skal peke bort fra sideputen. Sett de to boltene gjennom disse hullene og fest dem på utsiden med to muttere, som strammes med unbrakonøkkelen og en skiftenøkkel **B**.

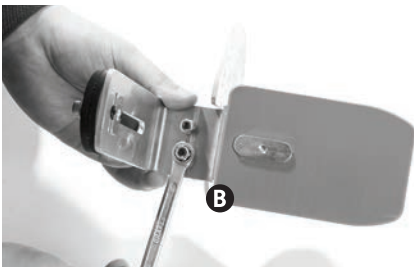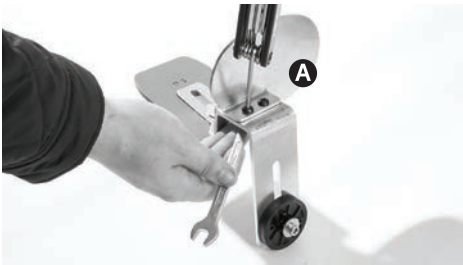

For å demontere protraksjonsputen, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 16.20: MONTERE OG DEMONTERE HOFTESTØTTER (BASIC RYGG)

For å feste hoftestøttene til basic ryggstøtte, sett T-mutteren **A** inn i hullet foran på basic ryggstøtte, mens du passer på så den lange kanten på T-mutteren står på linje med den rektangulære platen. Sett braketten inn i fordypningen på baksiden av basic ryggstøtte **B**. Hvis ryggputene er montert, kan de flyttes ut av veien.

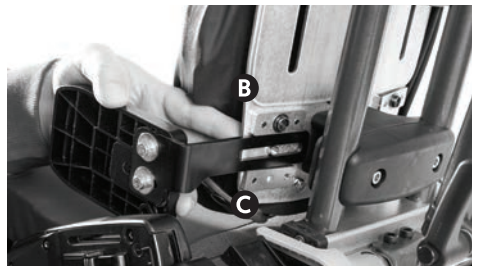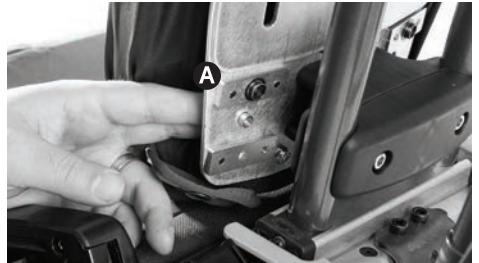


Rekkefølge. Sett først den delte pakningen og deretter den enkle pakningen på boltene, og stikk den gjennom hullet, **C**, slik at gjengene på T-mutteren festes. Stram med unbrakonøkkelen.

For å demontere, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 16.21: MONTERE OG DEMONTERE HOFTESTØTTER (MODERAT OG COMPLEX RYGG)

For å feste hoftestøttene til den moderate eller komplekse ryggen, sett T-mutteren **A** inn i sporet foran på hoftestøttebraketten. Sett braketten inn i fordypningen foran på sakraldelen **B**, mens du passer på at den korte enden på T-mutteren står på linje med den øvre og nedre overflaten på fordypningen. Hvis ryggputene er montert, kan de flyttes ut av veien.

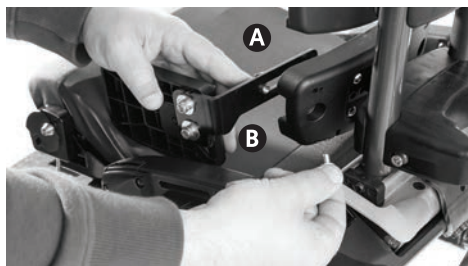


Sett først den delte pakningen og deretter den enkle pakningen på bolten, og stikk den gjennom hullet bak på sakraldelen **C**, slik at gjengene i T-mutteren festes. Stram med unbrakonøkkelen.


For å demontere, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 16.22: MONTERE OG DEMONTERE AVSTANDSSTYKKE FOR LITEN BASIC RYGG

For å montere avstandsstykket for den lille Basic ryggen, ta av ryggtrekket og skru ut de fire skruene oppe og nede, **A** slik at ryggplaten separeres fra klemmene. Fest avstandsstykkene ved bruk av de fire lange skruene i de øvre og nedre klemmene **B**.

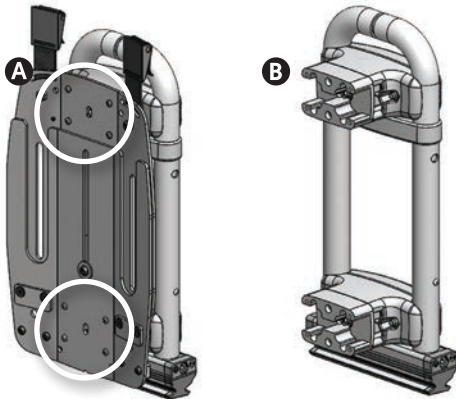

Plasser avstandsstykket for ryggplaten **C** på overflaten på den nedre klemmedelen **D**. Fest ryggplaten på nytt ved å stramme de fire skruene oppe og nede **A**.

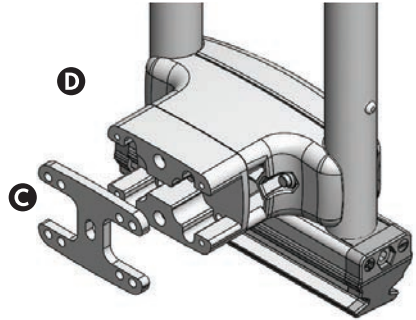

For å demontere avstandsstykkene for den lille basic ryggen, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge. Dette skal kun gjøres en gang, før det er nødvendig å skifte ut klemmene på standardsetet.

SEKSJON 16.23: MONTERE OG DEMONTERE HODESTØTTEN

For å demontere hodestøtten, vri håndspaken mot urviseren **A**. Til hodestøttestaget kan roteres fritt.





Så snart hodestøtten kan roteres fritt. Hodestøtten kan løftes ut av hodestøttebraketten **B**.





SEKSJON 16.24: MONTERE OG DEMONTERE BRAKETT TIL UNIVERSAL HODESTØTTE

For å feste den universelle hodestøttebraketten, skyv braketten **A** over toppen på ryggstøttrammen, og sørg for at skruhellene peker nedover. Deretter holder du avstandsstykkene **B** på plass mens du setter inn skruene og strammer dem.

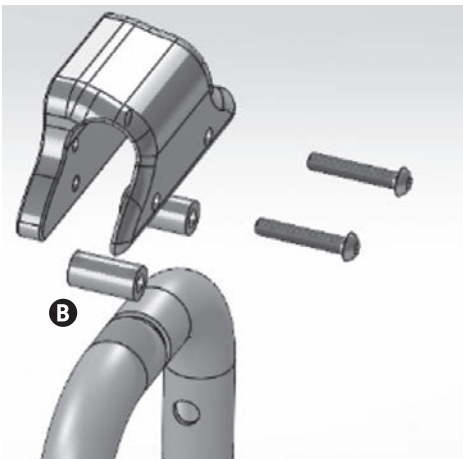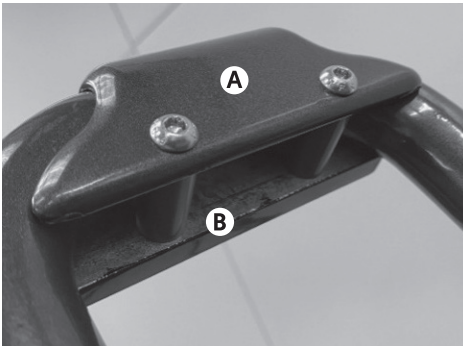

Etter dette fester du hodestøttestag holderen **C** i braketten. Deretter plasserer du pakningen **D** på håndtaket **E**, og skrur det inn i hodestøttestag holderen.

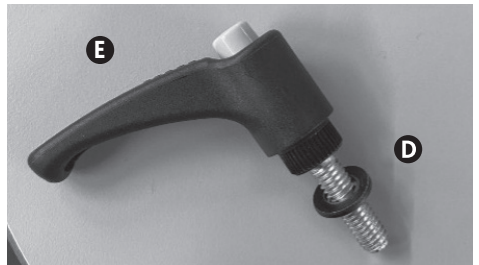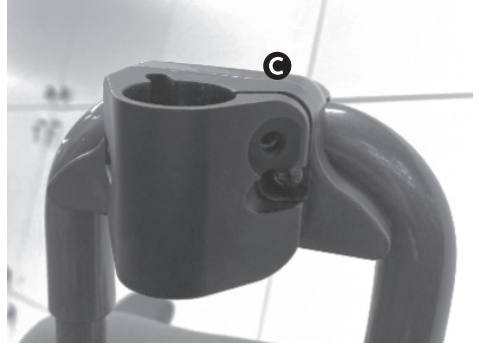

For å demontere den universelle hodestøttebraketten, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 16.25: MONTERE OG DEMONTERE WHITMYER PRO- HODESTØTTE

For å feste Whitmyer PRO-hodestøtten, fjern standardhodestøtten som beskrevet i avsnitt 16.23, og sørg for å fjerne adapterringen


A. Sett Whitmyer PRO-hodestøttestaget inn i mottakerbraketten **B**. Fest den med håndspaken **C**.



For å demontere Whitmyer-hodestøtten, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 16.26: MONTERE OG DEMONTERE WHITMYER AXYS HODESTØTTEMOTTAKER

Fjern først mottakeren bak på den universale braketten **A**.

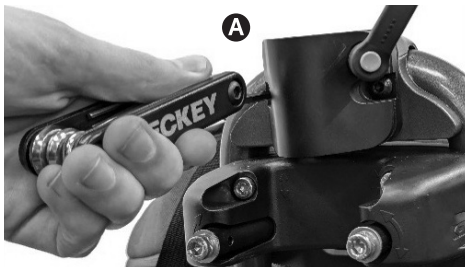


Fest AXYS-mottakeren bak på den universale braketten ved bruk av de to skruene som festet mottakeren til braketten **B**.



For å demontere Whitmyer AXYS-hodestøttemottakeren, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 16.27: MONTERE OG DEMONTERE BORDET

Før bordet monteres, kontroller at fingerskruen **A** foran på hvert armlen er løsnet. For å feste bordet, skyv rørene på bordet inn i åpningen midten på armlenene, og kontroller at rørene på bordet stikker ut på den andre siden på mottakeren. Når bordet står i ønsket stilling, må fingerskruene **A** strammes forsvarlig.

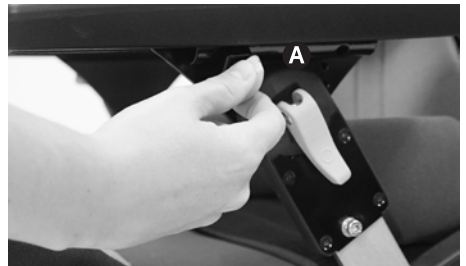

Vær alltid forsiktig for å forhindre at barnets hender eller armer klemmes når bordet monteres.

Bruk aldri bordet til å styre eller skyve stolen.

Ikke plasser gjenstander som er varmere enn 40 °C på bordet.

Bordet skal kun brukes av personen. Ikke len deg på bordet, eller plasser gjenstander som veier mer enn 8 kg på det.



Vær oppmerksom på åpningen under bordet, hvor barnet kan stikke fingrene sine inn mellom metallbraketten og basen på plastbordet.


Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere bordet.

SEKSJON 16.28: MONTERE OG DEMONTERE BRYST-/ SOMMERFUGLESELE

For å feste sommerfuglsekken, finn først kamspennene øverst bak på ryggen **A**, som er synlig gjennom åpningene i putene. Trekk båndet gjennom kamspennen, under glidestangen. Deretter legges båndet over glidestangen, og føres tilbake gjennom spennen på samme side som det ble ført inn **B**.



Stram deretter båndet **C** og lukk lokket **D**. Du finner de nedre festepunktene på baksiden av setebasen **E**. Bruk samme strammeteknikk som for de øvre kamspennene.

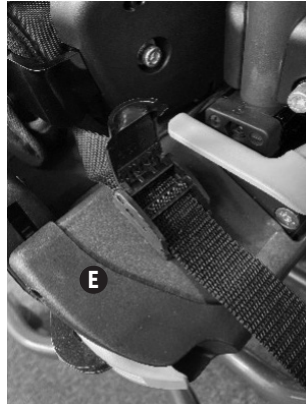


Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere.

SEKSJON 16.29: MONTERE OG DEMONTERE KALESJE


For å montere kalesje, må ryggstengene på kalesjen installeres. For å demontere det eksisterende ryggørret, skru opp boltene på klemmen som justerer rygg høyden, **A**, og hev røret til maks høyde. Trykk inn knappene **B** på siden av røret, og løft ryggørret helt ut av stolen.



Skru opp boltene på skulderputeklemmen, **C**, og skyv den av ryggørret. Skyv skulderputeklemmen på ryggørret for regntrekket, og fest boltene **D**.

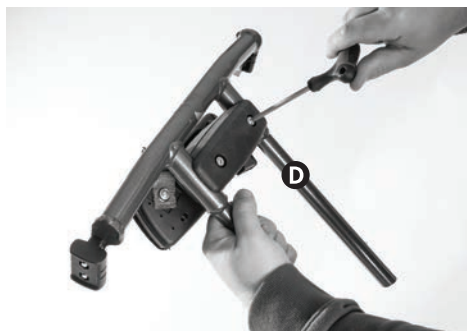

Sett endene på ryggørret inn i mottakerne på klemmen for rygg høyden. Trykk inn knappene **E** på sidene, og skyv ryggørret lenger ned. Stram boltene på høydejusteringsklemmen **F**.

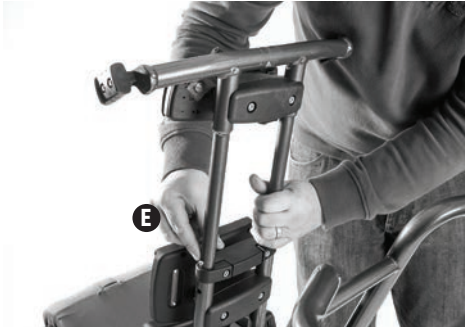

For å feste kalesjen, skyv koblingsstykkene ned og over mottakeren **G**, og vri klipset innover **H** så det klikker på plass.

Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere regntrekket.



Sikkerhetsinformasjon:

BeMe-hodestøtten kan ikke festes til ryggørret for regntrekket.

SEKSJON 16.30: MONTERE OG DEMONTERE POLSTRET TREKK FOR BORD



For å montere det polstrede trekket for bordet, må bordet først fjernes fra setet. Åpne borrelåsremmene, og skyv det polstrede trekket **A** over plastbordet **B**. For å feste, legg borrelåsremmene **C** mot hverandre på undersiden av bordet. Oversiden av bordet skal være helt dekket når trekket er montert **D**.



Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere det polstrede trekket for bordet.

SEKSJON 16.31: MONTERE OG DEMONTERE ALBUEKLOSSER

For å montere albueklossene, må bordet først fjernes fra setet. Fjern de to pakningene og boltene **A**. Plasser braketten for albueklossen **B**, slik at kanten på puten hviler mot overflaten på bordet **C**, før du stiller hullene på linje med hverandre. Fest de to boltene og pakningene på nytt **D** og stram ved bruk av unbrakonøkkeln.

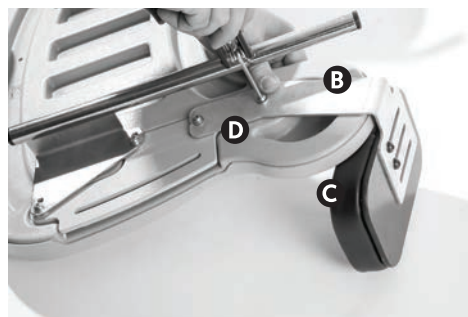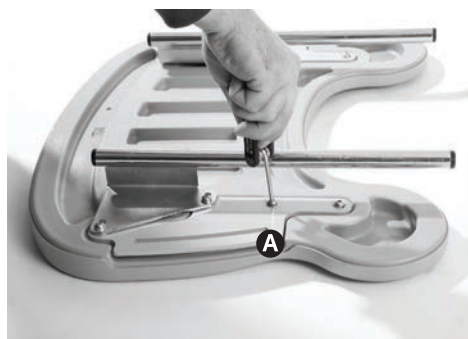

Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere albueklossene.



Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere albueklossen.

Albueklossene kan installeres både på standardbord og polstret bord.




SEKSJON 16.32: MONTERE OG DEMONTERE 4-PUNKTS BELTE

For å feste et 4-punkts belte, før det grå båndet gjennom den øvre åpningen på setet **A** og deretter gjennom kamspenningen. Tre båndet rundt den interne glidestangen, og før det ut gjennom den hengslede enden på spennen **B**. Trekk i båndet for å stramme det, og fest deretter kamspennene ved å lukke dem. Trekk det sorte båndet gjennom kamspenningen på forsiden **C**. Kontroller at polstringen i beltet vender mot barnet.

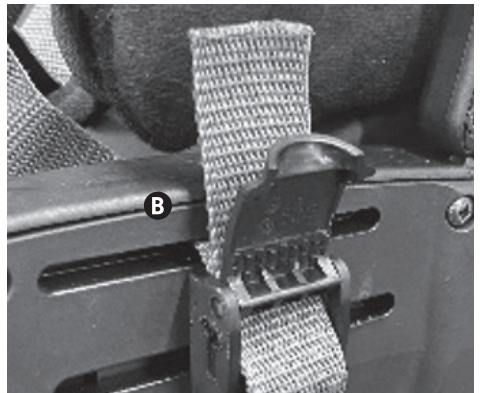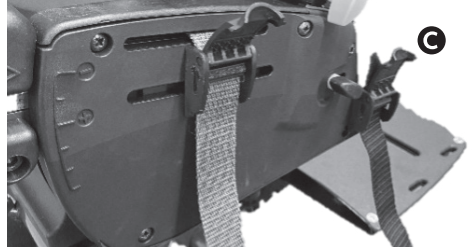

Fest spennen **D** på forsiden, slik at barnet sitter trygt i setet.

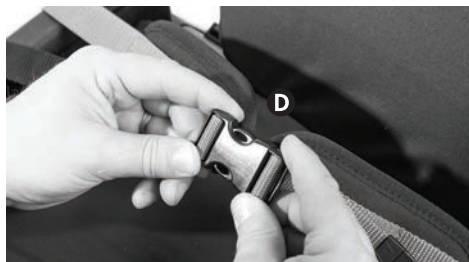

Fest alltid hoftestroppen først, før du foretar noen andre justeringer.

Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere 4-punkts beltet.



Sikkerhetsinformasjon:

Sikkerhetsinformasjon: Når 4-punktsbeltet brukes, anbefales det å legge båndet over siden av setekjernen i stedet for gjennom åpningen, dersom ekstra lengde på båndet er nødvendig.




SEKSJON 16.33: MONTERE OG DEMONTERE BEKKENVUGGE

Bekkenvuggen og festestroppen kan kun brukes med standardsete eller delt sete (ikke kontursete).


For å feste bekkenvuggestroppen må ryggstøtten først demonteres (se avsnittet om å montere og demontere ryggstøtten). Åpne deretter trykknappene foran på seteputen. Åpne bekkenvuggestroppen, slik at festesiden peker oppover **A**. Legg den rette delen på stroppen under seteputen **B**.

Vikle stroppen rundt seteputen, og fest den med borrelåspaden på siden av seteputen. Kontroller at den ovalformede profilen ligger midt på setet **C**, før ryggstøtten settes tilbake og strammes. Plasser stroppen slik at bakenden på stroppen er ca. 25 mm fra sakraldelen på ryggstøtten. Fest trykknappene foran på seteputen.

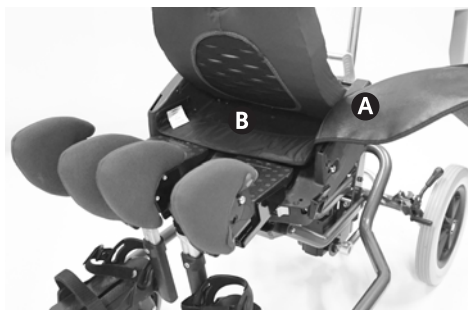



Fest borrelåsen **D** på bekkenvuggen til festestroppen **C**. Kontroller at borrelåsen på bekkenvuggen ikke er i kontakt med setetrekket. Trekk det sorte båndet gjennom kamspennene på hver side foran på setet, **E**, og fest kamspennene. Trekk det grå båndet gjennom kamspennene på hver side bak på setet **F**, og fest kamspennene.

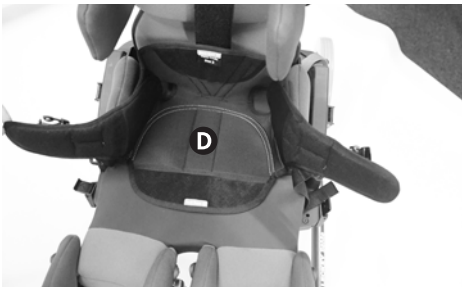

På Moderat- og Complex-rygger, brett stroppen under thorakalputen **G**. Fest spennen **H** på forsiden for å sikre personen. Se avsnittet om justering av bekkenvuggen for tilpassing.



Fest alltid hoftestroppen først, før du foretar noen andre justeringer.



Fest alltid hoftebeltet eller bekkenvuggen først, før andre spenner eller seler festes. Juster selen så barnet ikke kan skli eller falle forover i setet.

Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere bekkenvuggen og festestroppen.

SEKSJON 16.34: OPPGRADERING FRA STATISK TIL DYNAMISK RYGG


BeMe kan oppgraderes fra en statisk rygg **A** til en dynamisk rygg **B** ved bruk av et oppgraderingssett for dynamisk rygg. Oppgraderingssettet må monteres og tilpasses av en teknisk kompetent person. Oppgraderingssettet leveres med monteringsinstruksjoner.




Vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene dine når du setter sammen og monterer den dynamiske ryggen.

SEKSJON 16.35: MONTERE OG DEMONTERE OPPDATERT SKULDERVING (KUN MODERAT RYGG)

For å montere den oppgraderte skuldervingen, må den glatte skulderdelen først fjernes ved å skru opp de tre skruene som holder den på plass **A** ved bruk av unbrakonøkkelen. Fjern den glatte skulderdelen **B**, og erstatt den med den oppgraderte skuldervingen **C**. Sørg for at den er plassert slik at hodet på boltene **D** peker oppover. Fest med de tre skruene **E** ved bruk av unbrakonøkkelen. Ikke stram for mye.


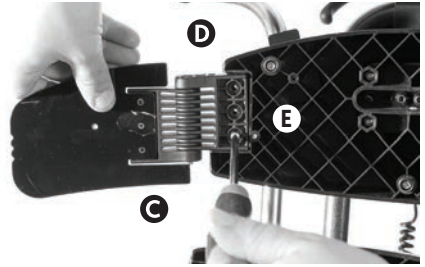


Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere den oppgraderte skuldervingen.


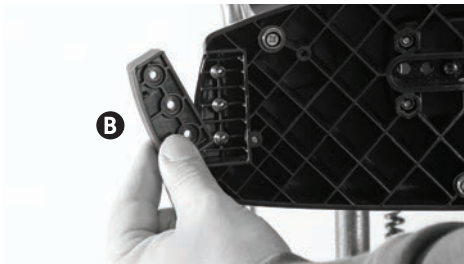


SEKSJON 16.36: MONTERE OG DEMONTERE VINKLET AVSTANDSSTYKKE FOR SKULDER (KUN MODERAT RYGG)

For å montere det vinklede avstandsstykket for skulderen, ta av trekket på skulderstykket, og skru ut de fire skruene for å separerer stykket fra klemmen **A**. Legg avstandsstykket for ryggplaten **B** på overflaten på klemmen **C**.

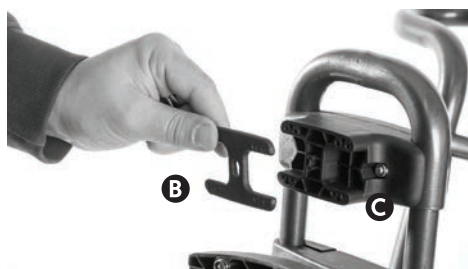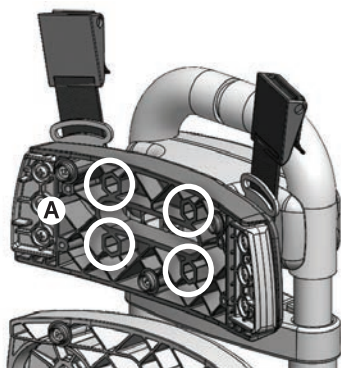


Fest det vinklede avstandsstykket for skulderen ved bruk av de fire lange skruene **D**. Fest skulderdelen på nytt ved å stramme skruene **E** i det vinklede avstandsstykket.

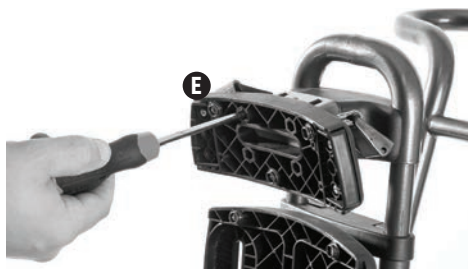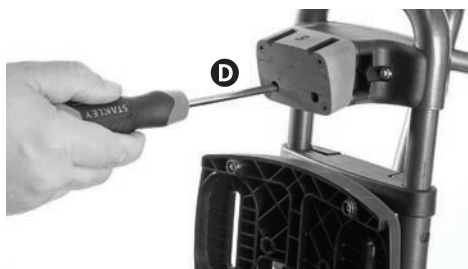

Prosessen må ikke gjøres på nytt ved bruk av de samme festeordningene. Når avstandsstykket fjernes, må det brukes en ny klemme for standardsetet.

SEKSJON 16.37: MONTERE OG DEMONTERE ABDUKSJONSKLOSS

Abduksjonsklossen kan kun festes til basic sete. For å feste abduksjonsklossen, åpne kamlåsen foran på setet **A**, og sett abduksjonsklossbraketten gjennom åpningen i seteputen og inn i mottakersporet på setet **B**. For å låse abduksjonsklossen, skyv kamlåsen **C** kraftig ned. Plasser abduksjonsklossen så den sitter ekstern på seteområdet.

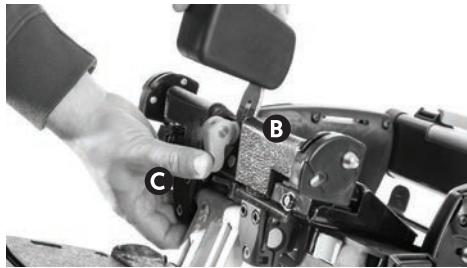

Hvis festemekanismen blir løs over tid, kan den strammes ved å stramme skruen (med urviseren) i kamspaken når den er hevet opp **A**.




Fjern alltid abduksjonsklossen før du setter barnet i setet.

Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere abduksjonsklossen.

SEKSJON 16.38: MONTERE OG DEMONTERE BENLEDERE

For å montere lårstøtten, skyv stammen på støtten **A** inn i mottakeren på setet **B**, og trykk den ned. Kontroller at benledeerne er låst i stilling ved å trekke oppover.


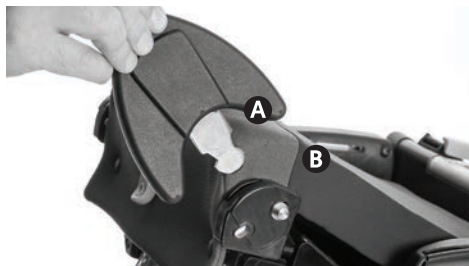


For å demontere benledeerne, skyv utløserknappen diagonalt oppover **C**, og trekk benledeeren ut av sporet.




SEKSJON 16.39: MONTERE OG DEMONTERE RYGGEN

For å montere ryggen, finn ryggmottakeren på baksiden av setebasen **A**. Åpne låseklaffene **B** på mottakeren bak på setebasen ved å trekke **klaffene fra hverandre horisontalt**, og deretter rotere de oppover.

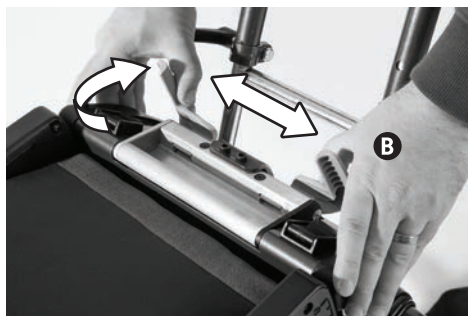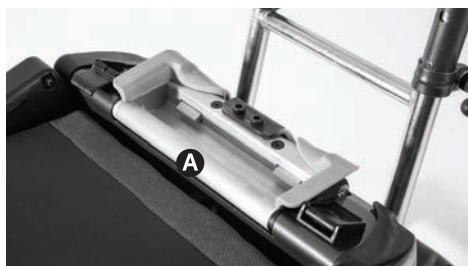

Sett basen på ryggen **C** så langt inn i mottakeren som den går. Vri klaffene nedover **D** og skyv de innover **E** for å feste ryggen på plass.

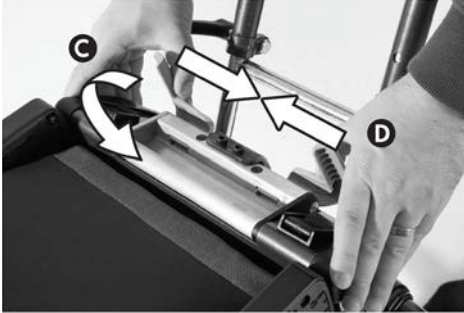

Kontroller at ryggen er forsvarlig festet ved å trekke den oppover, og deretter vippe den forover og bakover.



For å demontere ryggen, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.



Kontroller alltid at setebasen er forsvarlig festet.

SEKSJON 16.40: MONTERE OG DEMONTERE KOMMUNIKASJONSFESTE

For å montere kommunikasjonsfestet, finn hullene i bunnen på setebasen. Sett en av skruene inn i kommunikasjonsfestet (sørg for at håndtakskruene peker oppover), og sett den på linje med det tilsvarende hullet i setebasen **B**. Stram skruen **C** og gjenta denne prosessen for den andre skruen.

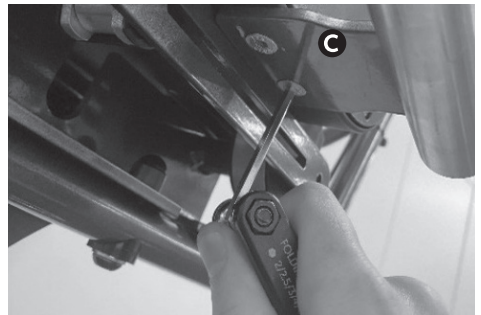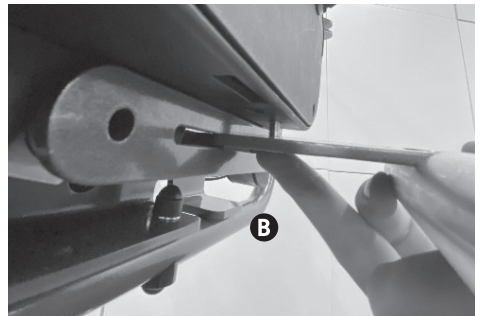

For å demontere kommunikasjonsfestet, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.


SEKSJON 17: FESTE TREKK OG PUTER

Vi anbefaler at putene festes i følgende rekkefølge:

1. **Lårtrekk (valgfritt)**
2. **Setepute**
 - a. Basic setepute
 - b. Split setepute
 - c. Contoured setepute
3. **Ryggpute(r)**
 - a. Basic rygg [skum, deretter trekk]
 - b. Moderate og complex rygg [tre deler: sakral, deretter bryst, så skulder]
4. **Hoftebelte (vugge, 2-punkts eller 4-punkts)**
5. **Hofteputer**
6. **Brystbelte**
7. **Trekk til sidestøtter**
8. **Trekk til hodestøtte**
9. **Fotpute**
10. **Trekk til abduksjonskloss**
11. **Trekk til protraksjonspute**

SEKSJON 17.1: TA TREKKET AV OG PÅ LÅRSTØTTENE



For å sette på trekket, dra trekket over enden på lårstøtten **A**. Fest ved bruk av klipsene **B** på hver side av metallstangen.

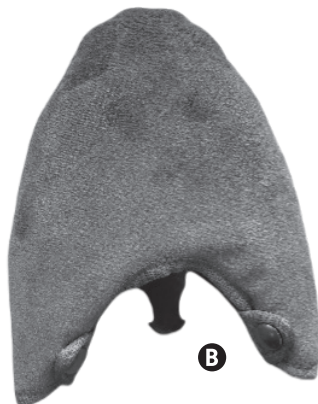


For å ta av trekket på lårstøttene, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 17.2: MONTERE OG DEMONTERE BASIC SETEPUTE

For å feste Basic setepute til ryggen, finn raden med trykknapper **A** på baksiden av setebasen. Skyv trykknappradene mellom seteputen og båndet **B**, og fest ved bruk av trykknappene **C**.

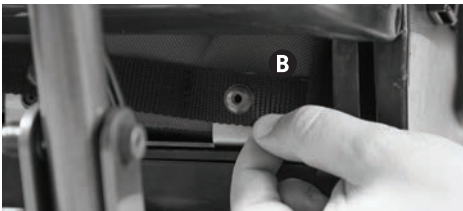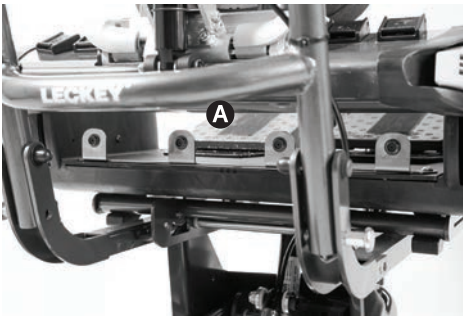

For å feste framsiden på Basic setepute, sett framsiden på puten på linje med framsiden på seterampene, og trykk borrelåsen ned på plass. Finn trykknappene foran på setebasen **D**. La den fremre fliken på seteputen henge ned, og fest ved bruk av trykknappene **E**. Kontroller at det er god tilgang til abduksjonshendelen gjennom åpningen i seteputen **F**.

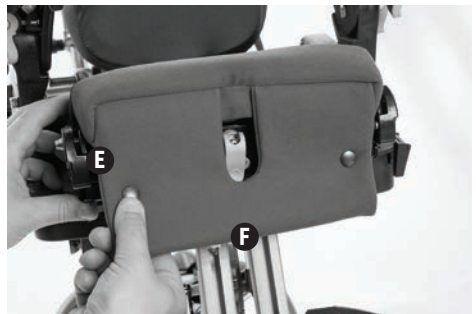




Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere basic setepute.



Kontroller alltid at puten i setebasen er forsvarlig festet før du setter barnet i setet.

SEKSJON 17.3: MONTERE OG DEMONTERE SPLIT SETEPUTE

For å feste Split setepute til ryggen, finn raden med trykknapper **A** på baksiden av setebasen. Skyv trykknappradene mellom seteputen og båndet **B**, og fest ved bruk av trykknappene **C**.

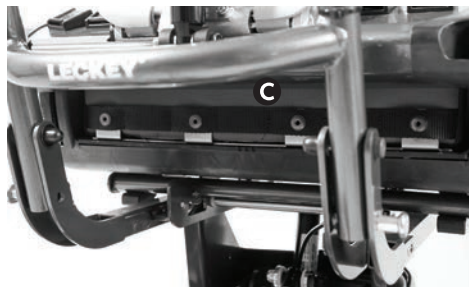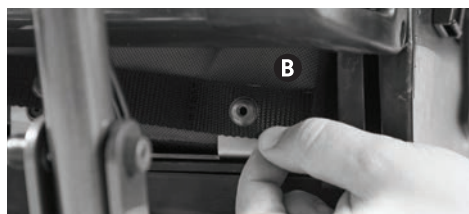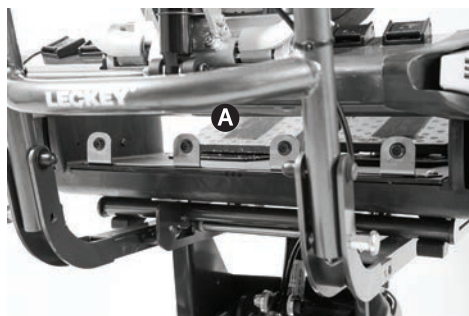

For å feste framsiden på Split setepute, sett framsiden på puten på linje med framsiden på seterampene, og trykk borrelåsen ned på plass. Finn trykknappene foran på setebasen **D**. La den fremre fliken på seteputen henge ned, og fest ved bruk av trykknappene **E**.




Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere Split setepute.



Kontroller alltid at puten i setebasen er forsvarlig festet før du setter barnet i setet.

SEKSJON 17.4: MONTERE OG DEMONTERE CONTOURED SETEPUTE

For å feste den konturformede seteputen, må du først ta skumputen ut av stofftrekket. Sett framsiden på skumputen på linje med den første konturen i setebasen. Trykk deretter borrelåsen ned på plass **A**. Strekk skumputen slik at den bakre kanten på skumputen står på linje med den bakre kanten på setebasen. Trykk deretter borrelåsen ned på plass **B**. Kontroller at sporene i skumputen går fra side til side.

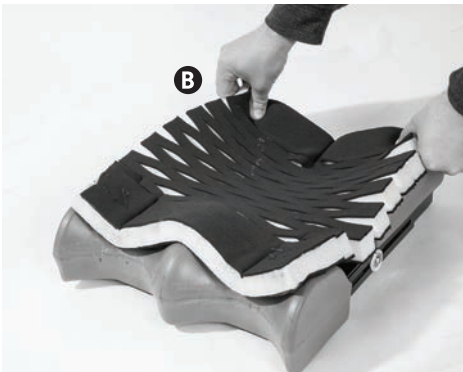

Dra framsiden på setetrekket over fronten på setet **C**, og strekk den bakre delen over baksiden. Trykk deretter borrelåsen ned på plass **D**.



For å demontere den konturformede seteputen, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.




Kontroller alltid at puten i setebasen er forsvarlig festet før du setter barnet i setet.

SEKSJON 17.5: MONTERE OG DEMONTERE SKUMPUTE I BASIC RYGG

For å montere skumputen i Basic rygg, finn hullene øverst og nederst på skumputen **A**. Sett pakningen på skruen **B**, og stikk skruen gjennom hullet i skumputen og de korresponderende hullene i platen **C**.




Bruk en skiftenøkkel til å stramme alle de fire skruene og mutrene **D**, slik at enden på skruen sitter på linje med enden på **E** mutteren.

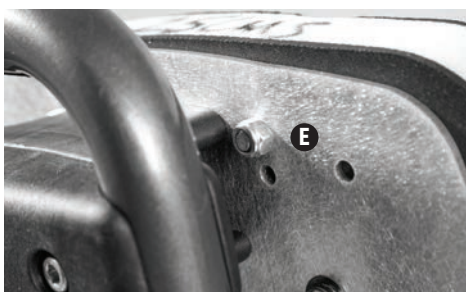

Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere skumputen for Basic rygg.

SEKSJON 17.6: MONTERE OG DEMONTERE BASIC RYGGTREKK

For å sette på Basic ryggtrekk, dra toppen på trekket over toppen på ryggstøtten, **A**, og fest det ved bruk av trykknappene **B**. Det er åpninger **C** på hver side i trekket, for tilkobling av en sele.

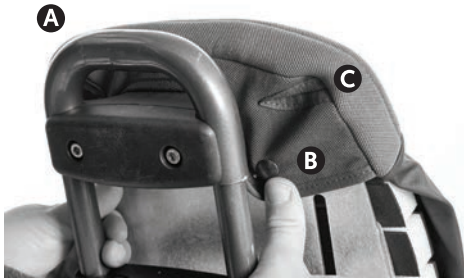


Legg stretchstoffet mellom skumputen og platen **D**, langs begge sider på ryggstøtten. Skyv den nederste delen på trekket under bunnen på ryggen, og fest det ved bruk av trykknappene **E**.



Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å ta av Basic ryggtrekk.

SEKSJON 17.7: MONTERE OG DEMONTERE SAKRALTREKKET



For å feste sakraltrekket, sett trekket på linje med delen, og fest det med trykknappene på sidene **A** og på undersiden av delen **B**.

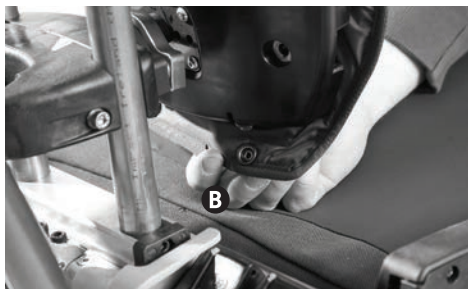

Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å ta av sakraltrekket.

SEKSJON 17.8: MONTERE OG DEMONTERE TREKK FOR BRYSTSTØTTE

For å feste brysttrekket, skyv den øvre delen på trekket inn i åpningen på skuldertrekket **C**, og skyv toppen på sakraltrekket inn i åpningen på undersiden av brysttrekket **B**. Trekk det elastiske trekket over baksiden på plastdelen **C**, og fest trykknappene under plastdelen **D**.

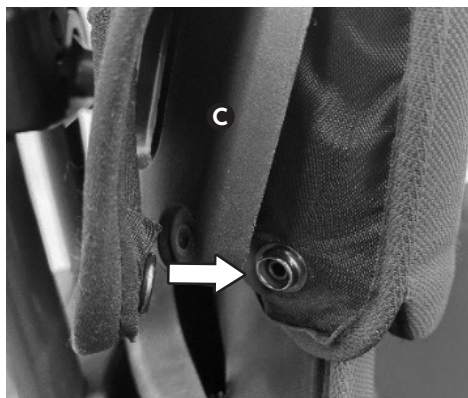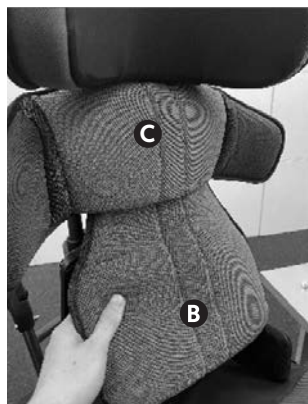


SEKSJON 17.9: MONTERE OG DEMONTERE TREKK PÅ SKULDERDEL

For å sette trekket på skulderdelen, dytt den øvre delen på brysttrekket inn i hulrommet på undersiden av skuldertrekket **A**. Sett skuldertrekket på linje med delen, og dra trekket over begge endene, før du fester det med glidelåsene **B**. Sørg for at utskjæringene på baksiden av skuldertrekket står på linje med selekoblingene, eller la selekoblingene gå igjennom **C**.



Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å ta av skuldertrekket.

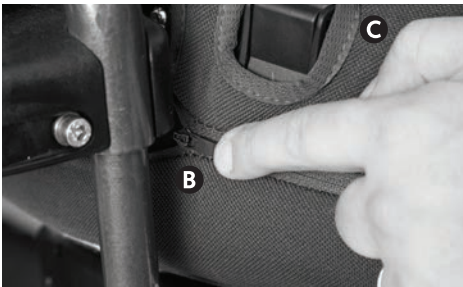


SEKSJON 17.10: MONTERE OG DEMONTERE BEKKENVUGGE


Bekkenvuggen og festestroppen kan kun brukes med standardsete eller delt sete [ikke kontursete].

For å feste bekkenvuggestroppen må ryggstøtten først demonteres (se avsnittet om å montere og demontere ryggstøtten). Åpne deretter trykknappene foran på seteputen. Åpne bekkenvuggestroppen, slik at festesiden peker oppover **A**. Legg den rette delen på stroppen under seteputen **B**.

Vikle stroppen rundt seteputen, og fest den med borrelåspaden på siden av seteputen. Kontroller at den ovalformede profilen ligger midt på setet **C**, før ryggstøtten settes tilbake og strammes. Plasser stroppen slik at bakenden på stroppen er ca. 25 mm fra sakraldelen på ryggstøtten. Fest trykknappene foran på seteputen.

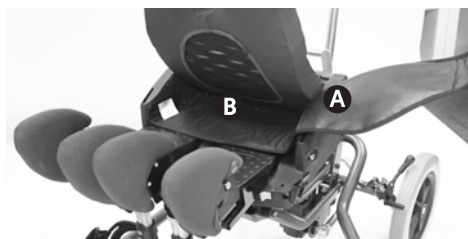

Fest borrelåsen **D** på bekkenvuggen til festestroppen **C**. Kontroller at borrelåsen på bekkenvuggen ikke er i kontakt med setetrekket. Trekk det sorte båndet gjennom kamspennene på hver side foran på setet, **E**, og fest kamspennene. Trekk det grå båndet gjennom kamspennene på hver side bak på setet **F**, og fest kamspennene.

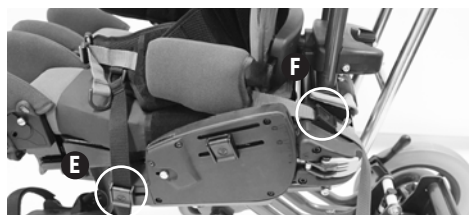

På Moderat- og Complex-rygger, brett stroppen under thorakalputen **G**. Fest spennen **H** på forsiden for å sikre personen. Se avsnittet om justering av bekkenvuggen for tilpassing.





Fest alltid hoftestroppen først, før du foretar noen andre justeringer.



Fest alltid hoftebeltet eller bekkenvuggen først, før andre spenner eller seler festes. Juster selen så barnet ikke kan skli eller falle forover i setet.

Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere bekkenvuggen og festestroppen.

SEKSJON 17.11: MONTERE OG DEMONTERE TREKK PÅ HOFTEPUTER

For å feste trekket på hoftestøttene, åpne borrelåsen og trekk trekket over støtten, med borrelåsen pekende ut. Fest ved bruk av borrelåsen. Merkelappen på innsiden viser hva som er høyre og venstre side.





Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å ta av trekket på hofteputen.

SEKSJON 17.12: MONTERE OG DEMONTERE BRYST-/ SOMMERFUGLESELE

For å feste sommerfuglselen, finn først kamspennene øverst bak på ryggen **A**, som er synlig gjennom åpningene i putene. Trekk båndet gjennom kamspennen, under glidestangen. Deretter legges båndet over glidestangen, og føres tilbake gjennom spennen på samme side som det ble ført inn **B**, før det strammes på plass ved å klemmes ned **C**.




Du finner de nedre festepunktene på baksiden av setebasen. Trekk båndet gjennom kamspennen, og gjenta trinn **B** og **C**. Vist i **D** og **E**.

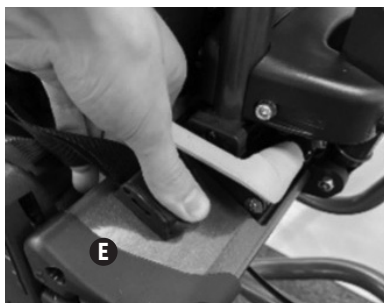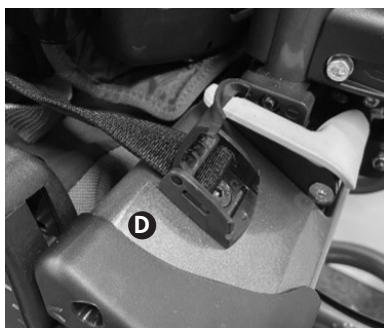

Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere.

SEKSJON 17.13: MONTERE OG DEMONTERE TREKK PÅ SIDESTØTTER - SMAL

For å montere trekk på sidestøtter, åpne borrelåsen og skyv trekket over plastputen **A** med borrelåsen pekende ned. Fest ved bruk av borrelåsen **B**.

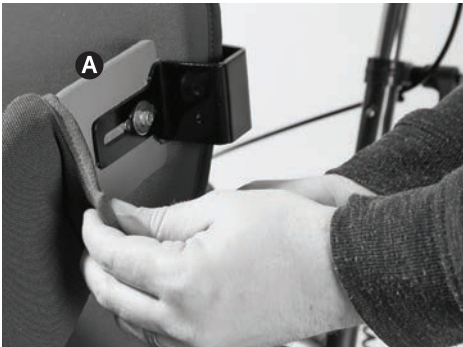

For å demontere det smale trekket, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 17.14: MONTERE OG DEMONTERE TREKK PÅ SIDESTØTTER - HENGSLET FESTE

For å ta på trekk på sidestøtter, åpne borrelåsen og dra trekket over plastdelen, **A**, mens borrelåsen peker ned og maljen peker opp. Fest ved bruk av borrelåsen **B**.



For å ta av trekket på den hengslede sidestøtten, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 17.15: MONTERE OG DEMONTERE TREKK PÅ SIDESTØTTER - FLEKSIBELT OMSLAG



For å ta på de fleksible trekkene, åpne borrelåsen og skyv trekket over plastputen **A**, med borrelåsen pekende ned og overflaten med det sorte båndet pekende ut. Fest ved bruk av borrelåsen **B**.



For å ta av det smale trekket, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 17.16: MONTERE OG DEMONTERE TREKK PÅ HODESTØTTE

For montere trekket på hodestøtten, sett trekket på linje med forsiden på hodestøtten og dra trekket over begge endene **A**, før du fester trekket med glidelåsene **B**. Sørg for å tilpasse trekket, slik at glidelåsen er så nærme den nedre kanten som mulig.

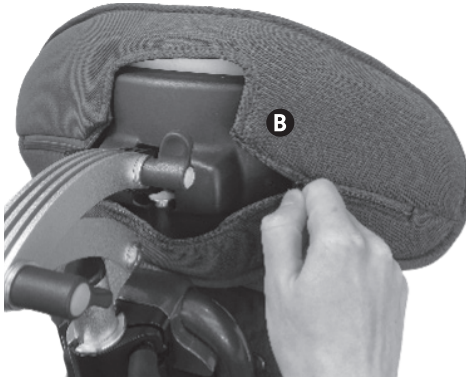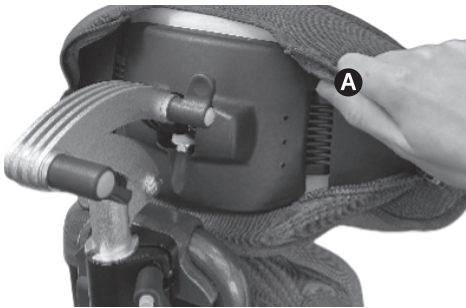

For å ta av trekket på hodestøtten, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 17.17: MONTERE OG DEMONTERE TREKK PÅ BENSTØTTE

For å montere trekket på benstøtten, må du først fjerne eventuelle festeordninger eller stropper som er festet til benstøtten. Legg trekket øverst på overflaten av benstøtten **A**. Legg trekket over overflaten på benstøtten, slik at de opphøyde sidene på trekket står på linje med baksiden og sidene på benstøtten. Fest på undersiden ved bruk av borrelåsene **B**.



For å ta av trekket på benstøtten, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.

SEKSJON 17.18: MONTERE OG DEMONTERE TREKKET PÅ ABDUKSJONSKLOSSEN


For å montere trekket på abduksjonsklossen, åpne borrelåsen og dra trekket **A** over plastputen **B**, mens borrelåsen peker ned og puten ligger slik at den matcher konturene på puten. Fest ved bruk av borrelåsen **C**.



Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å ta av trekket på abduksjonsklossen.

SEKSJON 17.19: MONTERE OG DEMONTERE TREKK PÅ PROTRAKSJONSPUTE


For å montere trekket på protraksjonsputen, åpne borrelåsen og dra trekket **A** over platen **B**, mens borrelåsen peker opp og puten er plassert slik at den grå stoffsiden peker forover i setet. Fest ved bruk av borrelåsen, og sett forlengelsesstykket inn i sidetrekket **C**.

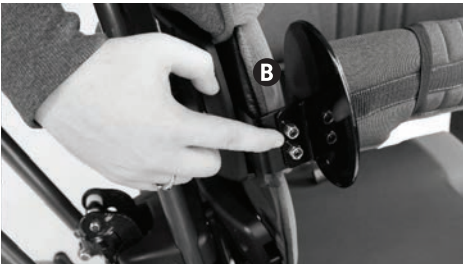


Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å ta av trekket på protraksjonsputen.

SEKSJON 17.20: MONTERE OG DEMONTERE TREKK PÅ SIDEBRAKETT

For å montere trekket på sidebraketten, åpne borrelåsen og dra trekket **A** over plastputen **B**, mens borrelåsen peker ned og puten ligger slik at forlengelsestappen **C** peker mot sideputen og utover. Fest ved bruk av borrelåsen **D**, og sett forlengelsestappen inn i sidetrekket **E**.

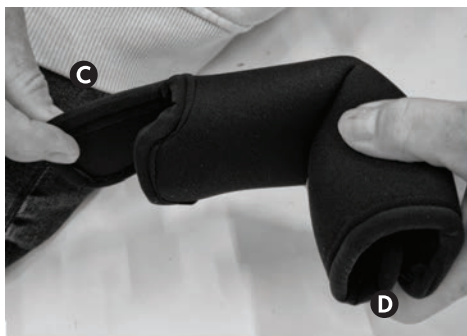

For å ta av trekket på sidebraketten, gjør du disse trinnene i motsatt rekkefølge.


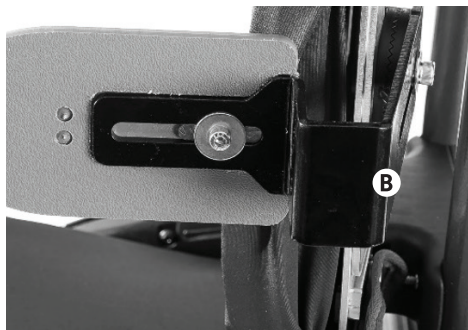


SEKSJON 18: KLINISK OPPSETT FOR POSTURAL KONTROLL

Det kliniske oppsettet av produktet skal utføres av en teknisk og klinisk kompetent person som har mottatt opplæring i å bruke produktet. Leckey anbefaler å skrive en liste over alle kliniske oppsett for dette produktet. Still inn rygg høyden, setedybden og høyden på fotplaten før du plasserer barnet i setet. Disse innstillingene kan finjusteres når barnet sitter i setet.



SEKSJON 18.1: JUSTERE SETEDYBE PÅ BASIC SETET

For å justere dybden på Basic setet, skru opp høyre og venstre bolt **A** på undersiden av setebasen, og flytt setet forover eller bakover til ønsket stilling. Stram begge boltene for å låse setet i stillingen.

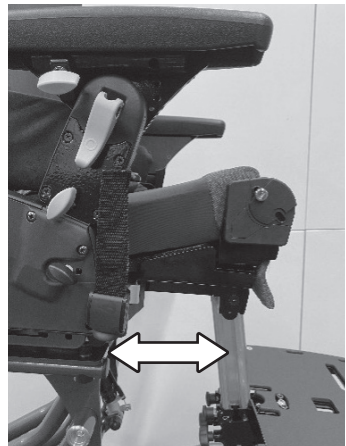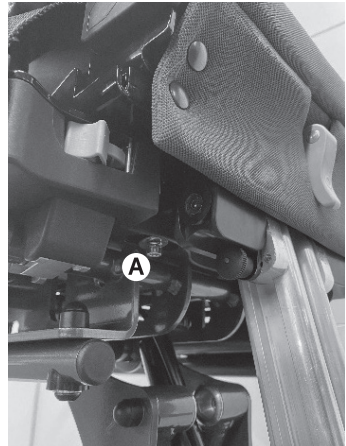

SEKSJON 18.2: JUSTERE SETEDYBDE OG BENVINKEL (INNOVERFØRING OG UTOVERFØRING) PÅ SPLIT SETE

For å juster setedybden og benvinkelen på Split sete, skru opp høyre og venstre bolt **A** på undersiden av setebasen, og flytt hver benkomponent separat til ønsket stilling. Benkomponentene på setet kan flyttes forover og bakover, samt til 15 graders innoverføring (abduksjon) eller 15 graders utoverføring (adduksjon). Stram begge boltene for å låse setet i stillingen.

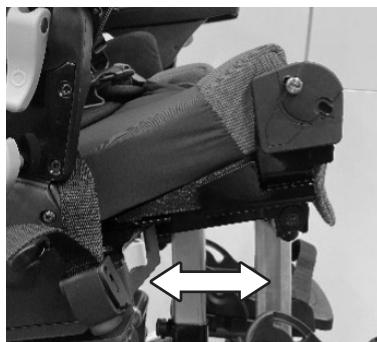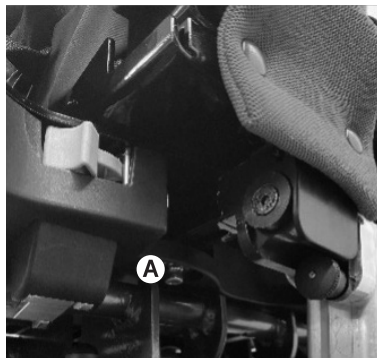


SEKSJON 18.3: JUSTERE SETEDYBE PÅ CONTOURED SETE

For å justere dybden på det konturformede setet, må du først fjerne den konturformede puten **A** fra setebasen, og deretter ta av trekkene og skumputen. Løsne boltene **B** på begge sider av platen, og skyv setet forover eller bakover til ønsket stilling. Stram boltene for å låse stillingen.



For å oppnå maksimal justering av setedybden, skal den fremre delen peke den veien som er vist ovenfor. For å oppnå den minimale justeringen av setedybden, fjern boltene **B** på begge sider av setet, før du roterer den fremre delen slik at den korte enden peker opp **C**. Sett den fremre delen tilbake på plass, slik at skinnen **D** og sporet **E** er satt sammen på begge sider. Sett tilbake boltene med pakningene på hver side av setet, juster til ønsket stilling, og stram boltene for å feste setet.

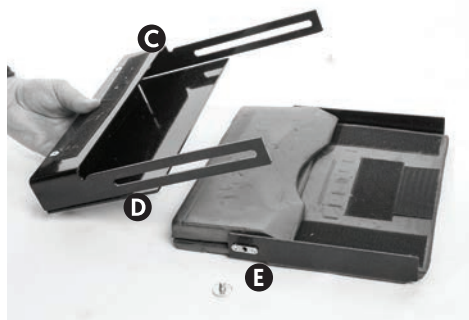


Du kan også justere dybden på baseplaten for å forhindre at seteplaten på det konturformede setet henger over kanten. For å juster dybden på seteplaten, skru opp høyre og venstre bolt på undersiden av setebasen, og flytt platen forover eller bakover til ønsket stilling. Stram begge boltene for å låse platen i stillingen [se illustrasjon i 18.1 eller 18.2].

Sett tilbake den fremre skumdelen **F**, slik at den hviler mot den innvendige overflaten foran på platen. Sett den konturformede skumdelen **G** på plass, ved å stille skumdelen på linje med forsiden på platen.



SEKSJON 18.4: JUSTERE HOFTEBREDDE PÅ CONTOURED SETE

For å justere hoftebredden på det konturformede setet, **A** kan høyre og venstre hoftepute flyttes **C** til en annen stilling langs borrelåsen hvor de korte, stiplede linjene **B** kan brukes for å oppnå riktig plassering og justering. Still den bakre kanten på putene på linje med den bakre kanten på platen.

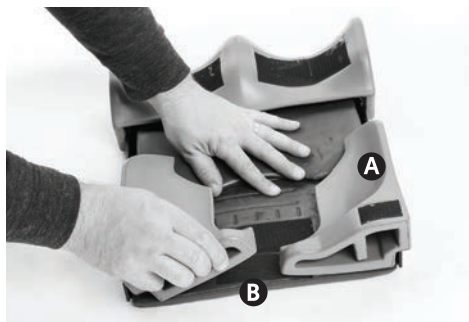

SEKSJON 18.5: JUSTERE BREDDE PÅ HOFTEPUTER PÅ BASIC SETE OG SPLIT SETE (BASIC RYGG)

For å justere bredden på hofteputen på basic rygg, åpne klipsfestene på ryggputen for å få tilgang til justeringsbolten **A**. Løsne bolten og juster innover eller utover til ønsket stilling. Stram bolten for å låse stillingen.



SEKSJON 18.6: JUSTERE BREDDEN PÅ HOFTEPUTE PÅ BASIC SETE (MODERATE OG COMPLEX RYGG)

For å justere bredden på hofteputen på Moderate og Complex ryggstøtte, finn justeringsbolten **A** bak på delen. Løsne bolten og juster innover eller utover til ønsket stilling. Stram bolten for å låse stillingen.




SEKSJON 18.7: JUSTERE HØYDE OG VINKEL PÅ HOFTEPUTE

For å justere vinkelen på hoftestøtten, fjern den midtre bolten **A** og sett puten i ønsket vinkel. Stram bolten for å låse stillingen.




For å justere høyden på hoftestøtten, bytt om den venstre hoftestøtten **B** og den høyre hoftestøtten **C**.

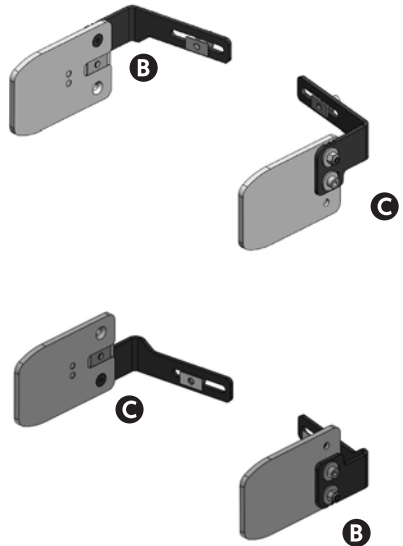

SEKSJON 18.8: JUSTERE HØYDE PÅ RYGGSTØTTE

For å justere høyden på ryggstøtten, skru opp boltene på høydejusteringsklemmen **A** på ryggstøtten, og hev eller senk teleskoprørene for ryggstøtten til ønsket høyde. For å senke ryggstøtten ned fra den høyeste stillingen, trykk inn knappen **B** på siden av røret, og skyv det nedover. Stram boltene på høydejusteringsklemmen **A** for å låse røret på plass.

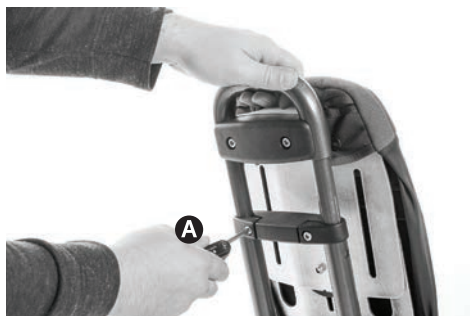


SEKSJON 18.9: JUSTERE HØYDE PÅ INDIVIDUELLE PUTER PÅ MODERATE OG COMPLEX RYGGSTØTTER

Putene i Moderate og Complex ryggstøtter har to forskjellige klemmer; standardklemme eller kompleks klemme.

For å justere høyden på standardklemmen, skru opp boltene **A** og skyv klemmen opp eller ned langs ryggroret til ønsket stilling. Stram boltene for å låse klemmen i stillingen.





For å justere høyden på den komplekse klemmen, skru opp boltene **B** og skyv klemmen opp eller ned langs ryggroret til ønsket stilling. Stram boltene for å låse klemmen i stillingen.

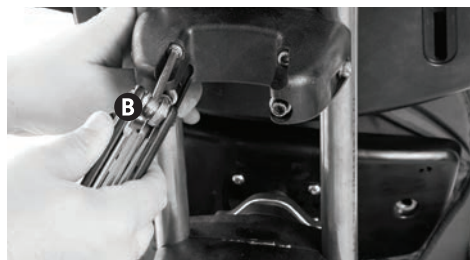

SEKSJON 18.10: JUSTERE DYBDE PÅ SAKRAL DEL (KUN MODERATE OG COMPLEX RYGG)

De komplekse klemmene er montert på sakraldelen, brystdelen og skulderdelen på Complex ryggstøtte, samt på sakraldelen på den moderate ryggstøtten.

For å justere dybden på den komplekse klemmen, skru opp boltene **A** på begge sider av klemmen. Juster dybden ved å flytte ryggdelen forover eller bakover til ønsket stilling **B**. Stram boltene for å låse klemmen i stillingen.

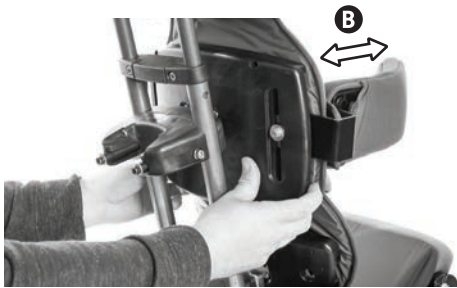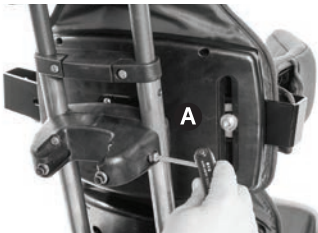


Det kan være nødvendig å løsne vinkeljusteringsboltene for å utføre dybdejusteringer, slik vist i 18.11. Sørg for at begge sett med bolter er strammet for å låse vinkelen i stilling etter justeringen.

SEKSJON 18.11: JUSTERE VINKEL PÅ SAKRAL DEL (KUN MODERATE OG COMPLEX RYGG)

De komplekse klemmene er montert på sakraldelen, brystdelen og skulderdelen på Complex ryggstøtte, samt på sakraldelen på den moderate ryggstøtten.


For å justere vinkelen på den komplekse klemmen, skru opp boltene **A** på klemmen. Juster vinkelen ved å rotere ryggdelen i alle aksene til ønsket stilling. Stram boltene for å låse klemmen i stillingen.

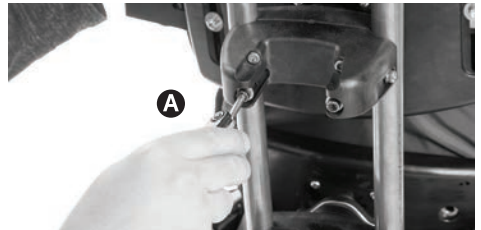

SEKSJON 18.12: JUSTERE DYBDE PÅ MIDTRE RYGGDEL (KUN COMPLEX RYGG)

De komplekse klemmene er montert på sakraldelen, brystdelen og skulderdelen på Complex ryggstøtte, samt på sakraldelen på den moderate ryggstøtten.

For å justere dybden på den komplekse klemmen, skru opp bolten **A** på begge sider av klemmen. Juster dybden ved å flytte ryggdelen forover eller bakover til ønsket stilling **B**. Stram boltene for å låse klemmen i stillingen.

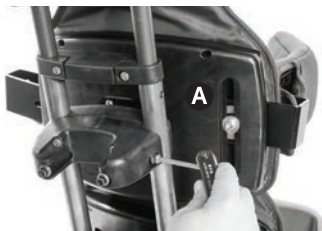


Det kan være nødvendig å løsne vinkeljusteringsboltene for å utføre dybdejusteringer, slik vist i 18.11. Sørg for at begge sett med bolter er strammet for å låse vinkelen i stilling etter justeringen.

SEKSJON 18.13: JUSTERE DYBDE PÅ MIDTRE RYGGDEL (KUN COMPLEX RYGG)

De komplekse klemmene er montert på sakraldelen, brystdelen og skulderdelen på Complex ryggstøtte, samt på sakraldelen på den moderate ryggstøtten.


For å justere vinkelen på den komplekse klemmen, skru opp bolten **A** på klemmen. Juster vinkelen ved å rotere ryggdelen i alle aksene til ønsket stilling. Stram boltene for å låse klemmen i stillingen.

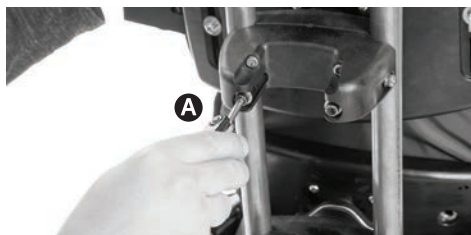

SEKSJON 18.14: JUSTERE DYBDE PÅ SKULDERDEL (KUN COMPLEX RYGG)

De komplekse klemmene er montert på sakraldelen, brystdelen og skulderdelen på Complex ryggstøtte, samt på sakraldelen på den moderate ryggstøtten.

For å justere dybden på den komplekse klemmen, skru opp bolten **A** på begge sider av klemmen. Juster dybden ved å flytte ryggdelen forover eller bakover til ønsket stilling **B**. Stram boltene for å låse klemmen i stillingen.

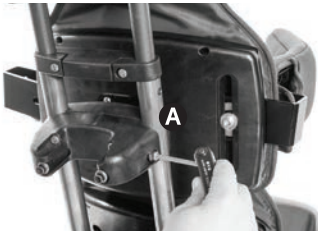


Det kan være nødvendig å løsne vinkeljusteringsboltene for å utføre dybdejusteringer, slik vist i 18.11. Sørg for at begge sett med bolter er strammet for å låse vinkelen i stilling etter justeringen.

SEKSJON 18.15: JUSTERE VINKEL PÅ SKULDERDEL (KUN COMPLEX RYGG)

De komplekse klemmene er montert på sakraldelen, brystdelen og skulderdelen på Complex ryggstøtte, samt på sakraldelen på den moderate ryggstøtten.

For å justere vinkelen på den komplekse klemmen, skru opp bolten **A** på klemmen. Juster vinkelen ved å rotere ryggdelen i alle aksene til ønsket stilling. Stram boltene for å låse klemmen i stillingen.

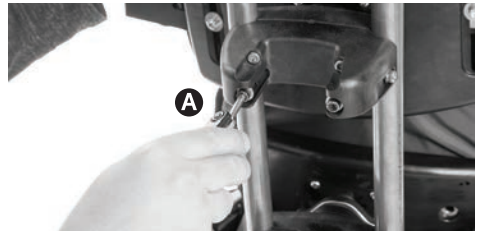

SEKSJON 18.16: JUSTERE VINKEL PÅ SKULDervingER (KUN MODERATE OG COMPLEX RYGG)


For å justere vinkelen på skuldervingene, åpne trekket på begge sider for å få tilgang til justeringsbolten ovenifra. Skru opp bolten **A** og flytt skuldervingen til ønsket stilling. Stram bolten for å låse stillingen, og lukk deretter trekket.



SEKSJON 18.17: JUSTERE HØYDE PÅ BENSTØTTE


For å justere benstøttens høyde, løsne håndtaket **C** og trekk ut tommelpinnen **B**. Sett benstøtten i ønsket høyde. Slipp tommelpinnen og sørg for at den har gått inn i et hull, før du strammer håndtaket.

For delte benstøtter, kan høyden justeres separat for hver benstøtte. For hel benstøtte, må håndtakene løsnes samtidig som pinnen trekkes ut for at justeringen skal kunne utføres.

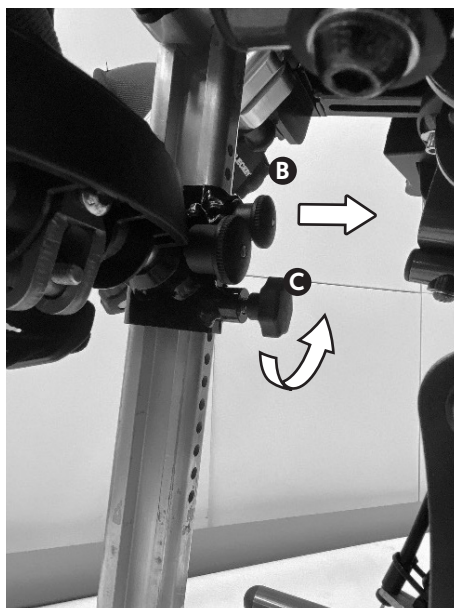

SEKSJON 18.18: JUSTERE VINKEL PÅ FOTSTANG(KNEVINKEL)

For å justere vinkelen på benstangen, skru opp tommelpinnen **C** og roter benstangen til ønsket stilling. Slipp deretter opp, og pinnen vil gli inn i ett av hullene i utspringet på benstangen **B**. For delte benstøtter, kan vinkelen justeres separat for hver benstøtte. For hel benstøtte kan pinnene roteres 30° for å låses ute, slik at høyden kan justeres uten at begge pinnene må holdes ute samtidig. Trekk ut pinnen og roter den 30° for å låse. Gjenta på den andre siden, juster fotplaten på nytt, og roter pinnene tilbake for å låse.

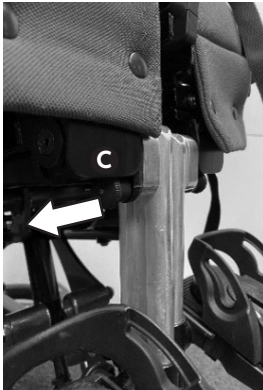


SEKSJON 18.19: JUSTERE VINKEL PÅ BENSTØTTE (DORSALFLEKSJON OG PLANTARFLEKSJON)

Hvis du må justere vinkelen på benstøtten for å gi plass til dorsalfleksjon og plantarfleksjon på den delte benstøtten, kan du løsne eller stramme håndknotten **A** under fotplaten til du oppnår ønsket vinkel på benstøtten.




Hvis du må justere vinkelen på benstøtten for å gi plass til dorsalfleksjon og plantarfleksjon på den hele benstøtten, kan du løsne eller stramme den midtre boltene **B** på toppen av fotplaten til du oppnår ønsket vinkel på benstøtten.

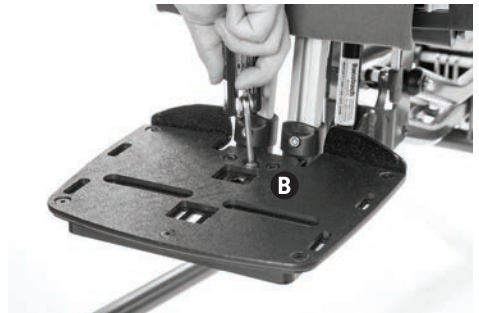


SEKSJON 18.20: JUSTERE SANDALER

For å plasseres barnets føtter i sandalene, fest de medfølgende borrelåsreimene så føttene holdes på plass. Reimene skal plasseres over vristen **A** og tærne **B**. Den fremre reimen kan mates gjennom et av to spor på begge sider av sandalene, avhengig av størrelsen på barnets føtter.

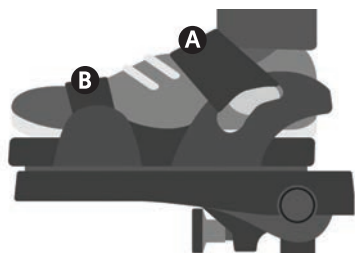

Hvis barnet har på seg sandaler eller lett fottøy, kontroller at reimene ikke irriterer huden.

For å justere plasseringen av sandalen på fotplaten, skru opp knotten **C** og flytt sandalen til ønsket stilling. Stram knotten for å låse sandalen i stilling.

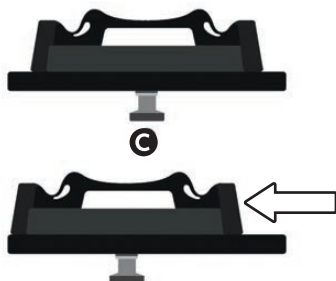


SEKSJON 18.21: JUSTERE ANKELSKINNER

For å justere ankelskinnen, tilpass borrelåsreimen rundt ankelen **A**, samt lengden på reimen gjennom spennen **B**.




SEKSJON 18.22: JUSTERE ANKELREIMER

For å justere ankelreimen, tilpass borrelåsreimene rundt vristen på foten **A** og rundt ankelen **B**.

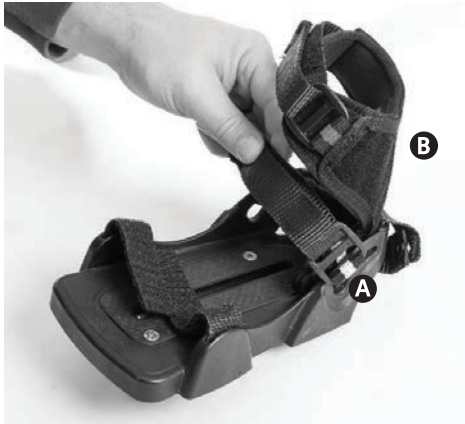

SEKSJON 18.23: JUSTERE STØVLER

For å justere støvlene, tilpass borrelåsreimene rundt vristen på foten, **A**, borrelåsreimen rundt ankelen **B**, samt lengden på reimen gjennom spennen **C**.

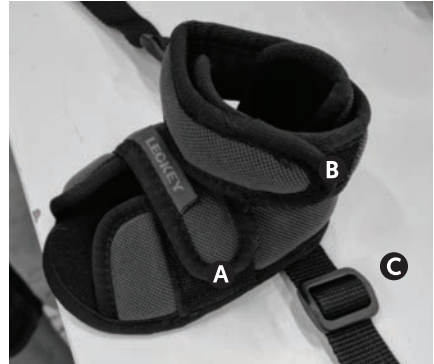


SEKSJON 18.24: JUSTERE SIDESTØTTER (BREDDDE, HØYDE OG VINKEL)

For å justere sidestøttenes høyde, bredde og vinkel, løsne bolten bak på Basic ryggen **A**, på den moderate ryggen, eller på Complex ryggen **B**. Åpne trykknappen [kun Moderate- og Complex-modellene], juster høyden, bredden og vinkelen til ønsket stilling, og stram for å låse på plass.




SEKSJON 18.25: JUSTERE SIDESTØTTER (DYBDE)

For å justere dybden på sidestøttene, åpne borrelåsen på trekket for å få tilgang til justeringsbolten **A**. Løsne bolten og juster forover eller bakover til ønsket stilling. Stram bolten for å låse stillingen. Sett tilbake trekket med borrelåsen.

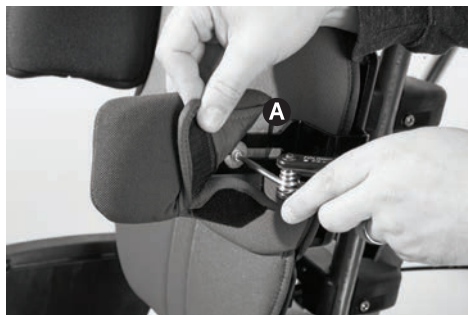


SEKSJON 18.26: JUSTERE FLEKSIBEL SIDESTØTTE MED OMSLAG


Festeanordningene for de fleksible sidestøttene justeres på samme måte som vanlige sidestøtter. For å justere stramheten på de fleksible sidestøttene, tilpasser du lengden på båndet på den fremre sidestøttereimen **A**.

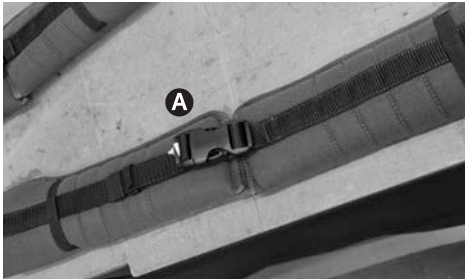

SEKSJON 18.27: JUSTERE HØYDE PÅ ARMLEN


Høyden på armlenet kan justeres i flere gradvise trinn. For å justere høyden på armlenet, løsne tommelskruen **A** som ligger på siden av midtlinjen på platen. Skyv tommelskruen over til den andre siden av midtlinjen, **B** slik at høyden på armlenet kan justeres opp eller ned. For å feste, skyv tommelskruen tilbake til den opprinnelige sideposisjonen **C**, plasser den i en av de tilgjengelige trinnvise høydeinnstillingene, og stram tommelskruen for å låse den på plass.

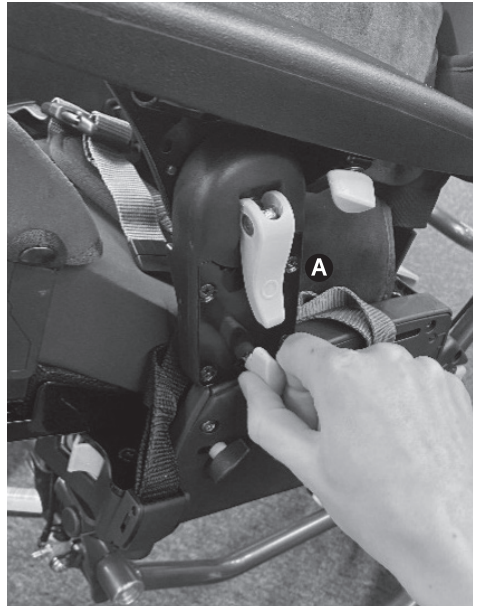

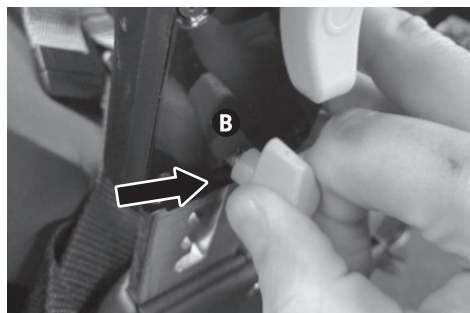



SEKSJON 18.28: JUSTERE VINKEL PÅ ARMLEN

For å justere vinkelen på armlenet, finn først kamspaken **A** midt på armlenet. Hev kamspaken for å låse opp og sette armlenet **B** i ønsket vinkel. Fest ved å senke kamspaken til låst stilling **C**.

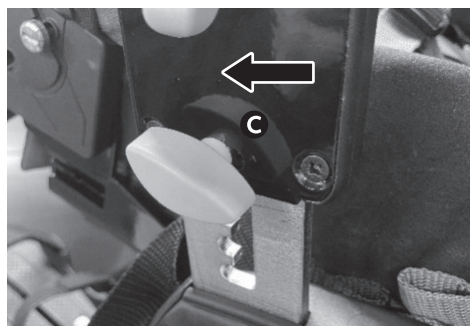


SEKSJON 18.29: JUSTERE DYBDE PÅ ARMLEN

For å justere dybden på armlenet, fjern boltene **B** for å fjerne PU-puten **B** fra platen **C**. Sett tilbake puten i en av de tre stillingene, og sett tilbake boltene. Stram boltene for å låse stillingen.

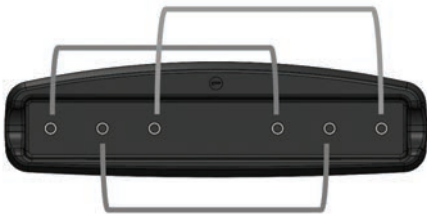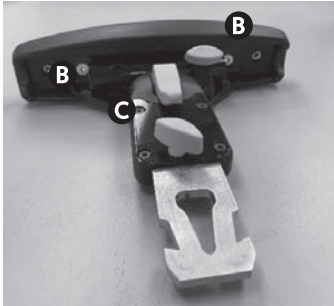

SEKSJON 18.30: JUSTERE SOMMERFUGLSELEN

For å justere sommerfuglselelen, kan du enten endre hvor mye av båndet som trekkes gjennom kamspennene bak på setebasen **B** eller øverst på ryggstøtten **B**, eller du kan justere lengden på båndet i selestroppene i hvert av de fire hjørnene på selet **C**.

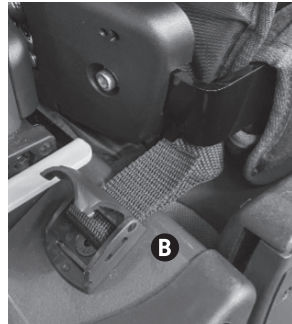


SEKSJON 18.31: JUSTERE HODESTØTTE

For å justere hodestøtten, løsne tommeleskruene **A**, **B**, **C** og **D**. Sett hodestøtten i ønsket høyde, dybde og vinkel. Stram tommeleskruene **A**, **B**, **C** og **D** for å låse hodestøtten på plass.




SEKSJON 18.32: JUSTERE VINKEL PÅ SIDESTØTTE I HODESTØTTE

For å justere vinkelen på sidestøttene i hodestøtten, åpne trekket på begge sider for å få tilgang til justeringsbolten ovenifra. Skru opp bolten **A** og flytt sidestøttene i hodestøtten til ønsket stilling. Stram bolten for å låse stillingen, og lukk deretter trekket.

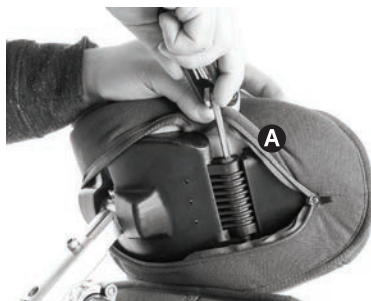

SEKSJON 18.33: JUSTERE VINKEL PÅ BORD

For å justere vinkelen på armlenet, finn først kamspaken **A** midt på armlenet. Hev kamspaken for å låse opp og sette armlenet/bordet **B** i ønsket stilling. Fest ved å senke kamspaken til låst stilling **C**.

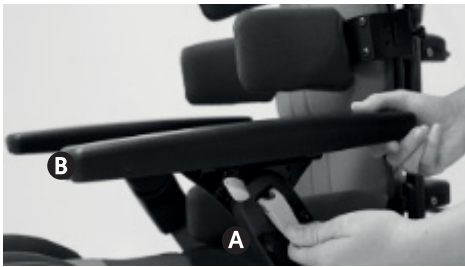

Vær alltid forsiktig for å forhindre at barnets hender eller armer klemmes når bordet monteres.

Bruk aldri bordet til å styre eller skyve stolen.

Ikke plasser gjenstander som er varmere enn 40 °C på bordet.

Bordet skal kun brukes av personen. Ikke len deg på bordet, eller plasser gjenstander som veier mer enn 8 kg på det.


SEKSJON 18.34: JUSTERE PlassERING AV ALBUEKLOSS

For å juster albueklossen, løsne boltene, **A**, og skyv puten langs sporene til ønsket stilling. Stram boltene for å låse stillingen.



SEKSJON 18.35: MONTERE, DEMONTERE OG JUSTERE 4-PUNKTS BELTE



For å feste et 4-punkts belte, før det grå båndet gjennom den øvre åpningen på setet **C** og deretter gjennom kamspennen. Trekk båndet rundt den interne glidestangen, og før det ut gjennom den hengslede enden på spennen **B**. Trekk i båndet for å stramme det, og fest deretter kamspennene ved å lukke dem. Trekk det sorte båndet gjennom kamspennen på forsiden **D**. Kontroller at polstringen i beltet vender mot barnet.

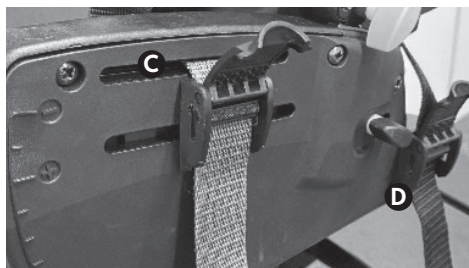

Sikkerhetsinformasjon:

Når 4-punktsbeltet brukes, anbefales det å legge stroppen over siden av setekjernen i stedet for gjennom åpningen, dersom ekstra lengde på beltet er nødvendig.

Fest spennen **D** på forsiden, slik at barnet sitter trygt i setet.

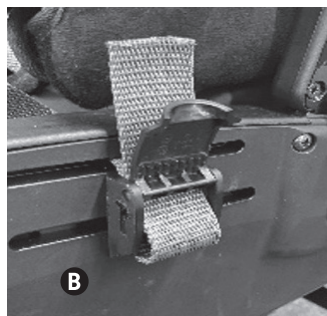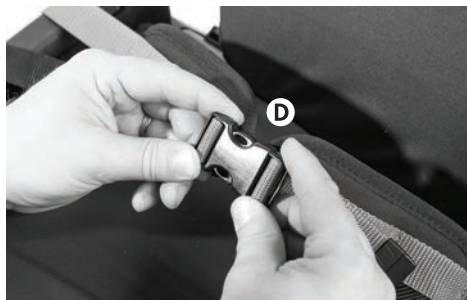



Gjør denne prosessen i motsatt rekkefølge for å demontere 4-punkts beltet.

SEKSJON 18.36: JUSTERE BEKKENVUGGE

Bekkenstøtten kan strammes eller løsnes for å gi brukeren bedre komfort og stabilitet ved hjelp av det grå båndet foran **A**, eller ved bruk av kamlåsene på siden og bak **B** og **C**.


For å justere kamlåsene, åpne lokket og trekk beltet gjennom den indre kamglideren **D**.

Bekkenvuggens posisjon kan også justeres med borrelåspaden **E**.

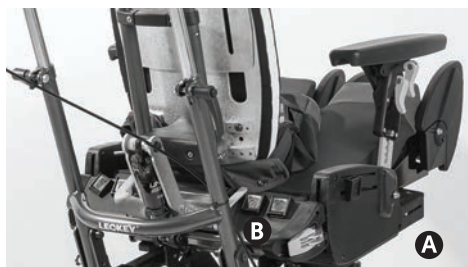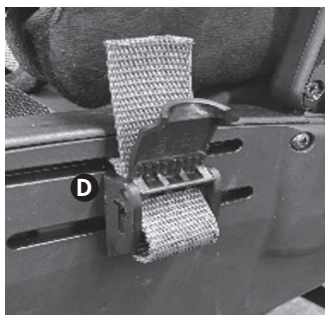

SEKSJON 18.37: JUSTERE LÅRSTØTTER (BREDDDE OG VINKEL)

For å justere bredden og vinkelen på lårstøttene, løft den fremre delen på seteputen opp **A**, slik at du får tilgang til boltene **B**. På standardsetet er lårstøttene kun plassert på utsiden av setet. På Split setet, er det fire sett med lårstøtter. Løsne boltene og juster til ønsket stilling. Stram boltene for å låse stillingen.

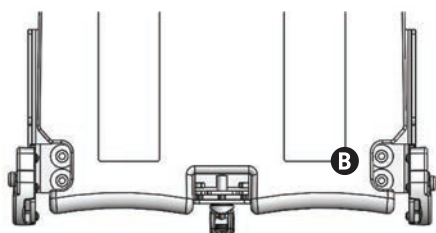


SEKSJON 18.38: JUSTERE RYGGVINKEL

Ryggvinkelen kan justeres på to måter: ved bruk av ryggens lenemekanisme, eller gjennom grensesnittet nederst på ryggen.


Lokaliser låsespakene for å regulere ryggvinkelen, **A**, bak på setet. Vri begge spakene utover samtidig, **B** for å frigjøre lenemekanismen og flytte ryggen til ønsket stilling. Sett spakene tilbake i lukket stilling **A** for å låse de på plass.




For å justere ryggvinkelen ved bruk grensesnittet nederst på ryggen, finn bolten **D** i grensesnittet.

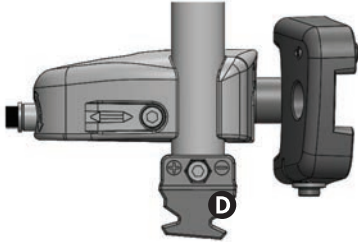

Fjern bolten helt fra delen, og separer fremspringet på grensesnittet **E**, og endeheftene **F** fra de vertikale rørene, og vri 180 grader. Skyv de vertikale rørene tilbake i fremspringet på grensesnittet og endeheftene **G**, og sett bolten gjennom alle delene. Stram bolten med mutteren for å låse den på plass.

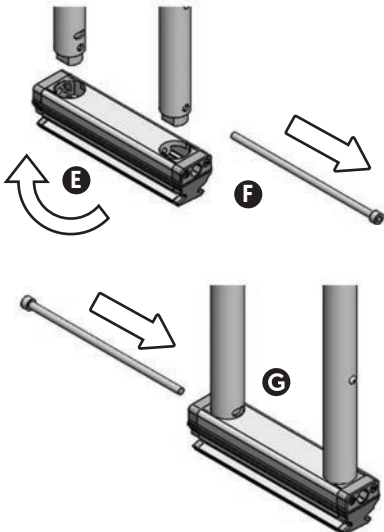

Ryggens lenemekanisme har seks stillinger i trinn på fem grader, slik vist i diagrammet **H** på siden av setet. I tillegg er det to stillinger for ryggens grensesnitt med fem graders forskjell, slik vist i diagrammet **I** på siden av setet. Viser for øyeblikket +10° til -15°.

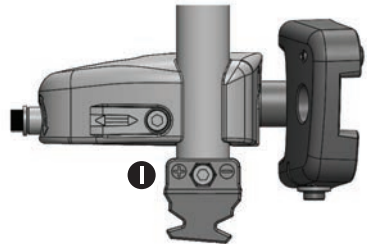

Følgende ryggvinkler kan oppnås ved bruk av kombinasjonene nedenfor.

Lenemekanisme for rygg	Grensesnitt for rygg (symbol peker forover)	Sete og ryggvinkel [°]	Lenvinkel [°]
		90	0 -25
		90	+10 -15

SEKSJON 18.39: JUSTERE DYNAMISK RYGGSTYRKE

Motstanden justeres ved å endre luftrykket, og det skal fastsettes av personens vekt, setestilling, setedesign og personlig preferanse.

Luftrykket justeres ved bruk av en luftpumpe **A** (som leveres med hver dynamiske rygg) i hovedventilen på den dynamiske mekanismen **B**.














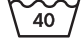






For å øke luftrykket, pump luft inn i ventilen til ønsket trykk er oppnådd. For å redusere trykket, trykk på utløserventilen på pumpen til ønsket trykk er oppnådd.



Advarsel: Trykkområdet er mellom 50 og 250 psi. Luftrykket i det ukomprimerte fjæringssystemet må aldri overstige 250 psi. Hvis det maksimale luftrykket på 250 psi overstiges, kan det føre til alvorlig personskaade.

TABELL OVER SYMBOLER

Symbol	Betydning
	Medisinsk utstyr
	Les instruksjonene for bruk
	CE-merking
	UKCA-merke
	Advarsel
	Produsent
	Serienummer
	Produktkode
	Maksimal brukervekt
	Produksjonsdato
	Inneholder ikke lateks
	Utstyrsidentifikasjonskode (UDI)
	Kollisjonstestet
	Vaskes i maskin på 40 °C
	Tørkes i tørketrommel på lav varme
	Må ikke strykes
	Skal ikke blekes
	Elektrisk/elektronisk utstyr kastes i henhold til WEEE-forskriften.



Forhandler i USA

Sunrise Medical AS
North American Headquarters
Delitoppen 3
Mount Juliet, TN 37122

T: 1-800-333-4000
F: 1-800-300-7502
E: customseating@sunmed.com

sunrisemedical.com

Forhandler i Canada

Sunrise Medical Canada Inc.
1000 Creditstone Rd., Unit #2
Concord, ON, L4K 4P8
Canada

T: +1.800.263.3390
F: +1.800.561.5834
E: mkt.canada@sunmed.com

sunrisemedical.ca



Gå til leckey.com for å se en komplett liste over Leckey-forhandlere.

James Leckey Design Limited
19 Ballinderry Road
Lisburn, BT28 2SA
Northern Ireland

leckey.com

(+44) 28 9260 0750
hello@leckey.com

