

Hovedfunksjoner for Orbit pleieseng

Funksjoner i urotert tilstand

Ryggstøtte
Hever hjertebrettet

Lår- og leggstøtte
Hever lår- og leggstøtte

Fotstøtte
Hever fotstøtten

Høyderegulering
Hever hele sengeflate-
høyden opptil 80cm

Det er mulig å samkjøre to funksjoner
ved å trykke på to knapper samtidig

Ryggstøtte
Senker hjertebrettet

Lår- og leggstøtte
Senker lår- og leggstøtte

Fotstøtte
Senker fotstøtten

Høyderegulering
Senker hele sengeflate-
høyden ned til 28 cm

Rotering

Utstigning av seng
Roterer ut sengen fra ligge-
posisjon til stolposisjon

Innstigning i seng
Roterer inn sengen fra stol-
posisjon til liggeposisjon

Du kan ikke bruke de blå knappene mens
sengen roterer. Dette vises ved at de oransje
LED-lysene over de blå knappene lyser.

Slik «resetter» du pleiesengen

Hvis sengen ikke fungerer som den skal, kan du prøve å tilbakestille den.

1. Finn knappene for *lår- og leggstøtte* på håndkontrollen.
2. Trykk begge knappene samtidig, og hold dem inne.
3. Håndkontrollen vil pipe to ganger – da er tilbakestillingen fullført.

Merk: Hvis du ofte må tilbakestille sengen, bør du kontakte distributøren.

