



Brukermanual – Daylight Omega 7 Lupelampe

Innhold i pakken

- Omega 7 lupelampe med LED-lys og linse (3 dioptrier, 1.75x forstørrelse)
- Bordklemme eller stativ (avhengig av modell)
- Strømadapter
- Bruksanvisning

Montering

- Fjern all emballasje før bruk
- Fest bordklemmen godt til en stabil overflate
- Sett lampearmen inn i klemmen eller stativet
- Koble til strøm med den medfølgende adapteren
- Juster armen forsiktig med begge hender – fjærene er sterke

Bruk

- Slå på lyset ved å trykke på knappen midt på lampehodet
- Juster lysstyrken med flere trykk (4 nivåer: 6300 – 5500 – 3500 – 1800 Lux)
- Slå av lyset med et langt trykk eller ved å trykke til lysstyrken går til null

Linse og forstørrelse

- Standardlinse har 17,5 cm diameter og gir 1.75x forstørrelse (3 dioptrier)
- Ekstra linser kan kjøpes separat:
 - 5 dioptrier (2.25x)

Vedlikehold og rengjøring

- Slå av og trekk ut strømmen før rengjøring
- Bruk fuktig klut med mildt såpevann
- Ikke bruk alkohol, løsemidler eller skuremidler
- Linsebeskyttere kan kjøpes for ekstra beskyttelse

Sikkerhet

- Ikke la linse stå i direkte sollys – brannfare!
- Ikke la lampen være uten tilsyn når den er på
- Unngå å bruke lampen i fuktige omgivelser

Tekniske spesifikasjoner

- Lysstyrke: 814 lumen / 6300 Lux ved 15 cm
- Fargetemperatur: 6000 K (dagslys)
- Energiforbruk: 12 W
- Linsemateriale: Akryl med antiripebelegg
- Kabellengde: 2,6 meter
- Rekkevidde på arm: 118 cm
- Vekt: ca. 3 kg
- Farge: Hvit / grå

Kontaktinformasjon

ProVista AS
Nils Hansens vei 20
0667 Oslo
www.provista.no
mail@provista.no

