



# **Elektrisk regulerbar ryggstøtte for seng med fjernkontroll**

## **Art. 823068**

### **VIKTIG!**

SØRG FOR AT DISSE INSTRUKSJONENE ER LESTE OG FORSTÅTT FULLT FØR BRUK. VENNLIGST OPPBEVAR DETTE DOKUMENT PÅ ET TRYGT STED FOR FREMTIDIG REFERANSE.

DISSE INSTRUKSJONENE BØR LEVERES MED PASIENT / BRUKER AV RYGGSTØTTEN SAMT RÅDFØRES MED OM NØDVENDIG.

- Det må utføres en risikovurdering med hensyn til egnetheten til dette produktet, spesielt for nye brukere. Følgende risikoer bør vurderes: Innklemming av fingre, kroppsdeler eller vev.
- Har produktet blitt montert trygt på sengen?
- Er dens trygge arbeidsbelastning passende (Max 80 kg.)?
- Vil brukerens helseforverring kreve ytterligere regelmessige vurderinger?
- Hold unna bevegelige deler og sørg for at det ikke er noen hindringer når du senker eller hever ryggstøtten.
- Forsikre deg om at du har lest og forstått disse instruksjonene, inkludert bilder med symboler.
- Sørg for at en inspeksjon av ryggstøtten utføres med jevne mellomrom.
- Ikke la barn leke med ryggstøtten.
- Ikke overskrid den sikre arbeidsbelastningen (SWL) på 80 kg

## 2. Innhold

Kontroller at følgende er i esken:

1. Ramme til ryggstøtte med aktuator
2. Madrass
3. Adapter, ledning med plugg, skjøteledning adapter-aktuator
4. Fjernkontroll
5. Festestropper
6. Pute trekk og pute
7. Bruker manual på norsk (Denne du leser nå).



Adapter



Fjernkontroll



Skjøteledning  
adapter - aktuator



Ledning med plugg

## 3. Beskrivelse

Ryggstøtten er designet for å plasseres i en seng for å regulere vinkelen på ryggstøtten for å passe brukerens behov.

På en enkeltseng er enheten plassert sentralt eller litt til siden, ved hodeenden av sengen. På en bred seng plasseres enheten på brukersiden av sengen ved hodeenden av sengen. Den medfølgende stroppen kan brukes for ekstra stabilitet og sikkerhet.

Ryggstøtten vil løfte overkroppen til en bruker, med en maksimal total kroppsvekt på 80 kg, fra ca. 2° til 80°. Den betjenes av en fjernkontroll med to knapper, og leveres med tilpasset trekk med skreddersydd putelomme.

Trekket er utstyrt med stropper og borrelås for enkel festing til rammen.

Putetrekket har stropper som kan festes til sengen.

## 4. Sammenstilling

4.1 Plasser ryggstøtten med rammen ned og aktuatoren pekende opp (se bilde under). Den hvite ryggplaten av plast skal vende opp.



Ryggstøtten plassert på seng.  
**PS!** Avbildet handtak er ikke en del av produktet.



Glideflate ved heving / senking av ryggstøtten.

- 4.2 Sett inn fjernkontrollen sin kontakt (2) til korresponderende plugg (1) og aktuatoren sin plugg (3) til korresponderende kontakt fra adapter (4)., og plugg og ledningens andre plugg (5) til adapteren (6). Til slutt kobles adapterens skjøteledning i adaptert (7) og pluggen (8) kan stikkes i enn vanlig stikkontakt. (Se bildene under)



- 4.3 Plasser adaptert flatt på gulvet eller under sengen;

---

## 5. Fjernkontroll

Kontroller funksjonene ved å trykke "opp" eller "ned" knappene på fjernkontrollen når sammenstillingen er utført.



## 6. Vedlikehold

- 6.1 Hvis festeanordning er brukt, så sjekk den jevnlig at den er stram/stabil;
- 6.2 Sjekk plasseringen av ryggstøtten hver gang den skal brukes;
- 6.3 Tørk regelmessig overflaten av aktuatoren for smuss;
- 6.4 Sjekk ledninger og adaptert for skader regelmessig hver 6 måned;
- 6.5 Sjekk aktuatoren for skader regelmessig hver 6 måned, reparer eller bytt dem om nødvendig;
- 6.6 Gjennomfør en grundig inspeksjon av produktet årlig, reparer eller bytt dem om nødvendig;
- 6.7 Kontroller backup batteriene hver 3. måned, hev ryggstøtten 15 cm høyt, så dra ut pluggen fra stikkontakt, trykk «ned» på fjernkontroll, hvis ryggstøtten da ikke går ned så må batteriene byttes.

## 7. Feilsøking metoder

Problem	Årsak	Tiltak
Ingen respons ved bruk av fjernkontrollen	1) Pluggen står ikke i stikkontakten 2) Når pluggen er tilkoblet 3) Noen av ledningene ikke er tilkoblet.	Plugg inn pluggen  Prøv en annen stikkontakt.  Sjekk de øvrige forbindelsene om de er tilkoblet.
En lyd høre når fjernkontrollen brukes	1) Få bekreftet hvor lyden kommer fra. 2) Hvis det er et fremmedobjekt som forårsaker lyden. 3) Om ryggstøtten er plassert hensiktsmessig.	Hvis det er en bevegelig del, så smør den med litt olje.  Fjern fremmedlegemet
Når aktuatoren beveger seg uten at fjernkontroll er benyttet.	1) Feil ved fjernkontrollen	Ta ut ledningen og send den til reparasjon.

## 8. Parameters

8.1 Ryggplate: ca. 61 x 75 cm

8.2 Rammens størrelse: ca. 61 cm x 78 cm

8.3 Størrelse madrass: 110 x 750 cm - tykkelse ca. 4 cm (ryggdel) / 2 cm (sengedel).

8.4 Ryggstøttens reguleringspotensiale: fra 1° til 85°

8.5 Spenning: 230V, 50Hz

8.6 Ryggplate max belastning: 80kg

8.7 Vekt: 13kg

8.8 Input effekt: 400VA

8.9 Strøm: 2A

Distributed by :  
**Identités**

Boulevard de la Chanterie  
F-49124 Saint Barthélémy d'Anjou  
France