

READEASY
EVOLVE ECO

Brukerhåndbok versjon 1.2



Synshjelpemidler AS
Norges Blindforbund

Opphavsrett © 2024, Visionaid International Ltd, alle rettigheter
forbeholdt.

Innholdsfortegnelse

Generell beskrivelse	4
Forbedringsprogram	4
Eierskap og rettigheter	5
Sikkerhet	6
Innhold i esken	7
Utpakking	7
Bærehåndtak	8
Plassering for bruk	8
Kamera	9
Koble til eller lade batteriet (kun batteriversjon)	12
Slå av/på	13
LED-belysning av/på	14
Lyd	15
Posisjonering av dokumenter	16
Betjeningsknapper	17
Ta bilde	18
Navigering	19
Tabellgjenkjenning	20
Talekontroll	20
Raskere og saktere	20
Endre stemme	21
Profiler for gjenkjenningsprofiler	21
Batteriinformasjon (kun batteriversjon)	21
Hovedmeny	22
Gjenkjenningsprofiler	22
Aktiv gjenkjenningsprofil	23
Gjenkjenningsprofil 1, 2, 3	23

Menyinnstillinger	24
Avanserte innstillinger	25
Om	26
Språk	26
Skaffe flere stemmesett/funksjoner	26
Aktivere tilleggsspråksett/-funksjoner	26
Støttede språk	26
Oppgradering av programvare	29
Sjekk din eksisterende programvareversjon	29
Bestemme den nyeste tilgjengelige versjonen	30
Skaffe den nyeste programvaren	30
Slik oppgraderer du	30
Batteribytte (i ReadEasy Evolve ECO med batteri)	30
Retningslinjer for batteribruk	31
Maksimer batterilevetiden	31
Generell batteribruk	31
Vanlige spørsmål og feilsøking	31
Salgsbetingelser	34
Garanti	34
Tillegg A: Teknisk informasjon	35
Tillegg B: Batterispesifikasjoner (kun batterimodell)	35

Generell beskrivelse

Gratulerer med valget av ReadEasy Evolve ECO lesemaskin.

ReadEasy Evolve ECO kombinerer brukervennlighet med høyeste nøyaktighet, talekvalitet og rask helsides tekstgjenkjenning. Den kan ta bilde av og lese alle typer trykt tekst opptil A4-størrelse, for eksempel brev, kontoutskrifter, mat- og medisineremballasje osv., og leser teksten høyt med naturlig stemme .

Forbedringsprogram

Brukerne er de beste menneskene til å hjelpe oss med å forbedre og utvikle produktene våre videre, så hvis du har noen ideer eller forslag, uansett hvor små, kan du kontakte oss:

E-post:

suggestions@visionaid.com

Kontakt:

Visionaid International Ltd.

Brohytta

Spalding

Lincolnshire

PE11 3AU

Storbritannia



Telefon:

+44 (0) 1775 711 977

Takk, og kos deg med din ReadEasy Evolve ECO-lesemaskin!

Eierskap og rettigheter

Programvaren som er installert på ReadEasy Evolve ECO bruker tredjeparts programvarebiblioteker som distribueres under sine egne respektive lisenser.

- Opphavsrett (C) 2000–2020, Intel Corporation, alle rettigheter forbeholdt.
- Opphavsrett (C) 2009–2011, Willow Garage Inc., alle rettigheter forbeholdt.
- Opphavsrett (C) 2009–2016, NVIDIA Corporation, alle rettigheter forbeholdt.
- Opphavsrett (C) 2010–2013, Advanced Micro Devices, Inc., alle rettigheter forbeholdt.
- Opphavsrett (C) 2015–2016, OpenCV Foundation, alle rettigheter forbeholdt.
- Opphavsrett (C) 2015–2016, Itseez Inc., alle rettigheter forbeholdt.
- Opphavsrett (C) 2019–2020, Xperience AI, alle rettigheter forbeholdt.

Tredjeparts opphavsrett tilhører sine respektive eiere.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter ReadEasy Evolve ECO forsiktig, da uforsiktig håndtering kan skade interne komponenter og ugyldiggjøre garantien.
- Bruk alltid enheten på et sted der temperaturen er mellom 10 og 35 °C (50 og 95 °F). Ikke utsett den for sterk varme, kulde eller direkte sollys.
- Hold enheten unna våte områder, regn og andre kilder til væske, fuktighet og kjemikalier. Ikke senk enheten ned i vann.
- Ikke forsøk å reparere enheten; ethvert uautorisert forsøk vil ugyldiggjøre produktgarantien. Ta kontakt med din distributør.
- Bruk kun den medfølgende strømadapteren.
- Trekk alltid ut støpselet til ReadEasy Evolve ECO før rengjøring. Bruk kun en myk klut til å rengjøre utsiden. Ikke bruk rengjøringsmidler eller slipende materialer, da de vil skade enheten.
- Bruk av ReadEasy Evolve ECO til andre formål enn det som er beskrevet i denne håndboken, vil utelukke garantien.
- Bruk kun den medfølgende strømadapteren med ReadEasy Evolve ECO.

Innhold i esken

ReadEasy Evolve ECO-boksen din inneholder følgende:

1. ReadEasy Evolve ECO lesemaskin (med eller uten batteri)
2. ReadEasy Evolve ECO-kamera (oppbevares bak på ReadEasy Evolve ECO).
3. Strømkabel.
4. Hurtigguide.
5. Denne brukerhåndboken.

Hvis noen av disse varene mangler i esken, kan du kontakte din lokale distributør.

Utpakking

Løft ut pappesken som inneholder strømforsyningen (i sin egen eske), strømkabelen, og dokumentasjonen.

Løft deretter ReadEasy Evolve ECO ut av esken og fjern forsiktig sideemballasjen.


Plasser ReadEasy Evolve ECO på en stabil, flat overflate der den skal brukes.

Hvis du har kjøpt den valgfrie funksjonspakken, vil den trådløse kontrollputen også være inkludert. Fjern denne hvis den er tilgjengelig og nødvendig.

Bærehåndtak

ReadEasy Evolve ECO har et integrert grått bærehåndtak som gjør den trygg og enkel å flytte fra rom til rom .

Bærehåndtaket er innebygd i toppen av enheten. Det sitter plant når det ikke er i bruk. Ved å løfte håndtaket opp i hevet posisjon er det enkelt å gripe tak i og flytte enheten.

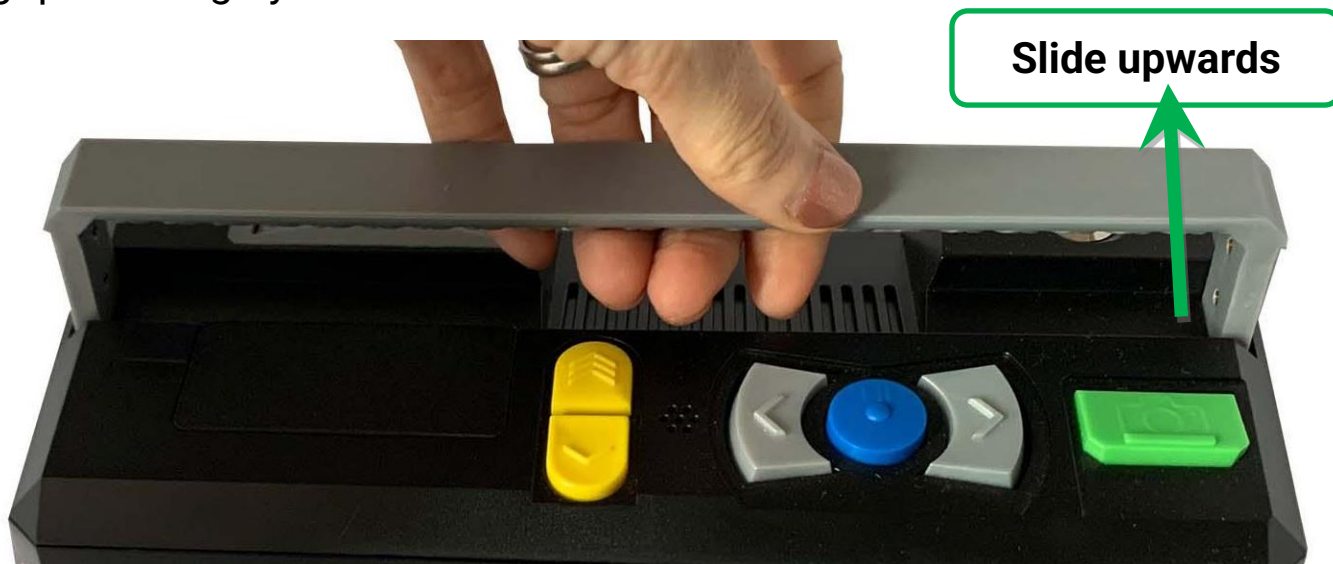

Du kan senke håndtaket ved å skyve det forsiktig inntil det sitter i flukt med enheten.

Merk:

- Hvis kameraet i ReadEasy Evolve ECO er koblet til og bærehåndtaket brukes til å flytte enheten, vil den koble fra kameraet. Dette er trygg og forventet oppførsel. Når enheten er på sin nye plassering, senker du håndtaket og skyver kameraet forsiktig tilbake i sporet.

Plassering for bruk

Når du plasserer ReadEasy Evolve ECO på en overflate for bruk, må du sørge for at den er ren, flat og stor nok til å plassere gjenstandene du ønsker å lese.

Sørg for at enheten ikke står rett under sterkt lys, da dette kan påvirke nøyaktigheten når du leser blanke dokumenter.

Kamera

ReadEasy Evolve ECO har et unikt, magnetisk kamerasystem med enkel utløsning. Kameraet må plasseres i kamerasporet før du tar opp lesestoffet ditt.

Fjerne kameraet fra lagret posisjon


Kameraet oppbevares i ReadEasy Evolve ECO, bak på enheten, langs bunnen. Med ReadEasy Evolve ECO vendt mot deg, før fingrene 2,5 cm opp langs baksiden av venstre kant. Du vil kjenne et utskjær formet som en halvsirkel. Skyv kamerahodet bakover ved hjelp av denne fordypningen og fjern det helt.



Utfolding av kameraet


Når kameraet er fjernet fra enheten, må det deretter foldes ut. Når kameraet er foldet sammen, er den delen av kameraet som skal settes inn i enheten litt kortere. Det har også en rektangulær USB-port som sitter i flukt med bunnen av den kortere delen.

Brett ut kameraet (90 grader) slik at det er klart til å settes inn i kameraposisjonen.

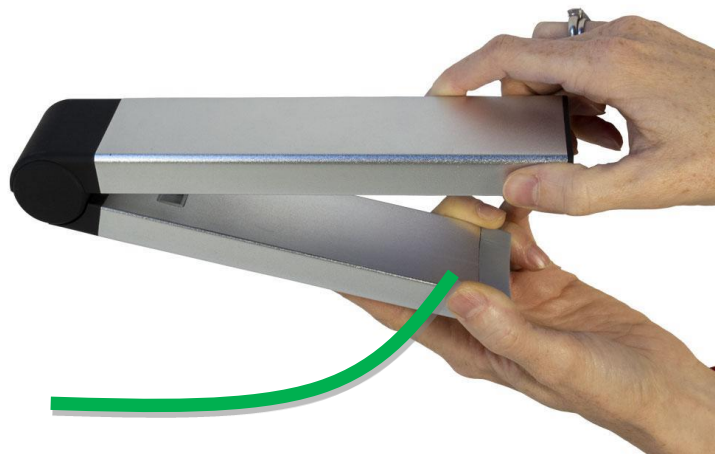

Koble til kameraet

Sporet for kameraet (farget sølv) er plassert øverst til venstre på ReadEasy Evolve ECO-enheten, bak, 3,5 cm fra venstre side. Sporet har et fjærbelastet støvdeksel.

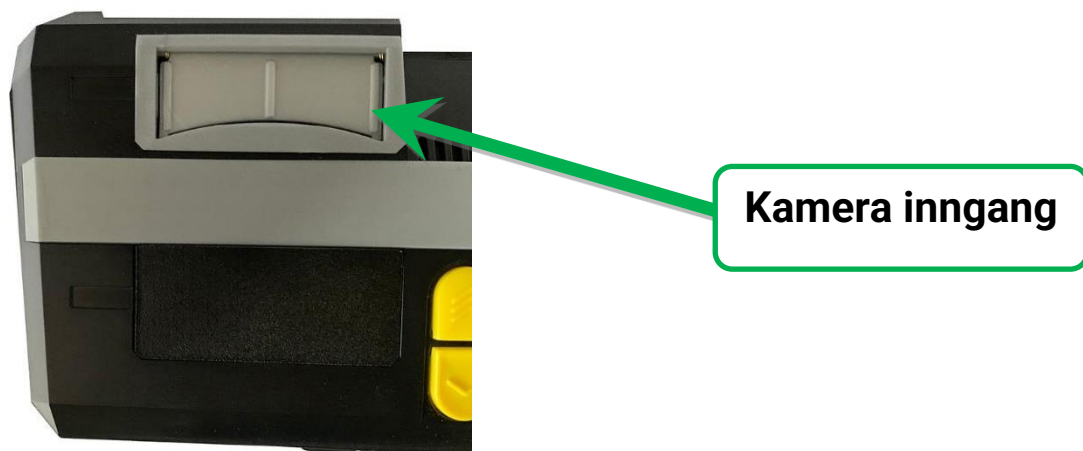

Med den korte armen (som inneholder USB-porten) vendt nedover og den andre delen av armen vendt mot deg, vinkler du kamerahodet noen grader fremover og setter kameraet sakte inn i kamerasporet.

Kameraet vil skyve ned omtrent 13 cm.

Når den er på plass, må du kanskje bruke litt kraft nedover for å koble kameraet helt til. Mens du gjør det, vil du føle at det går helt på plass.

Hvis ReadEasy Evolve ECO allerede er på når du setter inn kameraet, vil det si «Kamera tilkoblet».

Kameraet går bare inn i sporet én vei, og det krever ikke mye kraft, så vær forsiktig når du setter det inn.



Koble fra kameraet

Det er ikke nødvendig å koble fra, brette sammen og oppbevare kameraet etter hver bruk. Dette trenger bare å gjøres når enheten transporteres.

For å koble fra kameraet, grip det godt tak i den oppreiste delen (over kamerasporet). Plasser den andre hånden på selve hovedenheten og dra deretter kameraet oppover.

Hvis ReadEasy Evolve ECO allerede er på når du kobler fra kameraet, vil den si «Kamera frakoblet».


Sette kameraet tilbake til lagret posisjon

Når kameraet er fjernet, brett det forsiktig inn ved hengslet ved å holde i begge delene. Plasser det deretter tilbake på baksiden av enheten for sikker oppbevaring på motsatt måte av hvordan du fjernet det.

Den magnetiseres tilbake på plass og vil bare passe korrekt én vei rundt, med den korte kanten vendt mot deg og det avrundede hengslet til venstre.

Koble til eller lade batteriet (batterilading gjelder kun batteriversjonen)

1. Koble tuppen av strømkabelen til ReadEasy Evolve ECOs strømuttak. Med ReadEasy Evolve ECO vendt mot deg, kjør pekefingeren opp baksiden av enheten helt til venstre. 6 cm opp, skal du kjenne et rundt område med en rund fordypning. Det er her tuppen av strømkabelen settes inn.
2. Sett støpselet inn i en stikkontakt og sørg for at den er slått på.

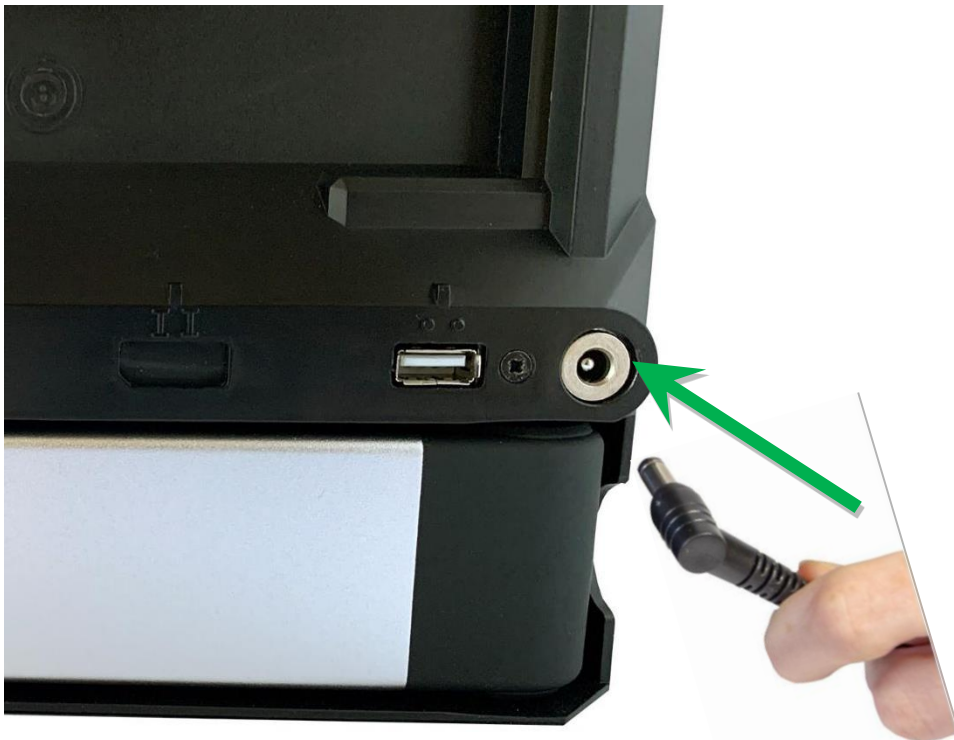

3. Hvis du har en Evolve ECO med batteri, vil batteriet lades automatisk når det er koblet til strømmettet.
4. Det tar omtrent 1,5 til 2 timer å lade batteriet fra tomt.

Vennligst merk:

- ReadEasy Evolve ECO med batteri kan brukes under lading.
- Hvis ReadEasy Evolve ECO med batteri er koblet til strømmettet mens den går på batteri, kan den starte på nytt automatisk. Dette er forventet oppførsel.

Slå av/på

Av/på-knappen er plassert på toppen av ReadEasy Evolve ECO, 2,5 cm fra baksiden og 3 cm fra høyre kant. Det er en rund knapp som er innfelt i et rundt hull.

Når strømmen er tilkoblet, vil ReadEasy Evolve ECO slå seg på automatisk.

Etter 8 sekunder vil det høres et pip (hvis volumet er opp), og 15 sekunder senere vil ReadEasy Evolve ECO annonsere: « ReadEasy er klar».

For å slå av, trykk på av/på-knappen igjen. ReadEasy Evolve ECO vil si « ReadEasy slår seg av».



Av/på-knappen lyser blått når Evolve ECO er på.

VIKTIG!

Hvis du ønsker å koble fra enheten etter at du har slått den av, må du enten vente i 10 sekunder etter at den sier « ReadEasy slår seg av, farvel», eller sørge for at den blå strømlampen ikke lenger lyser for å sikre at den er helt slått av.

LED-belysning av/på

Kameraet i ReadEasy Evolve ECO er optimalisert for å fungere i svakt lys uten integrert LED-belysning.

Som standard er LED-lampene slått av. I de fleste tilfeller bør de ikke slås av. De bør bare slås på hvis det er svært svakt omgivelseslys.

Hvis du tar opp et blankt dokument, kan bruk av den integrerte LED-belysningen forårsake refleksjoner som kan påvirke talepresisjonen. Hvis du har problemer med blanke dokumenter, må du derfor sørge for at LED-lysene på ReadEasy Evolve ECO er slått av.

Lysene styres av en vippebryter. Denne er plassert på undersiden av kameraarmen, ca. 3 cm fra bakhodet, i midten.

For å slå på lyset, vipp bryteren til høyre. For å slå av, vipp bryteren til venstre.



Lyd

Volumjustering

For å øke eller redusere volumet, hev eller senk den vertikale volumglidebryteren. Denne er plassert på høyre kant av maskinen, 4 cm fra baksiden.

Hodetelefonuttak og hodetelefoner

ReadEasy Evolve ECO kan brukes sammen hodetelefoner. De har en standard 3,5 mm lydkontakt.

Høytalerne vil automatisk slå seg av så snart hodetelefonene er koblet til. Bruk volumglidebryteren for å endre hodetelefonvolumet.

Hodetelefonutgangen er plassert på høyre kant av maskinen, 8 cm fra fronten og 6,5 cm opp fra bunnen.




Posisjonering av dokumenter

Når ReadEasy Evolve ECO er slått på og kameraet er tilkoblet, er du klar til å lese et dokument.

ReadEasy Evolve ECO fanger opp et område som er omtrent 10 % større enn en side i A4- eller Letter-størrelse. Hold opptaksområdet fritt for andre objekter eller tekst for å sikre at den ikke fanger opp og leser opp uventede tekststykker.

Plassering av dokument i A4-format (US Letter)

Snu dokumentet liggende og plasser langsiden av A4-dokumentet (Letter) du ønsker å lese, inntil og på linje med høyre kant av ReadEasy Evolve ECO.

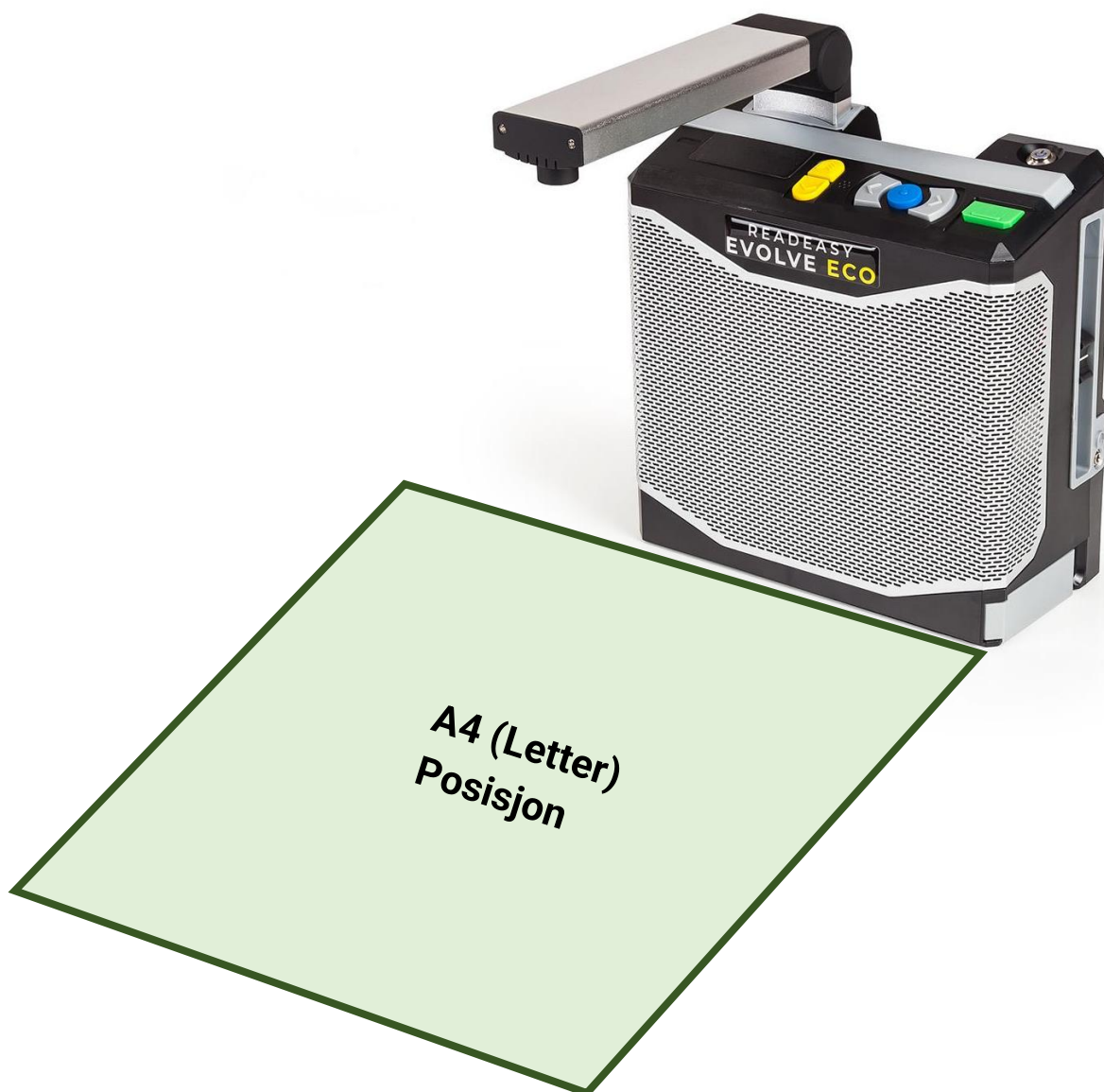


Sylindriske gjenstander (f.eks. blikkbokser)

For best resultat bør du vanligvis plassere objektet rett under midten av kameraet. Den delen av objektet du ønsker å lese, må vende oppover mot kameraet. Dette betyr at du kanskje må rotere boksen og ta et nytt bilde flere ganger før den gjenkjennes på en akseptabel måte. Vær oppmerksom på at refleksjoner på sylindriske objekter forårsaker et større problem, så hvis teksten ikke leses nøyaktig, kan du prøve å flytte boksen rundt bildeområdet før du tar et nytt bilde.

Betjeningsknapper

Betjeningsknappene er plassert på den øvre kanten av enheten foran. Det er seks taktile knapper.

Hver knapps farge, plassering og form beskrives i sin helhet senere i denne delen.

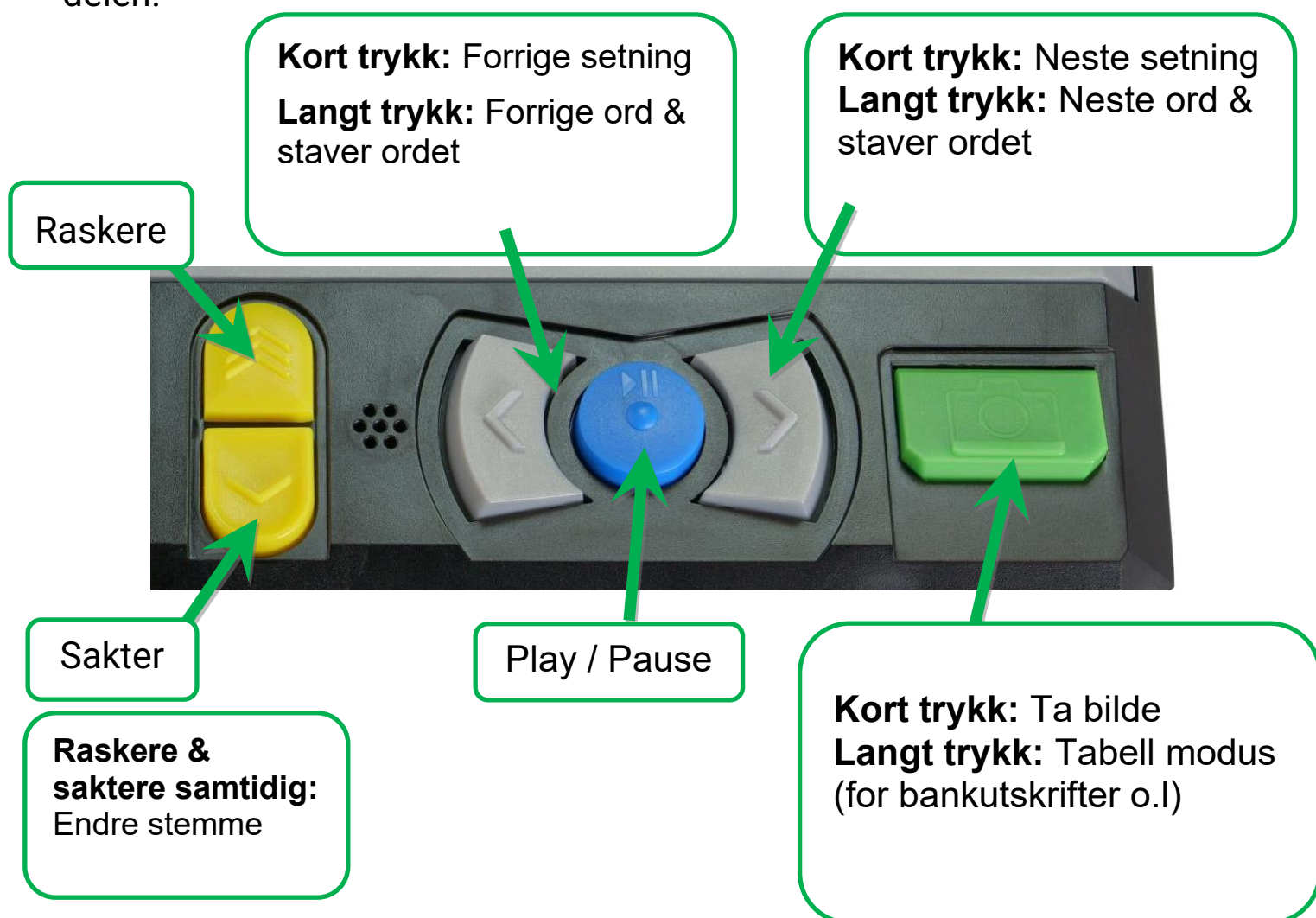

Ta bilde

Ta bilde (kort trykk)

For å ta bilde av et dokument og få det lest høyt, sørg for at du har et dokument under kameraet og trykk deretter på den grønne rektangulære knappen. Dette er knappen lengst til høyre, og den har en hevet, følbar linje nederst.

ReadEasy Evolve ECO har et intelligent bevegelsesdeteksjonssystem som hindrer at dokumentet ditt blir tatt bilde av hvis det beveger seg. Dette gir deg tid til å trykke på opptaksknappen og plassere dokumentet under ReadEasy Evolve ECO med begge hender (f.eks. for en bok). Bilde blir først tatt når det ikke er bevegelse under kameraet.

Et hørbart «pip» vil avgis mens bevegelse oppdages.

For å overstyre denne funksjonen og tvinge ReadEasy Evolve ECO til å fange dokumentet ditt, trykk på Ta bilde igjen.



Dokumentet ditt vil begynne å bli lest høyt noen sekunder senere.

ReadEasy Evolve ECO har automatisk tabellgjenkjenning med forbedret navigasjon.

Ta bilde av tabell (langt trykk)

Hvis ReadEasy Evolve ECO ikke oppdager en tabell og leser over kolonnene automatisk, bruk Ta bilde av tabell.

Trykk og hold inne Ta bilde knappen til «Ta opp som tabell» leses. Dette er knappen lengst til høyre, og den har en hevet, taktil linje nederst.



Navigering


Spill av / Pause

For å starte og stoppe opplesingen av dokumentet, trykk raskt på spill av/pause-knappen. Dette er den blå, runde knappen, som ligger mellom

de to grå halvmåneknappene. Det er den tredje knappen fra høyre. Den har en hevet kul i midten.

Neste og forrige setning

For å navigere fremover eller bakover én setning, trykk og slipp høyre eller venstre halvmåneknapp. Dette er knappene til høyre og venstre for Spill av/Pause-knappen. De har en preget pil på seg.

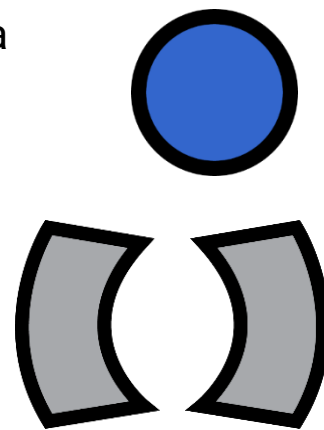


Ord for ord med staving

For å navigere fremover eller bakover ord for ord, trykk og hold inne neste eller forrige setningsknapp (høyre eller venstre halvmåneknapp). Når du slipper den, staves det gjeldende ordet bokstav for bokstav.


Neste avsnitt

For å navigere til neste avsnitt, trykk og hold nede Spill av/Pause-knappen og trykk raskt på Neste setning-knappen.

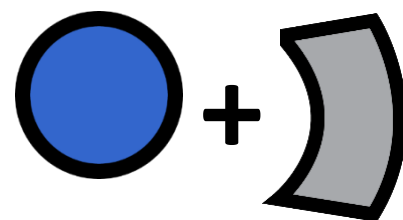

Forrige avsnitt

For å navigere til forrige avsnitt, trykk og hold nede Spill av/Pause-knappen og trykk raskt på Forrige setning-knappen.

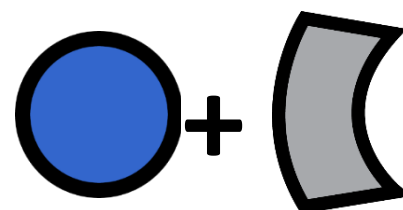

Tabellgjenkjenning

ReadEasy Evolve ECO har automatisk tabellgjenkjenning. Når en tabell oppdages, kan den navigeres på en intuitiv måte.


Du vil høre «Entering table» når lesingen går inn i en gjenkjent tabell.

Når ReadEasy Evolve ECO oppdager en tabelloverskrift, lar den deg lese gjennom cellene i en tabell mens overskriftene leses opp automatisk.

Når du er i en tabell, endres navigasjonskontrollene.


Neste og forrige celle

For å navigere til neste eller forrige celle, trykk på Neste- eller Forrige setning-knappen.

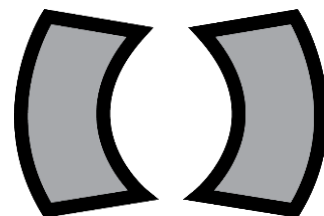


Neste rad

For å hoppe ned én rad, trykk og hold inne Spill av/pause-knappen og trykk raskt på Neste setning-knappen.

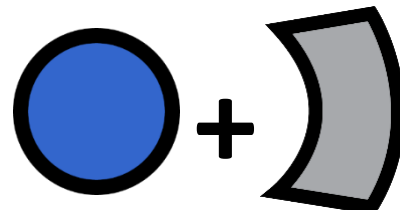

Forrige rad


For å hoppe opp én rad, trykk og hold inne Spill av/pause-knappen og trykk raskt på Forrige setning-knappen.

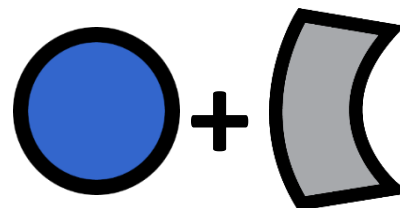

Talekontroll

Raskere og saktere

Det er totalt 40 tilgjengelige talehastigheter. For å øke eller redusere lesehastigheten, trykk på Raskere- eller Saktere-knappene. Dette er de to vertikalt på linje, gule, halvtavleformede knappene som er plassert helt til venstre for knappene, rett til venstre for forrige setning-knappen. Den øverste knappen øker lesehastigheten, og den nederste knappen reduserer lesehastigheten.

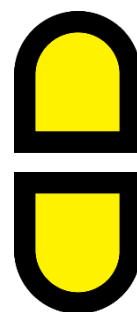


Endre stemme


For å bla gjennom lesestemmene for dokumentets språk, trykk raskt på Raskere- og Sakteere-knappene samtidig.

Profiler for gjenkjenning

For å bla gjennom gjenkjenningsprofilene dine, trykk og hold inne Spill av/pause-knappen og trykk på Raskere- eller Saktere-knappene.

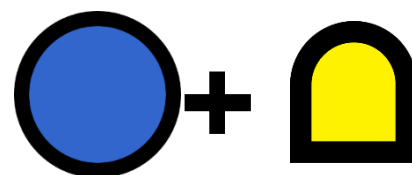


Gjenkjenningsprofiler kan konfigureres i hovedmenyen – Gjenkjenningsprofiler. Dette er fullstendig beskrevet på side .

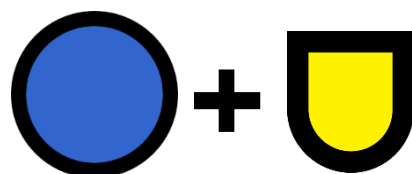

Batteriinformasjon (kun batteriversjon)

Batteristatus/-nivå

For å sjekke om batteriet lades eller utlades, gjenværende prosent og estimert gjenværende driftstid eller ladetid, trykk og hold inne Spill av/pause-knappen i 2 sekunder.

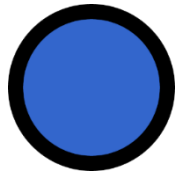

Enheten vil automatisk varsle når nettladeren er tilkoblet/frakoblet og gjeldende batteriprosent.

Enheten vil automatisk varsle når batterinivået når 20 %.

Hovedmeny

Hovedmenyen inneholder tilleggsinnstillinger for ReadEasy Evolve ECO.

For å få tilgang til hovedmenyen, trykk og hold inne knappene Neste og Forrige setning samtidig i 5 sekunder til «Hovedmeny» leses opp.

Hovedmenyen presenteres i en liste , og den vil alltid starte øverst på listen.

For å bla nedover gjennom alternativene, trykk på Saktere-knappen. For å bla opp, bruk Raskere-knappen. For å velge eller velge gjeldende alternativ, trykk på Spill av/pause-knappen. For å gå tilbake, trykk på forrige setning-knappen. Knappene fungerer slik i hele menyen for å få tilgang til alle alternativene.

Menyen er organisert som følger:

- 1. Gjenkjenningsprofiler**
- 2. Menyinnstillinger**
- 3. Avanserte innstillinger**
- 4. Om**
- 5. Gå**

Gjenkjenningsprofiler

Gjenkjenningsprofiler lar deg justere hvordan ReadEasy Evolve ECO gjenkjenner dokumentene dine.

Det finnes tre tilpassbare gjenkjenningsprofiler, noe som gjør det enkelt å bytte mellom flere språk og sidegjenkjenningsinnstillinger uten å måtte gå tilbake til hovedmenyen.

For eksempel:

Gjenkjenningsprofil 1 kan være engelsk, tysk og fransk, og språket kan endres per side (ett språk er tillatt per side).

Gjenkjenningsprofil 2 kan være engelsk og spansk som endrer språk for hver setning (bra når man lærer et språk).

Gjenkjenningsprofil 3 kan være thai. Dette kan ikke inkluderes med andre språk, da ReadEasy ikke kan bytte til dette språket automatisk.

Aktiv gjenkjenningsprofil

Dette lar deg velge den aktive gjenkjenningsprofilen.

Gjenkjenningsprofil 1, 2, 3

Lar deg konfigurere følgende innstillinger for hver av de tre gjenkjenningsprofilene. Dette er en avansert funksjon, så din lokale distributør vil sannsynligvis angi disse før ReadEasy Evolve ECO leveres til deg eller under opplæring.

1. Start lesing når gjenkjenningen er fullført (aktivert som standard)

Når dette er aktivert, begynner dokumentene å leses høyt så snart de er gjenkjent. Hvis du foretrekker å forstørre dokumentene først (tilgjengelig med den valgfrie funksjonspakken), kan det være nyttig å deaktivere dette.

2. Pause ved linjeskift (deaktivert som standard)

Når dette er aktivert, legges det til en pause på slutten av hver linje. Dette er nyttig når du leser ting som oppskrifter eller lister.

3. Automatisk språkgjenkjenningsmodus (ett språk per side som standard)

Det finnes to alternativer:

- 1. Ett språk per side** : Dette velger hovedspråket på siden fra alle språkene du har aktivert. Hvis du f.eks. har engelsk og spansk aktivert, og du leser en side med begge disse språkene tilstede, men den inneholder mer spansk, vil hele siden bli lest på spansk.
- 2. Flere språk per side**: Dette bytter automatisk mellom de aktiverte språkene dine setning for setning. Hvis du for eksempel har en tyskspråklig lærebok og deler av siden er på engelsk og deler er på tysk, vil ReadEasy Evolve ECO automatisk endre lesestemmen mellom de tyske og engelske setningene.

4. Primært gjenkjenningsspråk

Når «Automatisk språk-gjenkjenningssmodus» er satt til «Flere språk per side», er det mer sannsynlig at det valgte språket blir valgt hvis hovedspråket er aktivt.

5. Tilgjengelige gjenkjenningsspråk

En liste over tilgjengelige gjenkjenningsspråk som ReadEasy Evolve ECO støtter følger det primære gjenkjenningsspråket.

ReadEasy Evolve ECO vil se etter aktiverte språk i ethvert innhentet dokument.

Vi anbefaler å aktivere maksimalt 5 språk per gjenkjenningsprofil. Aktivering av flere samtidig støttes, men det kan redusere nøyaktigheten og hastigheten på gjenkjenningen (spesielt hvis Automatisk språk-gjenkjenningssmodus er satt til Flere språk per side).

Når du aktiverer et språk som ikke støtter automatisk språkbytte, deaktiveres alle andre språk automatisk. For en fullstendig liste over støttede språk, se side .

Hvis du regelmessig trenger å bytte mellom gjenkjenningsspråk, lar de tre tilpassbare forhåndsinnstillingene for gjenkjenning deg gjøre dette.

Menyinnstillinger

1. Grensesnittspråk

Lar deg velge meny-/grensesnittspråk (språket som brukes i menyene og for å annonsere hendelser, f.eks. «opptak», «raskere» osv.).

2. Grensesnittstemme

Velg din foretrukne meny-/grensesnittstemme (ReadEasy Evolve ECO tillater en annen lesestemme enn grensesnittstemmen).

3. Lydeffektvolum (standardinnstilt til 100 %)

Juster volumet på ReadEasy Evolve ECOs lydopptak og bevegelsesdeteksjon.

Avanserte innstillinger

1. Dato og klokkeslett

Endre dato og klokkeslett, tidssone og aktiver eller deaktiver automatisk nettverkstidssynkronisering (for enheter koblet til et nettverk).

2. Konfigurasjon av Bluetooth-hodesett

Lar deg koble til og administrere Bluetooth-lydenheter.

For å koble til en ny enhet, må du først sørge for at Bluetooth-lydenheten din er i paringsmodus (se enhetens instruksjoner for hvordan du gjør dette). Flytt deretter ned og velg «Tilgjengelige Bluetooth-enheter».

ReadEasy vil deretter lese opp navnene på eventuelle Bluetooth-enheter som finnes. Velg ønsket enhet, og trykk deretter på Spill av/Pause-knappen for å koble til den.

Som standard skal ReadEasy automatisk koble seg til den sist brukte enheten. På noen enheter må du kanskje koble den til ReadEasy Evolve MAX på nytt. For å deaktivere denne funksjonen, deaktiver alternativet «Koble automatisk til siste enhet».

For å tilbakestille Bluetooth-konfigurasjonen, velg «Tilbakestill konfigurasjonen av Bluetooth-lydenheten til standardinnstillinger».

3. Funksjonsadministrasjon

Viser status for funksjonene i ReadEasy Evolve ECO. Hvis du ønsker å aktivere en annen funksjon (f.eks. asiatiske språk eller et annet sett med stemmer), kan du kontakte din lokale distributør.

4. Setningsskift

Lar deg justere pausen mellom hver setning (i millisekunder).

Om

Gir spesifikk informasjon om din ReadEasy Evolve ECO, f.eks. produktnavn, programvareversjon og annen nyttig støtteinformasjon.

Språk

Skaffe flere stemmesett/funksjoner

Hvis du ønsker å kjøpe et ekstra sett med stemmer eller en funksjonspakke, kan du kontakte din lokale distributør.

Aktivere flere språksett/funksjoner

Når du har kontaktet distributøren din og kjøpt et språksett eller en funksjonspakke, vil de gi deg et kodet ark eller en fil du kan importere via en USB-minnepinne. Når du lagrer eller importerer dette dokumentet, låses og aktiveres den/de nye funksjonen(e) automatisk.

Støttede språk

ReadEasy støtter over 40 språk. Vær oppmerksom på at enkelte språk ikke støtter automatisk bytte (de kan ikke oppdages automatisk og må angis manuelt via en annen gjenkjenningsprofil som beskrevet på side) .

ReadEasy Evolve ECO støtter Cerence -settet med stemmer som følger:



Språk	Automatisk bryter	Stemmer
Baskisk	Ja	Miren (Kvinne)
Bulgarsk	Ingen	Daria (Kvinne)

Katalansk	Ja	Nurian (kvinne), Jordi (mann), Montserrat (kvinne), Empar (kvinne)
kinesisk	Ingen	Binbin- MI (Mann – kinesisk mandarin), Li-Li (Kvinne – kinesisk mandarin), Lili- MI (Kvinne – kinesisk mandarin), Tian-Tian (Kvinne – kinesisk mandarin), Tiantian-MI (Kvinne – kinesisk mandarin), Sinji-MI (Kvinne – Hongkong kantonesisk), Meijia-MI (Kvinne – taiwansk mandarin)
Kroatisk	Ingen	Lana (Kvinne)
Tsjekkisk	Ja	Iveta (Kvinne), Zuzana (Kvinne)
Dansk	Ja	Magnus (Mann), Sara (Kvinne)
Nederlands k	Ja	Claire- MI (Kvinne - Nederland), Xander (Mann - Nederland), Ellen (Kvinne - Belgisk)
Engelsk (India)	Ja	Rishi (Mann), Sangeeta (Kvinne), Veena (Kvinne)
Engelsk (Storbritannia)	Ja	Daniel (Mann), Fiona (Kvinne - Skotsk), Kate (Kvinne), Malcolm (Mann), Oliver (Mann), Serena (Kvinne) Moirra (Kvinne – Irsk)
Engelsk (USA)	Ja	Allison (Kvinne), Ava (Kvinne), Ava -MI (Kvinne), Joelle (Kvinne), Nathan (Mann), Noelle (Kvinne), Samantha (Kvinne), Susan (Kvinne), Tom (Mann), Zoe (Kvinne)
Engelsk (Australsk)	Ja	Karen (Kvinne), Lee (Mann)
Engelsk (New Zealand)	Ja	Tessa (Kvinne)
finsk	Ja	Onni (Mann), Satu (Kvinne)
Fransk (Canada)	Ja	Amelie (Kvinne), Amelie MI (Kvinne), Chantal (Kvinne), Nicolas (Mann)

Fransk	Ja	Audrey (Kvinne), Audrey- MI (Kvinne), Aurelie (Kvinne), Thomas (Mann)
Galisisk	Ja	Carmela (Kvinne)
Tysk	Ja	Anna (Kvinne), Anna- MI (Kvinne), Markus (Mann), Petra (Kvinne), Petra- MI (Kvinne), Viktor (Mann), Yannick (Mann)
Gresk	Ja	Melina (Kvinne), Nikos (Mann)
Hebraisk	Ingen	Carmit (Kvinne)
Ungarsk	Ja	Mariska (Kvinne)
Indonesisk	Ingen	Damayanti (Kvinne)
Italiensk	Ja	Alice (Kvinne), Alice- MI (Kvinne), Federica (Kvinne), Federica- MI (Kvinne), Luca (Mann), Paola (Kvinne), Silvia (Kvinne)
Koreansk	Ingen	Sora (Kvinne), Yuna (Kvinne)
Malayisk	Ingen	Amira (Kvinne)
norsk	Ja	Henrik (Mann), Nora (Kvinne)
Pusse	Ja	Ewa (kvinne), Krzysztof (mann), Zosia (kvinne)
Portugisisk (brasiliansk)	Ja	Felipe (Mann), Fernanda (Kvinne), Luciana (Kvinne)
Portugisisk	Ja	Catarina (kvinne), Joana (kvinne), Joaquim (mann)
Rumensk	Ingen	Ioana (Kvinne)
Russisk	Ja	Katya (Kvinne), Katya- MI (Kvinne), Milena (Kvinne), Yuri (Mann)
Slovakisk	Ingen	Laura (Kvinne)
Spansk	Ja	Diego (Mann - argentiner), Francisca (Kvinne – chilener), Carlos (Mann – colombiansk), Soledad (Kvinne – colombiansk). Jorge (Mann), Marisol (Kvinne), Marisol- MI (Kvinne), Monica (Kvinne), Monica- MI (Kvinne). Angelica (Kvinne – Meksikansk), Juan (Mann – Meksikansk), Paulina (Kvinne – Meksikansk), Paulina- MI (Kvinne – Meksikansk)

		Miren (Kvinne – Baskisk) Nurian (kvinne - katalansk), Jordi (mann - katalansk), Montserrat (kvinne - katalansk), Empar (kvinne - katalansk) Carmela (Kvinne – galisisk)
Svensk	Ja	Alva (kvinne), Klara (kvinne), Oskar (mann)
Thai	Ingen	Kanya (kvinne), Narisa (kvinne)
Tyrkisk	Ja	Cem-MI (Mann) Yelda (Kvinne)

Oppgradering av programvare

ReadEasy Evolve ECOs programvare kan oppgraderes etter hvert som nye versjoner blir tilgjengelige.

Sjekker din eksisterende programvareversjon

For å sjekke din nåværende programvareversjon, gå til Meny, gå deretter til Om og bla ned til Programvareversjon.

Bestemme den nyeste tilgjengelige versjonen

For å finne ut hva den nyeste tilgjengelige versjonen av ReadEasy Evolve ECO-programvaren er, kan du kontakte din lokale distributør eller sjekke nettstedet til Visionaid International Ltd (<http://www.visionaid.com>).

Skaffe den nyeste programvaren

Oppdatert programvare kan enten lastes ned fra Visionaid Internationals nettsted eller muligens skaffes på en USB-minnepinne fra distributøren din.

Hvis du laster ned programvaren, må den overføres til rotmappen på en USB-minnepinne.

Slik oppgraderer du

For å installere oppdateringen, sett inn minnepinnen i en av USB-portene på baksiden av enheten når ReadEasy Evolve ECO har startet og varslet at den er klar. ReadEasy Evolve ECO vil informere deg om at den har funnet

en oppdatering, versjonsnummeret og spørre om du vil installere den. For å bekrefte, trykk på Spill av/Pause-knappen, så vil oppgraderingen finne sted. Den vil bekrefte at oppdateringen har startet, og vil deretter si prosentandelen mens den oppdaterer.

Den vil si «Oppdatering fullført», trykke på spill av og pause for å starte maskinen på nytt, og den vil gjøre dette automatisk. Den vil si « ReadEasy er nå klar», og du kan begynne å bruke den som før.

For å avbryte oppgraderingen, velg «Avbryt» med Raskere- eller Saktere-knappene og bekreft med Spill av/Pause-knappen.

Batteribytte (i ReadEasy Evolve ECO med batteri)

Batteribytte inni ReadEasy Evolve ECO skal kun utføres av en autorisert distributør.

Retningslinjer for batteribruk

Maksimer batterilevetiden

ReadEasy Evolve ECO - batteriet er designet for å vare i hundrevis av lade- og utladingssykluser. For å forlenge den totale levetiden anbefales det imidlertid:

- Ikke la enheten være tilkoblet strøm permanent (og batteriet være 100 %). Over tid skader dette batteriet.
- Hvis du planlegger å ikke bruke enheten på to uker eller mer, bør du ideelt sett prøve å slå av enheten og koble den fra strømmettet når den har omtrent 60 % gjenværende lading.
- Unngå å bruke eller lade batteriet i ekstrem varme eller ekstrem kulde

Generell batteribruk

- Bruk kun den medfølgende strømadapteren.
- Ikke trekk ut og koble til apparatet fra strømmettet raskt og gjentatte ganger. Vent helst 10 sekunder mellom hver tilkobling og ny.

Vanlige spørsmål og feilsøking

Her er en liste over ofte stilte spørsmål og løsningene deres:

PROBLEM: ReadEasy Evolve ECO gjør ingenting når jeg trykker på noen av knappene.

Løsning 1: Sørg for at ReadEasy Evolve ECO er riktig koblet til og slått på, og at volumglidebryteren er oppe. ReadEasy Evolve ECO tar omtrent 20 sekunder å starte, og den vil varsle når den er klar. For svaksynte har av/på-bryteren en opplyst blå ring rundt seg når enheten er slått på. Se «Tilkobling» på side og «Slå av/på» på side for mer informasjon.

Løsning 2: Hvis du ikke bruker hodetelefoner, må du sørge for at ingen av dem er koblet til, da ReadEasy Evolve ECO automatisk vil dempe volumet når de kobles til. Se siden for mer informasjon om hodetelefoner. Sørg også for at volumet ikke er for lavt til at du kan høre det.

Løsning 3 (kun batteriversjon): Hvis batteriet er helt utladet, anbefales det å lade enheten i 1 minutt før du trykker på av/på-knappen. Hvis batteriet er tilstrekkelig ladet, vil den slå på enheten automatisk noen sekunder etter at strømadapteren er koblet til.

PROBLEM: Når ReadEasy Evolve kjører med batteri, starter den noen ganger på nytt når jeg kobler til strømadapteren.

Løsning: Dette er forventet oppførsel for enheten og forårsaker ingen skade på produktet.

PROBLEM: Når jeg prøver å ta opptak av et dokument, piper ReadEasy Evolve ECO bare etter at jeg har trykket på opptak.

Løsning 1: Noe aktiverer den automatiske bevegelsesdeteksjonsfunksjonen. Hvis du tar bilde av en bok, må du sørge for at sidene ikke beveger seg. Sørg også for at det ikke er noe annet som beveger seg i bildeområdet.

Løsning 2: Overstyr bevegelsesdeteksjon ved å ganske enkelt trykke på fangst igjen.

PROBLEM: ReadEasy Evolve ECO ser ikke ut til å lese hele dokumentet mitt.

Løsning 1: Sørg for at dokumentet er riktig plassert. Se «Plassering av dokumenter for opptak» på side .

Løsning 3: Er dokumentet tykt? I så fall kan det hende at kantene på teksten blir kuttet av under opptaket. Prøv å flytte dokumentet under midten av kameraet og ta opptaket på nytt.

PROBLEM: ReadEasy Evolve ECO leser noen ganger tilfeldige tegn før og etter dokumentet mitt.

Løsning: Dette løses vanligvis automatisk, men det kan være noen dukmønstre eller trefiberoverflater som kan forårsake et sporadisk problem. Hvis enheten din står på en mønstret eller trefiberoverflate, kan du prøve å flytte ReadEasy Evolve ECO til en blank overflate for å se om det løser problemet.

PROBLEM: ReadEasy Evolve ECO leser ord feil på omtrent samme sted på hver side.

Løsning: Sørg for at du ikke skanner et blankt dokument med lysene på i ReadEasy Evolve ECO. Se side «Belysning av/på» for detaljer om hvordan du slår lysene av og på.

Sjekk også at du ikke har takbelysning i nærheten, som kan forårsake refleksjoner i dokumentet.

PROBLEM: ReadEasy Evolve ECO forteller meg at kameraet ikke er tilkoblet.

Løsning 1: Sørg for at kameraet er riktig plassert i sporet på toppen av maskinen. Se «Koble til kameraet» på side for mer informasjon.

Løsning 2: Slå av ReadEasy Evolve ECO (hvis den er på). Koble deretter fra kameraet og strømkabelen som går inn på baksiden av ReadEasy Evolve ECO. La enheten være frakoblet i 10 minutter. Koble deretter til

strømkabelen igjen, sett kameraet i kontakten og slå ReadEasy Evolve ECO på igjen.

Salgsbetingelser

Garanti

Dette produktet har 24 måneders garanti mot produksjonsfeil fra kjøpsdatoen. Hvis du har problemer med produktet og du ikke kjøpte det direkte fra Visionaid Internasjonalt, vennligst kontakt forhandleren din først.

For alle returer og reparasjoner, kontakt din autoriserte distributør.

For batteriversjonen er selve batteriet garantert i en periode på 6 måneder fra kjøpsdatoen.



Dette produktet er CE- og UKCA-merket og overholder fullt ut all gjeldende britisk og EU-lovgivning.



WEEE-logoen på produktet eller esken indikerer at dette produktet ikke må kastes eller dumpes sammen med annet husholdningsavfall. Du er ansvarlig for å avhende alt elektronisk og elektrisk avfall ved å flytte det til det angitte innsamlingsstedet for resirkulering av slikt farlig avfall. Isolert innsamling og riktig gjenvinning av elektronisk og elektrisk avfall på avhendingstidspunktet vil bidra til å bevare naturressurser. I tillegg vil riktig resirkulering av elektronisk og elektrisk avfall sikre menneskers helse og miljøet. For mer informasjon om avhending, gjenvinning og innsamlingssteder for elektronisk og elektrisk avfall, kan du kontakte din lokale myndighet, renovasjonstjenesten, butikken der du kjøpte utstyret, eller Visionaid International Ltd.

© Visionaid International 2024

Tillegg A: Teknisk informasjon

Generell informasjon	
Fotavtrykk (BxD)	220 x 110 mm 8,7 x 4,3 tommer
Enhetens mål (kamera frakoblet) (B x D x H)	220 x 110 x 205 mm 8,7 x 4,3 x 8,1 tommer
Enhetens mål (kamera montert) (BxDxH) (fotavtrykket forblir uendret)	220 x 280 x 370 mm 8,7 x 11 x 14,6 tommer
Vekt - Modell uten batteri :	1,66 kg (3,7 pund)
Vekt - Batterimodell:	1,92 kg (4,2 pund)
Kamera:	13 MP
Hodetelefontilkobling:	3,5 mm stereokontakt

Driftsforhold	
Relativ fuktighet:	<70 %, ingen kondens
Temperatur:	0 til 35 °C

Lagrings- og transportforhold	
Relativ fuktighet:	<95 %, ingen kondens
Temperatur:	0 °C til 45 °C

Tillegg B: Batterispesifikasjoner (kun batterimodell)

Batteriinformasjon	
Batteritype	Oppladbart, litiumionbatteri
Batteriets driftstid	6–8 timer med kontinuerlig bruk (kameraets LED-lys er av i henhold til bruksanbefalingen)
Ladetid	1,5 til 2 timer
Kapasitet	10 000 mAh , 14,4 V = 2,5 Ah (36 Wh)

Vekt	310 g
------	-------