

READEASY EVOLVE ECO

Hurtiguide

Koble til kameraet



Kamera
plassering



Betjeningsknapper

Kort trykk: Forrige setning
Langt trykk: Forrige ord & staver ordet

Kort trykk: Neste setning
Langt trykk: Neste ord & staver ordet


Raskere

Saktere

Raskere & saktere samtidig:
Endre stemme

Play /
Pause

Kort trykk: Ta bilde
Langt trykk: Tabell modus
(for bankutskrifter o.l.)

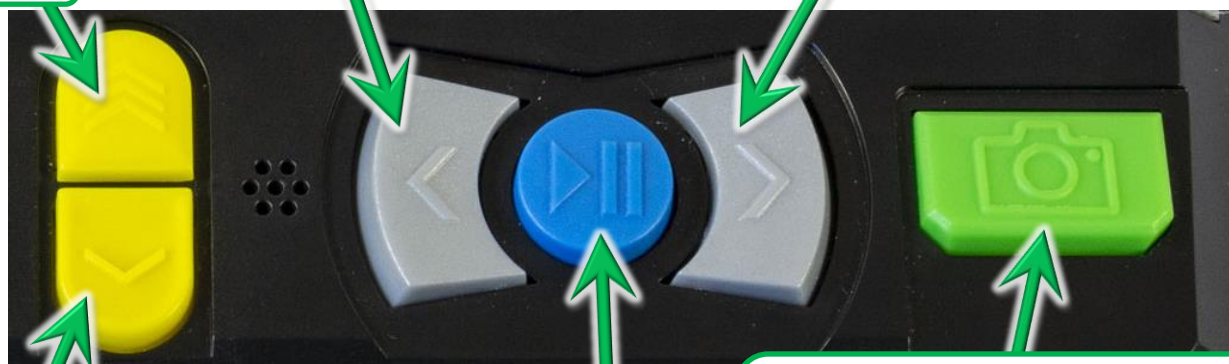

Av / På, Volum og Hodetelefoner

Av / På

For å slå på ReadEasy Evolve, trykk på Av / På knappen som sitter i bakkant på toppens høyre side. Knappen er rund og plassert nedsunket.



For å øke eller senke lyden, bruk skyvebryteren på maskinens høyre kortside. Bryteren kan skyves opp eller ned.

Hullet for inngang av hodetelefoner (3,5 mm jack) er plassert rett bak skyvebryteren for volum når den er plassert på laveste nivå.

Volum skyvebryter



Hodetelefon inngang (3.5mm stereo)

Kontakt oss

Synshjelpemidler AS
Postboks 5915 Majorstuen
Sporveisgata 10
0354 Oslo

Tlf:
23 21 55 55
E-post:
hjelpemidler@synshjelpemidler.no

www.synshjelpemidler.no



Synshjelpemidler AS
Norges Blindforbund