

sensio

KAY Speech Alerter

Bruks- og monteringsanvisning



Produktnummer: 606306

Dokument: 9159-2

Innhold

Sikkerhet	3
Introduksjon	3
Kom i gang	5
Innstillinger	6
Feilsøking	8
Spesifikasjoner	10
Vedlikehold	10
Resirkulering	11
Symboler	11
Godkjenninger	12
Support	12

Sikkerhet

Sikkerhetsråd

- Batteriet må ikke punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer eller andre direkte varmekilder.
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys.


Introduksjon

I esken

- KAY Speech Alerter
- 2 × AA litiumbatterier
- Veggbrakett med låsedel
- Borrelåser
- Våtserviett
- Bruksanvisning

Produktbeskrivelse

KAY er en tidsstyrt talevarsler som gir talebeskjed til brukeren når vedkommende er i ferd med å utføre en bestemt handling. Den brukes ofte til å varsle passasje eller vandring, og kan kobles til alle sensorer i FlexiBlink-systemet.

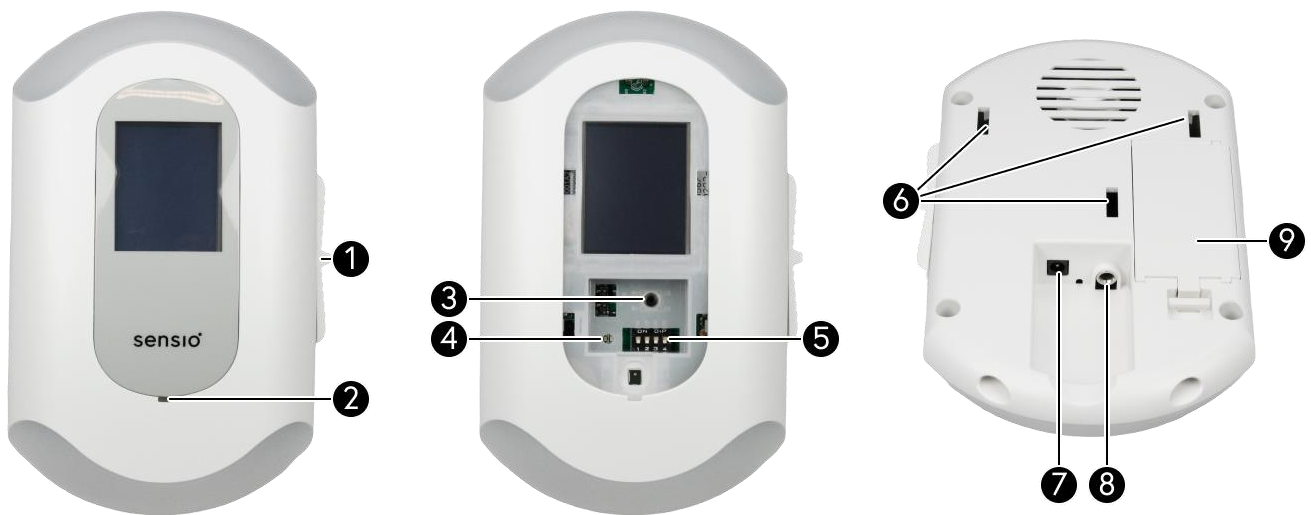

1. Volumkontroll
2. Spor for åpning av frontlokk
3. Pairing-knapp
4. Lysindikator
5. Funksjonsbrytere
6. Spor for veggbrakett
7. Strømtilkobling (Strømadapter medfølger ikke)
8. Signalinngang for tilkobling av sensor
9. Batterideksel

Kom i gang

KAY kan settes opp til å gi to ulike talebeskjeder, avhengig av når på døgnet den blir aktivert.

KAY må kobles til en sensor:

- **FLORA Floor Mat Sensor**
- **PIA PIR Motion Sensor**
- **PIA PIR Passage Narrow Sensor**
- **PIA PIR Passage Sensor**
- **MINA Magnetic Sensor**
- **SOFIA Bed Mat Sensor**
- **SOFIA Chair Mat Sensor**
- Eller annen type bryter for å varsle passasje, vandring eller behov for assistanse.

Montering

1. Sett inn de medfølgende batteriene i batterilommen på baksiden. Den flate siden på batteriene på batteriene (**minus**) skal vende oppover.
2. **Montering med borrelås:**
 - a. Vask området der enheten skal monteres med spritservietten som følger med.
 - b. Vent 1 minutt før dekkpapiret på borrelåsen fjernes og festes på veggbraketten.
 - c. Fest aktivitetsvarsleren i sporene på veggbraketten.
 - d. Trykk aktivitetsvarsleren med veggbraketten på plass på veggen, og hold den fast i 30 sekunder.
3. **Alternativt:** Veggbraketten kan skrues fast.
4. Løft ned aktivitetsvarsleren, og koble til sensoren.
5. Heng aktivitetsvarsleren opp igjen på veggbraketten.

Sammenkobling

Alle FlexiBlink-enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles. Enhetene må være i samme rom under sammenkoblingen.

For å sammenkoble et FlexiBlink-system må det alltid finnes en **stasjonær mottaker** som hovedenhet, for eksempel **IRIS Alerter**, **ALMA Alerter** eller **BRITT Bed Shaker**.

JUNIOR Assist eller **NORA Alert Watch** kan brukes som hovedenhet hvis systemet kun består av portable enheter.

1. Vipp **funksjonsbryter 1** opp på KAY.
2. På hovedenheten: Velg **Inviter** via skjermen eller trykk **2 ganger** på **Pairing-**knappen.
3. På KAY: Trykk **1 gang** på **Pairing-**knappen.
4. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2–3 sekunder, eller når meldingen «**Vellykket sammenkobling**» vises på skjermen.

Innstillinger

Standardinnstillinger

KAY har 2 oppsett som man kan tilpasse etter behov. Hver av disse kan ha en talebeskjed på opptil 10 sekunder.

- **Varsling A**
 - Tidsrom: 22:00 – 06:00
 - Aktivert: Ja
 - Talebeskjed: "Det er natt, gå til sengs"
- **Varsling B**
 - Tidsrom: 06:00 – 22:00
 - Aktivert: Nei
 - Talebeskjed: "Lås døren når du går ut"

Endre innstillinger

1. Ta av frontlokket, og bruk skjermen til å gå til **Innstillinger**.
2. Velg **Varsling A** eller **Varsling B**.
3. Velg klokkeslett for når varslingen skal starte, og trykk **Neste**.
4. Velg klokkeslett for når varslingen skal stoppe, og trykk **Neste**.
5. På skjermen vises nå følgende for valgt varsling:
 - a. Trykk på **avspillingssymbolet** for å høre gjeldende talebeskjed.
 - b. Trykk på **bjellesymbolet** for å slå varsling av eller på. (En strek over bjellen betyr at varsling er av.)
 - c. Trykk på **mikrofonsymbolet** for å spille inn en ny talebeskjed.
6. Følg instruksjonene på skjermen. Snakk klart og tydelig med normalt stemmenivå, ca. 5–10 cm fra mikrofonen, for best resultat.
7. Spill av og lytt til den innspilte talebeskjeden.
8. Juster volumkontrollen til et passende nivå mens beskjeden spilles av. (Lydnivået vises også som en **volumsøyle** øverst til venstre i displayet.)

- **Produktet aktiveres først når lokket settes på.**
- **Pass på at skjermen slokker når frontlokket settes på, for å unngå unødvendig batteribruk. Enheten vil ikke spille av talebeskjed dersom skjermen er tent.**
- **Etter at KAY har talt, eller batteriet er satt inn, tar det ca. 30 sekunder før enheten er klar til å spille av ny talebeskjed.**

Testing

1. Sett tidspunktet slik at det ligger innenfor testens tidsrom.
2. Sett frontlokket på plass.
3. Aktiver sensoren ved å utføre handlingen som skal utløse varslingen.
4. Lytt etter talebeskjeden.
5. Juster tidspunktet for varslingen til ønsket tidsrom.

Funksjonsbrytere



Funksjonsbryterne kan brukes til spesialtilpasninger:

- **Bryter 1:** Aktiver varsling til FlexiBlink mottakere.
- **Bryter 2:** KAY varsler med hvitt lys oppe og nede når bryter 2 er satt på.
- **Bryter 3:** Ikke i bruk.
- **Bryter 4:** Systeminnstillinger – brukes til å stille klokke eller dato, kalibrere touch-skjermen og tilbakestille til fabrikkinnstilling.

Bruk av bryter 4

1. Vipp bryter 4 opp.
2. Sett frontlokket på og ta det av igjen for å gå til innstillingsmenyen.
3. Trykk **Innstilling** på skjermen, og velg ønsket funksjon fra menyen.
4. Når justeringen er ferdig, vipp bryter 4 ned.
5. Sett frontlokket på plass.

Feilsøking

Det kommer ingen talebeskjed

Sjekk følgende:

- **Batteriet er tomt:** Bytt batteri
- **Tidsrommet for varsling er feil:** Endre det i **Innstillinger** i menyen.
- **Lokket er ikke satt riktig på:** Pass på at displayet slokker, eller trykk lokket godt på plass.
- **Varslingen er slått av:** Aktiver talebeskjeden.
- **Sensoren er ikke korrekt montert:**
 - Ta av dekselet på aktivitetsvarsleren.
 - Aktiver sensoren.
 - Kontroller at et rødt paragraftegn vises øverst til venstre på displayet.
 - Hvis symbolet vises, fungerer sensoren som den skal.

Klokken viser feil tid

Still dato og/eller klokke. [Se Innstillinger](#)

Berøring på skjermen registreres ikke

Kalibrer touch-skjermen:

- Sett alle funksjonsbryterne opp.
- Sett frontlokket på plass.
- Ta av frontlokket igjen.
- Følg instruksjonene som vises på skjermen.
- Sett funksjonsbryterne ned igjen.
- Sett frontlokket tilbake på plass.

Skjermen varsler «Lavt batteri»

KAY trenger nye batterier. Bytt batteriene.

Merk: Det kan være en liten forsinkelse i batterimålingen. Etter at nye batterier er satt inn:

1. Ta av frontlokket.
2. Kontroller at meldingen «Bytt batteri» ikke lenger vises på skjermene.

Spesifikasjoner

Tekniske data

- **Batteri:** 2 stk. 1,5V AA litiumbatterier
- **Strømadapter:** FlexiBlink strømadapter, 15VDC / 230VAC (kjøpes separat)
- **Temperatur:** -10 °C – 40 °C
- **IP-grad:** IP20
- **Radiofrekvens:** 2400 – 2483,5 MHz
- **Sendereffekt:** maks. 20 mW

Dimensjoner

- **Høyde:** 150 mm
- **Bredde:** 95 mm
- **Dybde:** 40 mm
- **Vekt:** 240 g

Vedlikehold

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Oppdateringer

For å oppdatere FlexiBlink-enheter må GURO Gateway være tilknyttet boligen. Se oppdateringer på Sensio sine nettsider.

<https://vestfold.sensio.io/update>

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Symboler

Symbol Beskrivelse



Varenummer



Serienummer



Batch-nummer



Unikt identifikasjonsnummer



Produsent



Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.



Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.

Godkjenninger

Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse til gjeldene krav for CE-merking. Se samsvarserklæring på Sensio sine nettsider for ytterligere informasjon.

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS, Møllergata 4, 0179 Oslo

- E-post: post@vestfoldaudio.no
- Nettside: vestfold.sensio.io
- Telefon: +47 33 47 33 47

Skann QR-koden for mer informasjon



- Produktinfo
- Bruks- og monteringsanvisning (PDF)
- Hjelpvideoer