



Fallsensor P193AB

Brukerhåndbok

Modell: P193
Produktversjon: v1
Fastvare: v1.0

Alert-iT og Alert-iT-logoen er enten registrerte varemerker eller varemerker for iTs Designs Ltd.

Copyright © 2025 iTs Designs Ltd.
Alle rettigheter forbeholdt.

Takk for at du valgte et Alert-iT varslingsystem

Med en forpliktelse til kvalitet og innovasjon er vi i stand til å gi deg et robust og pålitelig system for å hjelpe omsorgspersoner med enkeltpersoners beskyttelse. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre riktig oppsett, bruk og vedlikehold av ditt nye produkt i årene som kommer.

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp angående dette produktet eller andre Alert-iT-produkter, er vårt erfarne team tilgjengelig for å hjelpe. Vennligst finn kontaktinformasjon nedenfor. Ikke glem at du også kan bli med oss på Facebook, Twitter og LinkedIn hvor du finner enda mer informasjon og råd.

Produktet ditt er produsert av et team av bransjeeksperter med mer enn 20 års erfaring med å designe, produsere og distribuere omsorgsalarmer.

www.alert-it.co.uk

Telefon: +44 (0) 1530 239 900

E-post: sales@alert-it.co.uk

Revisjonsoversikt:

Dato	Navn	Kort beskrivelse av endring
02.05.25	Bent-Håvard Sollid	Første utgave, basert på: UH1521-ENG P193 Brukerhåndbok. Versjon: 1.0.0 [18. februar 2025].

Innhold

1	Tiltenkt bruk	4
1.1	Tiltenkt operatør/nærperson	4
1.2	Produsentens ansvar	4
1.3	Om denne bruksanvisningen	4
2	Sikkerhet.....	4
2.1	Forklaringer av merkingene som brukes på enheten og i dokumentasjonen	4
2.2	Sikkerhetstiltak.....	5
2.3	Utsiktet justering av innstillinger.....	6
3	Pakkens innhold	6
3.1	Kompatibelt utstyr.....	6
4	Introduksjon	6
4.1	Produktbeskrivelse	7
5	Oversikt	7
6	Grunnleggende funksjoner	7
6.1	Slå på enheten.....	7
6.2	Alarm for assistanseanrop	7
6.3	Tilbakestilling av alarmer.....	7
6.4	Slå av enheten.....	7
6.5	Tilkobling til radiosystemer	8
6.6	Falldeteksjon	8
7	Kontroller	8
7.1	Ukentlig kontroll – alarmaktivering	8
8	Innsetting av batterier og batteriets levetid	8
9	Bruk av profilredigering (kun for installatører)	8
9.1	Tilkobling	8
9.2	Enhetsinnstillinger.....	9
10	Alert-it begrenset garantierklæring	10
11	Rengjøring.....	12
12	Avfallshåndtering av enheten etter bruk	12
13	Samsvarserklæringer	12
14	Tekniske spesifikasjoner	12
14.1	Kontrollenhet.....	12
14.2	Omgivelsesforhold	12
14.3	Produktsamsvar	13
15	Alarm- og feilkoder.....	13
15.1	Feilkoder.....	13
15.2	Alarmer.....	13

1 Tiltentkt bruk

Produktet er ment å varsle omsorgspersonen om;

- Brukeren kan ha falt.
- Brukeren trykker på ringeknappen for å be om hjelp eller assistanse.

1.1 Tiltentkt operatør/nærperson

Operatøren må være en voksen som fullt ut forstår instruksjonene og bruksbegrensningene nevnt i denne bruksanvisningen. Ellers trengs ingen spesielle ferdigheter eller kunnskaper for operatøren.

1.2 Produsentens ansvar

ITs Designs Ltd. (T/A Alert-iT Care Alarms) er ansvarlig for å sikre sikkerheten, påliteligheten og ytelsen til enheten, forutsatt at:








- Enheten er installert, brukt og rengjort i samsvar med instruksjonene i denne bruksanvisningen.
- Eventuelle endringer på enheten, vedlikehold og reparasjoner utføres av en person som er opplært av iTs Designs Ltd eller sine representanter.
- Eventuelle reservedeler eller tilbehør som brukes er godkjent av iTs Designs Ltd.
- Alt tilbehør skiftes ut som anbefalt av produsenten.





1.3 Om denne bruksanvisningen

- Les alle advarsler og påminnelser i denne bruksanvisningen med forsiktighet for å unngå farlige situasjoner og skader.
- Ta kontakt med utstyrsleverandøren hvis det er nødvendig med hjelp til å sette opp, bruke eller vedlikeholde utstyret.
- Vennligst rapporter eventuelle uventede operasjoner eller hendelser til utstyrsleverandøren din.

2 Sikkerhet

2.1 Forklaringer av merkingene som brukes på enheten og i dokumentasjonen

	Serienummer.
	Katalognummer.
	Produsent.
	Produksjonsdato.
	Forsiktig - Se bruksanvisningen.
	Se bruksanvisningen.
	Produktet er kun for innendørs bruk.

	CE-merke. (produktet er i samsvar med de relevante EU-kravene.)
	UKCA-merke (produktet er i samsvar med de relevante britiske regulatoriske kravene).
	Symbol for det europeiske direktivet om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr (EWW-direktivet) 2002/96/EC om avfall fra elektronisk utstyr.
	Indikerer at produktet er i samsvar med det europeiske direktivet 2002/95/EF om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (vanligvis referert til som direktivet om begrensning av farlige stoffer eller RoHS).

2.2 Sikkerhetstiltak

Dette Alert-iT-produktet er designet med behørig hensyn til pålitelighet og integritet. Selv om det tilbyr en svært årvåken varslingsmetode, er det alltid mulig at en nødsituasjon kan forbli uoppdaget av en rekke årsaker (inkludert funksjonsfeil), og i livstruende situasjoner er det tilrådelig å bruke Alert-iT-systemet i forbindelse med tilleggsteknikker. Verken produsenten eller dennes agent kan akseptere juridisk ansvar for å levere et system som er ufeilbarlig. Pleieren er ansvarlig for å vurdere risikoen ved bruk av dette utstyret og eventuelle innstillinger knyttet til det.

- Forsikre deg om at enhver snor som brukes har en løskobling for å redusere risikoen for sammenfiltring eller kvelning.
- Denne enheten er kun utformet for å brukes som et hjelpemiddel for en omsorgsperson.
- Ikke bruk denne enheten til andre formål enn det som er spesifisert av produsenten.
- Bruk bare skjermen med tilbehør som er godkjent for bruk med dette produktet og kun i henhold til instruksjoner.
- Ikke prøv å reparere enheten selv.
- Utstyret er ikke egnet for bruk i nærvær av en brennbar anestesiblanding med luft, oksygen eller lystgass.
- Ingen vedlikehold av produktet er tillatt under bruk.
- Ikke flytt eller transporter enheten under bruk.
- Hvis sengen utstyrt med enheten må flyttes, husk å koble fra alle kabler.
- Ta ut batteriene når enheten ikke er i bruk eller når den oppbevares over en lengre periode. Alkaliske batterier kan selvutlades, begynne å lekke og forurense enheten.
- Ikke bruk oppladbare batterier eller litium-ion-batterier! Slike batterier har en risiko for overoppheting, ødeleggelse av enheten og mulig fare for brukeren.
- Sørg for, ved å teste, at alarmvarslene mottas på omsorgspersonens plassering(er).
- Rengjør og desinfiser hvert element regelmessig i henhold til informasjon om dette.
- Test enheten regelmessig som beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Som med alt elektronisk utstyr er det potensial for at utstyret kan forstyrre eller påvirkes av forstyrrelser fra andre elektriske eller elektroniske enheter. Unngå derfor å plassere enheten, sensoren eller tilkoblingskabel(e) i umiddelbar nærhet av sensitive elektroniske enheter eller enheter som produserer sterke elektromagnetiske felt som radiosendere, mobiltelefoner eller strømkabler.
- Pleieren må aldri fjerne en alarm uten å sjekke brukerens tilstand.
- Noe tilbehør er utstyrt med små skruer og har plastposer. Pass på at sårbare mennesker som kan kveles på dem ikke får tilgang til disse.

- Ikke la enheten bli våt.
- Dette produktet er kun til innendørs bruk i tørre omgivelser.
- Hvis utstyret er modifisert på noen måte, må passende inspeksjon og testing utføres for å sikre fortsatt sikker bruk av utstyret.
- Ikke installer denne enheten nær eller oppå en annen enhet. Men hvis dette ikke kan unngås, må brukeren sørge for at enheten fungerer på normal måte.
- En risikovurdering må utføres for å avgjøre om pålitelighetsnivået som tilbys av enheten er tilstrekkelig eller om det er behov for tilleggsutstyr.
- Det skal tas hensyn til brukernes sannsynlighet for å utilsiktet endre systemet.

2.3 *Utilsiktet justering av innstillinger*

- Feil alarmparametere kan føre til falske varsler ELLER kan føre til at alarmvarslingen ikke blir aktivert ved behov.
- For å sikre korrekt drift av enheten, plasser sensoren i henhold til disse instruksjonene.
- Endring av radioadresse uten også å endre den på mottakerutstyret, vil resultere i at alarmvarsling ikke mottas.

3 Pakkens innhold



Ant.	Hva	Benevnelse
1	Fallalarm	P193
1	Batteri type CR2450, 3 V knappecelle, montert	P160H
1	Nakke rem	
1	Belteklips	
1	Sikkerhetspinne	

3.1 *Kompatibelt utstyr*

	Hva	Benevnelse
	Personsøker	P137, P202
	Rekkeviddeforsterker	P164
	Radiomottaker impuls-ut P155	P155B

4 Introduksjon

Denne bruksanvisningen beskriver bruken av Alert-iT Fallalarm. Versjonen som disse instruksjonene gjelder for, vises på forsiden av dette dokumentet. Dette bør refereres til og sammenlignes med betegnelsen som vises på produktets merking som finnes på toppen av enheten. Hvis dette dokumentet ikke passer for produktet ditt, kan du se støtte-delen på nettstedet vårt for alternative instruksjoner.

Følg alle instruksjoner i dette dokumentet angående installasjon, bruk og rengjøring av enheten.

4.1 Produktbeskrivelse

Personen som trenger hjelp, skal bære fallalarmen. Omsorgspersoner varsles via visuelle og hørbare varsler (hvis aktivert) og/eller et varsel via et eksternt system, for eksempel en personsøker. Tiltent miljø er vanligvis et familiehjem eller en omsorgsinstitusjon.

5 Oversikt



6 Grunnleggende funksjoner

6.1 Slå på enheten

- Trykk kort på knappen for å vekke enheten.
- Ved oppstart vil alarmlys lyse kort.

6.2 Alarm for assistanseanrop

- Trykk kort på knappen for å utløse en alarm.
- Enheten vil pipe og alarmlampen vil begynne å blinke hvert 4. sekund.

6.3 Tilbakestilling av alarmer

- Hold inne knappen i 2 sekunder.
- Enheten piper to ganger for å bekrefte at alarmer er tilbakestillt.
- Alarmlampen slutter å blinke.

Merk: lyden ved tilbakestilling kan deaktiveres om nødvendig.

6.4 Slå av enheten

For å slå av enheten må du først utløse en alarm, deretter holde inne knappen for å tilbakestille alarmer og fortsette å holde inne for å slå av enheten.

- Trykk kort på knappen for å utløse en assistansealarm.
- Hold inne knappen i 8 sekunder.
- Etter 2 sekunder vil du høre de to pipelydene når alarmer tilbakestilles.
- Fortsett å holde nede til alarmlampen lyser.
- Slipp knappen.
- Enheten vil nå slå seg av.
- Når enheten slås av, sender den en feilkode via radioen for å advare deg om uønskede avstengninger. Se kapittel 9.2 for mer informasjon.

6.5 Tilkobling til radiosystemer

Fallalarmen må kobles til en radiomottaker for å kunne varsle. På produktetiketten vil du se den unike adressen for denne enheten og denne brukes sammen med «type» på produktetiketten, for å koble fallalarmen til mottakerutstyret.

6.6 Falldeteksjon

En falltilstand utløses når vippevinkelen på merket overstiger 55° fra vertikal posisjon i mer enn 10 sekunder.

- Når et fall oppdages, vil enheten begynne å lage en hørbar pipelyd.
- Hvis enheten forblir i en fallende tilstand i 20 sekunder, vil en alarm utløses (totalt 30 sekunder).
- Hvis enheten settes oppreist igjen før alarmen utløses, vil pipelyden stoppe, alarmen vil ikke utløses og tidtakeren nullstilles.

7 Kontroller

7.1 Ukentlig kontroll – alarmaktivering

Sørg for at omsorgspersonen(e) mottar alarmvarslene. Utløs en alarm manuelt om nødvendig.

8 Innsetting av batterier og batteriets levetid

Enheden drives av 1x CR2450 knappcellebatteri (3V 600mAH).

Installer og fjern batteriet som følger:

1. Skru ut de fire skruene på baksiden av boksen.
 2. Ta ut batteriet ved å løfte fliken og deretter skyve batteriet ut. Det kan være nødvendig med et lite verktøy for å skyve batteriet løs.
 3. Sett inn et nytt batteri i enheten. OBS: batteriet må stå riktig vei. Se polaritetssymbolet på batterikontakten.
 4. Skru de fire skruene tilbake i bakdekselet.
- Batterilevetiden vil variere mellom 10 måneder og 5 år, avhengig av alarmfrekvensen, hvor raskt alarmer reageres på og om Securelink™-radiopulssignalet er aktivert.
 - Når batteriene er lave, blinker "Alarm"-lampen hvert 6. sekund, og enheten begynner å sende et varsel om lavt batteri.
 - Enheden er testet og trygg å bruke med følgende batteri: CR2450.

9 Bruk av profiledigering (kun for installatører)

PC programmet kan lastes ned fra nettsiden vår på følgende adresse:

www.alert-it.co.uk/support/

Merk: Dette er et program kun for Windows (7/10/11).




Alert-IT Profile
Editor

9.1 Tilkobling

Enheden kan konfigureres på nytt som følger:

- Koble produktet til en PC ved hjelp av programmeringsverktøyet.
- Alarmlampen vil begynne å blinke raskt rødt.
- Hvis lyset ikke blinker, trykk kort på knappen for å vekke enheten.
- Kjør PC programmet og klikk på «Connect New Device».

Når du er tilkoblet, skal du få presentert følgende skjermbilde der du kan endre diverse innstillinger.

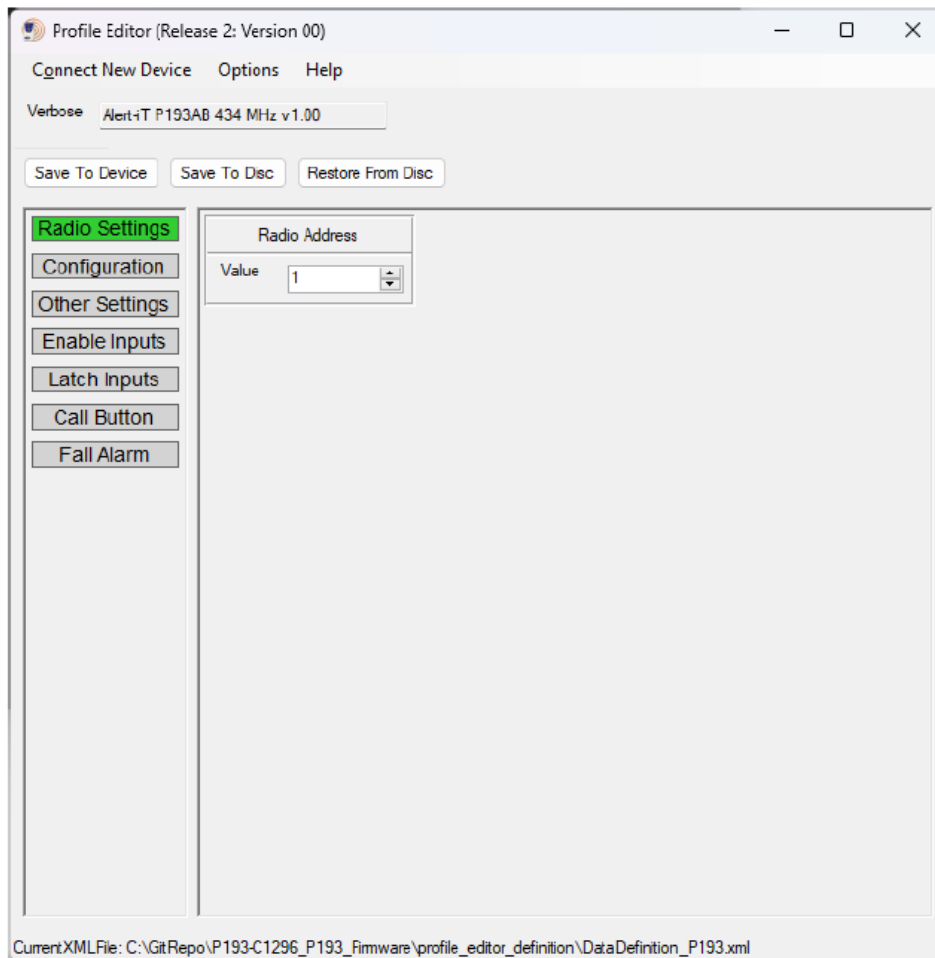

9.2 Enhetsinnstillinger

Det finnes forskjellige innstillinger som kan konfigureres.

- Radioadress
Hvis flere enheter brukes på samme sted, må hver enhet bruke en unik radioadresse mellom 1 og 127. Enheten leveres med en tilfeldig adresse og vi anbefaler kun å justere den hvis det oppstår duplisering på stedet.
- Alarm light
Denne innstillingen aktiverer blinkende alarmlys. [Standard: På]
- Alarm sounds
Denne innstillingen aktiverer interne alarmmelodier. [Standard: Av]
- Reset sounds
Denne innstillingen aktiverer lyden som spilles av når alarmer tilbakestilles. [Standard: På]
- Beep sounds
Denne innstillingen aktiverer pipelyden som høres når brukeren trykker på ringeknappen. [Standard: På]
- Fall warning sounds
Denne innstillingen aktiverer pipelyden som høres når et fall er oppdaget. [Standard: På]
- Safelink
Denne innstillingen aktiverer «Failsafe» radiosignalet. [Standard: På]
- Slå av skjermen ved avstengning
Denne innstillingen aktiverer feilvarsling når enheten er slått av. [Standard: På]

- Send monitor off on Power-down
Denne innstillingen aktiverer feilvarsling når en alarm utløses. [Standard: På]
- Sleep on power-up
Denne innstillingen gjør at enheten går inn i hvilemodus når batterier settes inn.
[Standard: Av]
- Alarm timeout
Denne innstillingen gjør at enheten automatisk tilbakestilles hvis en alarm forblir aktiv.
[Standard: 30 minutter]
- Clear delay
Denne innstillingen forsinker at det signalet som sendes når en alarm tilbakestilles. Dette kan brukes for å få en assistansealarm til å tilbakestilles automatisk etter en kort periode.
[Standard: Av]

10 Alert-it begrenset garantierklæring

I det usannsynlige tilfellet at produktet ditt trenger garantiservice, vennligst kontakt leverandøren, distributøren eller produsenten. For å unngå unødvendige ulemper fra din side, anbefaler vi at du leser disse bruksanvisningene nøye før du søker garantiservice.

Med denne garantien garanterer Alert-iT at produktet er fritt for defekter i materialer og utførelse på datoen for den opprinnelige kjøpsdatoen i en periode på tre (3) år fra denne datoen. Hvis det innenfor garantiperioden viser seg at produktet er defekt (på datoen for det opprinnelige kjøpet) på grunn av feil materialer eller utførelse, vil Alert-iT, uten kostnad for arbeid eller deler, reparere eller (etter Alert-iTs skjønn) erstatte produktet eller dets defekte deler i henhold til vilkårene og begrensningene nedenfor. Alert-iT kan erstatte defekte produkter eller deler med nye eller renoverte produkter eller deler. Alle beholdte produkter og erstattede deler blir Alert-iTs eiendom.

- Garantitjenester ytes kun dersom den originale fakturaen eller salgskvitteringen (som angir kjøpsdato, modellnavn og forhandlernavn) fremlegges sammen med det defekte produktet innen garantiperioden. Alert-iT kan nekte gratis garantitjenester dersom disse dokumentene ikke fremlegges, eller dersom de er ufullstendige eller uleselige. Denne garantien gjelder ikke dersom modellnavnet eller serienummeret på produktet er endret, slettet, fjernet eller gjort uleselig.
- Denne garantien dekker ikke transportkostnader og risikoer forbundet med transport av produktet ditt til og fra Alert-iT.
- Denne garantien dekker ikke:
 - a) beleggssensorer eller fuktighetssensorer (se individuelle produkter for garantier).
 - b) periodisk vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler på grunn av slitasje.
 - c) forbruksvarer (komponenter som forventes å kreve regelmessig utskifting i løpet av et produkts levetid, for eksempel batterier).
 - d) skader eller defekter forårsaket av bruk, drift eller behandling av produktet som ikke er i samsvar med normal bruk.
 - e) skader på eller endringer på produktet som følge av:
 - Misbruk, inkludert:
 - a. behandling som resulterer i fysisk, kosmetisk eller overflateskade eller endringer av produktet.
 - b. manglende installasjon eller bruk av produktet til normalt formål eller i samsvar med Alert-iTs instruksjoner for installasjon eller bruk.
 - c. manglende vedlikehold av produktet i samsvar med Alert-iTs instruksjoner om riktig vedlikehold.

- d. installasjon eller bruk av produktet på en måte som ikke er i samsvar med tekniske eller sikkerhetsmessige lover eller standarder i landet der det er installert eller brukt.
- Tilstanden til eller defektene i systemer som produktet brukes eller er innlemmet i, med unntak av andre Alert-iT-produkter som er utviklet for bruk med produktet.
 - Bruk av produktet med tilbehør, periferiutstyr og andre produkter av en annen type, tilstand og standard enn foreskrevet av Alert-iT. iv. reparasjon eller forsøk på reparasjon av personer som ikke er autorisert av Alert-iT.
 - Justeringer eller tilpasninger uten Alert-iTs forutgående skriftlige samtykke, inkludert: oppgradering av produktet utover spesifikasjonene eller funksjonene som er beskrevet i bruksanvisningen, eller modifikasjoner av produktet for å samsvare med nasjonale eller lokale tekniske eller sikkerhetsstandarder i andre land enn de som produktet ble spesifikt utviklet og produsert for.
 - Forsømmelse.
 - Ulykker, brann, væsker, kjemikalier, andre stoffer, flom, vibrasjoner, overdreven varme, utilstrekkelig ventilasjon, overdreven eller feil tilførsels- eller inngangsspenning, stråling, elektrostatiske utladninger inkludert belysning, andre ytre krefter og støt.
- Denne garantien dekker kun produktets maskinvarekomponenter.

Med unntak av det som er angitt ovenfor, gir Alert-iT ingen garantier (uttrykte, underforståtte, lovbestemte eller andre) angående produktets eller tilhørende eller bestanddeleres programvarekvalitet, ytelse, nøyaktighet, pålitelighet, egnethet for et bestemt formål eller annet. Hvis dette unntaket ikke er tillatt eller fullt ut tillatt i henhold til gjeldende lov, utelukker eller begrenser Alert-iT sine garantier kun i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov. Enhver garanti som ikke kan utelukkes fullt ut, vil være begrenset (i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov) til varigheten av denne garantien.

Alert-iTs eneste forpliktelse under denne garantien er å reparere eller erstatte produkter som er underlagt disse garantivilkårene. Alert-iT er ikke ansvarlig for tap eller skade knyttet til produkter, tjenester, denne garantien eller annet, inkludert - økonomiske eller immaterielle tap - prisen betalt for produktet - tap av fortjeneste, inntekter, data, glede eller bruk av produktet eller tilknyttede produkter - indirekte, tilfeldige eller følgeskader. Dette gjelder uansett om tapet eller skaden er knyttet til: svekket eller manglende drift av produktet eller tilknyttede produkter på grunn av defekter eller utilgjengelighet mens produktet var hos Alert-iT, som forårsaket nedetid, tap av brukertid eller driftsavbrudd unøyaktighet i utdata fra produktet eller tilknyttede produkter. Dette gjelder tap og skader under enhver juridisk teori, inkludert uaktsomhet og andre erstatningsrettslige handlinger, kontraktsbrudd, uttrykkelig eller underforstått garanti og objektivt ansvar (selv der Alert-iT har blitt informert om muligheten for slike skader).

Der gjeldende lov forbyr eller begrenser disse ansvarsunntakene, utelukker eller begrenser Alert-iT sitt ansvar kun i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov. For eksempel forbyr noen land utelukkelse eller begrensning av skader som følge av uaktsomhet, grov uaktsomhet, forsettlig mislighold, bedrag og lignende handlinger. Alert-iTs ansvar under denne garantien vil ikke under noen omstendigheter overstige prisen som er betalt for produktet, men dersom gjeldende lov kun tillater høyere ansvarsbegrensninger, gjelder de høyere begrensningene.

Forbrukere har juridiske (lovbestemte) rettigheter i henhold til gjeldende nasjonale lover knyttet til salg av forbrukerprodukter. Denne garantien påvirker ikke lovbestemte rettigheter

du måtte ha, eller de rettigheter som ikke kan utelukkes eller begrenses, eller rettigheter mot personen du kjøpte produktet fra. Du kan gjøre gjeldende eventuelle rettigheter du har etter eget skjønn.

11 Rengjøring

Du kan tørke av merket med en fuktig klut, et nøytralt rengjøringsprodukt eller et mildt desinfeksjonsmiddel.

12 Avfallshåndtering av enheten etter bruk

I samsvar med direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE-direktivet) må enheten samles inn separat og returneres til et godkjent innsamlingssted. Eieren må ta med enheten til avfallsmottaket som er angitt av lokale myndigheter.



For mer informasjon om hvordan du skal kaste enheten, vennligst kontakt relevante myndigheter.

13 Samsvarserklæringer

Produsenten, iTs Designs Ltd., erklærer herved at dette produktet er i samsvar med radioutstyrsforskriftene (UK) 2017 og radioutstyrsdirektivet (2014/53/EU).

Den fullstendige teksten til samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettsadresse: www.alert-it.co.uk/support/

14 Tekniske spesifikasjoner

Utstyret er for kontinuerlig drift.

14.1 Kontrollenhet

Modell	P193
Strømforsyning	Kun batteri. 1x CR2450 (3V 600mAh)
Brytere og kontroller	1 knapp, trykk på knappen: På/Av. Ring/Tilbakestill.
Signallys	Rød alarm-LED
Målinger	42 x 52 x 30 mm (H x B x D)
Vekt	30 g
Farge	Hvit
Boks	ABS-plast
IP-klassifisering	IPX5
Levetid	3 år.
Radiofrekvens	434,0750 MHz (P193A).
Radioutgangseffekt	< 10 mW.
Radiorekkevidde	300 meter (siktlinje).

14.2 Omgivelsesforhold

Driftstemperatur	5 °C til 35 °C (bruk innendørs)
Oppbevaringstemperatur	-30 °C til 50 °C
Fuktighetsgrense	5 % til 90 % maks. Ikke-kondenserende

14.3 Produktsamsvar

Produktet har følgende samsvarsmerkinger: CE, UKCA.

15 Alarm- og feilkoder

15.1 Feilkoder

Fault 16: Battery low

De interne batteriene begynner å få lite strøm. Skift batteriene snart.

Fault 29: Alarm off

- En alarm har utløpt eller;
- Enheten er slått av eller;
- Enheten har slått seg av på grunn av lavt batteri.

Kontroller enheten.

Fault 31: Battery flat

- De interne batteriene er tomme. Skift batteriene umiddelbart.

15.2 Alarmer

Assist 0: «User call: Assistance»

Brukeren har trykket på en ringeknapp for å få hjelp.

Help 15: «Fall alarm»

Brukeren kan ha falt og trenger hjelp.



ITs Designs Ltd
T/A: Alert-iT Care Alarms
Fernie House (Unit 3)
Coalville Business Park
Jackson Street
Leicester, UK
LE67 3NR
Tel: +44 (0) 1530 239 900
Email: support@alert-it.co.uk
Web: www.alert-it.co.uk

For støtte, vennligst kontakt utstyrsleverandøren din.