

sensio

MARIUS Mobile Phone Alerter

Bruks- og monteringsanvisning



Produktnummer: 606301

Dokument: 9014-2

Innhold

Sikkerhet	3
Introduksjon	3
Kom i gang	4
Innstillinger	6
Feilsøking	7
Spesifikasjoner	8
Vedlikehold	8
Resirkulering	9
Symboler	9
Godkjenninger	10
Support	10

Sikkerhet

Sikkerhetsråd

- Batteriet må ikke punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer eller andre direkte varmekilder.
- Produktet må kun skrus opp for bytte av batteri.
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys.


Introduksjon

I esken

- MARIUS Mobile Phone Alerter med innebygget batteri
- Bruksanvisning

Produktbeskrivelse

MARIUS er en smart vibrasjonssensor som oppdager vibrasjoner fra mobiltelefonen og sender varslar til FlexiBlink-mottakere i hjemmet. Legg telefonen på MARIUS for å bli varslet når det ringer, uansett hvor du er i boligen. Denne enkle og pålitelige løsningen sørger for at du aldri går glipp av et anrop.

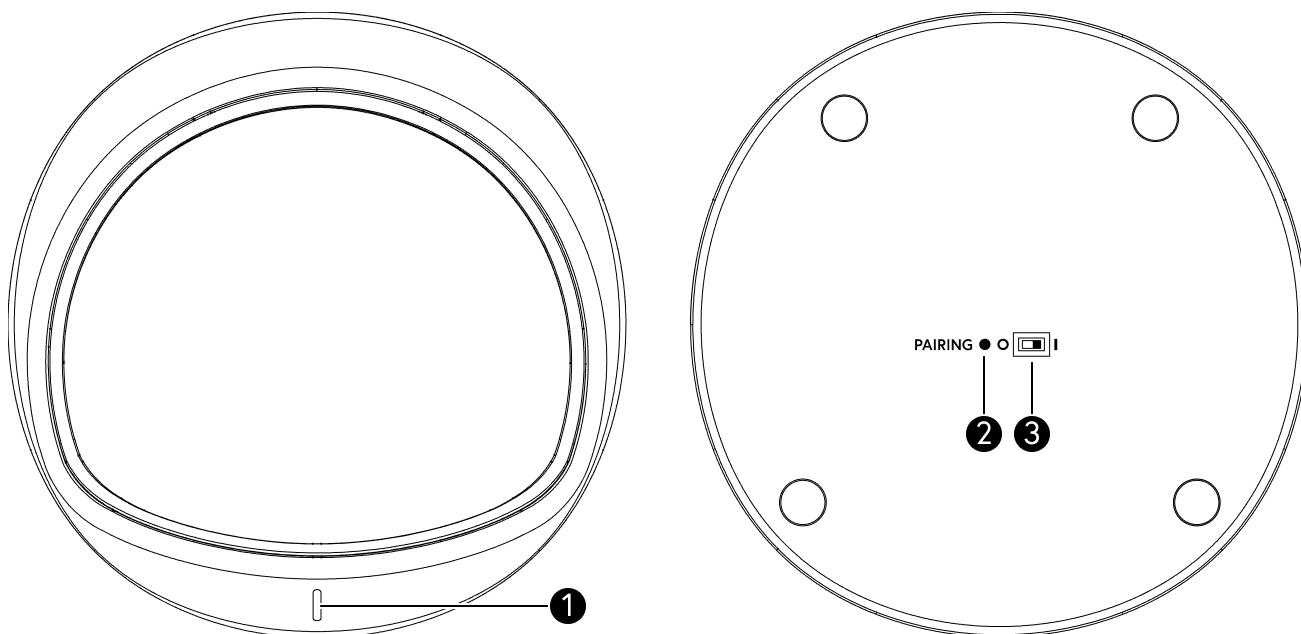

1. Lysindikator
2. Pairing-knapp
3. Av/på-bryter

Kom i gang

Plassering

Enheten plasseres på et bord eller en benk, gjerne der mobiltelefonen blir ladet. Mobiltelefonen legges på enheten når bruker ønsker å få varsling til FlexiBlink-mottakerne i boligen.

Slå på MARIUS ved å benytte bryteren på undersiden av enheten.

Sammenkobling

Alle FlexiBlink-enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles. Enhetene må være i samme rom under sammenkoblingen. For å sammenkoble et FlexiBlink-system, må det alltid være en stasjonær mottaker som hovedenhet, som f.eks. IRIS alerter, ALMA alerter eller BRITT bed shaker, i systemet. For sammenkobling, følg beskrivelsen under:

1. På hovedenheten: Velg **Inviter** via skjermen eller trykk **2 ganger** på **Pairing**-knappen på IRIS, ALMA eller BRITT
2. På MARIUS: Trykk **1 gang** på **Pairing**-knappen
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder eller ved beskjeden «Vellykket sammenkobling».

Skal du sammenkoble flere enn to enheter, gjenta punkt 1 til 3, ved å benytte samme hovedenhet.

Testing

1. Legg mobiltelefonen på MARIUS
2. Ring til mobiltelefonen
3. Se at mottakeren varsler

Statusindikasjon

Når MARIUS er i bruk, vises statusen i lysindikatoren:

- **Slukket:** Standby
- **Grønt lys:** Varsel sendt
- **Rødt/grønt blinkende lys:** Bytt batteri

Innstillinger

Varsling

Standard MARIUS sender varslingen Mobiltelefonen ringer. Hvis det er flere MARIUS i FlexiBlink-systemet, kan varslingen for hver enkelt MARIUS-enhet tilpasses, slik at det blir tydelig hvilken mobiltelefon som ringer. For hvert trykk på Pairing-knappen, blinker lysindikatoren grønt. Følg disse trinnene for å endre varslingen:

1. **Aktiver innstilling:** Hold Pairing-knappen inne i 10 sekunder til lysindikatoren gir to grønne blink.
2. **Velg ønsket varsling:** Når lysindikatoren har blinket, slipper du Pairing-knappen og gjør følgende:
 - a. Trykk ingen gang for varslingen *Mobiltelefon ringer*.
 - b. Trykk én gang for varslingen *Mobiltelefon 1 ringer*.
 - c. Trykk to ganger for varslingen *Mobiltelefon 2 ringer*.
 - d. Trykk tre ganger for varslingen *Mobiltelefon 3 ringer*.
 - e. Trykk fire ganger for varslingen *Vekkerklokke*.
 - f. Trykk fem ganger for varslingen *Vekkerklokke A*.
 - g. Trykk seks ganger for varslingen *Vekkerklokke B*.
 - h. Trykk syv ganger for varslingen *Generell varsling*.
3. **Bekreft endringen:** Etter at du har trykket ønsket antall ganger, vil lysindikatoren gi to grønne blink for å bekrefte at innstillingen er lagret.
4. [Test som tidligere](#)

Feilsøking

MARIUS sender ikke

- Sjekk at På/Av-bryteren er satt på
- Sjekk at MARIUS er sammenkoblet med en mottaker
- Velg en ringetone eller vekkerklokkelyd med vedvarende vibrasjon for å oppnå varsling

Det varsler ikke i mottakerne

- Enhetene er ikke riktig sammenkoblet. [Slett sammenkoblingen](#) og [sammenkoble på nytt](#)
- Avstanden mellom MARIUS og mottaker er for lang. Sett da enhetene nærmere hverandre, eller sett inn repeater. [Test](#) og sjekk at det varsler i FlexiBlink-mottaker

Sammenkoblingen er feil

1. Slett sammenkoblingen: Trykk 5 ganger på Pairing-knappen. MARIUS svarer med rødt og grønt blinkende lys
2. [Sammenkoble på nytt](#)

For å avbryte aktiv sammenkoblingsmodus, trykk en gang på Pairing-knappen.

Rødt lys i enheten ved sammenkobling

Sammenkobling mislyktes. [Nullstill enheten](#) for å sammenkoble på nytt.

Batteriet er tomt

MARIUS benytter et spesialbatteri som kan kjøpes hos produsenten. For å bytte batteriet, må de fire små skruene på baksiden av MARIUS skrus ut og baklokket fjernes. Bytt batteri og skru baklokket på plass igjen.

Spesifikasjoner

Tekniske data

- **Batteri:** innebygd litium 3 V (HMS: 244816)
- **Batterilevetid:** beregnet å vare i 5 år med 5 daglige varslinger
- **Temperatur:** -10 °C – 40 °C
- **IP-grad:** IP20
- **Radiofrekvens:** 2400 – 2483,5 MHz
- **Sendereffekt:** maks. 20 mW

Dimensjoner

- **Høyde:** 26 mm
- **Diameter:** 120 mm
- **Vekt:** 150 g

Vedlikehold

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Oppdateringer

For å oppdatere FlexiBlink-enheter må GURO Gateway være tilknyttet boligen. Se oppdateringer på Sensio sine nettsider.

<https://vestfold.sensio.io/update>

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Symboler

Symbol Beskrivelse



Varenummer



Serienummer



Batch-nummer



Unikt identifikasjonsnummer



Produsent



Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.



Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.

Godkjenninger

Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse til gjeldene krav for CE-merking. Se samsvarserklæring på Sensio sine nettsider for ytterligere informasjon.

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS, Møllergata 4, 0179 Oslo

- **E-post:** post@vestfoldaudio.no
- **Nettside:** vestfold.sensio.io
- **Telefon:** +47 33 47 33 47