

sensio

MARIUS Mobile Phone Alerter

Bruksanvisning

Produkt: 606301

Dokument: 9019-1



Sikkerhet

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer eller andre direkte varmekilder.
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys.

Produktbeskrivelse

MARIUS er en smart vibrasjonssensor som oppdager vibrasjoner fra mobiltelefonen og sender varsler til FlexiBlink-mottakere i hjemmet.

Legg telefonen på MARIUS for å bli varslet når det ringer, uansett hvor du er i boligen.

Denne enkle og pålitelige løsningen sørger for at du aldri går glipp av et anrop.

Varsling

Som standard sender MARIUS varslingen Mobiltelefonen ringer. Hvis det er flere mobiltelefoner i FlexiBlink-systemet, kan du tilpasse varslingen for hver enkelt enhet, slik at det blir tydelig hvilken mobiltelefon som ringer.

1. Aktiver innstilling

Hold Pairing-knappen inne i 10 sekunder til lysindikatoren gir to grønne blink.

2. Velg ønsket varsling

- Trykk **én** gang for *Mobiltelefon 1 ringer*
- Trykk **to** ganger for *Mobiltelefon 2 ringer*
- Trykk **tre** ganger for *Mobiltelefon 3 ringer*
- Trykk **fire** ganger for *Mobiltelefon 4 ringer*

3. Bekreft endringen

Etter at du har trykket ønsket antall ganger, vil lysindikatoren gi to grønne blink for å bekrefte at innstillingen er lagret.

Statusindikasjon

Når MARIUS er i bruk, vises statusen i lysindikatoren:

-  **Grønt lys:** Varsel sendt
-  **Blinkende rødt/grønt lys:** Bytt batteri
-  **Blinkende rødt lys etter trykk:**
Ikke koblet sammen med et FlexiBlink-system

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS

vestfold.sensio.io

Fant du ikke det du lette etter?

Skann QR-koden for å finne ut mer!



sensio

Produktinfo

Bruks- og monteringsanvisning

Hjelpvideoer