

sensio

JUNIOR

606219 JUNIOR Portable Alerter

606333 JUNIOR Assist Portable Alerter

Bruks- og monteringsanvisning



Innhold

Innhold	2
Sikkerhet	3
Introduksjon	3
Kom i gang	5
Bruk	6
Innstillinger	8
Feilsøking	10
Spesifikasjoner	11
Vedlikehold	12
Resirkulering	12
Symboler	13
Godkjenninger	14
Support	14

Sikkerhet

Sikkerhetsråd

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer eller andre direkte varmekilder
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys.
- Sørg for at halssnoren ikke brukes av barn, på grunn av kvelningsfare.

Introduksjon

I esken


- JUNIOR Portable Alerter / JUNIOR Assist Portable Alerter
- Strømforsyning for opplading 15VDC
- Halssnor
- Skrutrekker
- Bruksanvisning

Produktbeskrivelse

Bærbar mottaker som varsler med vibrasjon, lyd, lys og symbol om hendelser som brann eller dørklokke, fra FlexiBlink-sensorer. JUNIOR er oppladbar.

JUNIOR Portable Alerter har ved normal bruk en batteritid på mer enn 7 døgn.

JUNIOR Assist Portable Alerter har ved normal bruk en batteritid på mer enn 2 døgn.

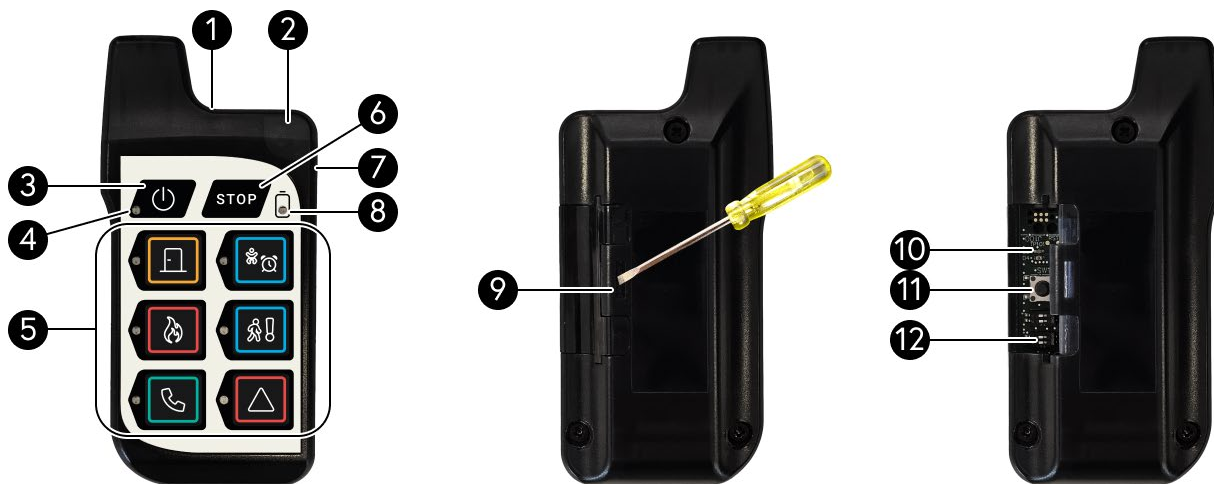

1. Feste til halssnor
2. Kraftig lys
3. På/Av-knapp
4. På-indikator – grønne blink
5. 6 varslingsindikatorer med ikoner
6. «Stopp varsling»-knapp
7. Ladekontakt 15VDC
8. Lavt batterivarsel
9. Lås for baklokket
10. Grønn/Rød lysdiode for sammenkobling
11. Pairing-knapp
12. Funksjonsbrytere

Kom i gang

Oppsett

1. Lad opp JUNIOR med medfølgende strømforsyning
2. Skyv av lokket på baksiden med medfølgende skrutrekker for å komme til **Pairing**-knappen
3. Gjennomfør sammenkobling

Sammenkobling

JUNIOR Portable Alerter

Alle FlexiBlink-enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles. Enhetene må være i samme rom under sammenkoblingen. For å sammenkoble et FlexiBlink-system, må det alltid være en stasjonær mottaker som hovedenhet, som f.eks. IRIS alerter, ALMA alerter eller BRITT bed shaker, i systemet. For sammenkobling, følg beskrivelsen under:

1. På hovedenheten: Velg **Inviter** via skjermen eller trykk **2 ganger** på **Pairing**-knappen.
2. På JUNIOR: Trykk 1 gang på Pairing-knappen
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder eller ved beskjeden «Vellykket sammenkobling».

Skal du sammenkoble flere enn to enheter, gjenta punkt 1 til 3, ved å benytte samme hovedenhet

JUNIOR Assist Portable Alerter

JUNIOR assist portable alerter kan benyttes som hovedenhet, batteritiden vil da være to døgn.

1. På JUNIOR: Trykk 2 ganger på **Pairing**-knappen
2. Trykk 1 gang på **Pairing**-knappen på den andre enheten
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder

Skal du sammenkoble flere enn to enheter, gjenta punkt 1 til 3, ved å benytte samme hovedenhet.

Testing

Utløs en sender i FlexiBlink-systemet ved hjelp av **TEST**-knappen og observer at JUNIOR varsler.

Bruk

Bæremuligheter

JUNIOR bæres vanligvis i lomma, men kan også bæres rundt halsen med medfølgende halssnor, eller plasseres ved siden av brukeren.

Kontrollknapper

- **Av/på-knapp** ③: Hold inne for å slå enheten av/på
- **STOP-knapp** ⑥: Trykk 1 gang for å stoppe varslingen. Lyset i symbolet vil fortsette å blinke i 45 sekunder eller til **STOP**-knappen trykkes igjen.

Varsling

Ved varsling vil JUNIOR vibrere samtidig med at lyset ved ett av symbolene ⑤ blinker. Dersom to varslinger kommer tett på hverandre, vil eldste melding vises med fast lys.

Lys i symbolene sammen med vibrasjon benyttes for å angi varslingsårsaken.

Vibrasjonsmønster

Varslingsmønstrene repeteres.

Brann




Røykvarsler



Alarmer (som komfyrvakt eller sykesignal)



Telefon

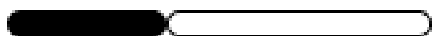

Dørklokke



Porttelefon



Annet



Innstillinger

Funksjonsbrytere

1: Alltid sterk vibrasjon

Vipp bryter opp for å aktivere kraftigste vibrasjon for alle varsler.

2: Vekkerklokke

Vipp bryter opp for å bruke JUNIOR som vekkerklokke sammen med IRIS.

3 og 4 (Umerkede)

Ikke i bruk

Slå av/på lyd

- **Av:** Trykk og hold **STOP**-knappen inne til JUNIOR kvitterer med to korte lyder
- **På:** Trykk og hold **STOP**-knappen inne til JUNIOR kvitterer med en lang lyd

Varslingsmetoder

Velg om det skal varsles med lys, lyd og vibrasjon eller kombinasjoner av disse.

1. **Slå av JUNIOR**
2. **Aktiver selvtest:** Hold inne av/på-knappen i ca. 8 sekunder, til lyset i symbol 1 tennes. Slipp knappen når du ser et blink i det sterke lyset.
3. **Lys:** Trykk på **STOP**-knappen for å tilpasse
 - a. Av = lys i symbol 1
 - b. På = lys i symbol 4
 - c. Bekreft valg med av/på-knappen
4. **Lyd:** Trykk på **STOP**-knappen for å tilpasse
 - a. Av = lyd i symbol 2
 - b. På = lyd i symbol 5
 - c. Bekreft valg med av/på-knappen
5. **Vibrasjon:** Trykk på **STOP**-knappen for å tilpasse
 - a. Av = lys i symbol 3
 - b. På = lys i symbol 6
 - c. Bekreft valg med av/på-knappen
6. Avslutt prosedyren med av/på-knappen igjen

Selv om du uforvarende skulle deaktivere alle tre varslingsformer (lys, lyd og vibrasjon), vil JUNIOR av sikkerhetshensyn likevel varsle med vibrasjon og markere hendelsen med et symbol.

Nullstill til fabrikkinnstilling

1. JUNIOR skal være påslått
2. Hold inne av/på-knappen og **STOP**-knappen i ca. 10 sekunder, til JUNIOR kvitterer følgende samtidig:
 - a. et blink med alle lys i membranpanelet,
 - b. et blink med det kraftige lyset,
 - c. et lydsignal og
 - d. vibrasjon.
3. JUNIOR slår seg av når nullstillingen er gjennomført.

Feilsøking

JUNIOR varsler ikke

- Sjekk at JUNIOR er påslått.
- Sjekk at batteriet har nok strøm.
- Sjekk at JUNIOR er sammenkoblet med FlexiBlink-systemet. [Se instruks for sammenkobling](#)
- Sjekk at senderen ikke er for langt unna resten av FlexiBlink-systemet.
- Sett inn en repeater i FlexiBlink-systemet for å få bedre rekkevidde.

Sammenkoblingen er feil

- Slett sammenkoblingen ved å trykke 5 ganger på **Pairing**-knappen. Enheten svarer med rødt og grønt blinkende lys.
- Gjennomfør sammenkobling på nytt. [Se instruks for sammenkobling](#)

Spesifikasjoner

Tekniske data

- **Strømadapter:** 15VDC / 230VAC
- **Batteri:** Innebygd LiPO 7,4V 4,07Wh
- **Temperatur:** -10 °C – 40 °C
- **IP-grad:** IP20
- **Radiofrekvens:** 2400,0 – 2483,5 MHz
- **Sendereffekt:** maks 20 mW

Dimensjoner

- **Høyde:** 133 mm
- **Bredde:** 69 mm
- **Dybde:** 27 mm
- **Vekt:** 200 g

Vedlikehold

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Oppdateringer

For å oppdatere FlexiBlink-enheter må GURO Gateway være tilknyttet boligen. Se oppdateringer på Sensio sine nettsider.

<https://vestfold.sensio.io/update>

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Symboler

Symbol Beskrivelse



Varenummer



Serienummer



Batch-nummer



Unikt identifikasjonsnummer



Les bruksanvisning og monteringsanvisning



Produsent



Produksjonsdato



Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.



Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.

Godkjenninger

Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse til gjeldene krav for CE-merking. Se samsvarserklæring på Sensio sine nettsider for ytterligere informasjon.

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS, Møllergata 4, 0179 Oslo

- **E-post:** post@vestfoldaudio.no
- **Nettside:** vestfold.sensio.io
- **Telefon:** +47 33 47 33 47