

sensio[®]

JUNIOR

Bruksanvisning

606219 JUNIOR Portable Alerter

606333 JUNIOR Assist Portable Alerter

Dokument: 9017-1



Sikkerhet

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer eller andre direkte varmekilder.
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys.
- Sørg for at halssnoren ikke brukes av barn, på grunn av kvelningsfare.

Produktbeskrivelse

Bærbar mottaker som varsler med vibrasjon, lyd, lys og symbol fra FlexiBlink-sendere i boligen.

Ved varsling vil JUNIOR vibrere samtidig med at lyset ved ett av symbolene blinker. Dersom to varslinger kommer tett på hverandre, vil eldste melding vises med fast lys.

Lys i symbolene sammen med vibrasjon benyttes for å angi varslingsårsaken.

Bæremuligheter

JUNIOR bæres vanligvis i lomma, men kan også bæres rundt halsen med medfølgende halssnor, eller plasseres ved siden av brukeren.

Kontrollknapper

Av/på-knapp: Hold inne for å slå enheten av/på
STOP-knapp: Trykk 1 gang for å stoppe varslingen. Lyset i symbolet vil fortsette å blinke i 45 sekunder eller til STOP-knappen trykkes igjen.

Slå av/på lyd

Av: Trykk og hold STOP-knappen inne til JUNIOR kvitterer med to korte lyder
På: Trykk og hold STOP-knappen inne til JUNIOR kvitterer med en lang lyd

Lading


JUNIOR er oppladbar og må lades etter ca. 7 døgn, mens JUNIOR Assist må lades etter ca. 2 døgn.

Vibrasjonsmønster

Brann



Dørklokke

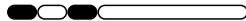

Røykvarsler



Porttelefon




Alarmer



Annet



Telefon

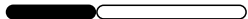

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS

vestfold.sensio.io

Fant du ikke det du lette etter?

Skann QR-koden for å finne ut mer!



sensio®

Produktinfo

Bruks- og monteringsanvisning

Hjelpvideoer