


# Hurtigveiledning Snow Pad Pro

## Kom i gang

Brett ut Snow pad og koble til nettbrettet i henhold til veiledningen i hoved manualen.

Last ned App se hoved manual.

Slå på Snow Pad (ON/OFF øverst på høyre side) hold knappen i 2 sek, slå så på nettbrettet og start APPen - 

## Zoome inn/ut. (Ingen lkon bare hurtigkommando.)

Klyp eller brett ut begge fingrene for å justere forstørrelsen

## Panorere skjermbilde

### Live bilde

Trykk og hold to fingre på skjermen, for så å bevege bildet. Fungerer over **7X** forstørring.

### Fryst eller lagret bilde

Trykk og hold to fingre på skjermen, for så å bevege bildet. Fungerer over **1X** forstørring

## Hurtigbytte mellom kamera visning.

Trykk to fingre på venstre side av skjerm. Du veksler mellom avstand-Delte skjerner-nærkamera.

Sekvensen for endring av skjermen er: full skjerm med avstandsvisning → fullskjerm med nærvissing → venstre og høyre delt skjerm → delt skjerm opp og ned.

## Bruke menyen i Snow Pad

Trykk på symbolet



nederst på skjermen.

# Hurtigveiledning Snow Pad Pro

Du vil nå se se følgende bilde. (bildet forsvinner automatisk etter 5s)

10.5X



- **Ta bilde:** Trykk på ikonet for å ta et bilde, og det lagres automatisk




- **Siste handling:** Trykk på ikonet for å se det siste lagrede bildet eller filen



- **OCR Tekst til tale:** Trykk på ikonet for å starte OCR. Vennligst legg lesestoffet så flatt som mulig, da dette vil forbedre tekstgjenkjenningen.



- Trykk på ikonet for å starte lesingen

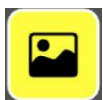

- Trykk på ikonet for å bytte mellom bildemodus og tekstmodus

Se side 20 i hoved manual for videre bruk av OCR funksjonene.

# Hurtigveiledning Snow Pad Pro

10.5X




Detail View Selfie Reading Line File Folder Settings Focus Lock



- **Kunstige farger:** Trykk på ikonet for å endre fargemodus. For å gå tilbake til fullfarge hold fingeren på ikonet i 1 sekund.

#### Justere kontrast

Ingen ikon men snarvei. Når du har funnet ønsket kontrast, skyv én finger opp og ned på høyre kanten av skjermen for å justere kontrastverdien.

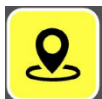

- **Finn:** Denne funksjonen er for enkel lokalisering av zoom-området. Fungerer når forstørrelse er  $> 1x$ . Trykk på symbolet på skjermen for å gå inn. En rød ramme vises. Trykk igjen, skjermen går tilbake til forrige forstørrelse nivå og den røde boksen forsvinner.



- **Endring av kamera visning:**  
Trykk på ikonet for å endre. Sekvensen for endring av skjermen er: full skjerm med avstandsvisning → fullskjerm med nærvisning → venstre og høyre delt skjerm → delt skjerm opp og ned.  
Når du deler skjermen, klikker du på bryterikonet i midten for å bytt posisjonen til de to skjermene.



- **Mer:** Trykk på symbolet for å få frem ikoner.

# Hurtigveiledning Snow Pad Pro



- **Detaljvisning.** Trykk på ikonet, skjermen er delt inn i venstre og høyre deler, den forstørrelsen i venstre side er omtrent 4 ganger større enn høyre side. Det er en rød ramme på høyre side. Plasser det du vil lese under kamera. Dra den røde rammen med fingeren til hvor du vil se, det venstre skjermbildet er nå forstørret. For å gå ut trykk pil tilbake opp til venstre.



- **Selfie:** Trykk på ikonet, skjermen endres til frontkameraet på nettbrett, slik at du kan ta en selfie, eller sminke deg.



- **Leselinje:** Trykk på ikonet for å få frem leselinje eller making.



- **Filer:** Trykk på ikonet for å åpne mappen (se 5.5 i hoved manual).



- **Innstillinger:** (se hovdmanual)

## Logisense AS

Kontaktinfo: Tlf: 22 12 00 86

E-post: [post@logisense.no](mailto:post@logisense.no)

Se mer info på [www.logisense.no](http://www.logisense.no)