

Sengemonitor P200C

Monitor for epilepsivarsling

Dette er en monitor beregnet på varsling av epilepsianfall. En kan koble forskjellige sensorer til den. Følsomhet og tid kan justeres.

- Utstyret kan varsle internt til personsøker med radioutgang.
- Utstyret kan varsle eksternt med releutgang (impuls) ved å koble den for eksempel til en GSM viderevarsler som kan ringe/sende SMS til annen telefon. Ved eksternt varsling* må bruker selv dekke abonnement til mobiltelefon.
- Deteksjon av spasmebevegelser er ikke egnet for barn under 6 måneder.
- For deteksjon av repeterende lyder brukes en innebygd mikrofon.
- Kan koble til 1 sensor for fravær og 1 for fukt sammen med bevegelse. Legg til eller bytt ut sensor med en fra listen nederst.

For deteksjon av kramper og risting (klonus) med varsling internt

Sensor	Føler riste-puste P140A. vekt 6-25 kg	vårt art.nr: 700140	HMS nr: 289666
<i>eller:</i>			
Sensor	Føler riste-puste P140B. vekt 20-200 kg	vårt art.nr: 700141	HMS nr: 298166
Sender:	Sengemonitor P200C	vårt art.nr: 702003	HMS nr: 298165
Mottaker:	Personsøker P202	vårt art.nr: 700300	HMS nr: 328675

For deteksjon av fravær kan velge en av flere sensorer

Sensor	Fraværsensor ribbe 35 cm P149B	vårt art.nr: 701492	HMS nr: 328776
Sensor	Fraværsensor ribbe 75 cm P143G	vårt art.nr: 701434	HMS nr: 328777
Sensor	Fraværsensor stolmatte P149A	vårt art.nr: 701490	HMS nr: 194991
Sensor	Fraværsensor sengematte P143C	vårt art.nr: 701431	HMS nr: 193906
Sensor	Fraværsensor vekt stol/senge-ben P144	vårt art.nr: 700144	HMS nr: 328680
Sensor	Trykkfølsom gulvmatte P150C	vårt art.nr: 700150	HMS nr: 328681
Sender:	Sengemonitor P200C	vårt art.nr: 702003	HMS nr: 298165

For deteksjon av fukt kan velge en av disse sensorene for tilkobling til sengemonitor

Sensor	Fuktsensor pute P142F x2, inkl. ledning	vårt art.nr: 700304	HMS nr: 328678
Sensor	Fuktsensor laken P142A x2, inkl. ledning	vårt art.nr: 701303	HMS nr: 328677
Sender:	Sengemonitor P200C	vårt art.nr: 702003	HMS nr: 298165

Fortsetter neste side...

For ekstern varsling

Som over, men en bytter ut Personsøker med:

Viderevarsler: GSM Viderevarsler ProCon

vårt art.nr: 700302 HMS nr: 328676

Fortsetter neste side...

GSM viderevarsler må programmeres hos Picomed før forsendelse. Ved bestilling av varsling eksternt med GSM viderevarsler:

- Oppgi det/de tlf nr det skal varsles til.
- Oppgi tlf nr til den som skal eie abonnement.

Picomed kontakter disse for å få & gi nødvendig informasjon og å hjelpe til med å bestille riktig mobiltelefonabonnement.

