

Sengemonitor Pro P200E

Monitor for epilepsivarsling

Dette er en monitor beregnet på varsling av epilepsianfall. Sammenlignet med P200C så vil Pro versjonen i tillegg detektere bevegelse assosiert med pust. En kan koble forskjellige sensorer til den. Verdier kan justeres direkte på sengemonitor eller med app til mobiltelefon. Den har mere avansert system for konfigurasjon og krever inngående kjennskap til diagnoser og deteksjon av disse i forhold til sengemonitor P200C. En logger brukers søvnmønster over flere netter for å få gode verdier for følsomheter, forsterkninger, tider, forsinkelser etc som justeres.

- Utstyret kan varsle internt til personsøker med radioutgang.
- Utstyret kan varsle eksternt med releutgang (impuls) ved å koble den for eksempel til en GSM viderevarsler som kan ringe og/eller sende SMS til annen telefon. Ved ekstern varsling* må bruker selv dekke abonnement til mobiltelefon.
- Deteksjon av spasmebevegelser er ikke egnet for barn under 6 måneder.
- For deteksjon av repeterende lyder brukes en innebygd mikrofon.
- Kan koble til 1 sensor for fravær og 1 for fukt sammen med bevegelse. Legg til eller bytt ut sensor med en fra listen nederst.

For deteksjon av kramper og risting (klonus) med varsling internt

Sensor	Føler riste-puste P140A. vekt 6-25 kg	vårt art.nr: 700140	HMS nr: 289666
<i>eller:</i>			
Sensor	Føler riste-puste P140B. vekt 20-200 kg	vårt art.nr: 700141	HMS nr: 298166
Sender:	Sengemonitor Pro P200E	vårt art.nr: 702005	HMS nr: 311299
Mottaker:	Personsøker P202	vårt art.nr: 700300	HMS nr: 328675

For deteksjon av fravær kan velge en av flere sensorer

Sensor	Fraværsensor ribbe 35 cm P149B	vårt art.nr: 701492	HMS nr: 328776
Sensor	Fraværsensor ribbe 75 cm P143G	vårt art.nr: 701434	HMS nr: 328777
Sensor	Fraværsensor stolmatte P149A	vårt art.nr: 701490	HMS nr: 194991
Sensor	Fraværsensor sengematte P143C	vårt art.nr: 701431	HMS nr: 193906
Sensor	Fraværsensor vekt stol/senge-ben P144	vårt art.nr: 700144	HMS nr: 328680
Sensor	Trykkfølsom gulvmatte P150C	vårt art.nr: 700150	HMS nr: 328681
Sender:	Sengemonitor Pro P200E	vårt art.nr: 702005	HMS nr: 311299

For deteksjon av fukt kan velge en av disse sensorene for tilkobling til sengemonitor

Fuktsensor pute P142F x2, inkl. ledning	vårt art.nr: 700304	HMS nr: 328678	
Fuktsensor laken P142A x2, inkl. ledning	vårt art.nr: 701303	HMS nr: 328677	
Sender:	Sengemonitor Pro P200E	vårt art.nr: 702005	HMS nr: 311299

Fortsetter neste side...

For ekstern varsling

Som over, men en bytter ut Personsøker med:

Viderevarsler: GSM Viderevarsler ProCon

vårt art.nr: 700302 HMS nr: 328676

GSM viderevarsler må programmeres hos Picomed før forsendelse. Ved bestilling av varsling eksternt med GSM viderevarsler:

- Oppgi det/de tlf nr det skal varsles til.
- Oppgi tlf nr til den som skal eie abonnement.

Picomed kontakter disse for å få & gi nødvendig informasjon og å hjelpe til med å bestille riktig mobiltelefonabonnement.

