

sensio

IRIS SOL Calendar

Bruks- og monteringsanvisning



Produktnummer: 606623

Dokument: 9151-3

Innhold

Innhold	2
Sikkerhet	3
Introduksjon	3
Kom i gang	5
Daglig bruk	7
Tilpasninger	8
Fjerntilgang	11
Feilsøking	12
Spesifikasjoner	14
Vedlikehold	14
Resirkulering	15
Symboler	15
Godkjenninger	16
Support	16

Sikkerhet

Sikkerhetsråd

- Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys.

Introduksjon

I esken

- IRIS SOL Calendar
- Strømforsyning
- Veggbrakett
- Borrelås
- Våtserviett
- Bruksanvisning

Produktbeskrivelse

IRIS SOL er en elektronisk kalender med påminnelser og talende klokke. Den har valgbare visninger av informasjon som analog eller digital klokke, dag, dato, døgnorientering og dagsplan.

Påminnelser legges direkte inn i kalenderen eller over nett via sikker webportal. Påminnelsene varsles med lyd, lysblink, symboler og eventuelt talemelding.

IRIS SOL synkroniserer påminnelsene med armbåndskalenderen NORA SOL, slik at man får påminnelser også når man er ute av huset. IRIS SOL kan varsle fra annet FlexiBlink-utstyr i boligen, som f.eks. brannalarm og dørklokke.

IRIS SOL har fire språk tilgjengelig: norsk, svensk, dansk og engelsk.



1. HJEM-knapp
2. Mikrofon for taleinnspilling
3. Høytaler
4. Volum opp/ned
5. Lysindikator
6. Pairing-knapp
7. Funksjonsbrytere
8. Strømtilkobling
9. Lydutgang
10. Internett-tilkobling
11. Ikke i bruk
12. USB

Kom i gang

Plassering

IRIS SOL kan stå på et bord eller monteres på veggen.

Internett

Hvis du skal legge inn påminnelser via fjerntilgang må IRIS SOL tilkobles internett med kabel før du slår på IRIS SOL. SOLVEI Remote Access (tilbehør) er en 4G/5G-ruter som kan benyttes dersom internett ikke er tilgjengelig.

Oppsett

Ved første gangs oppstart må du velge ønsket språk. Velg deretter dato og klokke. IRIS SOL er nå klar til bruk.

Sammenkobling

Hvis du har andre FlexiBlink sendere i ditt system, som f.eks. brannalarm, dørklokke, så må disse sammenkobles før du tar de i bruk. Enhetene må være i samme rom under sammenkoblingen.

Ved første gangs sammenkobling, velg IRIS SOL som hovedenhet.

1. På hovedenheten: Trykk **2 ganger** på **Pairing**-knappen
2. På enheten som skal legges til: Trykk **én gang** på **Pairing**-knappen på enheten eller velg «**Bli med**» på skjermen på den enheten som skal sammenkobles. Begge blinker da grønt eller viser status på skjerm i opptil 1 minutt
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder eller teksten «Vellykket sammenkobling» kommer opp på skjermen.

Sammenkoblingen er utført

Skal du sammenkoble flere enn to enheter, gjenta punkt 1 til 3.

Testing

Etter at FlexiBlink-utstyret er montert, utløs en sender i FlexiBlink-systemet og observer at IRIS varsler.

Registrere påminnelse på IRIS SOL

Trykk «HJEM-knapp» og velg «Påminnelser». I vinduet får du enkelt tilgang til alle avtaler som er registrert på kalenderen. Ved første gangs oppsett er denne oversikten tom.

Trykk på et av «+»-tegnene. Her vises 8 hovedkategorier for en kalenderavtale, og hvilke symboler som vises sammen med avtalen og påminnelsen. Velg kategori til din avtale.

I redigeringspanelet for påminnelsen kan du gjøre ønskede endringer:

- Skriv tekst som vises med påminnelsen i feltene «Tittel» og «Beskrivelse».
- Trykk på symbolet for å endre symbol.
- Trykk på mikrofon-symbolet for å spille inn en egen talemelding som avspilles samtidig med påminnelsen.
- Velg dato og klokkeslett
- Velg ønsket repetisjon av påminnelsen

Velg «Lagre» når du er ferdig.

Når du har lagret legger avtalen seg i avtaleoversikten. Med skyvebryteren kan du aktivere/deaktivere avtalen etter behov.

Trykk på pilen oppe til venstre for å gå helt ut av menyen.

Registrere påminnelse over internett

Se eget kapittel «Fjerntilgang» for hvordan du aktiverer fjernadministrasjon av IRIS SOL.

Når du har lagt til IRIS SOL i portalen kan du administrere kalenderen over internett.

- Åpne en nettleser, gå til adressen sol.vestfoldaudio.no, og logg inn med ditt telefonnummer.

- Trykk på «+»-tegnet oppe til høyre for å legge til en påminnelse.
- Trykk «Lagre» når du er ferdig.
- Påminnelsen synkroniseres med IRIS SOL i løpet av noen få minutter.

Daglig bruk

Klokke

IRIS Sol har ulike klokkevisninger du kan velge mellom, som analog eller digital klokke. Med «Talende klokke» aktivert, vil tidspunkt, tid på døgnet og/eller dag leses opp når du trykker på skjermen.

Justere volum

Benytt volumknapper (pluss/minus) på høyre framside av IRIS SOL for å justere lydstyrke på daglige varslinger.

Påminnelser

Påminnelser vises som et eget skjermbilde samtidig som det spilles av en lyd. Hvis man har spilt inn en talemelding, vil denne spilles av, og hvis lysblink er slått på, blinker det i varslingslysene. Hva som vises ved siden av symbolet for påminnelsen, bestemmes av visningsinnstillingene.

Påminnelsen blir stående på skjermen i 30 minutter.

Hvis man tar på skjermen, vil klokken vises med symbol for at en påminnelse er aktiv. Trykk på nytt for å spille av meldingen igjen. Nye påminnelser i denne perioden vil overstyre.

Varsling

Hendelser og alarmer varsles automatisk med lyd, lys og bilde – samt tale dersom dette er aktivert. En personlig talemelding ved brannalarm kan være spesielt gunstig for personer som kan ha vansker med å orientere seg ved akutte hendelser.

IRIS SOL viser varslinger i to minutter etter at varslingen er ferdig. For å se klokken i denne perioden – trykk HJEM-knappen ①.

Stoppe varsel

Ved å trykke på skjermen eller HJEM-knappen, stopper varselet. Dersom det stoppes på denne måten, vil et nytt varsel av samme type innen ett minutt, varsles med kun symbol og lys.

Tilpasninger

Skjermlås



Skjermlås låser tilgangen til volum og innstillinger til gjeldende nivå. Knapper for Påminnelser og Kalender kan fjernes/ legges til under Innstillinger: Påminnelse.

Skjermlås aktiveres ved å vippe funksjonsbryter opp (ON).

(Funksjonsbryter 1-4 og 6 er ikke i bruk).

Innstillinger

I menyen for innstillinger kan man endre klokke/dato, utseende, påminnelser, lysstyrke, samt se systeminformasjon og hvilke funksjoner som er valgt. Her kan man også velge Fjerntilgang for å administrere kalenderen eksternt.

Trykk på HJEM-knappen og velg «Innstillinger».

Klokke

- Still klokke
- Innstillinger
 - Talende klokke
 - Begrens tale til synlig informasjon
 - Talende analog klokke eller talende digital klokke
 - Automatisk sommertid
 - Nattmodus – lysstyrke og tidspunkt

Utseende

- Bakgrunn
- Oppsett – Velg mellom *Kun tekst*, *Klokke*, *Informativ* eller *Dagsplan*.

Lysstyrke

- Skjermlys
- Varslingslys

Påminnelser

- Vis tid for påminnelse
- Vis menyknapp for påminnelser
- Vis menyknapp for kalender
- Talende klokke ved påminnelser

Fjerntilgang

Se eget kappittel for [mer info om fjerntilgang](#).

NORA SOL

For å få påminnelser direkte til NORA SOL, må den først være sammenkoblet med FlexiBlink-systemet. Se eget avsnitt «Sammenkobling». Følg deretter oppsettet på i manualen for NORA SOL.

Kun 1 NORA SOL kan være tilkoblet en IRIS SOL. Ved eventuelt bytte, må den gamle slettes først.

System

- Oppgrader
 - Oppgrader via USB eller internett
- Nullstill
 - Nullstill til fabrikkstandard
- FlexiBlink
 - Kan spille inn egen talemelding ved brannalarm
 - Motta varslinger fra FlexiBlink-systemet
 - Sende varslinger til FlexiBlink-systemet ved påminnelser
- Språk
 - Mulighet til å bytte språk
- Systeminfo

Fjerntilgang

Internett

For å benytte fjerntilgang må IRIS SOL være koblet til internett. Dette gjøres enten med kabel til router, eller via SOLVEI Remote Access (tilbehør).

Sjekk at IRIS SOL er koblet til internett ved å åpne menyen, gå til **System → Systeminfo** og se at den har fått **IP-adresse**.

Aktivere fjerntilgang

Gå til **Innstillinger → Fjerntilgang** for å aktivere tjenesten. IRIS SOL vil starte på nytt.

Legge til kalender i SOL Portal

1. Gå til sol.vestfoldaudio.no
2. Skriv inn **mobilnummeret ditt** og trykk «Logg inn»
3. Du vil motta en SMS med en **4-sifret kode** som du bruker for å logge inn
4. Trykk på **pluss-tegnet** for å legge til ny IRIS SOL
5. Gi kalenderen et navn og fyll ut **SOL-ID** og **SOL-passord** som du finner på IRIS SOL under **Innstillinger → Fjerntilgang**
6. Trykk «Legg til»

Deaktivere fjerntilgang

Fjerntilgang kan deaktiveres via innstillingsmenyen på IRIS SOL. Ved å deaktivere fjerntilgang vil alle data som er lagret på Sensios skytjeneste (SOL Portal) bli slettet.

Feilsøking

Klokken viser feil tidspunkt eller dato

Still klokken via Innstillinger → Klokke → Still klokke

Knapper eller touch fungerer ikke

Volum opp/ned er låst

Vipp ned funksjonsbryter 5 (OFF)

Kommer ikke inn i Innstillinger

Vipp ned funksjonsbryter 5 (OFF)

Talende klokke fungerer ikke

Sjekk Innstillinger → Klokke → Innstillinger og aktiver *Talende klokke*

Påminnelser varsles ikke / kommer ikke opp

Påminnelsen er ikke aktiv

Aktiver påminnelsen med skyveknappen i oversikten over påminnelser.

Tidspunktet er feil

Kontroller at påminnelsen er satt til korrekt dato og tid.

Repetisjon er ikke aktiv

Kontroller at påminnelsen er satt til korrekt dag, dato og klokkeslett.

Får ikke koblet til ny enhet i portal

IRIS SOL er ikke tilkoblet internett eller mangler IP-adresse

1. Sjekk at internettkabel er koblet til.
2. Sjekk Innstillinger → System → Systeminfo og IP-adresse.
3. Koble fra strøm på IRIS SOL, og vent 10 sekunder med å koble til strøm igjen.
4. Sjekk om IRIS SOL har fått IP-adresse og kan kobles til i portalen.

Det kan ta noen minutter før IRIS SOL er tilgjengelig over internett.

- Vent 2-3 minutter og prøv på nytt.

Det varsler ikke i mottakerne

Avstanden mellom sender og mottaker er for lang

Sett da enhetene nærmere hverandre, eller sett inn repeater. Trykk på testknappen på senderen og sjekk at det varsler i FlexiBlink-mottaker

Enhetene er ikke riktig sammenkoblet

1. Slett sammenkoblingen: Trykk 5 ganger på Pairing-knappen. Enheten svarer med rødt og grønt blinkende lys eller tekst på skjerm: Sammenkobling slettet
2. Sammenkoble på nytt. Se [Sammenkobling](#)

Spesifikasjoner

Tekniske data

1. **Batteri:** innebygd litium 3V
2. **Temperatur:** -10 °C – 40 °C
3. **IP-grad:** IP20
4. **Radiofrekvens:** 2400,0 – 2483,5 MHz
5. **Sendereffekt:** maks 20 mW
6. **Driftsspenning:** 15V DC

Dimensjoner

- **Høyde:** 180 mm
- **Bredde:** 220 mm
- **Dybde:** 40 mm
- **Vekt:** 830 g

Vedlikehold

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Oppdateringer

For å oppdatere IRIS SOL, koble den til internett med kabel. Gå inn i menyen og velg **Innstillinger** → **System** → **Oppgrader**.

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Symboler

Symbol Beskrivelse



Varenummer



Serienummer



Batch-nummer



Unikt identifikasjonsnummer



Produsent



Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.



Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.

Godkjenninger

Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse til gjeldene krav for CE-merking. Se samsvarserklæring på Sensio sine nettsider for ytterligere informasjon.

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS, Møllergata 4, 0179 Oslo

- **E-post:** post@vestfoldaudio.no
- **Nettside:** vestfold.sensio.io
- **Telefon:** +47 33 47 33 47