

sensio

IRIS Sol Calendar



Bruksanvisning

Produktnummer: 606623

Dokument: 8008-6

Innhold

Innhold	2
Sikkerhet	3
Introduksjon	3
Kom i gang	5
Daglig bruk	5
Tilpasninger	6
Feilsøking	9
Spesifikasjoner	10
Vedlikehold	11
Resirkulering	11
Symboler	12
Godkjenninger	13
Support	13

Sikkerhet

Sikkerhetsråd

- Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys

Introduksjon

I esken


- IRIS Sol
- Strømforsyning
- Veggbrakett
- Borrelås
- Våtserviett
- Bruksanvisning

Produktbeskrivelse

IRIS SOL er en elektronisk kalender med påminnelser og talende klokke. Den har valgbare visninger av informasjon som analog eller digital klokke, dag, dato, døgnorientering og dagsplan.

Påminnelser legges direkte inn i kalenderen eller over nett via sikker webportal. Påminnelsene varsles med lyd, lysblink, symboler og eventuelt talemelding.

IRIS SOL synkroniserer påminnelsene med armbåndskalenderen NORA SOL, slik at man får påminnelser også når man er ute av huset. IRIS SOL kan varsle fra annet FlexiBlink-utstyr i boligen, som f.eks. brannalarm og dørklokke.

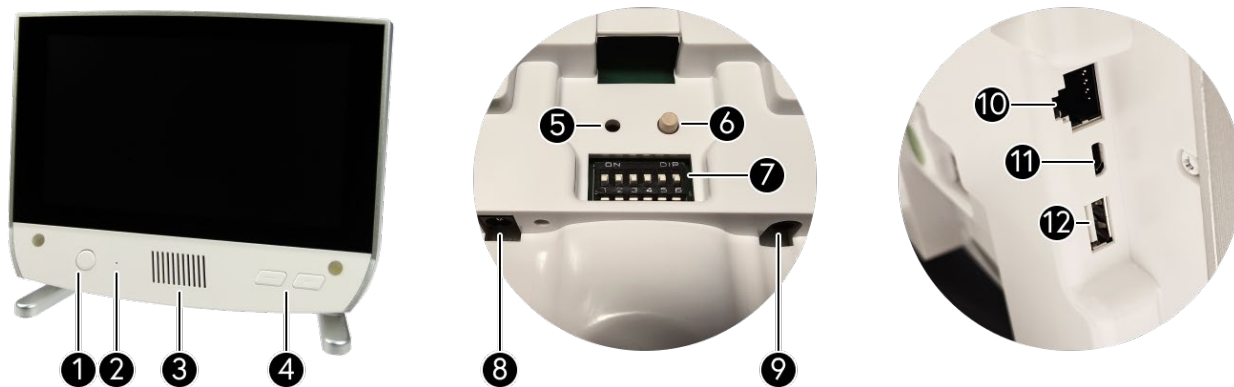

1. HJEM-knapp
2. Mikrofon for taleinnspilling
3. Høyttaler
4. Volum opp/ned
5. Lysindikator
6. Pairing-knapp
7. Funksjonsbrytere
8. Strømtilkobling
9. Lydutgang
10. Internett-tilkobling
11. *Ikke i bruk*
12. USB

Kom i gang

Plassering

IRIS SOL kan stå på et bord eller skrus opp på vegg.

Hvis du skal legge inn påminnelser via fjerntilgang må IRIS SOL tilkobles internett med kabel før du slår på IRIS SOL. SOLVEI Remote Access (tilbehør) er en 4G/5G ruter som kan benyttes dersom internett ikke er tilgjengelig.

Ved første gangs oppstart må du velge ønsket språk. Velg så dato og klokke. IRIS SOL er nå klar til bruk.

Daglig bruk

Klokke

IRIS Sol har ulike klokkevisninger du kan velge mellom, som analog eller digital klokke. Med «Talende klokke» aktivert, vil tidspunkt, tid på døgnet og/eller dag leses opp når du trykker på skjermen.

Justere volum

Benytt volumknapper (pluss/minus) på høyre framside av IRIS SOL for å justere lydstyrke på daglige varslinger.

Påminnelser

Påminnelser vises som et eget skjermbilde samtidig som det spilles av en lyd. Hvis man har spilt inn en talemelding, vil denne spilles av, og hvis lysblink er slått på, blinker det i varslingslysene. Hva som vises ved siden av symbolet for påminnelsen, bestemmes av visningsinnstillingene. Påminnelsen blir stående på skjermen i 30 minutter.

Hvis man tar på skjermen, vil klokken vises med symbol for at en påminnelse er aktiv. Trykk på nytt for å spille av meldingen igjen. Nye påminnelser i denne perioden vil «ta over».

Tilpasninger

Funksjonsbrytere



Funksjonsbryter 5: Aktivere/ deaktivere skjermlås og volumjustering. Låsing aktiveres ved å skyve bryter 5 til ON. Da vil brukeren ikke få tilgang til å endre innstillinger. Volum og innstillinger låses til gjeldende nivå. Knapper for Påminnelser og Kalender kan fjernes/ legges til under Innstillinger: Påminnelse.

Funksjonsbryter 1-4 og 6: Ikke i bruk

Innstillinger

I menyen for innstillinger kan man endre klokke/dato, utseende, påminnelser, lysstyrke, samt se systeminformasjon og hvilke funksjoner som er valgt. Her kan man også velge Fjerntilgang for å administrere kalenderen eksternt.

Trykk HJEM-knappen og velg «Innstillinger».

- Klokke
 - Still klokke
 - Innstillinger
 - Talende klokke
 - Begrens tale til synlig informasjon
 - Talende analog klokke eller talende digital klokke
 - Automatisk sommertid
 - Nattmodus – lysstyrke og tidspunkt
- Utseende
 - Bakgrunn
 - Oppsett. Velg mellom Kun tekst, Klokke, Informativ eller Dagsplan
- Lysstyrke

- Skjermlys
- Varslingslys
- Påminnelser
 - Vis tid for påminnelse
 - Vis menyknapp for påminnelser
 - Vis menyknapp for kalender
 - Talende klokke ved påminnelser
- Fjerntilgang, for info se eget kapittel
- NORA SOL
 - For å få påminnelser direkte til NORA SOL, må den først være sammenkoblet med FlexiBlink-systemet. Se eget avsnitt «Sammenkobling». Følg deretter oppsettet på IRIS SOL.
 - Merk! Kun 1 NORA SOL kan være tilkoblet en IRIS SOL. Ved eventuelt bytte, må den gamle først slettes.
- System
 - Oppgrader
 - Oppgrader via USB eller internett
 - Nullstill
 - Nullstill til fabrikkstandard
 - FlexiBlink
 - Kan spille inn egen talemelding ved brannalarm
 - Motta varslinger fra FlexiBlink-systemet
 - Sende varslinger til FlexiBlink-systemet ved påminnelser
 - Språk
 - Mulighet til å bytte språk
 - Systeminfo

Fjerntilgang

For å benytte fjerntilgang, må IRIS SOL kobles til internett. For å sjekke om IRIS SOL er koblet til internett, gå til «System» - «Systeminfo», og se at den har fått IP-adresse.

Gå til Innstillinger og velg Fjerntilgang for å aktivere tjenesten. IRIS SOL vil da starte på nytt.

Logg inn på sol.vestfoldaudio.no. Legg inn mobilnummer, og deretter SOL-ID og SOL-passord.

Ved deaktivering av fjerntilgang, vil alle data som er lagret på Sensios skytjeneste bli slettet.

Sammenkobling

Hvis du har andre FlexiBlink sendere i ditt system, som f.eks. brannalarm, dørklokke, så må disse sammenkobles før du tar de i bruk. Enhetene må være i samme rom under sammenkoblingen.

Ved første gangs sammenkobling, velg Iris Sol som hovedenhet.

1. Trykk to ganger på Pairing-knappen på hovedenheten
 2. Trykk en gang på Pairing-knappen på enheten eller velg **Bli med** på skjermen på den enheten som skal sammenkobles. Begge blinker da grønt eller viser status på skjerm i opptil 1 minutt
 3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder eller teksten «Vellykket sammenkobling» kommer opp på skjermen.
- Sammenkoblingen er utført

Skal du sammenkoble flere enn to enheter, gjenta punkt 1 til 3.

Testing

Etter at FlexiBlink-utstyret er montert, utløs en sender i FlexiBlink-systemet og observer at IRIS varsler

Varsling

Hendelser og alarmer varsles automatisk med lyd, lys og bilde – samt tale dersom dette er aktivert. En personlig talemelding ved brannalarm kan være spesielt gunstig for personer som kan ha vansker med å orientere seg ved akutte hendelser.

IRIS SOL viser varslinger i to minutter etter at varslingen er ferdig. For å se klokken i denne perioden – trykk HJEM knappen ①.

Stoppe varsel

Ved å trykke på skjermen eller HJEM-knappen, stopper varselet. Dersom det stoppes på denne måten, vil et nytt varsel av samme type innen ett minutt, varsles med kun symbol og lys.

Feilsøking

Klokken viser feil tidspunkt eller dato

- Still klokken via Innstillinger -> Klokke -> Still klokke

Knapper eller touch fungerer ikke

- Volum opp/ned er låst: Sett funksjonsbryter 5 ned (off).
- Kommer ikke inn i Innstillinger: Sett funksjonsbryter 5 ned (off).
- Talende klokke fungerer ikke: Sjekk Innstillinger -> Klokke -> Innstillinger og aktiver Talende klokke

Påminnelser varsles ikke/kommer ikke opp

- Påminnelsen er ikke aktiv.
 - Aktiver påminnelsen med skyveknappen i oversikten over påminnelser.
- Tidspunktet er feil
 - Kontroller at påminnelsen er satt til korrekt dato og tid
- Repetisjon er ikke aktiv
 - Kontroller at påminnelsen er satt til korrekt dag, dato og klokkeslett

Får ikke koblet til ny enhet i portal

- IRIS SOL er ikke tilkoblet internett/mangler IP-adresse.
 - Sjekk Innstillinger -> System -> Systeminfo og IP-adresse.
 - Sjekk at internettkabel er koblet til, koble fra strøm på IRIS SOL, vent 10 sekunder og koble til strøm. Sjekk om enhet har IP-adresse nå og koble til enhet i portal

Det varsler ikke i mottakerne

Avstanden mellom sender og mottaker er for lang.

Sett da enhetene nærmere hverandre, eller sett inn repeater. Trykk på testknappen på senderen og sjekk at det varsler i FlexiBlink-mottaker

Enhetene er ikke riktig sammenkoblet.

1. Slett sammenkoblingen: Trykk 5 ganger på Pairing-knappen. Enheten svarer med rødt og grønt blinkende lys eller tekst på skjerm: Sammenkobling slettet
2. Sammenkoble på nytt. Se [Sammenkobling](#)

Spesifikasjoner

Tekniske data

- **Batteri:** innebygd litium 3V
- **Temperatur:** -10 °C – 40 °C
- **IP-grad:** IP20
- **Radiofrekvens:** 2400,0 – 2483,5 MHz
- **Sendereffekt:** maks 20 mW
- **Driftsspenning:** 15V DC

Dimensjoner

- **Høyde:** 180 mm
- **Bredde:** 220 mm
- **Dybde:** 40 mm
- **Vekt:** 830 g

Vedlikehold

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut

Oppdateringer

IRIS SOL må være tilkoblet internett:

Velg «Innstillinger» - «System» - «Oppgrader»

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Symboler

Symbol Beskrivelse



Varenummer



Serienummer



Batch-nummer



Unikt identifikasjonsnummer



Les bruksanvisning og monteringsanvisning




Produsent



Produksjonsdato



Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.

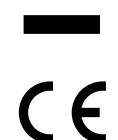

Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.

Godkjenninger

Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

[Se hele samsvarserklæringen på Sensio Vestfolds nettsider](https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering)

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS, avdeling Vestfold

- **E-post:** post@vestfoldaudio.no
- **Nettside:** vestfold.sensio.io
- **Telefon:** +47 33 47 33 47