



Zitzi
Buster

Bruksanvisning

Bruksanvisning, monterings-/justeringsinstruksjoner,
service og vedlikehold samt avfallshåndtering



Denne bruksanvisningen gjelder innendørsunderstellet Zitzi Buster med tilbehør. For fullstendig oversikt over beregnet tilbehør, se produktets bestillingsgrunnlag.

Innholdsfortegnelse

Produsent	3	Monterings- & justeringsinstruksjoner ...	15
Spesialtilpasning	3	Kjørebøyler	16
Introduksjon	4	Parkeringsbrems.....	17
Innledning	4	Montering av setesystem	18
Korrespondanse - merking.....	4	Justering av setehøyde - Manuell	20
CE-merking - klassifisering.....	4	Justering av setehøyde - El.....	21
Samsvarserklæring.....	4	Tiltfunksjon.....	23
Tiltenkt bruk.....	4	Lading av batteri	25
Symboler.....	5	Elektronikkboks.....	25
Produktmerking	6	Armlene	26
Sikkerhetsinstruksjoner	7	Bord	27
Opplæring og kvalifikasjoner	7	Fotstøtte.....	28
Advarsler/Forholdsregler	7	Fotbrett.....	29
Kontroller før bruk	9	Leggstøtte	30
EMC - elektromagnetisk kompatibilitet...	10	Ankelstøtte.....	31
Begrensninger	11	Fotreim.....	31
Gjenværende risiko.....	12	Oppsummering og oppfølging.....	32
Kombinasjoner.....	12	Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner.	33
Avvik/hendelser	12	Kontroller før bruk	33
Teknisk data	13	Service og utbedrende vedlikehold	34
Tilpasning og spesialtilpasning	14	Resirkulering	35
		Avfallshåndtering	37
		Garanti og retur.....	38
		Revisjon.....	39

Produsent

Produktet er produsert av **Anatomic Sitt i Norrköping AB**

Postadresse	Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Besøksadresse	Anatomic Sitt AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping
Telefon	011-161800
E-post	info@anatomicsitt.com
Nettside	anatomicsitt.com
Instruksjonsfilmer	youtube.com/anatomicsitt
Følg oss på	facebook.com/anatomicsitt

Eudamed-registreringsnummer/SRN: SE-MF-000002240

Spesialtilpasning



Kryss av i ruten ved eventuell spesialtilpasning av produktet.

CE-merkingen slutter å gjelde for spesialtilpassede produkter.



Introduksjon

Innledning

Gratulerer med valget av hjelpemiddel! Vi håper du vil få stor nytte av produktet vårt. For at du skal kunne bruke det fullt ut på en sikker måte, er det viktig at du leser gjennom denne bruksanvisningen grundig. Dette gjelder alle som befinner seg i brukerens nærhet.

Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk. Nye utgaver kan lastes ned fra vår nettside: www.anatomicsitt.com. Revisjon finnes på forsiden sammen med dato.

Korrespondanse - merking

På produktetiketten finnes produktets artikkelnummer samt serienummer (hovedprodukt) eller LOT-nummer (tilbehør). Disse numrene skal oppgis ved korrespondanse med Anatomic Sitt angående produktene. Serienummeret finner du på undersiden av seteplaten.

CE-merking - klassifisering

Hjelpemiddelet med dets tilbehør er et CE-merket medisinteknisk produkt, klasse I i henhold til klassifiseringsreglene i vedlegg VIII (EU) 2017/745.




















Samsvarserklæring

Produktet oppfyller kravet for medisintekniske produkter i henhold til forordning (EU) 2017/745 om medisintekniske produkter. Se aktuell EU-samsvarserklæring om overrenstemmelse for produktvarianter og tilbehør, se www.anatomicsitt.com/dokument

Tiltenkt bruk


Zitzi Buster er et hjulbasert innendørsunderstell for barn og voksne. Produktet kan justeres i høyde og tilt, og er beregnet for bruk sammen med modulære sittesystemer fra Anatomic Sitt i Norrköping AB. Zitzi Buster er et flerbruksprodukt.

Symboler

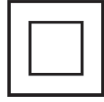	<p>Dette symbolet finnes i bruksanvisningen og gjør leseren oppmerksom på f.eks viktig sikkerhetsinformasjon m.m.</p>		<p>Angir batchnummeret til produksjonen slik at batch kan identifiseres.</p>
	<p>Dette symbolet indikerer eventuell klemfare.</p>		<p>Angir at produktet er et medisinteknisk produkt.</p>
	<p>Instruksjoner og tips som forenkler bruken av produktet.</p>		<p>Angir produsentens referansenummer/artikkelnummer slik at det medisintekniske produktet kan identifiseres.</p>
	<p>Angir at bruksanvisningen skal leses før produktet tas i bruk. Symbolet finnes på produktet.</p>		<p>Angir produsentens serienummer slik at et spesifikt medisinteknisk produkt kan identifiseres.</p>
 <p>www.anatomicstitt.com</p>	<p>Angir at bruksanvisningen alltid bør leses før bruk. Nettadresse indikerer hvor dokumentet befinner seg elektronisk.</p>		<p>Unik produktidentifikator som muliggjør entydig identifikasjon av spesifikke medisintekniske produkter.</p>
	<p>Angir at bruksanvisningen må leses for å få viktig sikkerhetsinformasjon om f.eks advarsler som ikke finnes på det medisintekniske produktets etikett.</p>		<p>Indikerer at produktet er CE-merket i henhold til gjeldende EU-direktiver.</p>
	<p>Angir produsenten av det medisintekniske produktet iht. definisjon i (EU) MDR 2017/745. Kan også brukes sammen med produksjonsdato.</p>		<p>Angir innen hvilke temperaturgrenser det medisinske utstyret trygt kan utsettes for.</p>
	<p>Angir datoen da det medisintekniske produktet ble produsert.</p>		<p>Viser hvor laderen skal kobles til på produktet.</p>
	<p>For å identifisere en pasienttilkoblet del av type BF (for elektrisk utstyr i helsevesenet).</p>		<p>Angir at elektroniske produkter ikke skal behandles som vanlig avfall.</p>
	<p>Angir at produktet er dobbeltisolert, det vil si isolasjonsklasse II.</p>		

Produktmerking

Etikett på hovedprodukt

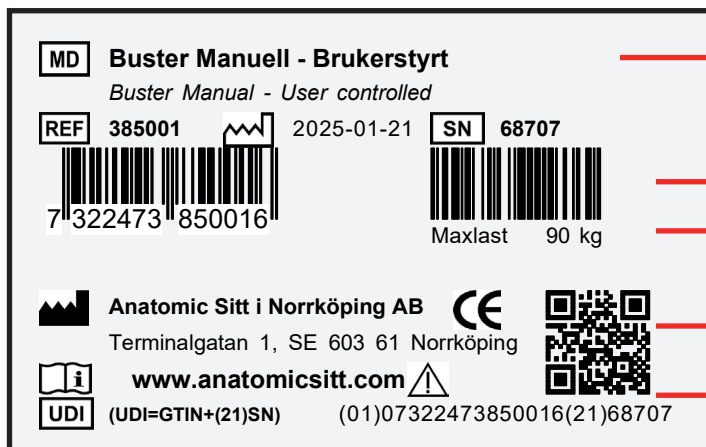

Produktnavn


Strekkode (EAN-13 eller REF samt SN)

Maks. belastningsvekt

UDI-transportør: QR-kode (GS1-128)

UDI= GS1-128

Etikett på tilbehør

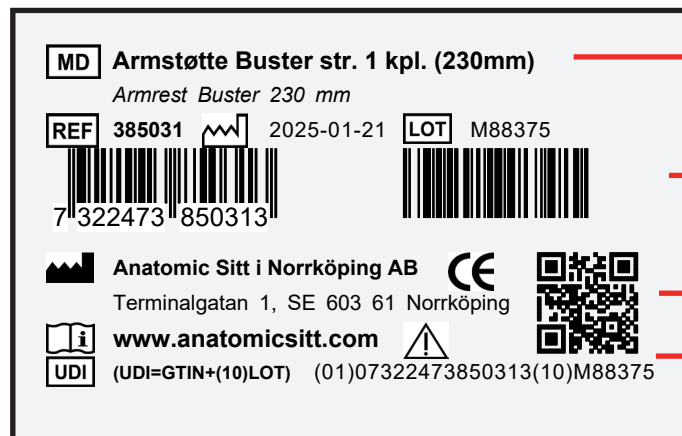

Produktnavn

Strekkode (EAN-13 eller REF samt LOT)

UDI-transportør: QR-kode (GS1-128)






UDI= GS1-128

Sikkerhetsinstruksjoner

Opplæring og kvalifikasjoner

- Montering, service og resirkulering skal alltid utføres av kvalifisert fagpersonell (tekniker på hjelpemiddelsentral eller tilsvarende).
- Vedtak om tilpasning/spesialtilpasning skal gjøres av kompetent medisinsk personell og utføres av kvalifisert fagpersonell (tekniker på hjelpemiddelsentral eller tilsvarende).
- Innstillinger, justeringer samt utprøving av hjelpemiddelet skal alltid utføres av kvalifisert medisinsk personell (fagperson på hjelpemiddelsentral eller tilsvarende).
- Hjelpemidlets forskriver eller en person med tilsvarende kompetanse og kjennskap til brukeren og hjelpemidlet skal alltid være med ved utprøving av produktet, samt gjennomføre en risikovurdering før første gangs bruk.

Advarsler/Forholdsregler

-  Les alltid bruksanvisningen før bruk.
-  Innstillinger skal kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Det er kun tillatt å gjøre innstillinger på den måten som beskrives i denne bruksanvisningen.
-  Sjekk produktets funksjonalitet før det leveres ut til bruker.
-  Den som foreskriver hjelpemiddelet er ansvarlig for å instruere brukeren og/eller andre personer i dets nærmiljø hvordan produktet anvendes på en sikker måte. Funksjonskontroller alltid produktet før bruk.
-  Hjelpemiddelets forskriver eller person med tilsvarende kompetanse og kunnskap om brukeren skal balansere det valgte setet for å sikre at eventuell tipperisiko utelukkes.
-  Justeringer skal kun utføres slik som beskrevet i denne bruksanvisningen.
-  Etter all monterings- justerings eller servicearbeid skal alle festeskruer og muttere kontrolleres og strammes.

-  Kontroller at sittesystemet sitter ordentlig fast i understellet før bruk.
-  Bremsene skal alltid være låst ved inn- og utstigning.
-  Bremsesystemer som virker på hjulene er ikke ment å brukes som kjørebremser, og skal kun benyttes som låsebremser.
-  Bruk aldri fotplaten ved inn- og utstigning fra hjelpemidlet.
-  Vær oppmerksom på klemfare ved senking og heving av sittehøyden samt ved endring av tilting. Ha ingen hender under setet under justeringer. Unngå å tilte setet maksimalt bakover når det er på laveste nivå for å redusere risikoen for skader på setet/adapteren.
-  Vær forsiktig og vær oppmerksom på økt velterisiko når understellet brukes på skrånende underlag. Understellet skal kun parkeres på horisontale og jevne flater.
-  Løft alltid i understellet – aldri i seteområdet.
-  Utfør aldri service mens produktet er i bruk.
-  Vær oppmerksom på at dersom brukeren tar tak i gjenstander utenfor hjelpemiddelet eller lener seg for langt ut fra hjelpemiddelet, kan det oppstå en forskyvning av tyngdepunktet som kan føre til økt risiko for å velte.
-  Overbelast aldri hjelpemiddelet, se avsnitt "Begrensninger for gjeldende maksimal belastning".
-  Svinghjulene kan kollideres med fotplaten i enkelte tilfeller. Vær oppmerksom på at hjulenes styreevne dermed kan påvirkes, og at innstillingene derfor kan måtte justeres.
-  La aldri brukeren være uten tilsyn når hjelpemiddelet er i bruk.
-  Kontroller klaring og balanse i ytterstillinger for høyde og tilt ved montering av setet før bruk.

Kontroller før bruk

Inspeksjon og kontroll skal utføres før hver bruk i henhold til punktene nedenfor:

- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse deler, slitasje og skader. Sjekk spesielt skruer og muttere, samt håndskruer.
- Kontroller at setet er godt festet til understellet.
- Kontroller produktets stabilitet.
- Kontroller funksjonen til eventuell tippesikring.
- Kontroller bremsenes funksjon.
- Kontroller hjulenes tilstand og at de sitter fast.
- Kontroller produktets bevegelige funksjoner, som ryggvinkel for mobilitet og låsing.

Dersom det oppdages feil og mangler, ikke bruk produktet. Kontakt din distributør av hjelpemiddelet for hjelp.

EMC - elektromagnetisk kompatibilitet

Tredjepartskomponenter

Bruk av komponenter og kabler som ikke er produsert og levert av leverandøren, kan føre til økt elektromagnetisk utslipp eller redusere den elektromagnetiske immuniteten i det elektriske systemet, og kan resultere i forstyrrelser eller redusert ytelse.

Forstyrrelse av annet utstyr, generell/RF

Unngå å bruke elektronikken i nærheten av annet elektrisk utstyr, da dette kan føre til redusert ytelse. Hvis det er nødvendig å bruke systemet nær andre elektriske systemer, må disse overvåkes for å sikre at de fungerer normalt.

Bærbart RF-kommunikasjonsutstyr (inkludert tilbehør som antennekabler og eksterne antenner) bør ikke brukes nærmere noen del av det elektriske systemet enn 30 cm, på grunn av risiko for redusert ytelse.

Hvis uvanlig oppførsel observeres i det elektriske systemet, spesielt dersom det er sporadisk og knyttet til bruk i nærheten av mobiltelefoner, mikrobølgeovner eller radiostasjoner, kan dette være en indikasjon på elektromagnetisk forstyrrelse.

Hvis slik oppførsel oppstår, prøv å flytte din Buster El lenger bort fra det forstyrrende utstyret.

Under bruk av den elektriske heve-/senkefunksjonen eller tilting, drives Buster El internt (internkraft), da den er utstyrt med batteri.



Type BF tilkoblet del

Buster El er klassifisert som type BF tilkoblet del.



Klasse II

Buster El er under lading klassifisert som et Klasse II-produkt, siden laderen er Klasse II.

Begrensninger

Maks. vekt

Maksimal belastningsvekt er 100 kg (EI) og 90 kg (Manuell).

Med belastningsvekt menes den maksimale vekten understellet kan utsettes for, for eksempel bruker og sittesystem.

Levetid

Produktens forventede levetid er 5 år ved normal bruk i samsvar med produktets tiltenkte formål, forutsatt at instruksjonene i denne bruksanvisningen følges.

Den faktiske levetiden kan imidlertid variere avhengig av hvor ofte og intensivt produktet brukes, men bør ikke overstige 10 år.


Grenseverdier for bruk

Buster med el-funksjoner:

-30°C til +55°C

20 til 90% luftfuktighet

800hPa til 1060hPa atmosfæretrykk

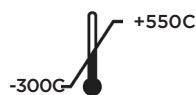


Grenseverdier for lagring og transport

Buster med el-funksjoner:

-45°C til +70°C

20 til 90% luftfuktighet

800hPa til 1060hPa atmosfæretrykk

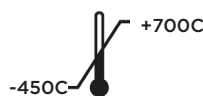

Batterier skal alltid lades før lagring. Batteriet skal deretter vedlikeholdslades hver 6. måned. Overskrid ikke lagringstemperaturen på -45 °C til +70 °C ved langtidslagring av batteriet, da dette kan forkorte batteriets levetid og ytelse.

Anbefalt lagringstemperatur er +10 °C til +25 °C.

Gassfjær

Hvis produktet skal lagres over lengre tid, ta hensyn til følgende:

Gassfjærer bør brukes regelmessig for å opprettholde funksjonen. Når produktet ikke er i bruk, må gassfjæren aktiveres minst én gang hver 6. måned.

Aktuator

Driftsyklus: 10 % (2 minutter kontinuerlig bruk etterfulgt av 18 minutter uten bruk).

Gjenværende risiko

Vær oppmerksom på at produktet og dets tilbehør er riktig innstilt slik at brukeren ikke opplever ubehag eller får skader under bruk. Hvis dette skjer, foreta justeringer eller installer passende tilbehør.

Kombinasjoner



For å opprettholde CE-merkingen på en sikker måte må hjelpemiddelet brukes sammen med produkter, tilbehør og reservedeler levert av Anatomic Sitt AB. Se produktets bestillingsskjema for mulige tilbehør og reservedeler.

Avvik/hendelser

Ved funksjonsfeil, kontakt hjelpemiddelsentral eller forhandler/produsent.

Dersom det inntreffer en hendelse som kunne ha ført til alvorlig skade, må det rapporteres til Anatomic Sitt AB og landets kompetente myndighet. Produktet skal også sendes til Anatomic Sitt i nåværende tilstand for videre undersøkelse.

Teknisk data

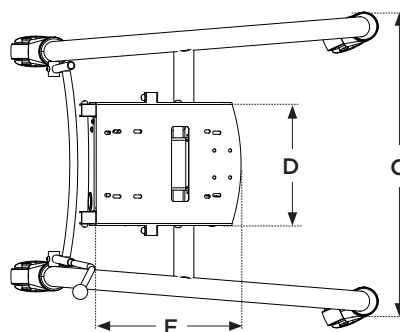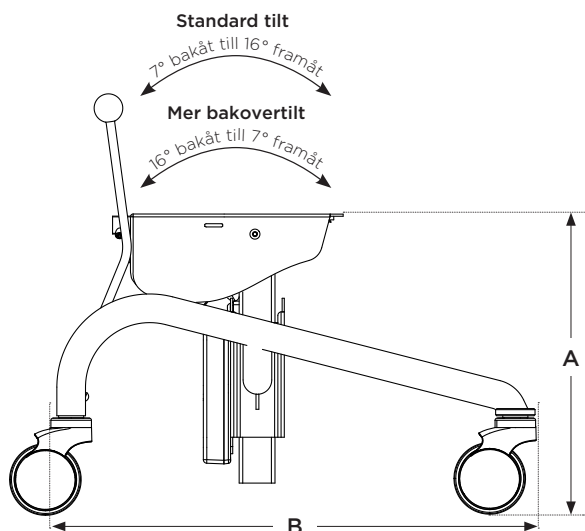

	Høyde A	Lengde B	Bredde C	Seteplate D x E	Belastningsvekt	Vekt	Tilt
Buster manuell	42-62 cm	67 cm	60 cm fram	26 x 32 cm	Max 90 kg	17 kg	7° bak til 16° fram
Buster elektrisk	42-62 cm	67 cm	60 cm fram	26 x 32 cm	Max 100 kg	22 kg	7° bak til 16° fram
Buster elektrisk med mer bakovertilt	42-62 cm	67 cm	60 cm fram	26 x 32 cm	Max 100 kg	22 kg	16° bak til 7° fram

FOTSTØTTE

	A x B	Stag
Helt str. 2	345 x 225 mm	250 mm
Helt str. 3	380 x 260 mm	300 mm
Helt str. 4	380 x 300 mm	350 mm
Helt str. 5	430 x 310 mm	350 mm

	A	B	Stag
Delt str. 2	160 x 220 mm		250 mm
Delt str. 3	180 x 255 mm		300 mm
Delt str. 4	180 x 305 mm		350 mm

Lengde på taggeledd (str. 2-5): 80 mm

ARMLENE

Mål	A	B	C	D
str.1	180 - 250 mm	75 mm	230 mm	260-360
str.2	220 - 320 mm	75 mm	330 mm	320-420

FOTBRETT

A (høyde fra fotplate)	str.	mm
	2	180 mm
	3	210 mm
	4	240 mm
	5	240 mm

Fotbrett str.2 passer fotstøtte str. 2 osv.

Höjd (H)

Kjørebøyle 13 cm
Kjørehåndtak 50 cm

Høyde måles fra oversiden av sitteplaten til håndtaket.

KJØREBØYLE

KJØREHÅNDTAK

BORD

Bord	MÅL	A	B	C	D
Str. 1		480 x 450 x 240 x 250 mm			
Str. 2		540 x 515 x 260 x 290 mm			
Str. 3		570 x 570 x 280 x 340 mm			
Str. 4		660 x 600 x 320 x 385 mm			
Str. 5		660 x 650 x 320 x 435 mm			

Støttebord

Støttebord	MÅL	A	B	C	D
Str. 1		380 x 450 x 230 x 260 mm			
Str. 2		430 x 510 x 260 x 300 mm			
Str. 3		490 x 580 x 300 x 340 mm			
Str. 4		540 x 640 x 330 x 380 mm			
Str. 5		600 x 710 x 360 x 420 mm			

Tilpasning og spesialtilpasning

Anbefalinger

Hver gang produktet endres på noe vis må en vurdering gjøres på om det er en tilpasning eller spesialtilpasning.

En tilpasning er en endring som gjøres innenfor rammene for produktets CE-merking. Alt annet er spesialtilpasning. Tilpasninger kan kun gjøres av en kvalifisert fagperson og skal alltid utføres på en profesjonell måte.

Tillatte tilpasninger innenfor rammen av CE-merking

Lengden på fotstøtteprofilen kan forkortes for å passe brukeren bedre.

Risikoanalyse


Merk at en risikoanalyse alltid skal gjøres, både ved tilpasning og ved spesialtilpasning av et hjelpemiddel. Produktet må aldri være farlig for brukeren eller personer i dets nærhet, til bruk etter tilpasning.

Merking

Ved merking skal det fremkomme om at det er en tilpasning til en spesifikk bruker, slik at det ikke kan forveksles med et standardprodukt.

Monterings- og justeringsinstruksjoner


Montering skal alltid utføres av kvalifisert fagpersonell (tekniker på hjelpemiddel-sentral eller tilsvarande). Instruer brukeren og/eller andre personer i dets nærmiljø om produktets funksjoner for at hjelpemiddelet skal kunne brukes på en sikker måte.

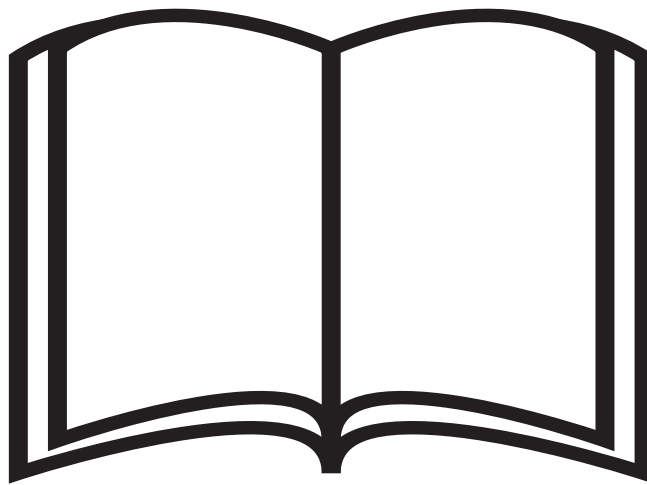

Kjørebøyer

Montering av kjørehåndtak/kjørebøyle

Før kjørehåndtaket inn i rørrammen til det stopper.
Stram skruene (A) godt etter montering.

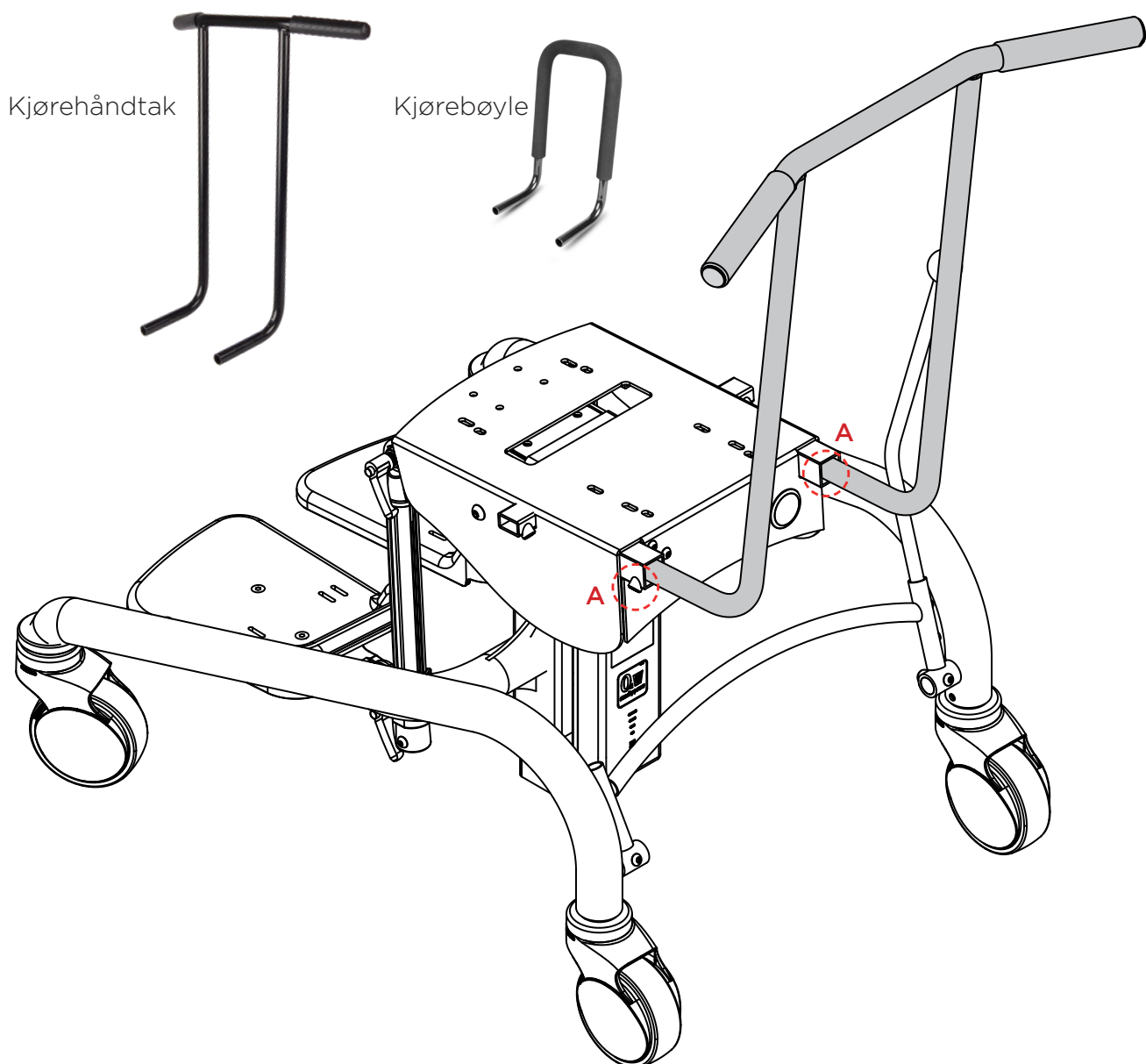

Når setesystemet monteres på understellet ved hjelp av adaptersystem (153042, 153047), må understellet utstyres med kjørebøyle for å feste sittesystemets sikkerhetsbelte.

Parkeringsbrems

Låse og låse opp parkeringsbremsen

Bremsefunksjonen fungerer kun på bakhjulene og betjenes med en felles låsehendel (B).

Ved aktivering av låsen låses både **hjulenes rullefunksjon og hjulenes styring**.



Låst brems



Åpen brems



Retningsperre

Hurtigguide

- **Låse**
Skyv låsespaken frem til endeosisjon.
- **Låse opp**
Plasser låsespaken i midtstilling.
- **Retningsperre**
Skyv låsespaken bakover til endeosisjon.

Tippesikring

Montering

Montering av tippesikringen (A) gjøres ved å løsne skruen (B) som holder hjulet. Før deretter opp tippesikringen over hjulhylsen motrammerøret.




Lås tippesikringen i retning framover i rammens retning ved hjelp av stoppeskruen. Skru hjulet fast igjen.






Montering av setesystem

Montering av setesystem

Setesystemets festebrakett monteres enkelt på understellet med fire (4) skruer, skiver og muttere i de merkede hullene på understellets sitteplate. Se bilde og markeringer nedenfor.

-  Hullene brukes for fremovertiltset setesystem.
-  Alternativt bakre hullpar ved bruk av adaptersystem.
-  Hull som brukes ved bakovertiltset setesystem.

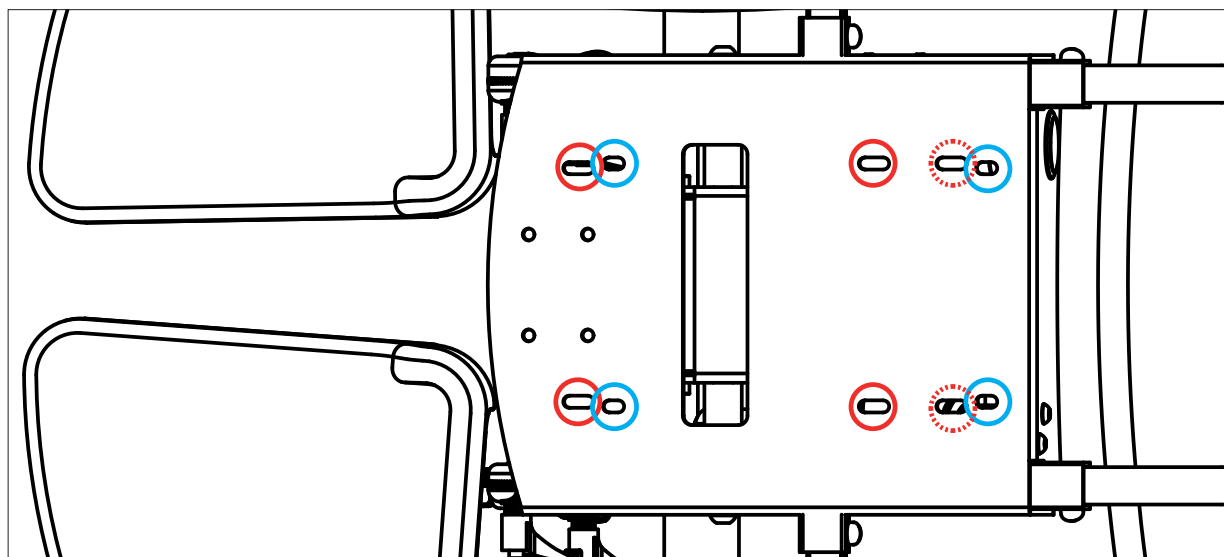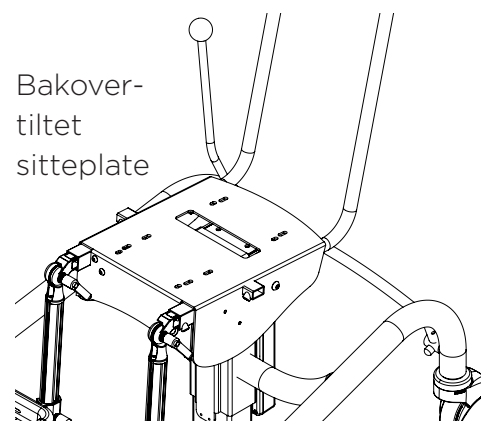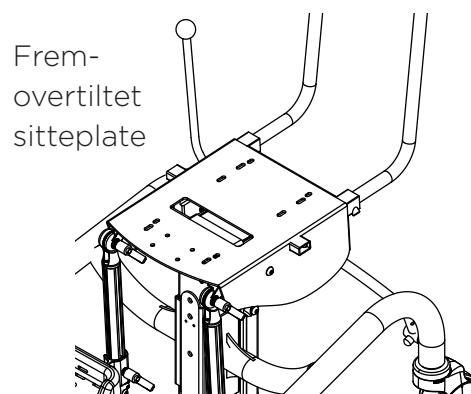

For ytterligere informasjon om festebraketter og adaptersystem, se respektive bruksanvisning for valgt setesystem.

Fast montering av setesystem ved el-tilt

Ved el-tilt er ett av monteringshullene skjult bak tilttonet, som da må løsnes.

Løsne el-kabelen og kontakten på tilttonet (bilde 1).

Løsne skruene helt (A) som holder tilttonet i kanten på sitteplaten.

Sving deretter tilttonet til siden slik at skruhullet (B) blir synlig (bilde 2).

Monter seteystemet i de 4 anbefalte hullene i henhold til forrige side.


Monter tilttonet tilbake med skruene (A).

Fest elkontakt og kabel på tilttonet.

bilde 1



bilde 2

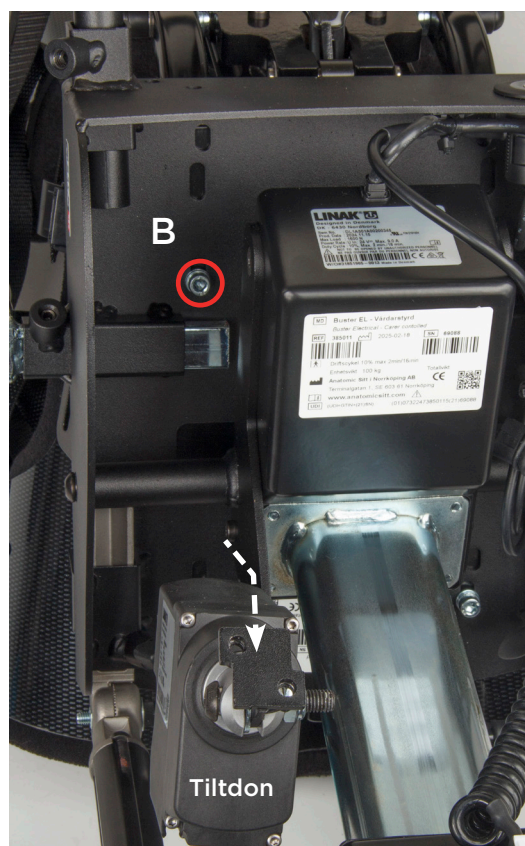

Justering av sittehøyde – Manuell brukerstyrt

Denne varianten forutsetter at brukeren selv kan reise seg slik at setesystemet avlastes. Sittehøyden justeres ved hjelp av aktiveringshåndtaket under brukers høyre armlene. Dra håndtaket oppover for å frigjøre låsen. Når brukeren avlaster setet ved å skyve fra med føttene, heves setet til håndtaket slippes.

For å senke setet dras håndtaket oppover for å frigjøre låsen, og setet senkes av brukers vekt. Slipp håndtaket når ønsket høyde er oppnådd.



Vær oppmerksom på mulig **klemfare**.



Justering av sittehøyde – Manuell ledsagerstyrt

Sittehøyden justeres ved hjelp av et vaierstyrt håndtak på kjørebøylen. Trykk inn håndtaket for å frigjøre låsen slik at setet kan heves eller senkes.

Slipp håndtaket når ønsket sittehøyde er oppnådd.



Justering av setehøyde - El brukerstyrt

Setehøyden justeres med en elektrisk håndkontroll under høyre armlene.



Trykk aktiveringshendelen **ned** for å senke setehøyden og trykk hendelen **opp** for å heve setehøyden.


Slipp aktiveringshendelen når ønsket høyde er oppnådd.



Vær oppmerksom på eventuell **klemfare**.


Justering av setehøyde - El ledsagerstyr

Setehøyden justeres med en elektrisk håndkontroll på ryggprofilen under kjørehåndtaket.

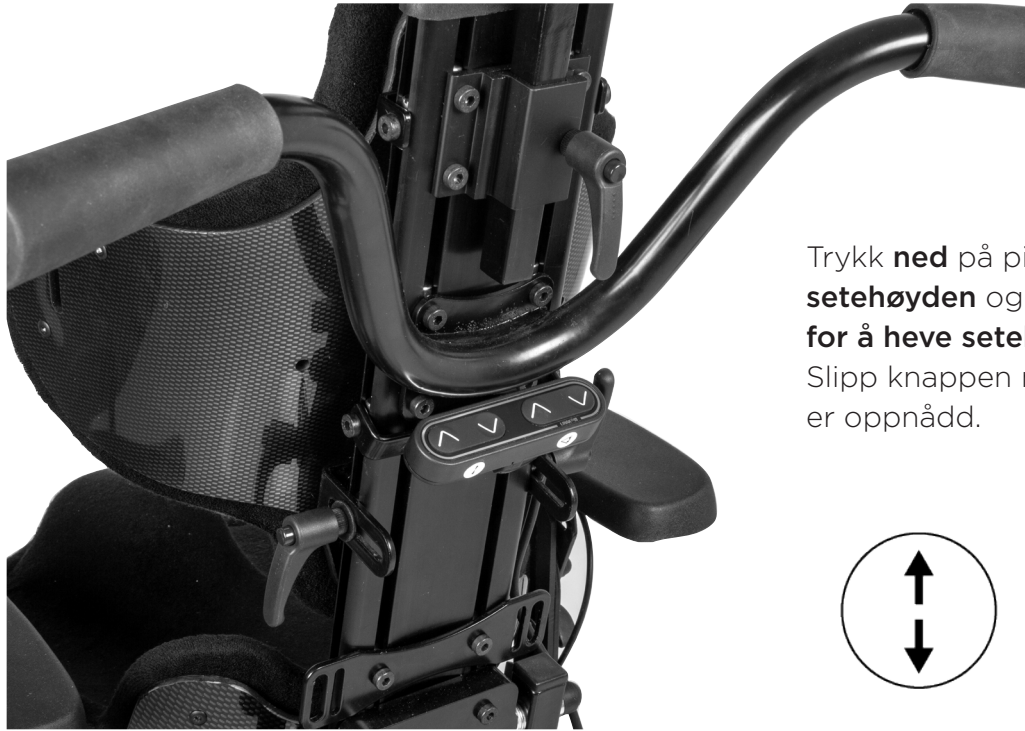


Trykk **ned** på pilene **for å senke setehøyden** og trykk pila **opp** **for å heve setehøyden**.

Slipp knappen når ønsket høyde er oppnådd.

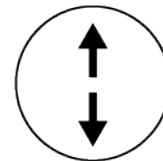

Symbol for høydejustering

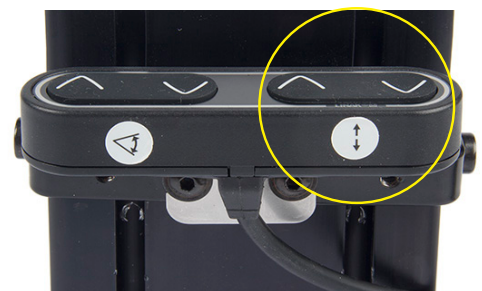

Ledsagerkontroll



Lav




Høy



Vær oppmerksom på eventuell **klemfare**.

Tiltfunksjon

Busters tiltfunksjon gjør det mulig å justere setet framover eller bakover etter behov. Avhengig av hvilken retning seteplaten er montert i, får man enten mer fremovertilt (passer til arbeidsstoler) eller mer bakovertilt (passer til øvrige setesystemer).

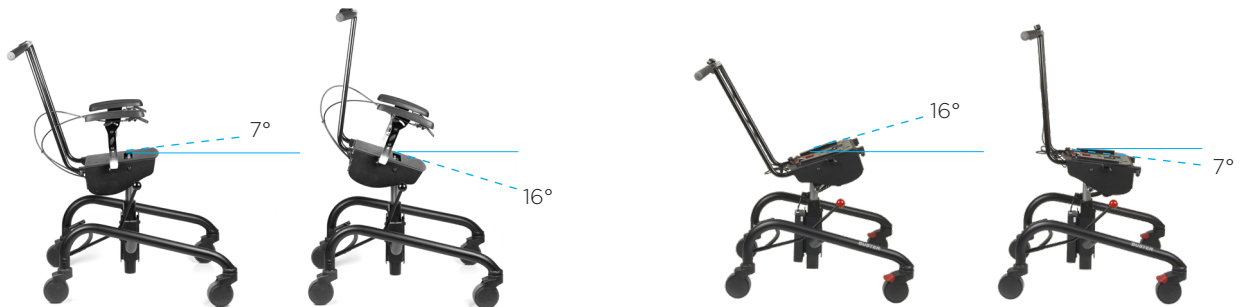

Fremovertiltet
seteplatemontering
7° bakover / 16° fremover

Bakovertiltet
seteplatemontering
16° bakover / 7° fremover

Tiltfunksjon - Manuell brukerstyrt

Seteplatenes tilt/vinkel justeres ved hjelp av håndkontrollen under brukerens venstre armlene. Dra håndkontrollen opp for å låse opp, og juster setet trinnløst bakover eller fremover. Slipp håndkontrollen når ønsket vinkel er nådd. Vinkelen er nå låst.



Tiltfunksjon - Manuell ledsagerstyrt

Seteplatenes tilt justeres ved hjelp av et vajerstyrt håndtak på kjørebøylen. Trykk inn håndtaket for å frigjøre låsen, slik at setedelen kan tiltes/vinkles. Slipp håndtaket når ønsket vinkel er oppnådd.



Symbol for
Tilting/vinkling

Tiltfunksjon - Elektrisk brukerstyrt

Seteplatens tilt justeres med en elektrisk håndkontroll under brukerens venstre armlene.

Dra håndkontrollen opp med fingrene for å tilte setet fremover trinnløst.

Trykk håndkontrollen ned for å tilte setet bakover.

Slipp håndkontrollen når ønsket vinkel er nådd.




Brukerstyring

Tiltfunksjon - Elektrisk ledsagerstyrt

Seteplatens tilt justeres ved hjelp av den elektriske håndkontrollen for ledsagerstyring på ryggprofilen eller kjørehåndtaket. Trykk pilen opp for å tilte setet fremover, eller trykk pilen ned for å tilte setet bakover trinnløst.



Symbol for
Tilting/vinkling

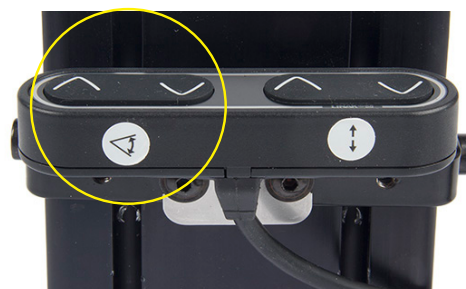

Ledsagerstyring




Vær oppmerksom på
eventuell **klemfare**.

Lading av batteri

Koble laderens kontakt til uttaket på baksiden av seteplaten. Kontakten er magnetisk, noe som gjør den enkel å koble til og ta av. Koble deretter laderens strømledning til et vegguttak (220 V).

Kontakten lyser alltid.

For å avbryte lading/strømtilførsel, trekk kabelen ut av magnetkontakten. Hvis batteriet er utladet: koble til laderen og la den stå - ladingen starter automatisk igjen etter en stund.

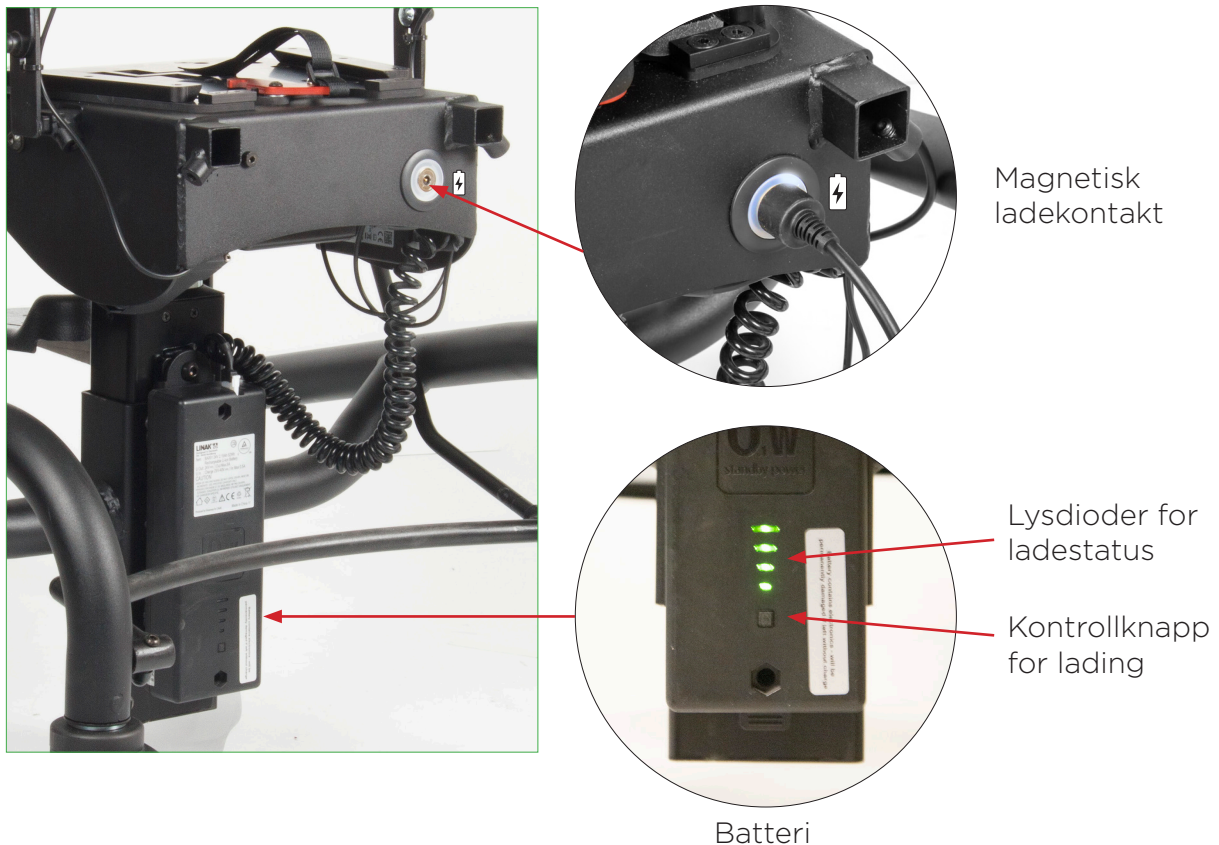

Armlene

Avtakning/sidejustering

Løsne låseskruen (A) med verktøyet, og skyv armlenet sidelengs for å ta det av eller justere til ønsket bredde. Stram skruen (A).

Høydejustering

Løsne håndskruen (B) litt, og skyv armlenet opp eller ned til ønsket høyde. Hvis det er tungt, kan det være nødvendig å løsne mutteren (C) over. Stram håndskruen (B) etter justering.

Vinkling opp/ned


Løsne spakskruen (D). Vinkle armlenet fremover/bakover etter ønske, og stram (D).

Flytt armleneplaten fremover/bakover

Løsne skruene (E) helt for å flytte platen til nye hull fremover eller bakover. Stram skruene (E).

Vinkle sideveis

Armleneplaten kan vinkles litt ved å løsne de to skruene (E) lett.

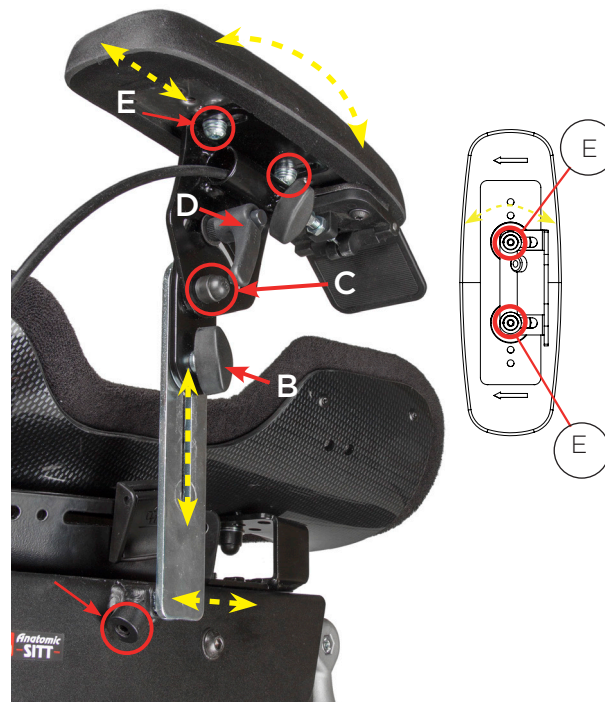

Bord


Montering av bord

Legg bordet på armleneplatene, og vri deretter bordets låsearm under armleneplaten. Låsearmen skal vris til den havner innenfor kanten på armleneplaten.



Bytte av monteringshull

Det finnes 3 ulike festebredder å velge mellom. For å bytte bredde brukes et valgfritt monteringshull under armlenepolstringen på bordets bakre del. I standardutførelse er låsearmen festet i midthullet. For å bytte monteringshull må du først løfte polstringen bakerst. Markeringene på bordets ytre bakre kant viser kun hvilken størrelse bordet har.

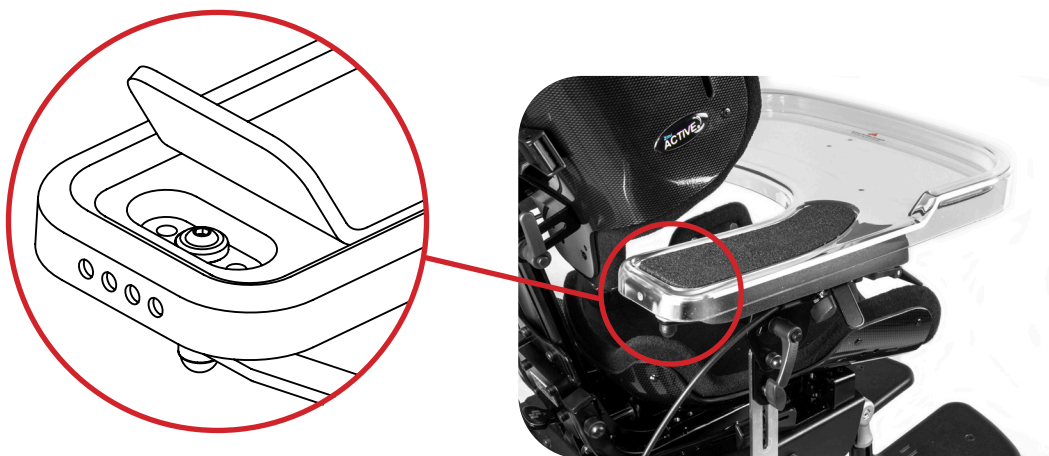

Pass på å ikke løfte bordet i fremkant.

Fotstøtte

Montering av fotstøtte

Monter fotstøttens firkantprofil (A) i fotstøttefestene (B) under sitteplatens fremre del. Lås fotstøtten med låseskruene (C) på begge sider.

Justering av vinkel ved kneleddet

Når fotstøtten er montert på sitteplaten, er det mulig å justere vinkelen ved kneleddet. Løsne skuren (D) litt og juster til ønsket vinkel. Stram deretter skruen.

Justering av fotstøttens høyde


Når fotstøtten er montert på sitteplaten, er det mulig å justere høyden ved fotleddet. Løsne skruen (E) litt og juster til ønsket høyde. Stram deretter skruen.

Sikkerhetsstopp

Sikkerhetsstopp (F) i form av en sprint er montert i bunnen av fotstøtteprofilen. Stoppet kan også brukes for å finne tilbake til en forhåndsinnstilt høydeposisjon.



Monter et ekstra sikkerhetsstopp over fotstøtten i sporet på fotstøtteprofilen for enkelt å finne tilbake til en alternativ høydeposisjon (for eksempel med eller uten sko).

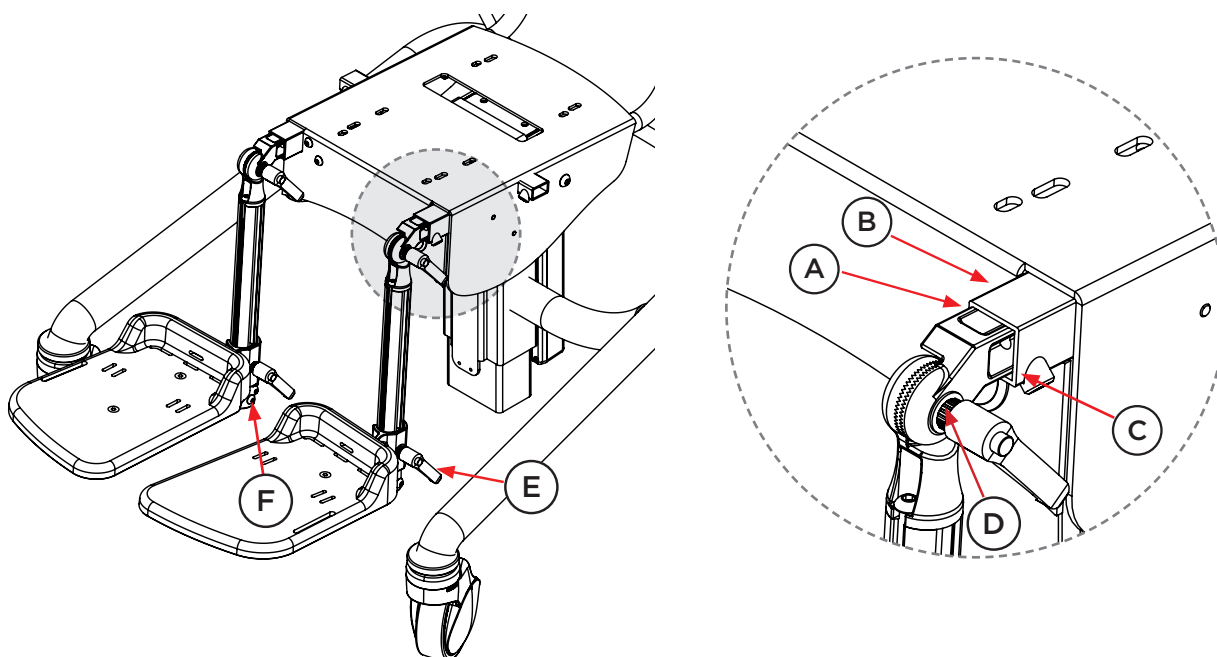


Fotbrett

Fotbrett med dobbelstag

For å montere fotbrettet begynner du med å skyve sprinten (A) på fotbrettet (B) i fotstøttestaget (C). Still deretter inn fotstøtten (D) til ønsket høyde og stram spaken (E).

Still inn ønsket høyde og bredde på fotbrettet ved hjelp av skruene (F) og (G). Plaststaget (H) på fotbrettet skal føres gjennom sporet (I) på fotstøtteplaten. Avslutt med å montere medfølgende polstring, og kontroller at alle skruer er godt strammet.

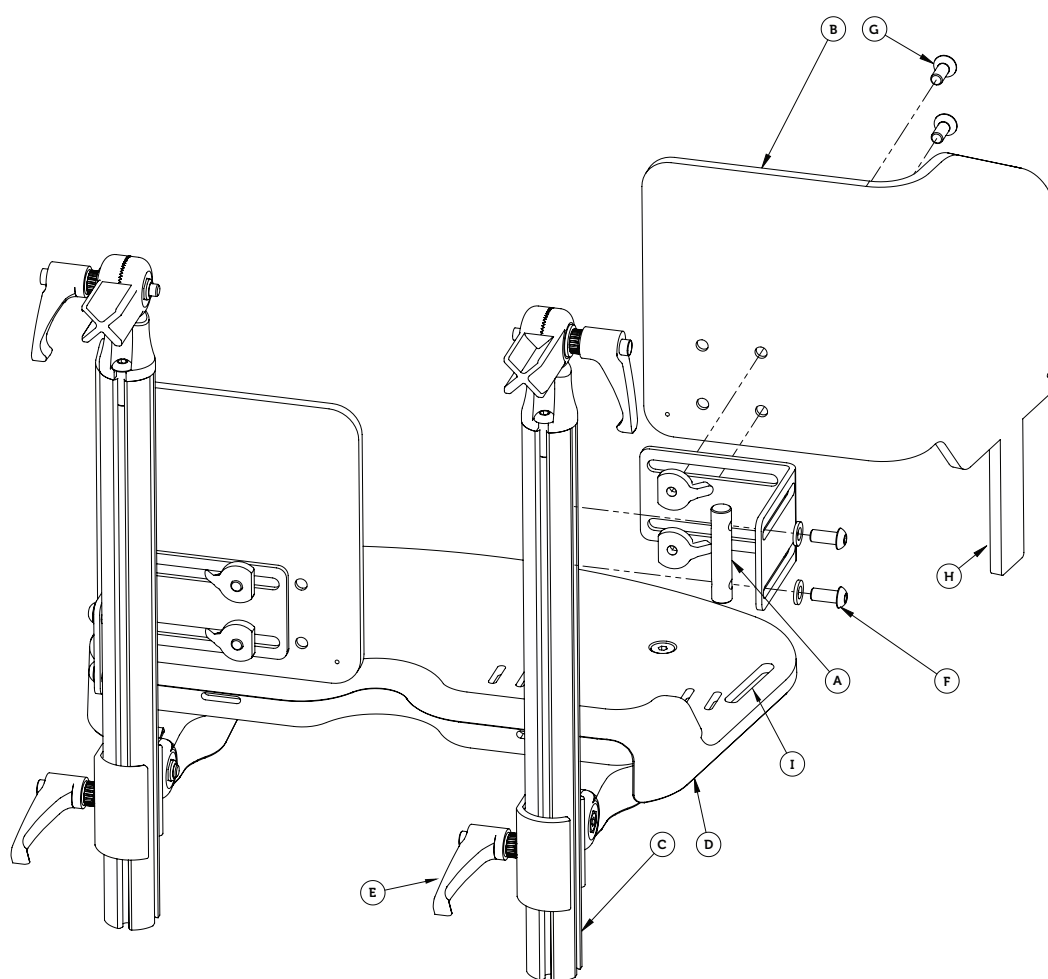

Plaststaget (H) kan etter justering til ønsket høyde, kappes eller varmes og bøyes inn under fotstøtteplaten etter eget ønske.

Leggstøtte

Montering av leggstøtte

Før montering av leggstøtte kan utføres, må eventuelle fotstøtter først fjernes. Begynn med å ta av endestykket (G), og løsne deretter spakskruen (F) som holder fotstøtten på plass på fotstøttestaget. Trekk deretter fotstøtteplaten og beslagene nedover.


Monter leggstøtten ved å skyve sprinten (C) inn i fotstøttestaget, juster til ønsket høyde, og stram skruene (E). Monter deretter fotstøtten og endestykket (G) tilbake.

Høydejustering av leggstøtte

For å justere høyden på leggstøtten, løsne skruene (E) litt, juster til ønsket høyde, og stram deretter skruene (E).

Breddejustering av leggstøtte


For å justere bredden på leggstøtten, løsne skruene (A) litt, juster til ønsket bredde, og stram deretter skruene (A).

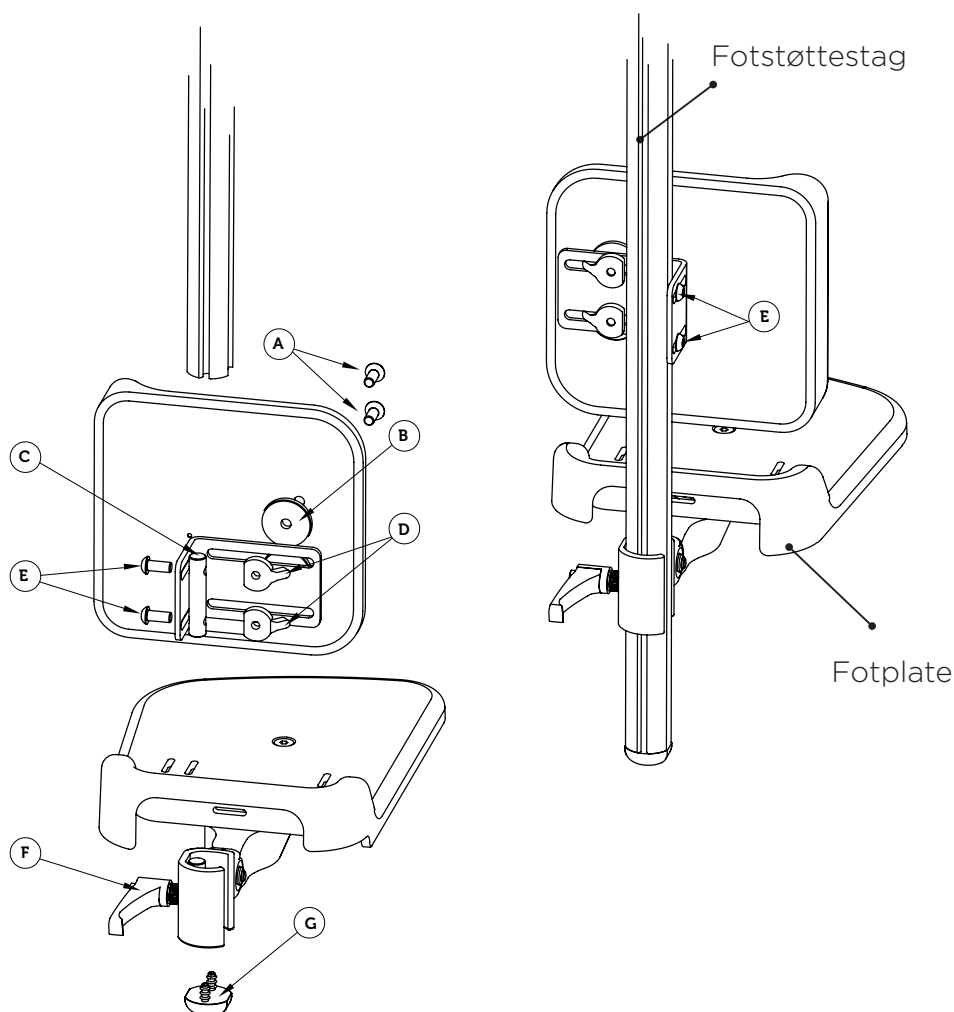

Ankelstøtte

Fotplaten er forberedt for montering av ankelstøtte.

Montering av ankelstøtte på helt justerbar og delt justerbar fotstøtte gjøres under den justerbare fotplaten.

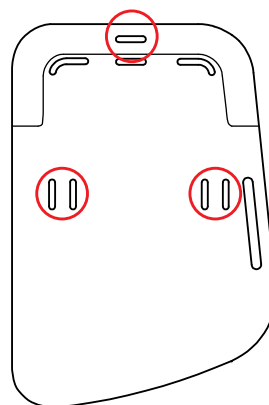


Kontroller at reimen ikke har foldet seg på ankelstøtten.

Fotreim

Fotplaten er forberedt for montering av fotreim.

Montering av fotreimene på alle fotplater gjøres ved å føre reimen ned og opp gjennom to av de forhåndsborede hullene i fotplaten. Fotreimen kan monteres i de fremre eller bakre hulloppsettene (se separat bruksanvisning).

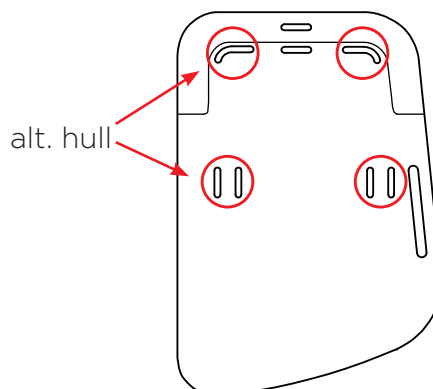

Oppsummering og etterkontroll

Etter montering og/eller justering er gjennomført, kontroller at produktene (hovedprodukt og tilbehør) er riktig montert i henhold til bruksanvisningen og at produktet fungerer som tiltenkt.

Kontroller innstillingene til produktet og dets tilbehør slik at brukeren har riktig sittestilling.

Etter all montering-, justering- eller servicearbeid må alle gantergrep, festeskruer og muttere kontrolleres og etterstrammes.

Kontroller at hjelpemiddelet er riktig balansert for å sikre at eventuell velterisiko er utelukket.

Hvis det oppdages feil, ikke bruk produktet. Kontakt din distributør av hjelpemiddelet for hjelp til utbedring.

Transport i kjøretøy

Produktet er ikke ment for transport av brukere i kjøretøy. Kollisjonstest er derfor ikke utført på dette produktet.

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

Dette produktet er et medisinteknisk utstyr beregnet for flergangsbruk. For at hjelpemiddelet skal fungere trygt og sikkert og nå estimert levetid, er det viktig med tilsyn, vedlikehold og rengjøring. Ved utskifting av deler i forbindelse med vedlikehold og service skal det alltid benyttes originale deler fra Anatomic Sitt.

Definisjoner:

Generelt skilles det mellom utbedrende vedlikehold, service og forebyggende vedlikehold.

- **Utbedrende vedlikehold** refererer til tiltak for å reparere et ødelagt produkt, akutt vedlikehold, vanskelig å planlegge i tide og ofte avhengig av produktets bruk.
- **Service** refererer til en enklere overhaling som kan forlenge levetiden til produktet. Dette inkluderer for eksempel kontroll av skruer og festemidler, bevegelige deler, generell slitasje etc., samt mindre reparasjoner.
- **Forebyggende vedlikehold** refererer til handlinger forårsaket av forutsigbare begrensninger i produktets ytelse. Denne typen vedlikehold kan ses på som handlinger av engangskaraktter som planlegges med tanke på tid, art og omfang. For dette produktet er det ikke nødvendig med forebyggende vedlikehold i løpet av produktets forventede levetid.

Kontroller før bruk

For at hjelpemiddelet skal fungere trygt og sikkert, er tilsyn og renhold viktig.

Inspeksjon og kontroll må utføres før hver bruk i henhold til følgende punkter:

- Kontroller produktet og dets tilbehør for løse deler, slitasje og skader. Sjekk spesielt skruer og muttere, samt håndskruer.
- Kontroller at setet er godt festet til understellet.
- Kontroller produktets stabilitet.
- Kontroller funksjonen på eventuelle tippesikringer.
- Kontroller bremsenes funksjon.
- Kontroller hjulenes tilstand og at de sitter godt fast.
- Kontroller produktets bevegelige funksjoner, for eksempel ryggvinkel, tilt, høydejustering osv., med hensyn til bevegelse og låsing.

Hvis det oppdages mangler: ikke bruk produktet. Kontakt din distributør av hjelpemiddelet for hjelp til utbedring.

Renhold

Rengjøringsbehovet varierer og må vurderes basert på bruk av produktet, men minst en gang i uken anbefales.

Rengjør produktet med svamp/klut og antibakterielle, milde rengjøringsmidler. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder slipemidler, etsende stoffer eller løsemidler.

Elektronikken har IP-klasse: IPX0. Dette betyr at den kun kan rengjøres med lett fuktet klut. Elektronikken skal fjernes før vask.

Service og utbedrende vedlikehold

Service utføres primært for å forlenge produktets levetid og for å sjekke om det er behov for utbedrende vedlikehold. Behovet for inspeksjon/service varierer og kan vurderes fra sak til sak avhengig av produktets bruk og slitasje, men det anbefales minst en gang hver 6. måned.

Arbeidet skal alltid utføres av kvalifisert personell, se avsnitt Sikkerhetsanvisninger i bruksanvisningen. Ved utskifting av ødelagte, slitte eller sprukne deler, bruk kun originaldeler fra Anatomic Sitt slik at produktet beholder CE-merket. Reservedeler kan bestilles etter egen reservedelsliste for det aktuelle produktet.

Ved enhver service skal det sikres at produktets funksjoner er pålitelige og at produktet er trygt å bruke. Hvis det er mangler som påvirker sikkerheten og ikke kan utbedres, må produktet tas ut av drift.

For rengjøring av produktet, se avsnittet Renhold.

Ved service, kontroller følgende og korriger om nødvendig:

- Kontroller produktets samtlige funksjoner.
- Kontroller produktet og dets tilbehør med tanke på løse deler, skjevhet, slitasje og skader.
- Kontroller at alle skruer, muttere og bolter er strammet skikkelig.
- Kontroller at alle grep er intakte og fungerer.
- Kontroller at setet er godt festet til understellet.
- Kontroller at eventuelle tippsikringer fungerer.
- Kontroller bremsenes funksjon.
- Funksjonstest og smør alle bevegelige deler som ledd, vaiere, hjul, skruer osv. Bruk egnet olje eller smøremiddel (for eksempel CRC 5-56, teflonspray osv.).
- Kontroller produktets bevegelige funksjoner, for eksempel ryggvinkel, setetilt, høydejustering osv. Både med tanke på justeringsmuligheter, bevegelse og låsing.
- Kontroller at stemplene låser i valgt posisjon.
- Kontroller at vaierne er korrekt plassert og riktig justert.
- Kontroller hjulenes funksjon: Sørg for at alle hjul sitter godt fast og står stabilt på underlaget. Kontroller at stolen ruller tilfredsstillende.

- Kontroller eventuell slitasje på alle ledd, tannledd og fester. Sørg for at de låser som de skal.
- Kontroller merking, etiketter og advarselssymboler for å sikre at de er hele og lesbare.

Tillegg for elektriske funksjoner

- Kontroller at aktuatorer og batterier er riktig montert og i god stand.
- Kontroller at ledninger, kontakter og tetningsringer er hele og uten synlige skader.
- Kontroller at håndkontroll og lader er i god stand og fungerer som de skal.

Etterkontroll

Når service er utført, kontroller at produktene (hovedprodukt og tilbehør) er korrekt montert i henhold til bruksanvisningen, og at de fungerer som tiltenkt.

Resirkulering

Resirkulering gjøres hensiktsmessig dersom hjelpemiddelet er personlig og skal gis til ny bruker eller ved langtidslagring. Arbeidet skal alltid utføres fagmessig av kvalifisert personell, se avsnitt Sikkerhetsinstruksjoner i bruksanvisninger. Ved utskiftning av deler skal det brukes originaldeler fra Anatomic Sitt.

For informasjon om produktet og dets funksjoner, se bruksanvisningen på www.anatomicsitt.com. For mer informasjon om produktets levetid, se avsnittet Begrensninger i bruksanvisningen.

Sjekk alltid ved resirkulering at hjelpemiddelet ikke er spesialtilpasset før det sendes til ny bruker.

Ved hver resirkulering bør det sikres at produktets funksjoner er pålitelige og at det er trygt å bruke. Hvis det er mangler som ikke kan rettes opp, må produktet tas ut av drift og resirkuleres.

Rengjøring

Rengjør produktet med svamp eller klut og antibakterielle, milde rengjøringsmidler. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder slipemidler, etsende stoffer eller løsemidler.

Produktet kan med fordel rengjøres i vaskekabinett: 65 °C i maks 10 minutter. Ved rengjøring av understell i vaskekabinett skal det stå fiksert og plasseres oppreist med låste hjul.

Elektriske komponenter skal fjernes fra understellet før rengjøring i vaskekabinett.

Tørk

Understellet kan tørkes i kabinett ved maks 65 °C i opptil 10 minutter.

Kontroller ved resirkulering

Etter rengjøring og tørking, sjekk produktet for skader/slitasje. Vær oppmerksom på at produktets levetid er begrenset (se avsnittet Begrensninger i bruksanvisningen) når det skal vurderes om produktet er egnet for resirkulering.

Ødelagte, slitte eller sprukne deler skiftes ut. Bruk kun originaldeler fra Anatomic Sitt. Reservedeler kan bestilles i henhold til egen reservedelsliste for gjeldende produkt. For at produktet skal beholde sin CE-merking kan hjelpemiddelet kun utstyres med reservedeler levert av Anatomic Sitt AB.

Funksjonstest og smør alle bevegelige deler som ledd, vaiere, hjul, skruer osv. Bruk egnet olje eller smøremiddel (for eksempel CRC 5-56, teflonspray osv.).

Kontroller at alle skruer og muttere er strammet. Sørg for at bruksanvisningen og alle originale etiketter følger den nye bestillingen.

Etiketter/klistremerker

Ved behov for nye etiketter/klistremerker, kontakt Anatomic Sitt. For plassering på hjelpemiddelet, se www.anatomicsitt.com hvor du også finner bruksanvisninger.

Oppfriskingsfarge

For å forhindre korrosjonsskader eller reparere riper kan oppfriskingsmaling bestilles fra Anatomic Sitt AB.

Artikkelnummer: 387299, Oppfriskingsfarge understell G2, matt svart.

Kontrollpunkter

Overordnet:

- Sjekk hele produktet og dets tilbehør for å identifisere ødelagte, sprukne eller slitte deler som skal byttes ut.
- Kontroller produktets samtlige funksjoner.
- Kontroller at hjelpemidlet ikke er skeivt, og at det står stabilt med alle hjul mot underlaget.

Understell:

- Kontroller at alle skruer og muttere er strammet.
- Kontroller at tiltfunksjonen fungerer, og at stempelet låser i valgt posisjon.
- Kontroller at vaierne er korrekt plassert og riktig justert..
- Kontroller at eventuell hevestempel fungerer som den skal.
- Kontroller at kjørebøylens justeringsmuligheter og ledd fungerer, og at polstringen er hel.

Hjul/Bremser:

- Kontroller at skruene til hjulene er godt strammet.
- Kontroller at styrehjulene snurrer uhindret, og at lagrene ikke sitter fast.
- Kontroller at hjul med låsefunksjon fungerer. Hjulene skal ikke kunne rulle når de er låst.
- Kontroller at understellet ruller tilfredsstillende.

Fotstøtte:

- Utfør funksjonskontroll av høyde- og vinkeljustering.
- Sjekk evt. slitasje på alle ledd og sørg for at de låses ordentlig.

Festesystem:

- Kontroller funksjonen slik at den låser seg.

Andre evt. tilbehør:

- Kontroller alle deler etter slitasje og bytt ved behov.
- Kontroller evt. låsninger og justeringsmuligheter.

Elektriske funksjoner:

- Kontroller at aktuatorer og batterier er riktig montert og i god stand.
- Kontroller at ledninger, kontakter og tetningsringer er hele og uten synlige skader.
- Kontroller at håndkontroll og lader er i god stand og fungerer som de skal.

Etterkontroll

Når resirkulering utføres, kontroller at produktene (hovedprodukt og tilbehør) er riktig montert i henhold til bruksanvisningen og fungerer som ment. Sjekk også at merking, etiketter og advarselssymbolene er komplette og lesbare.

Avfallshåndtering

Gjenvinning

En brukt del eller produkt må demonteres. Delene skal separeres etter materialtype og etterlates på gjenvinningsstasjon eller tilsvarende. Batteri- og gassfjærer sorteres som farlig avfall.

Garanti og retur

Garanti og reklamasjon

Garanti gjelder generelt i ett (1) år mot fabrikasjonsfeil fra leveringsdato eller etter avtale. Det gis ikke garanti for ytre påvirkninger eller unormal håndtering. Garantien bortfaller for elektriske komponenter dersom de åpnes eller manipuleres. For garantibehandling kreves defekt vare i retur. Legg alltid ved følgeseddel.

For best mulig vurdering av reklamasjonen, må produktet være tørt og rengjort når det sendes tilbake.

Beskriv feilen og årsaken så grundig som mulig. Se garantireparasjon eller mulig erstatningsgaranti. Legg ved en kopi av fakturaen og oppgi at produktet skal returneres til deg etter reparasjon. Oppgi leveringsadresse, kontaktperson og telefonnummer. Reklamasjonsskjema kan lastes ned fra vår nettside.

Pakk produktet godt for å beskytte det mot mulige støt under transport. Ikke glem å skrive ned forsendelsesnummer eller liknende på dokumentene dine. Dette for at du skal kunne spore forsendelsen dersom noe skulle skje under transport.

Retur

Feilbestilte eller feilleverte varer skal returneres innen 20 dager fra leveringsdato. Legg alltid ved kopi av både følgeseddel og faktura. Skriv inn årsaken til at du returnerer varene dine. Returskjema er tilgjengelig på vår nettside.

Pakk produktet godt for å beskytte det mot mulige støt under transport. Ikke glem å skrive ned forsendelsesnummer eller liknende på dokumentene dine. Dette for at du skal kunne spore forsendelsen dersom noe skulle skje under transport.

Vær oppmerksom på at tilpassede produkter ikke kan returneres!

Revisjon

Følgende endringer er gjort i denne versjonen av bruksanvisningen.

Symboloversikt

Ny etikett - Les bruksanvisningen

s. 5

Ny etikett - Ladekontakt

s. 5 + 25

Lading av batteri

Oppdatert tekst

s. 25

Revisjonsliste

Ver. 1.0 - 2025-01-17

Ver. 1.1 - 2025-03-27

Ver. 1.2 - 2025-05-13

Ver. 1.3 - 2025-06-05

SE

Anatomic Sitt AB (producent)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Besøksadresse

Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

World wide

anatomicsitt.com

info@anatomicsitt.com

facebook.com/anatomicsitt

youtube.com/anatomicsitt

