



LENTEX SOFT EUROFLEX

Flexibel hygienmadrass med unikt laminerat överdrag helt utan sömmar och dragkedjor

Soft Euroflex är en högpresterande hygienmadrass i LENTEX[®]-serien. Den är utvecklad för behandling av trycksår upp till och med kategori 3. Den genomtänkta skumsammansättningen ger ett lågt tryck oavsett brukarvikt och är samtidigt avlastande för utstickande kroppsdelar som axlar och hälar.

- **EXTREMT FLEXIBELT ÖVERDRAG** möjliggör Immersion and Envelopment. En viktig faktor för god tryckavlastning.
- **SEMI-TRANSPARENT LAMINAT** underlättar upptäckten av kontaminerade skumkärnor.
- **HELT UTAN SÖMMAR OCH DRAGKEDJOR** för att minska risken för kontaminering av madrassens skumkärna
- **VITT YTSKIKT**
Det ljusa ytskiktet underlättar för personal att upptäcka föroreningar på madrassens yta.
- **UNIK YTA FÖR EFFEKTIV RENGÖRING**
Tack vare ytskiktets unika struktur har utomstående studier visat att överdraget håller kvar upp till 73% mer decinfektionsmedel* vid rengöring.

** Studie, Tyskland 1999*



LENTEX SOFT EUROFLEX

UTVECKLAD FÖR HÖG KOMFORT OCH MYCKET GOD TRYCKAVLASTNING.

Godkänd för säng- och madrassvätt


Då det blir allt vanligare med automatiserade säng- och madrassvättar är det viktigt med produkter som klarar av den hanteringen utan att fyllas med vatten eller blåsas upp. Våra Lentexmadrasser har testats och godkänts för användning med säng- och madrassvätt från Sonosteam/Semi Staal.

Avlastning för utstickande kroppsdelar

Madrassen har ett dokumenterat lågt tryck (45 mm/Hg) för utstickande kroppsdelar, såsom hälar och skuldror varför ingen separat hälzon krävs.

Tryckavlastande egenskaper

Madrassen har genomgått utmattningstest enligt standard SS 876 00 11 med goda resultat. Madrassen erbjuder därigenom sittfunktion med höjt ryggläge i säng.

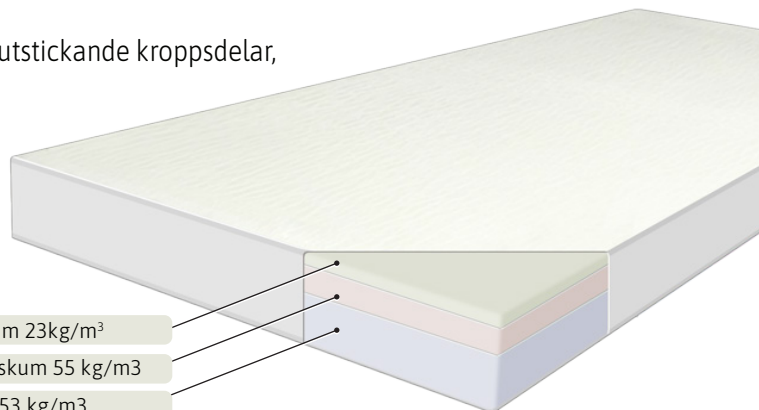

2 cm supersoft kallsaum 23kg/m³

4 cm tryckavlastande Flexskum 55 kg/m³

7 cm Waterlilysaum 53 kg/m³

STANDARD FÖR OBJEKTIV UTVÄRDERING AV MADRASSERS TRYCKAVLASTANDE EGENSKAPER.

För att få en objektiv bedömning av madrassers tryckavlastande egenskaper har RISE utvecklat en standard där man med intryckskroppar mäter det faktiska mottrycket i en madrass ger. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard SS 876 00 13.

Lentex® Soft Euroflex har testats av **RIS** enligt SS 876 00 13 och är tryckavlastande upp till och med sårkategori 3.

Testresultaten redovisas nedan.

Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög
Stor intryckskropp 300 N	< 30.0	30.0 - 34.9	35.0 - 39.9	40.0 - 44.9
Stor intryckskropp 600 N	< 45.0	45.0 - 52.9	53.0 - 60.9	61.0 - 68.9
Liten intryckskropp 40 N	< 45.0	45.0 - 52.9	53.0 - 60.9	61.0 - 68.9

Madras	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
Lentex Soft Euroflex	26	48	45

PRODUKTSPECIFIKATIONER



Material 2 cm supersoft kallsaum 23kg/m³,
4 cm tryckavlastande Flexskum 55 kg/m³,
7 cm Waterlilysaum 53 kg/m³.
Ytskiktet Lentex® är av polyuretan.

Storlekar 200/205/210 x 80/85/90/105/120 x 13 cm
(För andra storlekar kontakta Järven Health Care.)

Sårkategori Till och med kategori 3

Madrasvikt 11-13 kg beroende på längd och bredd

Hygien SS-EN ISO 811.

Madrasvätt Godkänd av Sonosteam/Semistaal

Max brukarvikt 180 kg.

Garanti 3 år på utmattning av madrasskärnans B-värde enligt SS 876 00 11.
5 år med åldersavskrivning på vidhäftningen av Lentex.

Brand SS 87600 01, normalrisk (testmetod EN 597-1 & 2)

Återvinning Helt återvinningsbar. Sorteras som brännbart avfall. Demontering krävs ej.

Märkning Tillverkningsår, månad, dag, EAN, skötselansvisningar, kontaktinformation, uppfyllda standarder & placering i säng.



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se