


sensio

# ML HearClear Auracast Earbuds Bluetooth 5.3

Bruksanvisning

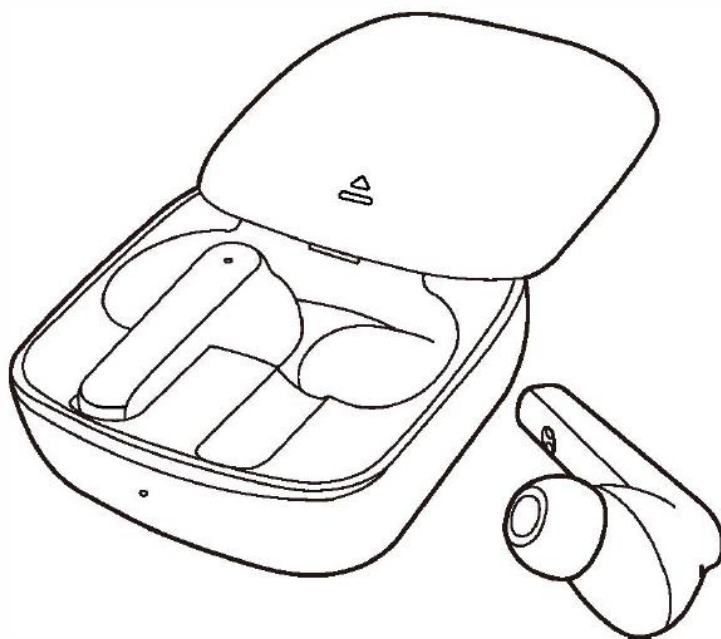

---

Produktnummer: 606531

Dokument:

# Innhold

---

<b>Innhold</b>	<b>2</b>
<b>Sikkerhet</b>	<b>3</b>
<b>Introduksjon</b>	<b>3</b>
<b>Daglig bruk</b>	<b>5</b>
<b>Paring og tilkobling</b>	<b>6</b>
<b>Batterilading</b>	<b>8</b>
<b>Musikk kontroller</b>	<b>8</b>
<b>Telefonsamtale:</b>	<b>9</b>
<b>Tilbakestilling:</b>	<b>9</b>
<b>Spesifikasjoner</b>	<b>10</b>
<b>Vedlikehold</b>	<b>10</b>
<b>Resirkulering</b>	<b>10</b>
<b>Symboler</b>	<b>11</b>
<b>Godkjenninger</b>	<b>12</b>
<b>Support</b>	<b>12</b>

# Sikkerhet

---

## Sikkerhetsråd

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.

# Introduksjon



---

## I esken

- Ladetui
- HearClear hørepropper
- USB-C ladekabel
- Reservepropper

## Produktbeskrivelse

EchoBeatz er trådløse hodetelefoner for Bluetooth Auracast lytting. Hodetelefonene har ANC-funksjon for aktiv redusering av omgivelsesslyd.

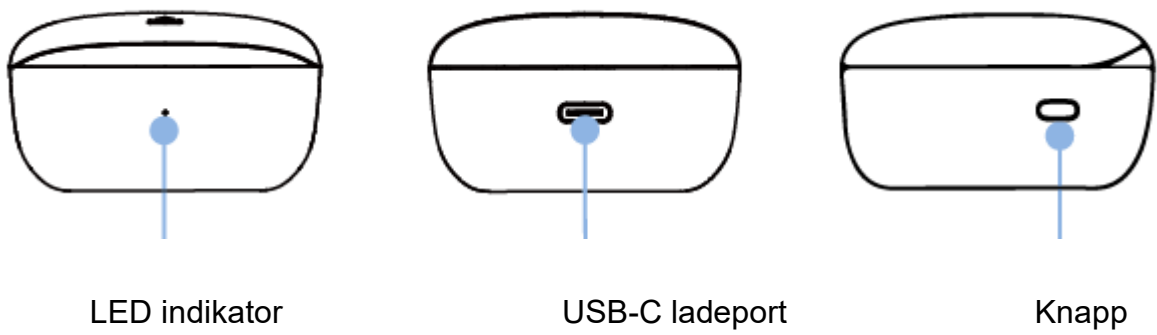
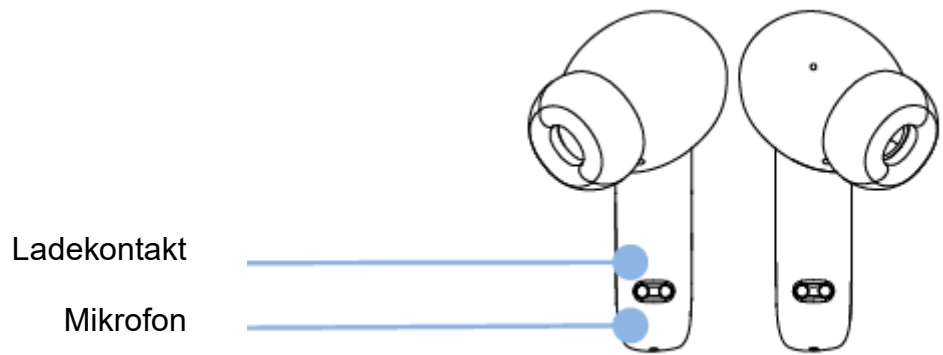


# Daglig bruk

---


## Strøm PÅ:

- Åpne ladeetuiet. Øreproppene slår seg på automatisk.
- For å slå på strøm manuelt: Trykk og hold berøringsområdet til øreproppene i 2 sekunder (når avslått).

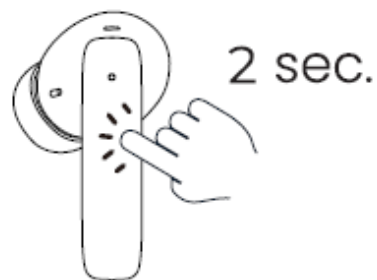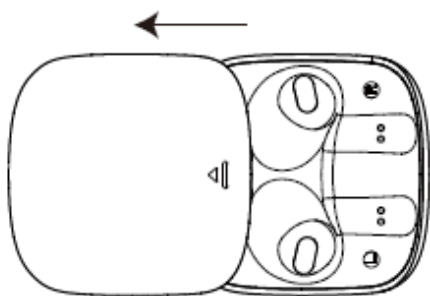

## Strøm AV:

- Plasser øreproppene i ladeetuiet og skyv lokket tilbake. Øreproppene slås av automatisk.

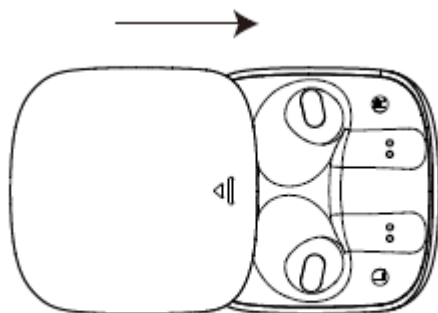


# Paring og tilkobling

---

## Paring mellom ørepropper og Bluetooth-enhet


### Bluetooth klassisk modus

- Hold øreproppene og mobiltelefonen (eller annen Bluetooth-enhet) innenfor 1 meter – jo nærmere, jo bedre.
- Åpne ladeetuiet og ta ut øreproppene.
- Ved førstegangsbruk: Aktiver Bluetooth på mobiltelefonen (eller annen Bluetooth-enhet), søk etter enheter, og velg "hearClear" fra listen over tilgjengelige Bluetooth-enheter for å opprette tilkobling.
- Hvis mobilen (eller Bluetooth-enheten) ikke finner øreproppenes Bluetooth-navn, legg øreproppene tilbake i ladeetuiet og hold inne knappen på etuiet i 3 sekunder. Da vil det hvite lyset på hovedøreproppen blinke sakte for å indikere at den er i Bluetooth-paringsmodus. Bruk så Bluetooth-enheten til å søke, og velg "hearClear" fra listen for å koble til.
- Når øreproppene først er parett og koblet til mobiltelefonen, trenger man ikke pare dem igjen. De kobler seg automatisk til telefonen når de slås på.

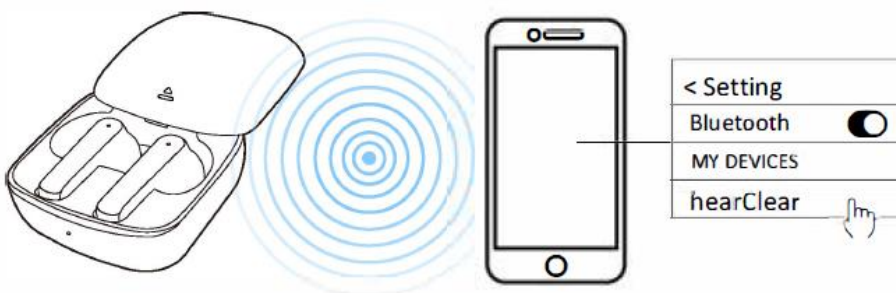

### **Auracast (kringkastings) modus**

- Hold øreproppene og mobiltelefonen (eller annen Bluetooth-enhet som støtter Auracast-modus) innenfor 1 meter – jo nærmere, jo bedre.
- Åpne ladeetuiet og ta ut øreproppene.
- Trykk 4 ganger på berøringsområdet på øreproppen (venstre eller høyre) for å gå inn i Auracast (kringkastings) modus.
- Ingen paring er nødvendig i Auracast (kringkastings) modus. Så lenge senderens Auracast er aktivert, kan øreproppene automatisk søke etter og koble til.
- Trykk 3 ganger på berøringsområdet på øreproppen (venstre eller høyre) for å bytte til en annen Auracast (kringkastings) kilde.

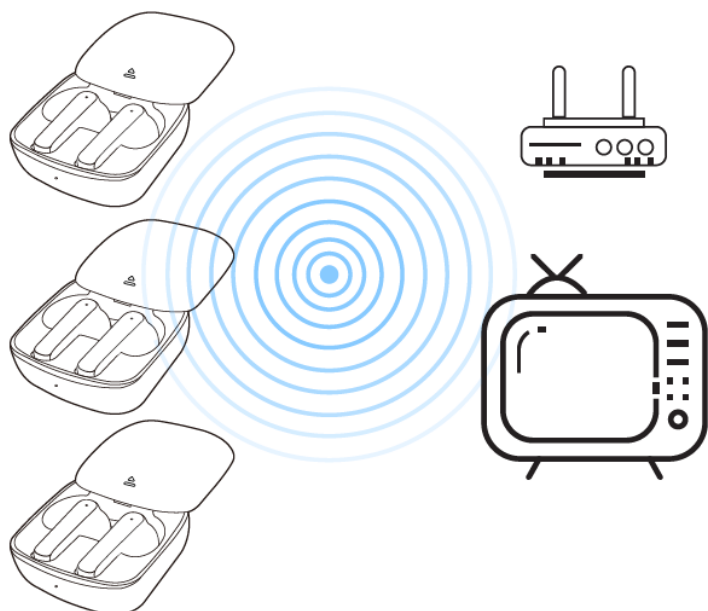

# Batterilading

---

- Plasser øreproppene i ladeetuiet og skyv lokket tilbake
- Sett inn ladekabelen i USB-C porten for å starte lading.

# Musikk kontroller

---

Play/pause	Trykk 2 ganger på berøringsområdet til en av øreproppene
Forrige spor	Trykk berøringsområdet på venstre ørepropp 3 ganger.
Neste spor	Trykk berøringsområdet på høyre ørepropp 3 ganger.
Bytte til Auracast (kringkastings) modus	Trykk berøringsområdet på en av øreproppene 4 ganger for å komme til Auracast modus.  Trykk berøringsområdet på en av øreproppene 3 ganger for å bytte til en annen Auracast kilde.
Bytte til Stemmeforsterkning	Trykk og hold berøringsområdet på høyre ørepropp i 2 sekunder.
Bytte til omgivelsesmodus	Trykk og hold berøringsområdet på venstre ørepropp i 2 sekunder.
Volum opp	Trykk berøringsområdet på høyre ørepropp.
Volum ned	Trykk berøringsområdet på venstre ørepropp.

# Telefonsamtale:

---

Besvare	Trykk 2 ganger på berøringsområdet på en av øreproppene.
Avslutt samtale	Trykk 2 ganger på berøringsområdet på en av øreproppene.
Avslå en telefonsamtale	Trykk og hold berøringsområdet på en av øreproppene i 2 sekunder.

## Aktiv støyreduisering (ANC):

ANC På	Trykk ANC bryter (1) opp for aktiv støyreduisering.
Modus for omgivelseslyd	Når du er i ANC modus, trykk knappen for omgivelseslyd (2).
ANC Av	Trykk ANC-bryter ned for å skru av aktiv støyreduisering.

# Tilbakestilling:

---

1. Når begge øreproppene er slått på og ikke er koblet til noen enhet, trykk og hold inne berøringsområdet på begge øreproppene i 6 sekunder til LED-lyset tennes og deretter slukkes. Etter dette vil øreproppene automatisk slå seg på igjen og gjenopprettes til fabrikkinnstillinger.
2. Med øreproppene i ladeetuiet og lokket åpent, trykk og hold inne knappen på ladeetuiet i 8 sekunder. LED-lyset på øreproppene vil da lyse opp og så slukkes. Øreproppene vil automatisk starte på nytt og tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.

# Spesifikasjoner

---

- Blåtann versjon: 5.3
- Ladetid: ca 2 timer
- Ladeport: USB-C
- Blåtann rekkevidde: Opptil 20 meter
- Kablet tilkobling: 3,5mm Audiokabel

# Vedlikehold

---

## Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

# Resirkulering

---

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

# Symboler

---

## Symbol    Beskrivelse



Varenummer



Serienummer



Batch-nummer



Unikt identifikasjonsnummer



Produsent



Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.



Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.

# Godkjenninger

---

## Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse til gjeldene krav for CE-merking. Se samsvarserklæring på Sensio sine nettsider for ytterligere informasjon.

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

## Support

---

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

## Produsent

Sensio AS, Møllergata 4, 0179 Oslo

- **E-post:** [post@vestfoldaudio.no](mailto:post@vestfoldaudio.no)
- **Nettside:** [vestfold.sensio.io](https://vestfold.sensio.io)
- **Telefon:** +47 33 47 33 47