

# KayserBetten

## Automatisk låsing av betjeningsknappene

Betjeningsknappene låses automatisk etter 5 sekunder uten aktivitet.

For å låse opp betjeningsknappene, trykk på knappen (pos. 1)

3 ganger kort og 1 gang så lenge til LED-lampen (pos. 2) lyser grønt.

Betjeningsknappene er låst opp.

- ① 3x kort
- ① 1x lang
- =
- ② LED lyser

## Aktivere/deaktivere håndbryterfunksjoner

For å aktivere eller deaktivere håndbryterfunksjonene, sett den blå nøkkelen (pos. 3) inn i knappen på baksiden av håndbryteren (pos. 4) og vri den til ønsket symbol:



Alle funksjoner deaktivert




Alle funksjoner aktivert  
Antitrendelenburg-posisjon deaktivert\*



Alle funksjoner aktivert

\* Kun med valgfri antitrendelenburg-posisjon

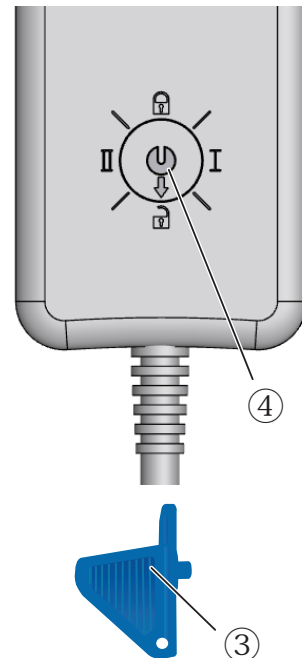

**Oppbevar denne bruksanvisningen utilgjengelig for barn og uvedkommende.**

**KayserBetten GmbH & Co. KG**

Rieper Straße 12

29683 Bad Fallingb. • Germany

Tel: + 49 51 63 - 65 95

Fax: + 49 51 63 - 20 76

info@kayserbetten.de

www.kayserbetten.de