

Clover Book XL OCR

Hurtigguide



1. Hold nede bordplaten med en hånd, og brett ut skjermen med den andre. Hold i skjermens øverste del eller bærehåndtaket.



2. Ta tak i nederste del av skjermen og fold den ut, samtig som du holder nede bordplaten.



3. Du kan også vinkle skjermen til hva som passer best for din sittestilling.



Tekst til Tale (OCR)

Det er 2 måter å bruke Tekst til Tale funksjonen på;


Fullside: Langt trykk på . Ta et bilde og lese opp teksten på et helt ark.




Gjeldende side: Kort trykk på  Tar bilde av det som vises på skjermen, og leser opp dette.

(Husk at Zoom-nivået påvirker dette).


Fullside




Det finnes 2 måter å aktivere Fullside på:

1. Langt trykk på Enter/OCR knappen  (i 2 sekunder).
2. Velg deretter Tekst til Tale fra menyen.

En uthevet ramme vil vises, og arket skal plasseres innenfor denne rammen (liggende). Du kan nå trykke på skjermen  Eller på enter/OCR knappen  Vent mens apparatet behandler teksten. 

Gjeldende side OCR

Trykk på Enter/OCR knappen  for å ta et bilde av det som vises på skjermen og å få dette opplest.

- Vanligvis vil apparatet selv justere bildet til riktig visning, og vil vanligvis automatisk rotere bildet. Du kan også manuelt rotere bildet om nødvendig.
- Trykk et langt trykk på Bytt kamera  for å komme til rotasjon. Trykk på Hjem/Tilbake  knappen for å få frem kontrollknappene. Trykk på  for å endre retning på teksten.

Trykk på Enter/OCR  for å aktivere OCR funksjonen. Trykk på exit  for å gå tilbake til forrige skjermbilde (eller langt trykk på Hjem/Tilbake ).

Tekst til Tale kontrollpanel

Med en gang gjenkjenningen er ferdig etter man tatt et bilde av tekst som man vil ha opplest, vil kontrollpanelet for Tekst til Tale dukke opp nederst på skjermen.



- Trykk og skyv på hastighetsknappen for å regulere lesehastigheten.
- Trykk på Zoomknappen for å hurtig zoom helt ut dersom du har zoomet inn teksten.
- Hvis man ikke trykker på noen av knappene vil kontrollpanelet lukke seg selv etter 8 sekunder. Et kort trykk på Hjem/Tilbake vil også lukke kontrollpanelet.
- Langt trykk på Hjem/Tilbake vil ta deg tilbake til forrige modus/applikasjon.
- Langt trykk på Frys bilde-knappen vil lagre bildet/teksten. Bildet vil bli lagret som bilde, og teksten vil bli lagret som tekst.

Bilde modus eller Tekst modus: trykk på  for å bytte.

I Bildemodus (Picture Mode), vil teksten vises som et bilde. Zoom inn og ut, panorering og fargevalg er mulig.