



Bruksanvisning for

JOSI-pro

Rehab buggy

Str	JOSI-pro
Size S	JPM-30002
Size M	JPM-30003
Size L	JPM-30004



John GmbH
Ziddelrasen 1b
D-99830 Treffurt

Phone: +49 36923 8388-0
Fax: +49 36923 8388-10
E-mail: info@johngmbh.com
Internet: www.johngmbh.com



Video



WE MANUFACTURE IN GERMANY 

Innholdsfortegnelse

1.	Introduksjon.....	2
2.	Instruksjoner for blinde og svaksynte.....	2
3.	Tiltent bruk.....	3
4.	CE-merking.....	3
5.	Hvor den kan brukes.....	3
6.	Maksimal vekt.....	3
7.	Sikkerhetsinstruksjoner og bruksrisiko.....	3
8.	Transport i kjøretøy.....	4
9.	Montering.....	5
10.	Legge sammen.....	9
11.	Understells innstillinger.....	9
12.	Anti-velt og veltespak.....	10
13.	Bremser og parkeringslås.....	10
14.	Håndledd sikkerhetssnor.....	10
15.	Forhjul.....	11
16.	Forhjulskobling og hjulbytte.....	11
17.	Fotstøtte.....	12
18.	Trinnløs innstilling.....	12
19.	Ryggjustering.....	12
20.	Justering av settepute og ryggstøttetrekk.....	13
21.	Seteoversikt.....	14
22.	Beltesystemet.....	15
23.	Pelotte system Pro.....	19
24.	Regnbeskyttelse og myggnett.....	19
25.	Solbeskyttelse med forlengelsesglidelås.....	19
26.	Veske.....	20
27.	Sykkel tilkobling.....	20
28.	I kombinasjon med andre medisinske produkter.....	22
29.	Vedlikehold og pleie.....	23
30.	Levetid og bruksslitasje.....	23
31.	Gjenbruk.....	24
32.	Avhending.....	24
33.	Garanti.....	24
34.	Rapportering om alvorlige hendelser.....	24
35.	Tekniske data.....	24
36.	Modell klistremerke.....	26

1. Introduksjon

JOSI-pro rehab buggy er et kvalitetsprodukt fra John GmbH. Det er utstyrt med et integrert sete(cover med for), tilt-in-space og en ryggjustering. Setedybden og nedre benlengde kan finjusteres. I tillegg kan setesystemet bli utstyrt med tilbehør (torsoputer, hødestøtte, settepute osv.). Tilbehøret kan også bli finjustert.

JOSI-pro er perfekt fo å sikre god mobilitet både utendørs og innendørs, I byen og i skog og mark. Front og bakhjul kan bli optimalisert for individuelle ønsker, også når produktet skal videreselges. Før bruk av JOSI-pro vennligst les HELE denne bruksanvisningen. Dette for å unngå feilbruk, og at optimal bruk av JOSI-pro kan oppnås.

Vi tar forbehold om feil og eventuelle tekniske endringer.

Bildene i denne manualen kan variere i forhold til spesifikke konfigurasjoner.

2. Instruksjon for blinde eller svaksynte

Slik instruksjon kan skaffes på forespørsel på PDF.

3. Tiltent bruk

JOSI-pro er en multifunksjonell rehabiliterings vogn med fastlåst eller is a multifunctional rehab stroller with faste eller svingbare forhjul, passer for barn og yngre opp til en høyde på 185 cm med alvorlige gangproblemer eller lammelser. Setejusteringen gjøres med det fleksible setejusterings systemet. JOSI-pro passer til innendørs og utendørs bruk, både i by og land. Ut fra brukerens ønsker, kan JOSI-pro bli brukt som trillevogn og som henger til sykkel. Det store utvalget av tilbehør og tilpassingsvennlige design sørger for at JOSI-pro er perfekt til blant annet ved høy eller lav muskelstyrke, amputasjoner, lamme eller deformerte lemmer, leddkontrakturer og leddskader.

4. CE-merking

Som ansvarlig produsent erklærer John GmbH at JOSI-pro er et medisinsk product og overholder alle regler i Regulativ (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council.

5. Hvor den skal brukes

JOSI-pro er, avhengig av konfigurasjon, passende for innendørs og utendørs bruk, i by og i ulendt terreng, og på asfaltert vei eller grusvei.

6. Maksimal vekt

Maksimal vekt på brukeren må ikke overstige; Str S 50 kg, Str M 70 kg og Str L 90 kg (se tekniske data).

7. Sikkerhetsinstruksjoner og bruksrisiko

- ⚠ Før bruk av produktet er det essensielt at en kyndig person gjennomgår sikker og korrekt bruk av produktet.
- ⚠ Alle sikkerhetsinstruksjoner må følges for å minimere risiko for skader. Gjør deg godt kjent med JOSI-pro før første gangs bruk – kjøremønster og størrelse
- ⚠ Sett deg inn i de tekniske data (inkludert brukervekt og nyttelast.
- ⚠ Sjekk og følg dekktrykk spesifikasjoner (se tekniske data).
- ⚠ Pass på at alle skruer, låser og fester er godt festet og skrudd til.
- ⚠ Bruk tilt-in-space kun når det ikke sitter noen i vognen.
- ⚠ Ved justering av tilt-in-space, trekk alltid i håndtaket samtidig som du åpner Quick Release.
- ⚠ JOSI-pro er godkjent for kun en person.
- ⚠ Tilbehøret anti-velt er sterkt anbefalt. (se kap. Om anti-velt og veltespak)
For flytting av brukeren fra vognen, plasser vognen i opprest posisjon og lås parkeringsbremsen.
- ⚠ JOSI-pro E-Drive skal parkeres på falt underlag og parkeringsbremsen låses.
- ⚠ Brukeren må alltid spennes godt fast under kjøring (se kap. om Beltesystemet).
- ⚠ Brukeren må ikke forlates uten tilsyn, selv ikke når han eller hun er godt festet med beltesystemet og parkeringsbremsen på.
- ⚠ Alltid bruk anti-velt utstyret ved bruk av JOSI-pro.
- ⚠ Et ekstra anti-velt sett er anbefalt ved økt risiko for velt. (f.eks. i bakker og ved ujevne veier/stier.
- ⚠ Parker alltid JOSI-pro på et flatt underlag og sett på parkeringsbremsen.
- ⚠ Pass på at brukerne ikke lener seg ut av JOSI-pro. Dette kan medføre risiko for vel teller at vognen tipper over. Om nødvendig plasser armer og ben i sikker posisjon. Bruk av spilebeskytter er anbefalt.
- ⚠ Bruk det faste 12.5" forhjul eller 12.5" forhjul for ujevne forhold.
- ⚠ Ved kjøring i hellinger eller ved ujevne forhold, vær oppmerksom på stabiliteten og kjør ikke mot hindringer.
- ⚠ JOSI-pro må kun løftes i rammen. IKKE løft den med kjørehåndtaket.
- ⚠ Pass på vektfordeling, og ikke heng tunge gjenstander i kjørehåndtaket som kan føre til endringer i vektfordelingen.
- ⚠ Bruk alltid ramper eller heis. Trapp kan kun benyttes ved hjelp av en ekstra person.
- ⚠ Pass på fingrene ved montering eller justeringer.

- ⚠ Pass på at ingenting henger ut av JOSI-pro ved bruk.
- ⚠ Bruk alltid håndledd sikkerhetssnor (se kap. Håndledd sikkerhetssnor).
- ⚠ Alle justeringer og rejusteringer – bremses, tyngdepunkt, belter osv – skal gjøres av en spesialist forhandler.
Trommelbremsene må vedlikeholdes årlig av en spesialist forhandler. (se kap. "Vedlikehold og pleie").
- ⚠ Alt tilbehør som ikke er tilpasset må tilpasses av en spesialist forhandler.
- ⚠ Skulle produktet være defekt eller ha funksjonsfeil, eller du har spørsmål om produktet, kontakt din spesialist forhandler så snart som mulig.
- ⚠ Ikke gjør noen forandringer på produktet.

7.1 Ryggjustering

- ⚠ Bruk to anti-velt, venstre og høyre ved justering av ryggjustering eller og liggende posisjon. (se kap. anti-velt og veltespak).

7.2 Når den brukes som sykkelhenger

- ⚠ Les bruks og sikkerhetsinstruksjonen for "Weber Clutch".
- ⚠ Total tillatt vekt for Weber Clutch 80kg.
Eksempel: 25kg JOSI-pro = ca. 55kg brukervekt (inkl. nyttelast).
- ⚠ Luftrykk dekk må være på 2,8 bar (16" and 20" wheels).
- ⚠ Pass på at trekkbøylen er riktig låst og sikret.
- ⚠ Pass på at sikkerhetslinen på trekkbøylen og Weber clutch er festet (se kap. Sykkeltilkobling).
- ⚠ Bruk alltid hjul deflektoren
- ⚠ Bruk alltid sikkerhetsstangen (see chapter Bike option).
Sykle alltid med tilt-in-space i laveste posisjon slik at tyngdepunktet forskyves nedover.
- ⚠ Bruk alltid 5punkts-beltet eller bryst-skulder belte I kombinasjon med setebuksen. Andre beltevarianter gir for lite sikkerhet ved sykkeltilkobling på grunn av risiko for å skli og mangel på fiksering av skuldrene. Brukeren i vognen skal alltid ha på hjelm.
- ⚠ Gjør ingen endringer på koblingen og heller ikke noen forlengning av festetanordningen.
- ⚠ Brukertilpasset rammekonstruksjon av JOSI-pro er IKKE godkjent for bruk som sykkelhenger.
- ⚠ Gjør deg kjent med kjøreegenskapene på sykkelhengeren før første tur..
- ⚠ Med vognen tilkoblet sykkel øker bremses og stopplengden. Kjør alltid forsiktig.
- ⚠ Unngå krappe svinger og raske retningsendringer.
- ⚠ Pass på å sette på alle deler i sykkelhenger tilbehør pakken (JP-15500 eller tilsvarende).
Bruk baklyset om morgenen og i generelt dårlige lysforhold. Også i mørke og når forholdene tilsier bruk av baklyset.
- ⚠ Følg de nasjonale regler som måtte finnes vedrørende kjøring med sykkelhenger, og følg ellers de trafikkregler som gjelder for sykling.
- ⚠ Vi anbefaler å sette på det følgende tilbehør på JOSI-pro ved bruk som sykkelhenger.
Spilebeskytter for 20" hjul (JP-15800 eller tilsvarende).
Myggnett (JP-15600) eller regnbeskyttelse (JP-15300) som beskyttelse mot insekter og små gjenstander (f.eks grus eller sand) og for å redusere risikoen for at lemmer kommer utenfor vognen.

8. Transport i kjøretøy

- ⚠ JOSI-pro er ikke godkjent for transport i kjøretøy (unntatt kollektivtransport).
JOSI-pro er ikke godkjent for å festes med feste/kroksett.

9. Montering



JOSI-pro



JOSI-pro kan lagres i stående stilling

9.1 Fjern remmen



1) Åpne spennen

Åpne spennen og fjern remmen rundt bunnrammen og ryggen som holder JOSI-pro sammenbrettet.

9.2 Bakhjul



1) Monter bakhjul

A. Hold inne knappen og sett hjulets aksel inn i hullet i vognens akselholder.

B. Slipp Knappen når hjulets aksel er korrekt plassert i akselholderen.

NB!:

Pass på at aksel og akselholder er rene og uten fremmedlegemer!

Obs:

⚠ Sjekk at hjul og akselholder sitter godt fast. Det skal ikke være mulig å fjerne hjulet uten å trykke på og holde knappen inne.

9.3 Parkeringsbrems



1) Låse parkeringsbremsene

Lås parkeringsbremsen.

Se kap. Bremses og parkeringslås.

9.4 Anti-velt



1) Monter anti-velt

Skyv anti-slip utstyret inn i rammens bakside og sikre det med en pin metallpinnen. (A).

2) Still inn anti-velt

Juster anti-velt.
Se kap. Anti-velt og veltespak.

9.5 Forhjul med tilkobling



1) Monter forhjul med tilkobling


Sett forhjulet på.
Se kap. forhjulskobling for instruksjoner.

Obs:

⚠ Ha vognen i oppreist stilling ved tilkobling (A) av forhjul for å unngå at vognen velter.

9.6 Transport nedsenking (tilbehør)

Transport nedsenking er tilleggsutstyr og gjør at vognen kan brettes sammen mer kompakt. Dette utstyret kan ettermonteres på JOSI-pro.

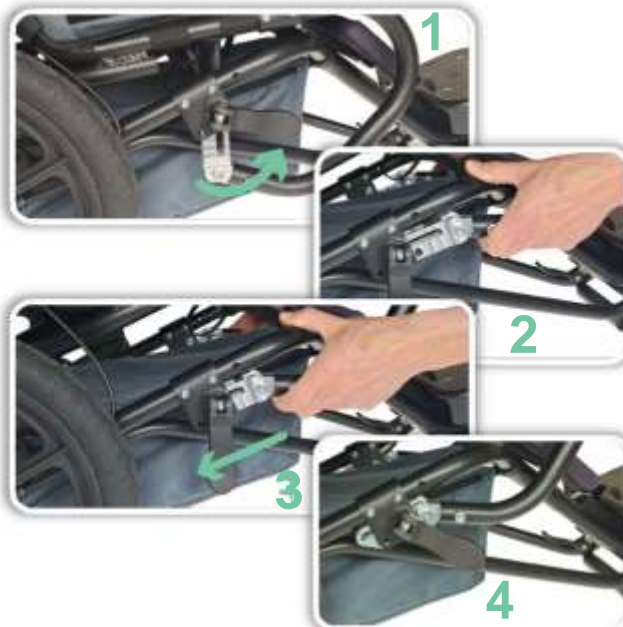


1) Løft seterammen

Løsne festehåndtaket.
Før seterammen forover, deretter trykk den helt tilbake til stopp. (1-2-3-4).

Obs:

⚠ Lås parkeringsbremsen før dette gjøres. (Se kap. Bremses og parkeringslås).

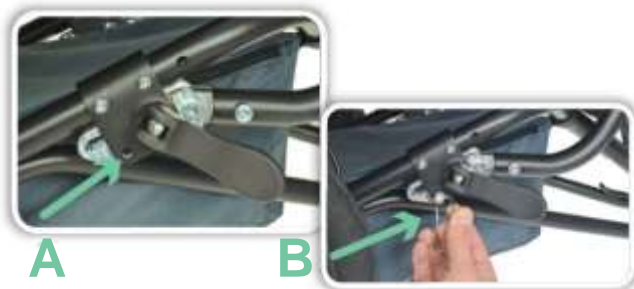

- 2) **Sett i sikkerhetsskrue**
 Sett sikkerhetsskruen I hullet (A) og brett klemmen(B) bakover

Obs:

⚠ ikke lås festehåndtaket enda slik at sikkerhetsskruen ikke setter seg fast.



- 3) **Lukk og lås festehåndtaket**
 Lukk festehåndtaket (C).

9.7 **Back arcn**
Bakdelen



- 1) **Brett ut bakdelen**
 Brett ut ryggdelen.

Obs:

Ryggjustering må som oftest låses opp for å brette ut ryggdelen.

Merk!

⚠ Fare for at seteryggen setter seg fast (A)! Ryggjusteringen beveger seg når ryggen brettes ut.



- 2) **Låsing**
 Brett ut ryggdelen helt og lås festene ved å trykke lett i pilens retning.

Obs!

⚠ Pass på at festet sitter helt låst.



- 3) **Nedre trekk over mekanisme**
 Lukk nedre trekk over brette-mekanismen ved hjelp av borrelås.



- 4) Øvre trekk over mekanisme
Lukk øvre trekk over brette mekanismen ved hjelp av borrelås.



- 5) Lås ryggjusteringen
Lås ryggjusteringen i ønsket posisjon.

9.8 Dyttehåndtaket



- 1) Justering av håndtaket
Juster det ergonomiske håndtaket ved hjelp av trykknappen(A).

Obs!

- ⚠ Lift JOSI-pro kun i rammen. JOSI-pro må ikke løftes ved hjelp av håndtaket!
- ⚠ Følg med på vektbalansen, og heng ikke tunge gjenstander på håndtaket som endrer vognens tyngdepunkt.

9.9 Brett ut / juster Fotstøtten



- 1) Brett ut fotstøtten
Brett ut fotstøtten.

Merk:

For justering av fotstøtten, se kap. Fotstøtte.

10. Legge sammen



11. Rammeinnstillinger



1) Legg sammen

Legg vognen sammen slik:

1. Lås parkeringsbremsen
2. Sett ryggen i rett posisjon
3. Legg inn fotstøtten(e)
4. Legg inn håndtaket (trykkknappen)
5. Lås opp ryggjustering (om utstyrt med)
6. Åpne øvre trekk over brette mekanismen
7. Åpne nedre trekk over brette mekanismen
8. Brett inn ryggen (dra i remmen)
9. Legg ned nedsekningen (om utstyrt med)
10. Fjern forhjul
11. Fjern anti-velt utstyret
12. Lås opp parkeringsbremsen (se kap. Bremses og parkeringslås)
13. Fjern bakhjulene
14. Plasser stroppen rundt bunnrammen og ryggen og lukk med spennen.

1) Tyngdepunkt

Tyngdepunktet kan justeres ved hjelp av forskjellige monteringspunktet på akselen. For å gjøre dette må skruer A og B fjernes. Pass på at skruene settes korrekt tilbake etterpå!

Merk:

Akselplaten er laget også for 20" hjul (C).

OBS!

⚠ Et feil innstilt tyngdepunkt kan påvirke kjørestilen negativt. Ved feil innstilling kan vognen tippe bakover.

2) Fjæring

Rammen kan tilpasses den enkelte brukers vekt. Bruk en 6 mm umbrakonøkkel for å justere fjæringen. Skru med klokken for å stivere fjæring, mot klokken for mykere fjæring.


Merk:

For korrekt fjæring anbefales dobbel fjæring (B) (art.nr. JP-12810) fra en brukervekt på 55 kg og over.

Obs!

⚠ Fjæringen må justeres slik at fjæren kun er lett komprimert (10-20%) når brukeren sitter i ro.

12. Anti-velt og veltespak

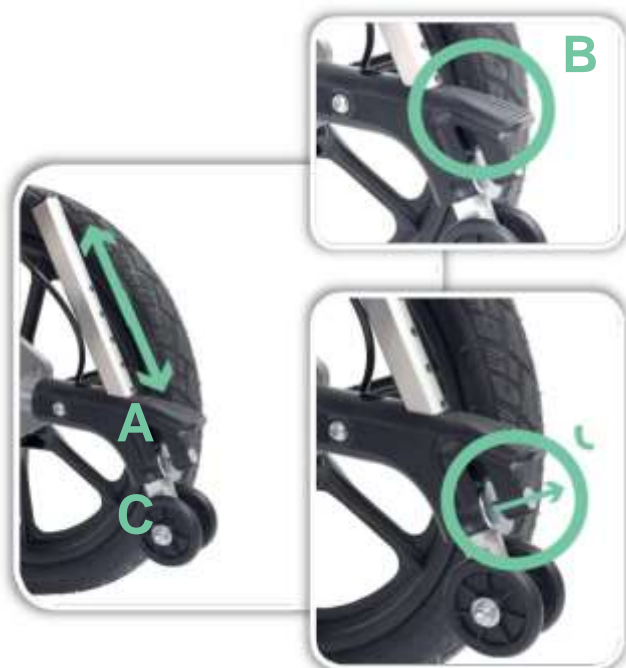

1) Innstilling

JOSI-pro er utstyrt med en kombinert justerbar anti-velt (A) og integrert veltespak (B).

Merk:

Anti-velt justeres enkelt ved hjelp av del C.

Obs!

- ⚠️ Bruk alltid anti-velt under kjøring med JOSI-pro.
- ⚠️ Bruk alltid to anti-velt (hvis utstyrt med) ved justering av ryggstøtten og i liggende posisjon.
- ⚠️ Bruk en andre anti-velt enhet dersom vognen brukes i ulendt terring og hellinger.

13. Bremses og parkeringslås



1) Bremsing

Begge hjul kan bremse individuelt med de to bremsespakene. Dette gjør det mulig å enkelt skifte kjøreretning i nedoverbakker

Bremsespakene brukes som parkeringsbrems ved å låse dem med den røde låsen (A).

Obs!

- ⚠️ Når brukeren skal ut av vognen, lås bremsespakene og dra ned anti-velt mekanismen.
- ⚠️ JOSI-pro skal alltid parkeres på flatt underlag med bremsespakene i låst posisjon.
- ⚠️ Trommelbremsene skal sjekkes årlig av en spesialist forhandler.

14. Sikkerhetssnor håndledd



1) Sikkerhetssnor

Sikkerhetssnoren festes til håndbuen og ditt håndledd.

Obs!

- ⚠️ Bruk alltid sikkerhetssnoren ved kjøring med JOSI-pro.
- ⚠️ Sikkerhetssnoren må sitte godt fast slik at den ikke kan falle av håndleddet.

15. Forhjul




1) Tilgjengelige forhjul

JOSI-pro kun utstyres med følgende luftfylte hjul:

- A. 12.5" fast forhjul
- B. 8" svingbart hjul med låsefunksjon
- C. 8" svingbart hjul Duo
- D. 12.5" Forhjul Pro med låsefunksjon.

Låsefunksjon:

1. Trykk på rød knapp E for å slå på låsefunksjonen.
2. Trekk i sort spak F for å slå på hjulets svingefunksjon.

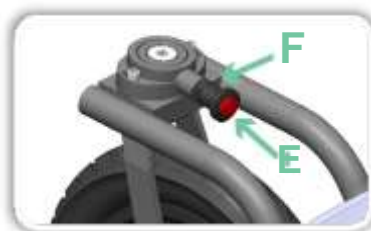

16. Forhjulstilkobling of hjulbytte



1) Monter

Sett tilkoblingen på underside av festet.

2) Plassering

Plasser tilkoblingen slik at låseskrue A går inn i sporet.

3) Låseskrue

Brett opp låseskruen.

4) Stram til låseskruen

Stram til låseskruen

17. Fotstøtte



1) Innstillinger

Fotstøtten har følgende innstillinger som standard:

1. Hæl/leggstøtte
2. Høydejustering, justering tilpasset fra kneet og ned
3. Vippejustering
4. Forberedt for låsing av fot

2) Justere høyden på fotstøtten

1. Lås opp hurtiglås A.
2. Still på ønsket høyde
3. Lås igjen hurtiglås A.

3) Vippejustering

Juster hellingen på fotstøtten på underside med justeringsskruer A (skiftenøkkel 13 mm).

18. Tilt-in-space



1) Trinnløs tilt-in-space, enkel og dobbel

1. Åpne hurtiglås A or B
2. juster setevinkelen
3. Lukk hurtiglås A or B

Obs!

- ⚠ Tilt-in-space skal kun brukes uten en person i vognen.
- Ved justering av tilt-in-space, hold alltid i styrehåndtaket samtidig.

19. Ryggjustering



1) Foreta ryggjustering

1. Hold i overkant av ryggstøtten og åpne hurtiglås A (på venste og høyre side).
2. Juster ryggen til ønsket stilling
3. Lås hurtiglåsen.

Obs!

- ⚠ Husk å låse begge hurtiglåsene. Bruk alltid to anti-velt for ryggjustering og for liggende stilling.

20. Juster seteputens posisjon samt baktrekk 20.1 Juster sittepute



- 1) **Løft sitteputen**
Løft opp sitteputen.

- 2) **Juster sitteputens stropper**
Juster hver strop til ønsket posisjon.
Merk:
Hver stropp kan justeres til forskjellig lengde etter ønske og brukerens kropp

Obs!

⚠ **Borrelåsfestene på remmene skal være på linje etter justering. (A).**

20.2 Justering av baktrekk



- 1) **Åpne solbeskyttelsen på baksiden**
Åpne solbeskyttelsen med glidelåsen.

- 2) **Åpne baksiden**
Åpne baksiden med glidelåsen.

- 3) **Justering av bakstroppene**
Juster hver strop til ønsket posisjon og lukk glidelåsen igjen.

Merk:

Hver stropp kan justeres til forskjellig lengde ut fra eget ønske og kroppsform.

21. Setesystemet

21.1 Seteenheten (basisinnstilling & tilbehør)



1) Plassering av deler

Seteenheten kan bli utstyrt med følgende deler for optimal seteposisjon.

Deler:

- A. Hodestøtte, justerbar med borrelås
- B. Polstret baktrekk
- C. Ryggpute, variabel høyde
- D. Ryggstøtte, justerbar høyde og bredde med borrelås.
- E. Abduksjonskile, justerbar med borrelåsoverflate
- F. Setepute, justerbar dybde med borrelåsoverflate
- G. Leggstøtte, justerbar
- H. Fotstøtte, justerbar



2) Ryggputen variabel høyde

Ryggputen har variabel høyde:

- A. Dra puten forover slik at den løsner fra borrelåsfestet
- B. Brett ryggputen bakover til ønsket høyde er oppnådd
- C. Fest puten til borrelåsoverflaten.
- D. Plasser puten tilbake.

21.2 Setedybde



1) Løft seteputen

Løft opp seteputen.



2) Juster putens dybde

Juster putens dybde og press den deretter fast til borrelåsoverflaten.



- 3) **Fjern stropper for mindre setedybde**
Om setedybden er bak linje A må stropp B fjernes.

Obs!

⚠ Når justert setedybde er foran linje A må stropp B festes igjen.

22. Beltesystem

22.1 5punktbelte

22.1.1 Beltehode



- 1) **Åpne solbeskyttelsen på baksiden**
Åpne solbeskyttelsen på baksiden med glidelåsen.

- 2) **Åpne baksiden**
Åpne baksiden med glidelåsen for å komme til beltet(A).



- 3) **Løsne beltefestet**
Fjern beltene fra beltefestet og dra dem forover gjennom baksiden.



- 4) **Conduct belts**
Før beltene gjennom de ønskede sporene og dra gjennom.



5) Tre i beltet

Tre beltet tilbake i beltefestet og sjekk at det sitter ordentlig på plass.



6) Legg rygg og solbeskyttelse tilbake

Lukk baksiden og solbeskyttelsen igjen med glidelåsen.

22.1.2 Beltelengde



1) Løft seteputen

Løft seteputen for tilgang til setebeltejusteringen.



2) Fjern borrelåsstrøpper

Fjernborrelåsstrøppene som holder beltet sammen.



3) Beltejusterer

A. Lås opp beltejustereren.

B. Juster beltet til ønsket lengde

Merk:

Når beltet er justert til ønsket lengde, dra beltespennen (foran) for å stramme beltet.




4) Lukk beltejustereren

A. Lukk beltejustereren

B. Brett beltet sammen og sett tilbake borrelåsstrøppene.

C. Trykk seteputen fast til borrelåsoverflatene

22.1.3 Fest beltet

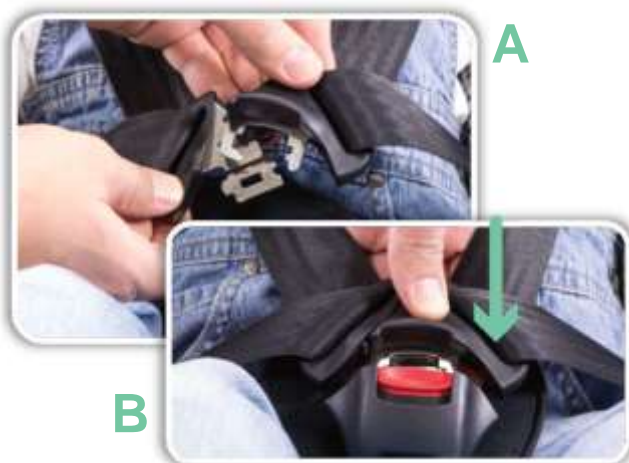

1) Fest 5 punkts beltet

Fest 5-punkts beltet slik:

De øvre stroppene skal over skuldrene og nedre stropp skal over lårene.

Merk:

Belteputene har borrelåsfeste for å holdes på plass.

Obs!

⚠ Pass på at belteputene sitter rett oppå skuldrene.

2) Lukke beltespennen

A. Plasser beltenes låsedel oppå hverandre.

B. Sett disse inn i beltespennen.

Merk:

Er beltet for kort, juster lengden (se seksjon Beltelengde).

22.1.4 Beltejusterer



1) Forkorte beltelengde

Juster beltet ved å dra i justeringsstroppen på baksiden av ryggen.

Obs!

⚠ Juster beltesystemet så det sitter godt inntil kroppen og sørger for god støtte.

⚠ Pass også på at beltene sitter slik at brukeren kan puste fritt.

2) Forleng belte

Forleng beltet ved å trykke på løsneknotten og trekk i fronten av stroppen.

Merk:

Beltet åpnes ved å trykke på den røde knappen på spennen.

22.2 Hoftebelte /Bryst-skulderbelte / Setebukser



1) Beltesystemer


Det følgende beltesystemet til festes til JOSI-pro:

- A. Bryst-skulderbelte
- B. Hoftebelte
- C. Setebukser



2) Bryst-skulderbelte og hoftebelte i bunnen

Fest de nedre stroppen fra bryst-skulderbelte og/eller hoftebelte med spennene på nedre seteramme (A).

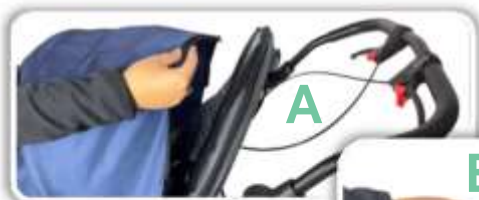

3) Bryst-skulderbelte i toppen

- A. Open solbeskyttelsen på baksiden med glidelåsen.
- B. Åpne baksiden med glidelås.
- C. Dra de øvre stroppene fra beltet gjennom ønsket spor.
- D. Fest de øvre stroppene fra beltet i kryss til øvre del av baksiden.
- E. Fest de øvre stroppene til beltet til spennene på rammen øverst på ryggen (E).
- F. Lukk ryggdel og solbeskyttelsen med glidelås igjen.



4) Setebukser

- A. Fest stroppene fra setebuksen gjennom spennene på setets nedre ramme.
- B. Brett de to stroppene rundt på baksiden og klikk de to spennene sammen. Juster til riktig stropp lengde.

23. Pelotte system Pro



1) Montering

- A. Monter Pelotte systemet på rammen. Montering av Pelotte systemet er ikke rigid og kan monteres der det er ønsket på rammen.
- B. Bruk den trinnløse posisjonsskruen til å sette putene i korrekt posisjon.

2) Snu putene 90°

- Putene har påført monteringspunkter (A) snu puten 90°.

24. Rain cover & mosquito net



1) Sidefeste

- Bruk klipsene til å feste myggnettet eller regnbeskyttelsen til siden av rammen.

2) Front feste

- Plasser regnbeskyttelsen eller myggnettet over fotstøtten.

25. Solbeskyttelse med forlengelses glidelås

25.1 Solbeskyttelse



1) Solbeskyttelse med vindu og glidelås

- Solbeskyttelse har dekkbart vindu og er utstyrt med to glidelåser på siden. De følgende tilbehør kan festes med glidelåsene (maks to av gangen):
Forlenget solbeskyttelse


Myggnett
Regnbeskyttelse

25.2 Forlengelse for solbeskyttelsen




- 1) **Forlengelse til solbeskyttelsen**
Forlengelsen festes til en av de to glidelåsene (A) på solbeskyttelsen.

26. Veske

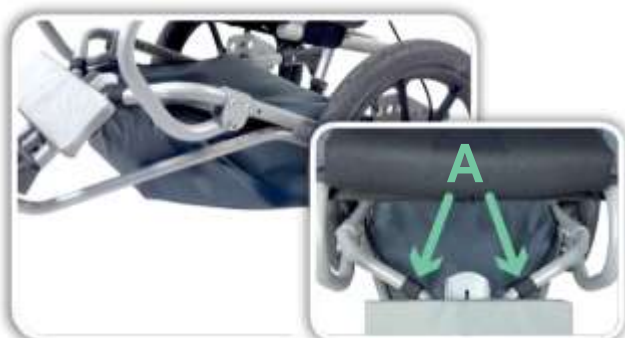

- 1) **Feste i front**
Fest veskens frontmonterte borrelåsstrapper (A) til rammen bak leggstøttene.

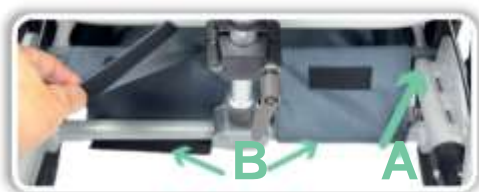

- 2) **Fest bak på vognen**
 1. Sett røret (A) bak på vesken i rammen foran akselplatene.
 2. Fest borrelåsstrappene på vesken (B) rundt akselrøret.



- 3) **Åpne og lukke**
Bruk de to glidelåsene, venstre og høyre, for å åpne og lukke vesken.



- 4) **Bruk som åpen veske**
Bruk som åpen veske ved å åpne de to glidelåsene helt og brett lukket ned i bunnen av vesken.

27. Sykkeltilkobling



- 1) **JOSI-pro som sykkelhenger**
Med sykkeltilkobling – trekkbøyle og sporutvidelse– kan JOSI-pro brukes som sykkelhenger. Tilkoblingssystemet gjør det enkelt. **Obs!**
Før bruk av sykkel tilkobling les sikkerhetsinstruksjonene nøye.



2) Montere trekkbøyle

Fjern forhjulet og fest trekkbøylen til Josi-pro (se også chapter kap. Forhjulskobling og hjulbytte).

Obs!

⚠ Forsikre deg om at tilkoblingen er satt inn riktig på undersiden av holderen (A).

⚠ Pass på at låseskruen (B) er ordentlig strammet.



3) Feste sikkerhetslinen

Led sikkerhetslinen gjennom rammen på JOSI-pro og lukk beltespennen.

Obs!

⚠ Sikkerhetslinen sørger for dobbel beskyttelse for koblingen mellom trekkbøylen og rammen og bør alltid benyttes på sykkelturen.

⚠

4) Hjulbeskytter

"Hjulbeskytter" hindrer objekter i å komme mellom hjulet og setet på JOSI-pro.

Venstre hjul:

For venstre hjul fungerer trekkbøylen som en beskytter.

Høyre hjul:

For høyre hjul fungerer anti-velt som en beskytter:

A. Fjern bakre anti-velt.

B. Sett den inn i siden av trekkbøylen med de små hjulene pekende mot høyre bakhjul på JOSI-pro og sett inn låsepinnen (1).



Obs!

Anti-velt på alltid peke mot hjulet på JOSI-pro og IKKE mot sykkelens.

⚠ Pass på at snoren (2) på låsepinnen (1) ledes over hjulbeskyttelsen.

5) Stativ/støtte

Hjulbeskyttelsen kan roteres 90°.

Dermed kan denne brukes som støtte/stativ for sykkeltilkoblingen.

Obs!

⚠ Bruk alltid låsepinnen (A) i denne posisjonen.


⚠ Bruk dette valget KUN uten bruker i JOSI-pro.

⚠





A

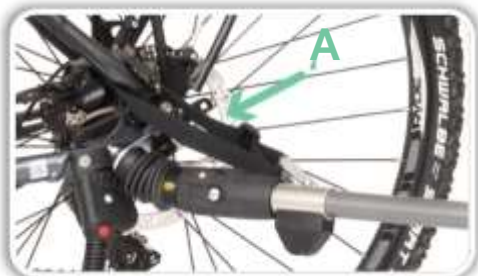

6) Sikkerhetsstang

Håndtaket på JOSI-pro kan legges helt forover når du sykler og fungerer som en sikkerhetsstang for hodet.

Obs!

- ⚠ Plasthengslene (A) må være aktive.
- ⚠ Personen i vognen skal alltid bære hjelm.

7) Tilt-in-space i nedre posisjon

Sett tilt-in-space I nedre posisjon når du sykler slik at tyngdepunktet forskyves fremover. Se klistremerket på trekkbøylen.

8) Tilkoble Weber clutch

Bruk Weber clutch til å koble trekkbøylen til sykkelen. (Se Weber clutch instruksjoner for bruk)

Obs!

- ⚠ Bruk sikkerhetslinen (A) gjennom sykkelens ramme og gjennom festet. Les
- ⚠ installeringsinstruksjonene for Weber kobling og følg dem nøye.

28. I kombinasjon med annet medisinsk utstyr 28.1 Decon e-drive



1) Decon e-Drive 20" Big Ben Versjon

Inkl. batteri / batteriveske og lader.

Nyttelast kapasitet 125 kg

(total vekt på vognen, bruker og last eksl. vekten på E-Drive).

Obs!

- ⚠ Pass på totalvekten I forhold til de forskjellige modellene av JOSI-pro (brukervekt og nyttelast, se Tekniske data). Totalvekten på 125 kg må ikke overskrides I noen kombinasjon ved bruk av Decon E-Drive. To anti-velt (venstre og høyre) må monteres og brukes (se kap. Anti-velt og veltespak).
- ⚠ For bruksanvisning og garantiregler, les
- ⚠ også manualen for Decon E-Drive

Installeringen bør gjøres av en spesialist forhandler.

29. Vedlikehold og pleie

29.1 Teknisk inspeksjon

For teknisk inspeksjon vennligst noter følgende:

Visuell sjekk, f.eks for skader:	Før hver tur
Beltesystemets justeringer samt spenne:	Før hver tur
Bremsetest:	Før hver tur
Koblinger, låser, festepunkter:	Før hver tur
Lufttrykk i dekkene:	Ukentig, før hver tur
Slitedeler (inkludert hjul, kulelager, dekk, bremses, kabler, bremsespaker, parkeringsbrems, hengsler, festepunkter, låser)	Månedlig
Alle skruer:	Månedlig

Ved ødelagte eller defekte deler, kontakt din forhandler for reparasjon/bytte av deler.

29.2 Vedlikehold trommelbrems

Trommelbremsene må sjekkes og justeres av en spesialist forhandler minst en gang eller dersom bremseeffekten blir dårligere eller feiler (parkeringsbrems og hovedbrems). Dersom justeringer ikke er nok, må bremsene byttes ut.

29.3 Vedlikeholdssett

Vi anbefaler at hengsler, festepunkter, fjæring og foldemekanismen blir byttet av spesialist forhandler hvert andre år. Bruk de respektive vedlikeholdssett som kan skaffes ved å oppgi JOSI-pro's serienummer .

29.4 Pleie og rengjøring

Rammen kan gjøres ren med vanlig vann og såpe. Alle stoffer kan vaskes med varmt vann og desinfiseres med desinfeksjonsmiddel for tekstiler og overflater (IKKE klorin!). Oppbevar JOSI-pro på et tørt, godt ventilert sted. Før lagring må JOSI-pro være tørr for å unngå mugg og muggflekker. Utsett JOSI-pro tils å lite direkte sollys som mulig for å unngå at fargene blekner.

30. Levetid og bruksslitasje

Levetiden for JOSI-pro er fra produsent regnet å være 5 år. Med jevnlig og ordentlig pleie, vedlikehold og reparasjoner kan levetiden forlenges avhengig av hvor mye JOSI-pro brukes. JOSI-pro er laget av rustbeskyttet materiale (se materialer brukt i kap. Tekniske data). Produktet har deler og komponenter som utsettes for vanlig slitasje også ved normal bruk, men dette avhenger av modell, bruksmønster samt vedlikehold og pleie. Spesielt ved intensive bruk (daglig bruk i all slags vær), kan enkelte deler og komponenter bli utslitt til og med før garantiperioden er gått ut og/eller den oppgitte levetiden er nådd. I slike tilfeller av tidlig slitte deler grunnet bruk, regnes ikke dette automatisk som en defekt på produktet.

Levetiden påvirkes av blant annet:

Antall kjørte kilometer

 Totaltvekt: brukerens vekt og nyttelast

 Påvirkninger fra værforhold:

 UV bestråling, fuktighet,

 Skitt, temperatur, salt, kontakt med

 saltvann, veisalt, lagring, nivå på

 vedlikehold.

31. Gjenbruk

Produktet egner seg kun til gjenbruk/videre bruk dersom sikkerheten og egenskapene til produktet ikke er endret som følge av bruk.

Aluminium rørrammen er rustbeskyttet på grunn av pulverlakkeringen. Alle skruekoblinger og led er rustbeskyttet. Selv om pulverlakkeringen blir skadet vil det ikke dannes rust grunnet aluminiumskonstruksjonen.

Generelt er det anbefalt at JOSI-pro blir overhålt av en spesialist forhandler eller hos produsent før gjenbruk.

For gjenbruk må tilstanden og sikkerheten ved bruk av produktet sjekket av en spesialist forhandler. Bruk sjekklisten for levering, vedlikehold og gjenbruk som er tilgjengelig fra produsenten. Slitedeler må byttes ut før gjenbruk. Rengjøring og desinfisering av produktet må utføres i henhold til rengjøringsinstruksjonen.

Av hygieniske årsaker må polstrede deler som har vært i direkte kontakt med brukerens hud byttes ut ved gjenbruk.

32. Avhending/gjenvinning

Produktet må avhendes i henhold til de respektive lands regler og rutiner for avfall/gjenvinning.

33. Garanti

Følgende garantiregler gjelder for produsent- og materialdefekter:

2 års generell garanti på produktet (unntatt slitedeler)

3 års garanti på aluminiumsrammen

Garantireglene for Decon electric drive (dersom montert) finnes i dette produktets bruksanvisning.

34. Rapportering av alvorlige hendelser


Alle alvorlige hendelser i sammenheng med produktet må rapporteres til produsenten (John GmbH) og relevante myndigheter. „Alvorlig hendelse“ betyr alle hendelser som direkte eller indirekte leder, kunne ha ledet eller kan lede til noe av det følgende: Død (pasient, bruker eller annen person); midlertidig eller permanent alvorlig forverring av en pasients, brukers eller annen persons helsetilstand; alvorlig trussel mot folkehelsen – en hendelse som kan resultere i overhengende risiko for død, forverring av en persons helsetilstand, alvorlig sykdom som behøver umiddelbar behandling, og som kan forårsake betydelig sykelighet eller dødsfall i mennesker, eller som er uvanlig eller uventet for det aktuelle stedet og/eller tidspunktet. (Regulation (EU) 2017/745)

35. Tekniske data

35.1 Materialer brukt



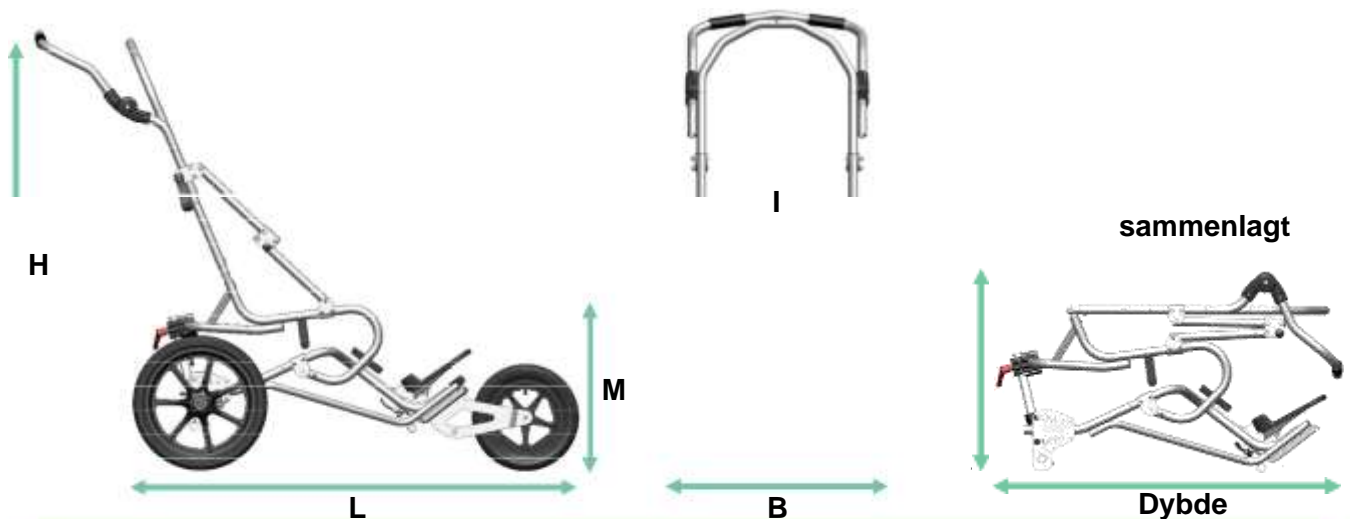

Rør ramme	Aluminium runde rør, AlMgSi0.5/EN AW-6060 T66, pudder-lakkert
Laser hjørne deler	Aluminium AlMg3, pudder-lakkert
Dreide / fresede parts	AW60682-AISi1; 1.4301-A2; PVC-CAW
Skruer og festemateriale	Rustfritt stål A1/ A2; steel 10.9 galvanisert
Trekk stoff	"Supratex" nylon stoff PU dekket
Stopping	Polyether skum
Belter	Polyesternetting; polyamide kroker/hempe netting
Hjul	Plast og aluminiumskant med luftfylte dekk

35.2 Dimensjoner og vekt



JOSI-pro Artikkelnummer	Size XS JPM-30001	Size S JPM-30002	Size M JPM-30003	Size L JPM-30004
Størrelse	Ca. 75-115 cm	Ca. 105-145 cm	Ca. 125-165 cm	Ca. 150-185 cm
Høyde: H	123 cm	128 cm	136 cm	141 cm
Lengde: L	Se neste tabell	Se neste tabell	Se neste tabell	Se neste tabell
Sporvidde: B	63 cm	63 cm	68 cm	73 cm
m/ekstra vidde: B	72,5 cm	72,5 cm	77,5 cm	82,5 cm
Indre/setebredde: I	Opp til 36 cm	Opp til 36 cm	Opp til 42 cm	Opp til 46 cm
Setehøyde: M (Inkl. pute)	57 cm	57 cm	57 cm	59 cm
setedybde	18 - 32 cm	25 - 40 cm	30 - 45 cm	35 - 50 cm
Legglengde	Opp til 32 cm	Opp til 36 cm	Opp til 42 cm	Opp til 47 cm
Total rygg høyde	73 cm	80 cm	90 cm	95 cm
Pakkestr: WDH	55 x 90 x 56 cm	55 x 97 x 60 cm	60 x 99 x 64 cm	66 x 103 x 64 cm
Med senking: WDH	55 x 90 x 48 cm	55 x 97 x 52 cm	60 x 99 x 56 cm	66 x 103 x 56 cm
Nyttelast / bruker	max. 50 kg	max. 50 kg	max. 70 kg	max. 90 kg
Ekstra last veske	max. 5 kg	max. 5 kg	max. 5 kg	max. 5 kg
Ekstra last Brett med. utstyr	max. 15 kg	max. 15 kg	max. 15 kg	max. 15 kg
Vekt brettet ramme (med trekk)	17 kg	18 kg	19,5 kg	21,5 kg
Vekt standard konfigurasjon	24,5 kg	25,5 kg	27 kg	29 kg
Bakhjul, luftdekk	16" / 20"	16" / 20"	16" / 20"	16" / 20"
Lufttrykk. bakhjul	2.0 bar (16" & 20")	2.0 bar (16" & 20")	2.0 bar (16" & 20")	2.0 bar (16" & 20")
Med sykkel	2,5-2,8 bar (16" & 20")	2,5-2,8 bar (16" & 20")	2,5-2,8 bar (16" & 20")	2,5-2,8 bar (16" & 20")
Forhjul, luftdekk	Se neste tabell	Se neste tabell	Se neste tabell	Se neste tabell
Hjulammer	0° / 5° med ekstra vidde	0° / 5° med ekstra vidde	0° / 5° med ekstra vidde	0° / 5° med ekstra vidde
Setevinkel	Ca. 10° - 30°	Ca. 10° - 30°	Ca. 10° - 30°	Ca. 10° - 30°
Ryggvinkel	Ca. 110° - 160°	Ca. 110° - 160°	Ca. 110° - 160°	Ca. 110° - 160°

35.3 Additional information on length and front wheels

	Size XS	Size S	Size M	Size L	
12.5" fast forhjul:					
Lengde i normal pos: L Lufttrykk	125 cm 1,8 bar	135 cm 1,8 bar	128 cm 1,8 bar	152 cm 1,8 bar	
8" Svingbart hjul:					
Lengde i normal pos: L Lufttrykk	110 cm 2,5 bar	120 cm 2,5 bar	123 cm 2,5 bar	134 cm 2,5 bar	
8" Svingbart hjul Duo:					
Lengde i normal pos: L Lufttrykk	100 cm 2,5 bar	110 cm 2,5 bar	113 cm 2,5 bar	126 cm 2,5 bar	
12.5" Forhjul Pro:					
Lengde i normal pos: L Lufttrykk	128 cm 1,8 bar	138 cm 1,8 bar	141 cm 1,8 bar	154 cm 1,8 bar	

36. Modell klistremerke

Det værbestandige modell klistremerket for JOSI-pro sitter på rammens underside nær fotstøttene.

⚠ Hvis klistremerket ikke lenger er leselig, kontakt specialist forhandleren slik at et nytt modell klistremerke kan bli tilsendt fra produsenten.

John GmbH

Ziddelrasen 1b - D-99830 Treffurt - Tel: +49 36923 8388-0 - Fax: +49 36923 8388-10 - info@johngmbh.com