

sensio

Vozono™ Handheld Microphone

Bruksanvisning



Innhold

Sikkerhet	3
Introduksjon	4
Kom i gang	5
Bruk	6
Feilsøking	7
Spesifikasjoner	7
Vedlikehold	8
Resirkulering	8
Symboler	9
Godkjenninger	10
Support	10

Sikkerhet

Sikkerhetsråd

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys


Introduksjon

I esken

- Vozono Handheld Microphone
- Bruksanvisning
- Mikrofonholder (i egen eske)

Produktbeskrivelse

Denne mikrofonen benyttes i Vozono lydutjevningsanlegg. Enheten er oppladbar og sammenkobles med Vozono Base eller Vozono Portabel (Vozono Duo og Vozono Uno). Mikrofonen kan benyttes med Push To Talk (PTT), eller med av/på-funksjon.

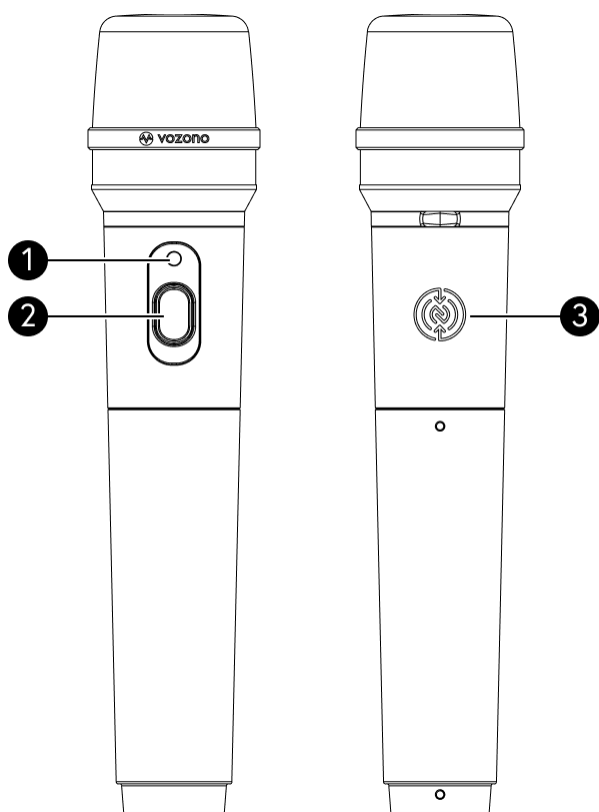

1. Lysindikator
2. Betjeningsknapp
3. NFC-felt

Kom i gang

Sammenkobling

For at mikrofonen skal fungere må den sammenkobles med Vozono Base eller Vozono Portabel. Sammenkoble én mikrofon av gangen.

1. Slå på Vozono Base eller Vozono Portabel med av/på-knappen, og vent på fast grønt lys i av/på-knappen.
2. Kort trykk på betjeningsknappen ② på mikrofonen
3. Lysindikator ① på mikrofonen begynner å blinke, gult lys ved først gangs oppkobling, grønt lys hvis allerede sammenkoblet til annet system.
4. Plasser mikrofonen med NFC-feltet på mikrofon og Base pekende mot hverandre. Et grønt lys tennes og lyser i 3 sekunder for å bekrefte sammenkobling.
5. Gjenta punkt 2-5 til alle mikrofoner er tilkoblet.

Sammenkoblingen er gjennomført.

Testing

1. Test én og én mikrofon ved å aktivere mikrofonene med betjeningsknappen.
2. Slå på den håndholdte mikrofonen, og sjekk at ny lampe tennes på Vozono Base eller Vozono portabel. Snakk i mikrofonen for å bekrefte at det er lyd
3. Gjenta med alle mikrofoner til alle er testet.

Anlegget er klart til bruk.

Bruk

Betjening

Betjeningsknappen har 2 funksjoner:

- **Av/på:** Trykk én gang på knappen for å slå mikrofonen av eller på.
- **Push To Talk (PTT):** Knappen holdes inne mens man snakker

Mikrofonen leveres innstilt på PTT. Man veksler mellom de to innstillingene, ved å plassere mikrofonen i lader, og holde betjeningsknappen inne i 3 sekunder. Innstillingen indikeres på følgende måte:

- Et gult blink på mikrofonen indikerer innstillingen av/på
- To gule blink indikerer innstillingen PTT

Plassering

Plasser mikrofonens topp mellom munnen og hakespissen, og prat naturlig uten å heve stemmen.

Mikrofonen kan plasseres i tilhørende mikrofonholder, når den ikke er i aktiv bruk.

Lysindikasjoner ①

- **Grønt lys:** Indikerer at mikrofonen er påslått og sammenkoblet
- **Grønt blinkende lys:** Oppretter forbindelse
- **Rødt lys i tre sekunder:** Indikerer opptatt kanal
- **Rødt lysblink hvert 5. sekund:** Lavt batteri
- **Gult blinkende lys:** Utenfor rekkevidde eller ikke sammenkoblet
- **Rødt raskt blinkende lys:** Feilindikasjon

Lading

Mikrofonen lades i Vozono lademodul.

- **Rødt lys på mikrofonen:** Lading pågår
- **Grønt lys på mikrofonen:** Lading er ferdig

Feilsøking

Mikrofonen virker ikke og blinker gult

Mikrofonen er utenfor rekkevidde, eller er ikke sammenkoblet. Se punkt for sammekobling

Spesifikasjoner

Tekniske data

- **Audiofrekvens:** 125 – 16 000 Hz
- **Rekkevidde:** 25 meter, fri sikt
- **Batteri:** 3,2 V LiFePO4
- **Brukstid:** 14 timer
- **Radiofrekvenser:** ISM-bånd 2,4 GHz og 5,725 GHz
- **Sendereffekt:** opptil 200 mW

Dimensjoner

- **Høyde:** 182 mm
- **Diameter:** 40 mm
- **Vekt:** 135 g

Vedlikehold

Rengjøring

Tørk av med lett fuktet klut.

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Symboler

Symbol Beskrivelse



Varenummer



Serienummer



Batch-nummer



Unikt identifikasjonsnummer



Les bruksanvisning og monteringsanvisning



Produsent



Produksjonsdato



Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.



Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.



Produktet er i samsvar med (EU) 2017/745 – forordning om medisinsk utstyr (MDR).

Godkjenninger

MDR

Medical Device Regulation (MDR) er en forskrift som regulerer produksjon og distribusjon av medisinsk utstyr i EU. For brukeren sikrer MDR at medisinsk utstyr oppfyller strenge sikkerhets- og kvalitetskrav, noe som beskytter pasientenes helse og sikkerhet.

Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

[Se hele samsvarserklæringen på Sensio Vestfolds nettsider](https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering)

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS, avdeling Vestfold

- **E-post:** post@vestfoldaudio.no
- **Nettside:** vestfold.sensio.io
- **Telefon:** +47 33 47 33 47