

sensio

BEA Backup Power

Bruks- og monteringsanvisning



Produktnummer: 606607

Dokument: 9023-1

Innhold

Sikkerhet	3
Introduksjon	3
Kom i gang	4
Feilsøking	5
Spesifikasjoner	6
Vedlikehold	6
Symboler	7
Resirkulering	8
Godkjenninger	8
Support	8

Sikkerhet

Sikkerhetsråd

- Batteriet må ikke punkteres eller kortsluttes
- Unngå å eksponere enheten for flammer eller andre direkte varmekilder
- Produktet må ikke skrus fra hverandre
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom
- Skal ikke monteres der den kan påvirkes av direkte sollys

Introduksjon

I esken

- BEA Backup Power
- Bruksanvisning

Produktbeskrivelse

Nødstrømbatteriet er designet for bruk med våre FlexiBlink-mottakere og sendere som kan driftes på nettspenning.

Kom i gang

Montering

Nødstrømbatteriet anbefales fastmontert til vegg med de medfølgende borrelåser. Slik går du fram:

1. Trekk batterieliminatoren til mottakeren eller senderen ut av kontakten på veggen.
2. Koble ifra batterieliminatoren fra mottakeren eller senderen.
3. Koble mottaker eller senderen til nødstrømbatteri. Benytt enten ledningen som følger med nødstrømbatteriet eller koble ledning fra mottaker eller senderen direkte inn i nødstrømbatteriet.
4. Plugg batterieliminatoren til nødstrømbatteriet inn i kontakten på veggen.

Når nødstrømbatteriet er koblet til strømnettet og et FlexiBlink-produkt, vil det automatisk levere strøm til enheten ved strømbrudd. Batteriet oppnår full beredskapsevne etter 14–18 timers ladetid.

Batterieliminatoren (laderen) til nødstrømbatteriet må alltid stå tilsluttet nettspenning (230 volt AC), dvs. kontakten på veggen – ellers mister nødstrømbatteriet sin beredskapsevne!

Testing

Beredskapsevnen til nødstrømbatteriet bør testes årlig. Koble ifra strømforsyningen til nødstrømbatteriet og registrer hvor lenge produktet det er koblet til opprettholdes. Dersom beredskapsevnen bare er noen minutter, er nødstrømbatteriet defekt og bør repareres eller erstattes.

Lagring eller oppbevaring over lengre tid

Dersom nødstrømbatteriet har vært i bruk, og skal settes på lager, bør det settes i dvalestilling:

1. Lade opp nødstrømbatteriet (f.eks. over natten).
2. Koble fra batterieliminatoren og FlexiBlink-produktet.
3. Lokaliser et lite hull på framsiden av nødstrømbatteriet.
4. Med en tynn skrutrekker e.l. trykker man én gang på den oransje knappen som kan skimtes gjennom hullet. Nødstrømbatteriet er nå satt i dvalestilling. Grønt lys i indikatoren er nå slukket.



Feilsøking

Nødstrømmen varer i kort tid

- Sjekk at nødstrømsbatteriet er oppladet. Dette kan ta 14-18 timer.
- Nødstrømbatteriet kan være defekt og bør repareres eller erstattes.

Spesifikasjoner

Tekniske data

- **Batteri:** Ni-MH (nikkelmetallhydrid)
- **Driftsspenning:** 15 VDC (batterieliminatør)
- **Utspenning:** 12 VDC
- **Batterikapasitet:** 650 mAh
- **Beredskapstid ved strømbrudd:** flere timer, avhengig av hvilket produkt som er tilkoblet

Dimensjoner

- **Lengde:** 155 mm
- **Bredde:** 50 mm
- **Tykkelse:** 25 mm
- **Vekt:** 400 g

Vedlikehold

Rengjøring

Koble nødstrømbatteriet fra nettspenningen. Sett batteriet i dvalestilling (se bruksanvisningen). Nødstrømbatteriet kan nå rengjøres med myk klut oppvridd i lunkent, mildt såpevann.

Hjelpemiddelet må ikke utsettes for søl eller sprut med vann.

Symboler

Symbol Beskrivelse



Varenummer



Serienummer



Batch-nummer



Unikt identifikasjonsnummer



Les bruksanvisning og monteringsanvisning




Produsent



Produksjonsdato



Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.

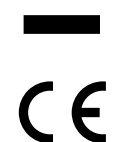

Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Godkjenninger

Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse til gjeldene krav for CE-merking. Se samsvarserklæring på Sensio sine nettsider for ytterligere informasjon.

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS, Møllergata 4, 0179 Oslo

- E-post: post@vestfoldaudio.no
- Nettside: vestfold.sensio.io
- Telefon: +47 33 47 33 47