
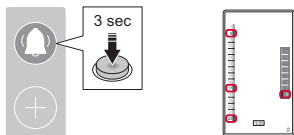


Rengjør MEMO Dayboard


Rengjør MEMO Dayboard med den medfølgende mikrofiberkluten og litt vann.

 **TIPS:** Er tavlen vanskelig å rengjøre? Bruk en whiteboard-penn for å gå over eventuell tekst eller merker som er vanskelige å fjerne, og vent et minutt før du tørker av.

Vis alle gjeldende alarmer




1. Åpne innstillingsmodus.
Alle tidspunkter med alarmer lyser opp.

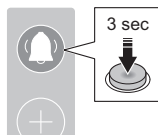


2. Avslutt innstillingsmodus.


Still inn en ny alarm

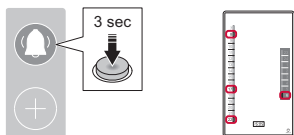


1. Åpne innstillingsmodus.
Alle tidspunkter med alarmer lyser opp.

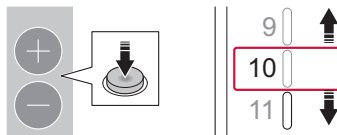


2. Bruk + og – til å velge et tidspunkt.

 **TIPS:** Trykk og hold inne + eller – for å flytte pekeren raskere.

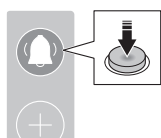


3. Still inn alarmen. Som bekreftelse blinker lyspunktet raskt. Hvis du vil stille inn flere alarmer, gjenta trinn 2 og 3.

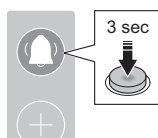

4. Avslutt innstillingsmodus.


Stopp en alarm med sidepanelet

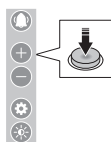


1. Trykk på en valgfri knapp på sidepanelet.

Alarmlyden stopper etter ett minutt.
Alarmen stopper etter 15 minutter.

Slette en alarm

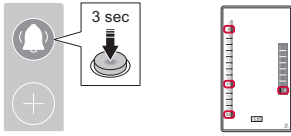


1. Åpne innstillingsmodus.
Alle tidspunkter med alarmer lyser opp.

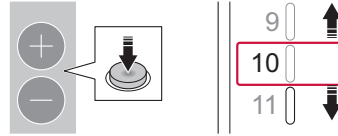


2. Bruk + og – til å velge et tidspunkt.

 **TIPS:** Trykk og hold inne + eller - for å flytte pekeren raskere.

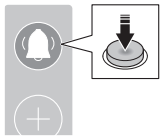


3. Slett alarmen.
Hvis du vil slette flere alarmer, gjentar du trinn 2 og 3.

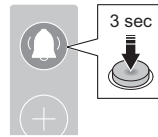


4. Avslutt innstillingsmodus.

Stille inn låsemodus

Det er mulig å låse knappene på sidepanelet slik at ingen innstillinger kan endres.

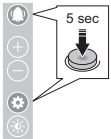

1. Hvis du vil aktivere eller deaktivere låsemodus, holder du inne Innstillinger- og Alarm-knappene til du hører et pip.

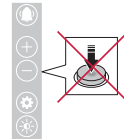

2. Når MEMO Dayboard er i låsemodus, deaktiveres alle knapper. Det er fortsatt mulig å stoppe en pågående alarm.
Når du trykker på en valgfri knapp mens du er i låsemodus, viser displayet kort "LOC".

Få mer produktinformasjon og tilgang til hele bruksanvisningen

Gå til www.abilia.com/nb/our-products/memo-dayboard-24h eller skann QR-koden.



Skann meg!