

sensio

# FELIX Doorbell Push Button

Bruks- og monteringsanvisning



---

Produktnummer: 606313

Dokument: 9012-1

# Innhold

|                 |    |
|-----------------|----|
| Sikkerhet       | 3  |
| Introduksjon    | 4  |
| Kom i gang      | 5  |
| Feilsøking      | 7  |
| Spesifikasjoner | 8  |
| Vedlikehold     | 9  |
| Resirkulering   | 9  |
| Symboler        | 10 |
| Godkjenninger   | 11 |
| Support         | 11 |

# Sikkerhet

---

## Sikkerhetsråd

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer eller andre direkte varmekilder.
- Produktet må kun skrus fra hverandre for bytte av batteri.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys.

# Introduksjon


---

## I esken

- FELIX Doorbell Push Button med innebygget batteri
- Veggbrakett
- Pose med to skruer
- Borrelås
- Våtserviett
- Bruksanvisning

## Produktbeskrivelse

Trykknapp som sender varsel til FlexiBlink-mottakere. Den benyttes oftest som dørklokke, men kan også brukes for å tilkalle assistanse. FELIX benytter et spesialbatteri med lang levetid.

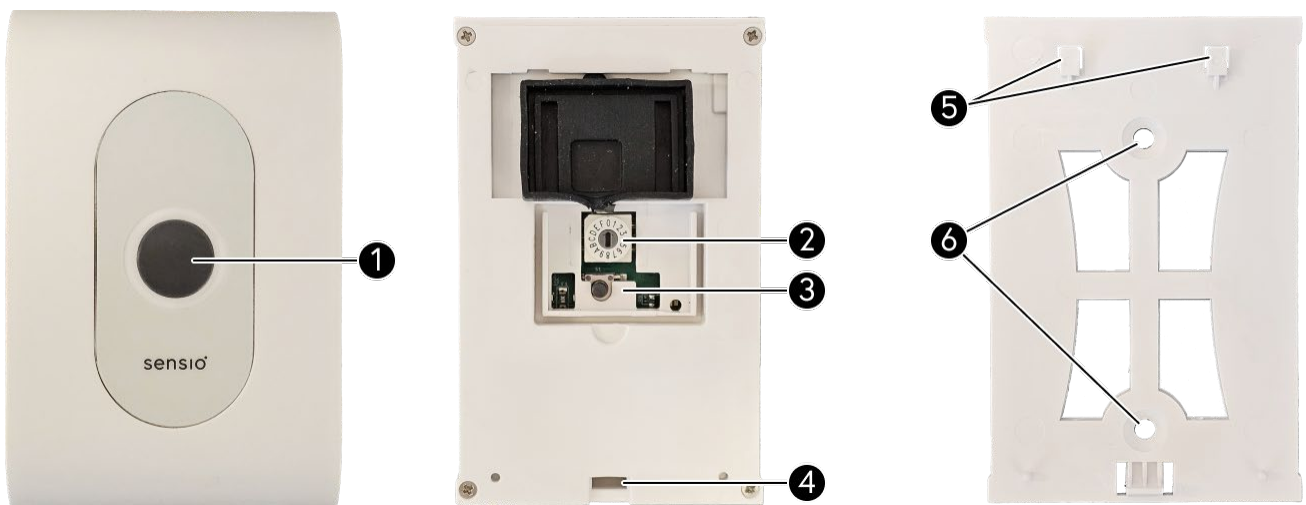

1. Trykknapp
2. Funksjonsvelger
3. Pairing-knapp
4. Spor for å løsne fra veggbrakett
5. Festepunkter for FELIX
6. Skruehull til feste av veggbrakett

# Kom i gang

---

## Sammenkobling

Alle FlexiBlink-enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles. Enhetene må være i samme rom under sammenkoblingen. For å sammenkoble et FlexiBlink-system, må det alltid være en stasjonær mottaker som hovedenhet, som f.eks. IRIS alerter, ALMA alerter eller BRITT bed shaker, i systemet. For sammenkobling, følg beskrivelsen under:

1. På hovedenheten: Velg **Inviter** via skjermen eller trykk **2 ganger** på **Pairing**-knappen på IRIS, ALMA eller BRITT
2. På FELIX: Trykk **1 gang** på **Pairing**-knappen
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder eller ved beskjeden «Vellykket sammenkobling».

Skal du sammenkoble flere enn to enheter, gjenta punkt 1 til 3, ved å benytte samme hovedenhet

## Funksjonsvelger

Vri på funksjonsvelgeren for å velge hvilket varsel som skal sendes:

- **0:** Det ringer på døren
- **1:** Det ringer på hoveddøren
- **2:** Det ringer på dør 2
- **3:** Sykesignal
- **4:** Sykesignal 2
- **5:** Assistanse ønskes
- **6:** Hjelp meg nå!
- **7:** Kom snart
- **8:** Generell varsling (for eksempel Resepsjonen eller Varelevering)
- **9:** Generell alarm
- **A:** Barnet har stått opp
- **B:** Barn 2 har stått opp
- **C:** Opplest klokke (Gjelder kun med IRIS som mottaker)

# Montering

FELIX monteres vanligvis på veggen eller der brukeren trenger den.

## Utendørs

Prøv å unngå å sette FELIX i direkte sollys eller at den kan bli utsatt for regn.

1. Skru den medfølgende veggbraketten fast til veggen
2. Knepp FELIX på plass i braketten

## Innendørs

For innendørs bruk kan veggbraketten monteres med den medfølgende borrelås-tapen.

1. Vask stedet den skal monteres med den medfølgende spritservietten
2. Vent i 30 sekunder
3. Trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder

**Borrelåsen har veldig kraftig tape. Når borrelåsen fjernes, kan det forårsake at tapeten følger med.**

Alternativt kan enheten festes med veggbraketten som for utendørs montasje.

## Demontering fra veggbrakett

Trykk inn et flatt skrujern i sporet på midten av undersiden til FELIX og skyv oppover for å løsne fra veggbrakett.

# Testing

Trykk på trykknappen på FELIX og se at det kommer riktig varsel i FlexiBlink-mottakerne. Etter at knappen er benyttet, er det en karenstid på 10 sekunder før knappen kan benyttes igjen.

## Statusindikasjon

Når enheten er i bruk, vises statusen i lysindikatoren på forsiden:

- **Grønt lys:** Varsel sendt
- **Blinkende rødt/grønt lys:** Bytt batteri
- **Blinkende rødt lys etter trykk:** Ikke koblet sammen med et FlexiBlink-system

## Feilsøking

---

### Det varsler ikke i mottakerne

- Batteriet er tomt. Bytt batteri. FELIX benytter et spesialbatteri som kan kjøpes hos produsenten. For å bytte batteriet, må de fire små skruene på baksiden av FELIX skrus ut og baklokket fjernes. Bytt batteri og skru baklokket på plass igjen.
- Enhetene er ikke riktig sammenkoblet. [Slett sammenkoblingen](#) og [sammenkoble](#) på nytt
- Avstanden mellom sender og mottaker er for lang. Sett da enhetene nærmere hverandre, eller sett inn repeater. Test ved å trykke på FELIX og sjekk at det varsler i FlexiBlink-mottaker

### Sammenkoblingen er feil

1. Slett sammenkoblingen ved å trykke **5 ganger** på **Pairing**-knappen. Slettingen bekreftes med rødt og grønt blinkende lys.
2. Sammenkoble på nytt. [Se instruks for sammenkobling](#)

### Rødt lys i enheten ved sammenkobling

Sammenkobling mislyktes. [Slett sammenkoblingen](#) og [sammenkoble](#) på nytt.

### Feil varsling i mottakeren

Vri funksjonsvelgeren til rett posisjon.

# Spesifikasjoner

---

## Tekniske data

- **Batteri:** Innebygd Litium 3V
- **Temperatur:** -10 °C – 40 °C
- **IP-grad:** IP54
- **Radiofrekvens:** 2400,0 – 2483,5 MHz
- **Sendereffekt:** maks 20 mW
- **Batterilevetid:** 10 år

## Dimensjoner

- **Høyde:** 100 mm
- **Bredde:** 64 mm
- **Dybde:** 20 mm
- **Vekt:** 140 g



# Vedlikehold

---

## Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

## Oppdateringer

For å oppdatere FlexiBlink-enheter må GURO Gateway være tilknyttet boligen. Se oppdateringer på Sensio sine nettsider.

<https://vestfold.sensio.io/update>

## Resirkulering

---

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

# Symboler

---

## Symbol      Beskrivelse



Varenummer



Serienummer



Batch-nummer



Unikt identifikasjonsnummer



Les bruksanvisning og monteringsanvisning




Produsent



Produksjonsdato



Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.

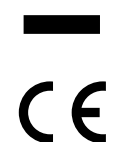

Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.

# Godkjenninger

---

## Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse til gjeldene krav for CE-merking. Se samsvarserklæring på Sensio sine nettsider for ytterligere informasjon.

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

## Support

---

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

## Produsent

Sensio AS, Møllergata 4, 0179 Oslo

- **E-post:** [post@vestfoldaudio.no](mailto:post@vestfoldaudio.no)
- **Nettside:** [vestfold.sensio.io](https://vestfold.sensio.io)
- **Telefon:** +47 33 47 33 47