

sensio

FELIX Doorbell Push Button

Bruksanvisning

Produkt: 606313

Dokument: 9022-1



Sikkerhet

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer eller andre direkte varmekilder.
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys.

Produktbeskrivelse

Trykknapp som sender varsel til FlexiBlink-mottakere. Den benyttes oftest som dørklokke, men kan også brukes for å tilkalle assistanse. FELIX benytter et spesialbatteri med lang levetid.

Funksjonsvelger



0: Det ringer på døren

1: Det ringer på hoveddøren

2: Det ringer på dør 2

3: Sykesignal

4: Sykesignal 2

5: Assistanse ønskes

6: Hjelp meg nå!

7: Kom snart

8: Generell varsling (f.eks. Resepsjonen eller Varelevering)

9: Generell alarm

A: Barnet har stått opp

B: Barn 2 har stått opp

C: Opplest klokke

Statusindikasjon

Når FELIX er i bruk, vises statusen i lysindikatoren:

-  **Grønt lys:** Varsel sendt
-  **Blinkende rødt/grønt lys:** Bytt batteri
-  **Blinkende rødt lys etter trykk:**
Ikke koblet sammen med et FlexiBlink-system

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS

vestfold.sensio.io

Fant du ikke det du lette etter?

Skann QR-koden for å finne ut mer!



sensio®

Produktinfo

Bruks- og monteringsanvisning

Hjelpvideoer