

Installasjonsveiledning Eurolift



Innholdsfortegnelse:

Kapittel 1 :	Montering av skinnen
Kapittel 2 :	Montering av drivenheten og stolen
Kapittel 3 :	Elektriske tilkoblinger
Kapittel 4:	Igangkjøring
Kapittel 5:	Tekniske spesifikasjoner
Blindtarm :	Koblingsskjema

Nødvendig verktøy:

- Drill maskin
- Skrutrekkere
- Bor for betong Ø6mm ; Ø8mm
- Imbussett
- Multimeter
- Rette og kryss skrutrekkere i ulike størrelser
- Kryppeverktøy
- Valgfritt: En stropp for å løfte enheten

Hver leveranse inneholder følgende deler:

- Skinne
- Ben : o
Ben av forskjellig lengde o Plugg
med tilhørende skruer o Tegning med
posisjonene til bena o Tegning som indikerer
skinnepassasjen • Trappeheis (Drive unit) • Stol
for på drivenheten
- Elektriske komponenter: o 2x
0,75 rød/svart kabel o 2 batterier:
12V/12A
o 2 fjernkontroller
o Strømforsyning : 24V/2A o
Tilkoblingskabel for bruk mellom de 2 batteriene.
o En rød og en svart kabelsko.

Kapittel 1 : Montering av skinnen

1.1 Bestill alle deler.





Ben, kan også pakkes i boks.

1.2 Ta ut skinnesegmentene og bena.



1.3 Sett alle bena i rekkefølge som vist på bildet.

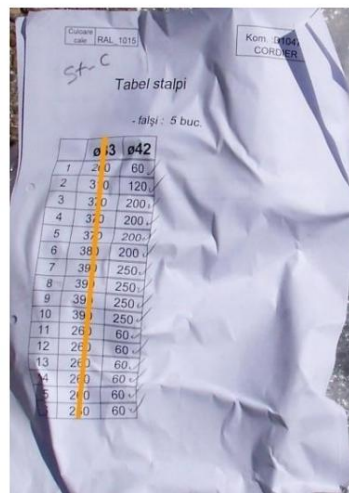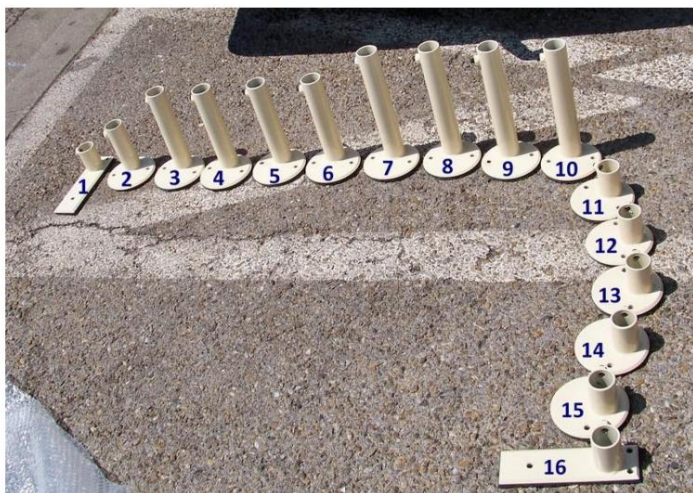

1.4 Monter bena på skinnen.




1.5 Du starter med å sette opp skinnedel 1 på trappa, deretter installerer du skinnedel 2 på skinnedel1 med skruene (Torx).

Første smøring

det indre

del.

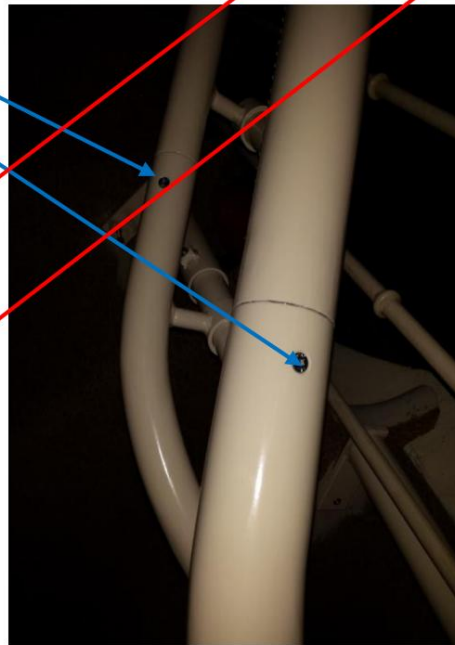

1.6 Du jobber slik til den siste skinnedelen er montert.

1.7 Fest bena med de medfølgende skruene og pluggene på trappen.


Kapittel 2 : Installasjon av drivenheten og stolen.

Etter at skinnen er plassert, kan drivenheten og stolen monteres.


2.1. Ta av drivenheten og plasser den på skinnen, som vist nedenfor.



2.2. Ta ut stolen og fjern fjærfjæren fra asken under setet.

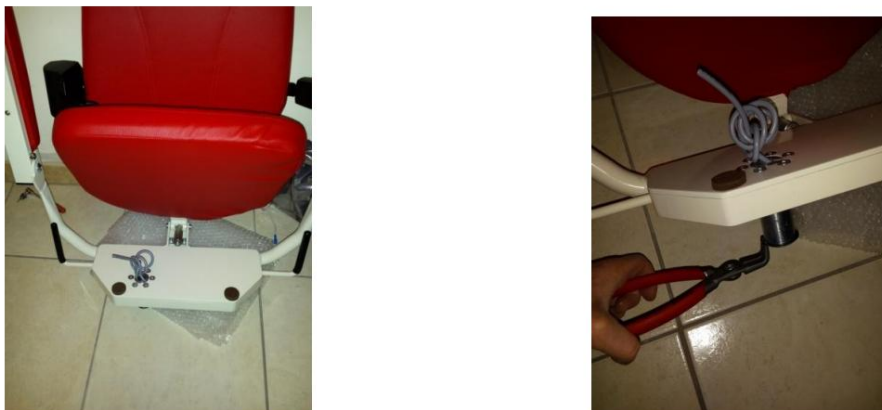

2.3. Sørg for å skru spaken på stolen ned når du plasserer stolen, dette forhindrer at mikrobryteren går i stykker på drivenheten. Etter å ha plassert enheten, må du sørge for at fjærfjæren kommer tilbake på asken.

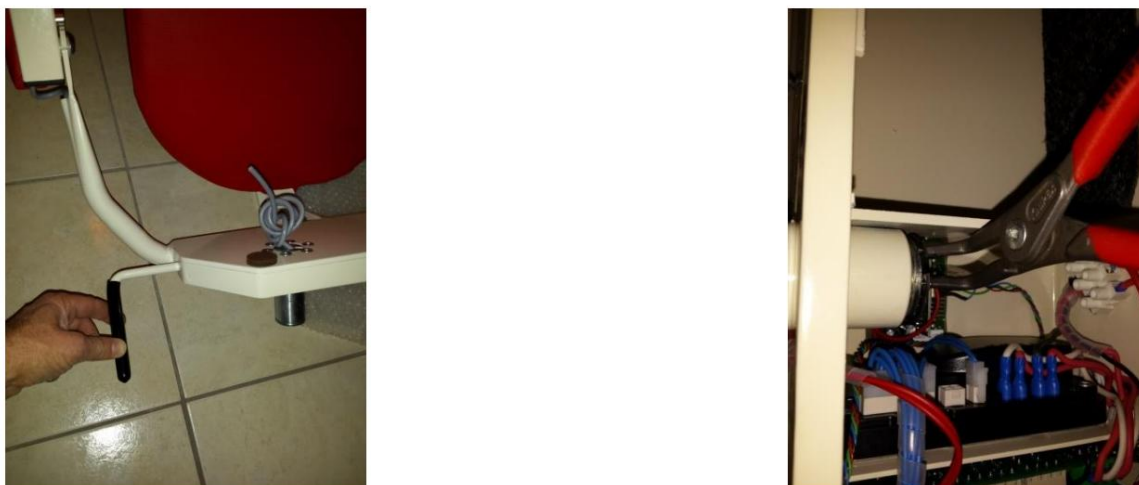


Kapittel 3 : Elektriske tilkoblinger

3.1. Sett kabelen gjennom stolens aske og koble til ledningene som vist nedenfor.



Joystick tilkobling:

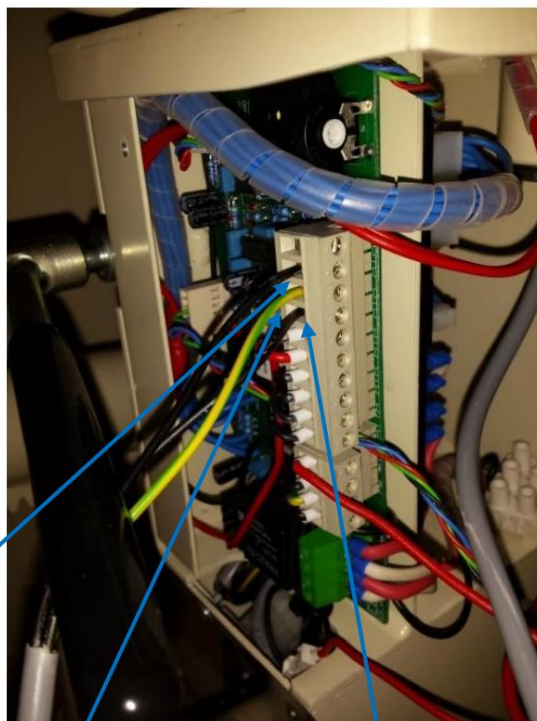

Tilkobling opp

Jordforbindelse

Tilkobling ned

3.2. Sett inn batteriene som vist på bildet og koble dem til som vist



3.4. Installer ladestasjonene på det tynne røret (Ø 40mm). Trekk 2x0,75-kabelen gjennom det tynne røret (Ø 40mm) og trekk dem gjennom det lille hullet Ø10mm på ladestasjonen (under, oppe og mulig mellom stasjoner)

Koble ledningene fra 2x0,75 mm kabelen til laderen (rød med rød og svart med svart) ved å bruke den svarte eller røde kabelskoene. (se fig. 3)

På siden hvor strømforsyningen ikke er festet, kobles ledningene til kabelskoene (se fig. 2)

Kjør løfteenheten til lasteposisjonen og juster endestopperen slik at justeringsfjæren (Figur 1) lyset trykkes inn og akkurat byttes.



Figur 1



Fig. 2



3.3. Koble til strømforsyningen, og heisen er klar til bruk.


Når du kobler til strømforsyningen, kobler du den hvite og den røde ledningen sammen på ladestasjonen. Gjør det samme med de to svarte ledningene.

Vær oppmerksom på ladepunktene på drivenheten der den røde ledningen er koblet til, denne tilkoblingen av den røde ledningen må være på samme side av ladestasjonene.



Kapittel 4 : Igangkjøring av heisen


4.1. Heisen settes på med den sorte bryteren på kabinettet. Du må trykke på siden av bryteren med 1-en på. Det røde lyset må brenne hvis du slår på heisen.

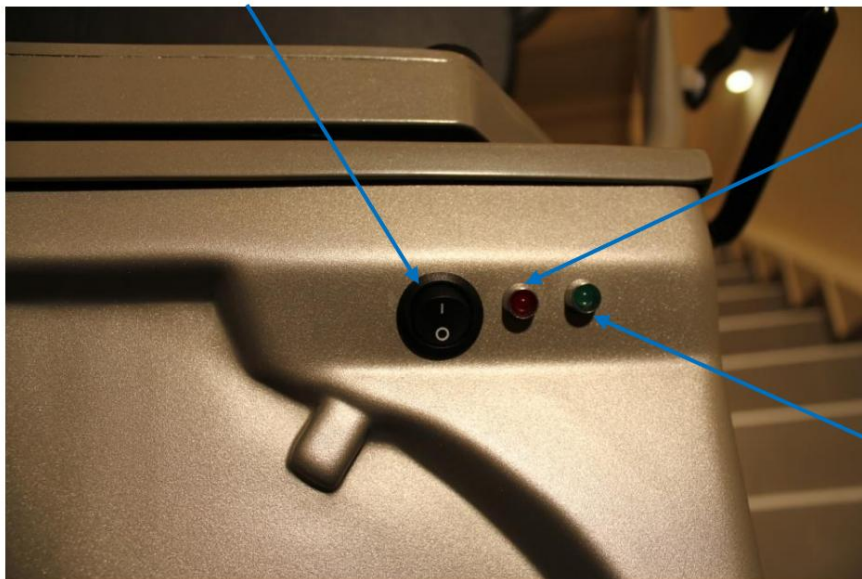

Rød LED-indikator som indikerer at heisen er på.

Grønn LED-indikator som indikerer at heisen er lader.

4.2. For å bruke heisen, flytt joysticken i ønsket retning.

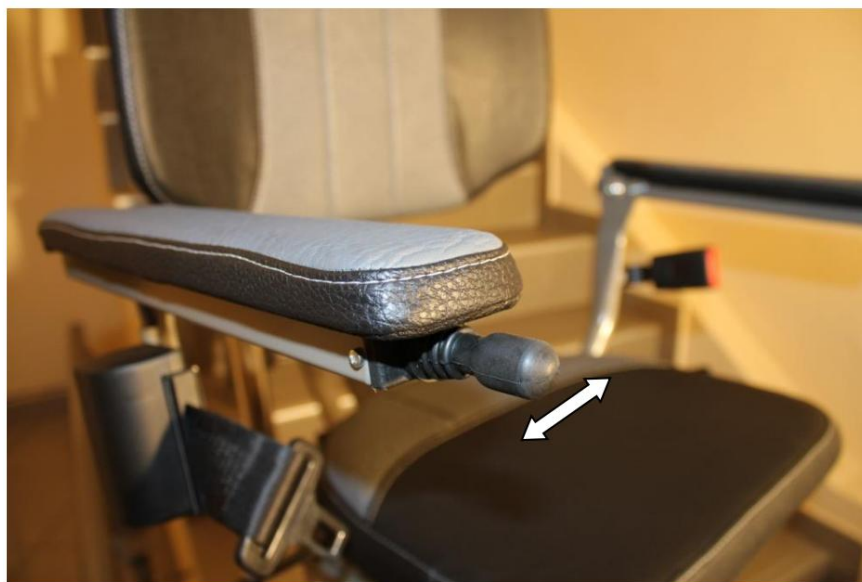

Kapittel 5: Tekniske spesifikasjoner

Makt : 0,35 kW

Maks vekt : 125/160 kg

Hastighet : 0,08-0,10 m/s

Strømforsyning : 24 V

Bredde på stolen i bruk : 605 mm

Bredde på stolen i ro (foldet) : 365 mm

Automatisk stopp når du møter hindringer

Nødstoppeknap på løftesiden

Maksimal slitevinkel : 70 grader

Minimum bredde : 720 mm.

Vedlegg : Elektrisk koblingsskjema

