

LiNX blinke/feilkoder

01.06.2021

Blinkekode	Feilbeskrivelse	Mulige tiltak
1	Feil på Joystick	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller kabler og kontakter • Kontakt leverandøren
2	Nettverk eller konfigurasjonsfeil	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller kabler og kontakter • Lad opp batteriene • Sjekk laderen • Kontakt leverandøren
3	Feil på venstre motor	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller kabler og kontakter • Kontakt leverandøren
4	Feil på høyre motor	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller kabler og kontakter • Kontakt leverandøren
5	Feil på venstre magnetbrems	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller kabler og kontakter • Kontroller om den venstre magnetiske bremsen er aktivert • Se kapittelet “Frikobling av bremses/drivmotor” i brukermanualen til rullestolen din • Kontakt leverandøren
6	Feil på høyre magnetbrems	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller kabler og kontakter • Kontroller om den høyre magnetiske bremsen er aktivert • Se kapittelet “Frikobling av bremses/drivmotor” i brukermanualen til • Kontakt leverandøren
7	Modulfeil (andre moduler enn joystick)	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller kabler og kontakter • Kontroller modulene • Lad opp batteriene • Hvis stolen er forhindret fra å kjøre, må du reversere eller fjerne hindringen • Kontakt leverandøren