

# Hurtigguide

Optima7080 / Optima8590 / OptimaBario / OptimaCot / OptimaJuve

**MERK:** Sett hurtigguiden tilbake på plass etter å ha lest den.

## VED GJENOPPLIVING:

**Slå av enheten med stand-by knappen og start gjenopplivning umiddelbart uten å tømme celledsystemet.**



Trykk på **Stand-by** knappen for å slå på enheten og starte justeringen til **Normal** drift. La enheten justere til **Normal** drift uten pasient. Trykk på knappen igjen for å slå av enheten uavhengig av den aktive operasjonen.



**Lås og lås opp tastaturet.** Trykk og hold inne knappen i tre (3) sekunder til lås tastaturet om nødvendig. Trykk og hold inne igjen i tre (3) sekunder for å låse opp.



**Bekreftelsesfunksjon for informasjonssignal** slår av enhetens informasjonssignaler. **Det hørbare informasjonssignalet bekreftes/slås av med et enkelt trykk mens visuelle informasjonssignaler bekreftes/slås av med et kontinuerlig trykk på minst tre (3) sekunder.** Gjør deg kjent med ulike feilsituasjoner i brukerhåndboken. Baksiden av hurtigguiden har et eksempel på feilsøking.



Bruk **Normal** drift **i alle liggende stillinger.** **Normal** drift aktiveres automatisk ved oppstart.



**Lydløs** funksjonen kan velges i en situasjon der du vil minimere støy fra enhetens kontrollsykluser og pumpefunksjon, for eksempel om natten når pasienten sover. Åtte (8) timer etter at du har valgt **Lydløs** funksjon går madrassen automatisk tilbake til **Normal** drift.



**Ryngleie**-funksjonen (Supine) **brukes bare til behandling av immobile pasienter liggende på ryggen.** I dette tilfellet vil madrasssystemet tilpasse seg lavest mulig trykkinnstilling. **MERK: Pass på at pasienten ligger horisontalt på ryggen når denne funksjonen er valgt.**



**Sitt**funksjonen er beregnet på pasienter i sittende stilling. Hjerterebrettet er hevet i en vinkel på over 30 grader. Etter en time i denne funksjonen, vil informasjonssignalet varsle omsorgspersonell/ bruker om økt risiko for trykksår.



**Fast**-funksjonen fyller max luft i madrassen slik at vending, stell og behandling blir enklere. Madrassen vil automatisk gjenoppta **Normal** drift etter 30 minutter hvis det ikke gjøres noe annet valg. **MERK: Når madrassen er fast, reduseres dens trykkreducerende evner.**



Lysdioder fra venstre til høyre: **strømkabel** tilkoblet, **batteribruk**, **Bluetooth**-tilkobling.


# Hurtigguide

Optima7080 / Optima8590 / OptimaBario / OptimaCot / OptimaJuve

**MERK:** Sett hurtigguiden tilbake på plass etter å ha lest den.

Eksempel på feilsøking - Lekkasje i luftslangene eller i de indre cellene

Sjekk luftslangene;  
se i hurtigguiden

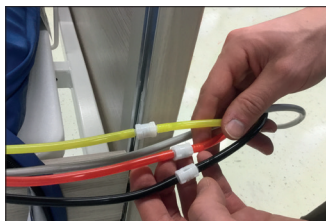

1. Styreenheten vil gi et hørbart signal og displayet vil vise en tekst. Lysdiodene (orange) lyser i området med lekkasje; hode, overkropp eller ben (angitt med farger som tilsvarer fargene på slangene).

2. Sjekk først om Sixtube-kontakten (kontakten med luftslanger) er koblet til styreenheten og er låst. Kontroller at luftslangene sitter fast i kontakten.



Optima7080/Optima8590/OptimaBario



OptimaCot/OptimaJuve

3. Åpne trekket rundt luftslangene og sjekk om luftslangene mellom cellene og styreenheten er koblet til kontaktene og at fargene stemmer (for eksempel svart på svart).

4. Hvis du merker noen løse slanger, kobler du dem til hverandre. Se om nødvendig i brukerhåndboken for mer informasjon. Etter dette lukker du trekket rundt luftslangene.

5. Trykk og hold nede tilbakestillingsknappen i tre (3) sekunder til du hører et signalet. Sjekk at madrasssystemet tilpasser seg den valgte funksjonen.

Om du fortsatt får feilmelding, kontakt Carital®-service

Direct Healthcare Group Norge AS - Kjellstad Næringspark, St Hallvardsvei 3, 3414 Lierstranda  
Kundeservice: T: +47 21 01 44 70, info.no@directhealthcaregroup.com  
Åpningstider: Hverdager kl. 08.00 - 16.00

carital®

PKOHJ-H1-01-NO-1.0-20012022