

HURTIGUIDE LOOKY 4 HD

1. Slå Looky4 på eller av

Trykk kort på Av/På-knappen når du vil slå Looky4 på, et tretoners lydsignal vil varsle om lupen slås på.

Hold Av/På-knappen nedtrykket i ca. 3 sekunder for å slå Looky4 av, et tretoners lydsignal vil varsle om at lupen slås av.

Legg merke til at når Looky4 er påslått, vil den slå seg automatisk av etter 3 minutter dersom kameraet ikke registrerer bevegelse, dette gjøres for å spare på batteriet. Et lydsignal vil varsle om at lupen slås av.

2. Fokusere Looky4

For at Looky4 skal fokusere på et ark eller en gjenstand, trykker du kort midt på skjermen

3. Slå av LED-belysningen



Dersom du vil slå av LED-belysningen på baksiden av Looky4, trykker du med én finger midt på skjermen i 4 sekunder. Et lydsignal vil varsle om at belysningen er slått av.

For å slå LED-belysningen på igjen, trykker du én gang til med én finger midt på skjermen i 4 sekunder. Nok et lydsignal vil varsle om at belysningen er lått på.

Spesielt for blanke gjenstander med sterk refleks kan det være lurt å slå belysningen av.

4. Forskjellige visninger

Måten Looky4 viser bildet på kan endres ved å dra en finger enten fra øverst til nederst på skjermen eller omvendt. Ved å gjenta denne bevegelsen, vil du bla deg gjennom de forskjellige fargekombinasjonene bildet kan vises i.

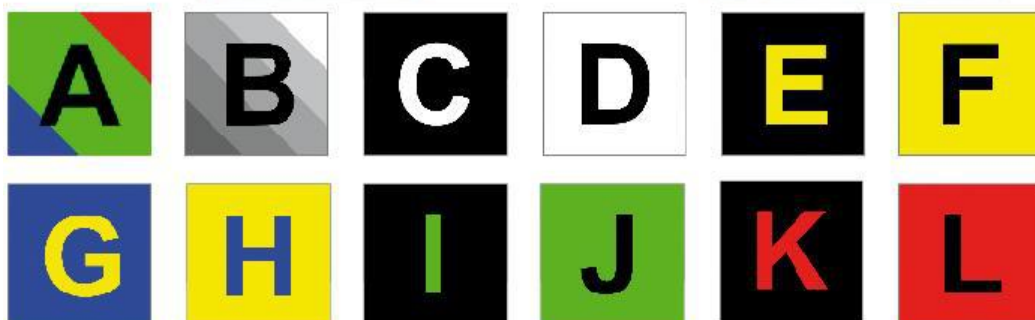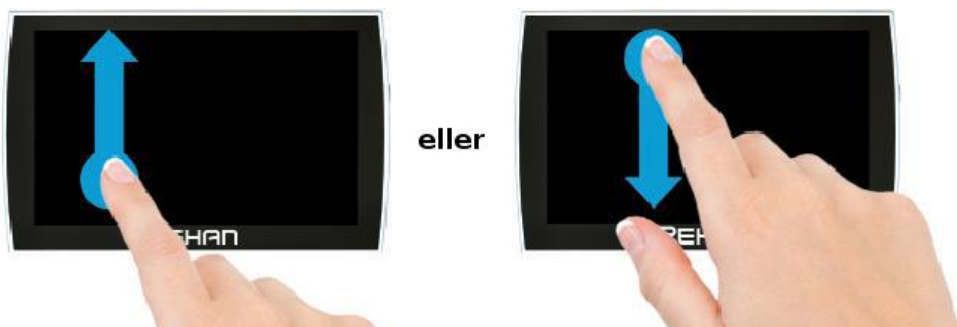

5. Zoom

For å endre lupens forstørrelsesgrad, drar du først en finger enten opp- eller nedover på skjermens høyre eller venstre kant, et tydelig ikon vil nå vises.



For nå å zoome inn, drar du en finger oppover på Zoom-ikonet. Dersom du vil zoome ut, drar du en finger nedover på samme måte. Forstørrelsesgraden på Looky4 går fra 2x til 20x.

6. "Fryse" bildet

Du kan "fryse" bildet som vises på Looky4's skjerm slik at du kan flytte lupen bort fra det du ser på og likevel beholde bildet. Trykk kort på Av/På-knappen og bildet vil "fryses". Trykk kort på Av/På-knappen igjen for å gå tilbake til vanlig visning.



Legg merke til at når et bilde "fryses", kan du fremdeles zoome inn og ut som forklart i punkt 13 samt forflytte deg i bildet ved å holde én finger på skjermen og føre den i den retningen du ønsker.

7. Lading av batteriet

Koble den største kontakten på kabelen til i selve laderen, og sett den på plass i en stikkontakt. Ladingen startes nå så fort kabelens minste ende kobles til i Looky4. Legg merke til at knotten du her finner, markerer oversiden av kontakten.

