

OPUS 5

Sengen består av en underramme med hjul, en patentert løfteanordning, en 4-delt liggeflate, to integrerte personalebetjente sengegrinder, en avtagbar hode- og fotgavl, en kontrollboks og tre håndbetjeninger.




Se brukerveiledningen for detaljert informasjon om de enkelte funksjonene.

BRUGERBETJENING 1 FINREGULERING

DEN GRØNNE KNAPPEN

Den grønne knappen på brukerbetjening 1 er forhåndsprogrammert slik at lår- og ryggdel reguleres samtidig. Når du trykker OPP, går lårdel helt opp og deretter ryggdelen. Når du trykker NED, går ryggdel helt ned og deretter lår delen.

Sengen stopper automatisk når knappene slippes og det alle funksjoner kan låses med personalebetjeningen.

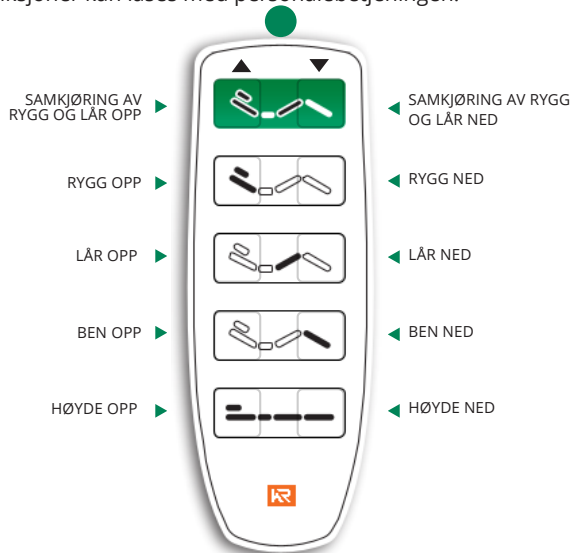

BRUGERBETJENING 2 SPESIALFUNKSJONER

FORHÅNDSPROGRAMMERET

Spesialfunksjonene på brukerbetjening 2 er forhåndsprogrammert slik at du med et konstant trykk på en funksjonsknapp kan få sengen til å bevege seg i en fast posisjon.

Sengen stopper automatisk når knappene slippes og det alle funksjoner kan låses med personalebetjeningen.



PERSONALEBETJENING TOHÅNDSBETJENT

For at forhindre, at man utilsiktet kommer til at aktivere en funksjon, er personalebetjeningen tohåndsbetjent.


Hvis du ønsker å aktivere en bestemt funksjon, må en av aktiveringsknappene med «hånd»-symbolet holdes nede samtidig som du trykker på ønsket funksjon. Sengens funksjoner stopper automatisk når knappene slippes.

LÅSEFUNKSJON

Du kan låse funksjonene merket med «hengelås»-symbolet.

Trykk samtidig på «nøkkel» og ønsket funksjonsknapp for å låse/låse funksjonen.

Låste funksjoner på personalbetjeningen låser tilsvarende funksjoner på brukerbetjeningene.

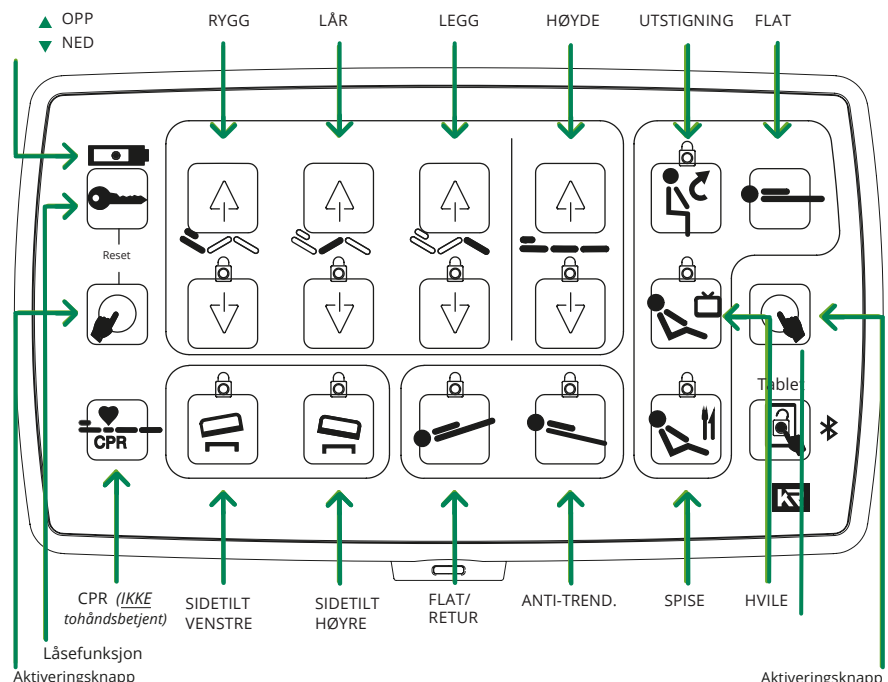

MADRASS


OPUS 5 kan leveres med skummadrass eller kombinert Stimulite og skum. Madrassene kommer med spesialtrekk for sikker feste.

ANBEFALT MADRASSMÅL			
Lengde	Bredde	Høyde på madrass med integrert sengegrind	Høyde på madrass ved bruk av sengegrindforhøyer
210 cm	85 cm	12 cm	12-24 cm

Tredjepartsmadrasser som ikke er tilpasset sengen eller det godkjente tilbehøret fra produsenten kan utgjøre en risiko. Risikovurdering skal gjennomføres.

Vær spesielt oppmerksom på madrasshøyden ved bruk av sengegrindforhøyer.

MADRASSGUIDE

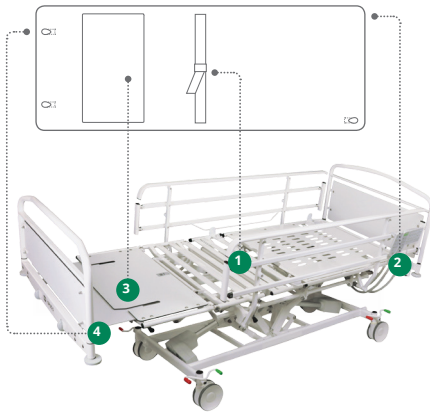


SENTEGRIND

Sengen leveres med integrerte og personalbetjente sengegrinder. Man kan kjøpe sengegrindforhøyer ved bruk av høye madrasser. Disse krever en madrasshøyde på 12-24 cm.

⚠ Pass på armer, hender, fingre osv. ikke kommer i klem når sengegrinden legges ned. Hold kun toppåret til sengegrinden.

⚠ Tredjepartsmadrasser som ikke er tilpasset sengen eller det godkjente tilbehøret fra produsenten kan utgjøre en risiko. Risikovurdering skal gjennomføres.

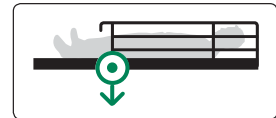

PERSONALUTLØSER


Aktiver utløseren under ben- og setedelen og senk sengegrinden. Motsatt heves sengegrinden til den klikker på plass.

HJULPOSISJONER

Sengen er utstyrt med svingbare hjul, retningsstyring og et sentralt bremsesystem som kan betjenes fra alle sengehjørner. Hvis en pedal aktiveres, reagerer alle hjulene.

⚠ Viktig! Sengens bremses skal alltid være aktivert når sengen ikke skal flyttes for å unngå ulykker.

HORISONTALT = HJULENE ER FRI

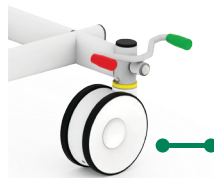

NØYTRAL

Hjulene er frie og bevegelige i alle retninger.


RØD PEDAL NED = HJULENE ER BREMSET



LÅST

Hjulene er låst og sengen står fast.

GRØNN PEDAL NED = RETNINGSSTYRING ER AKTIVERT

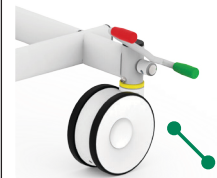

RETNINGSSTYRING

Bremsen frigjøres og hjulene låses i kjøreretningen.

SERVICE

Service og periodisk ettersyn anbefales minst én gang i året. Ikke bruk sengen hvis den er ødelagt.

⚠ Overhold de anbefalte serviceintervallene.

⚠ Ikke bruk sengen hvis det er mistanke om at den er ødelagt.

👤 Se serviceveiledning for mer informasjon.




CPR

Sengen er utstyrt med en mekanisk CPR-funksjon for nødsituasjoner.

Betjening: Tekk i det røde håndtaket under sengens hjertebrett og trykk ryggdelen helt ned.


MERK: Etter bruk må personell trykke én gang på «rygg, ned» på brukerbetjeningen for at sengen skal gjenfinne sin posisjon.

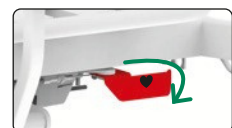

GENERELLE SIKKERHETSREGLER

Nedenfor finner du farer og instruksjoner om hvordan unngå dem:

 Les **ALLTID** brukerveiledningen og følg instruksjonene nøye.

 Tilbehør og madrasser fra tredjeparter som ikke er tilpasset sengen eller godkjent tilbehør fra produsenten kan utgjøre en risiko. Risikovurdering skal gjennomføres.

 Personalet skal **ALLTID** risikovurdere om brukeren kan bruke sengen på en korrekt og trygg måte.

KLEMFARE

- Pass på at ingen kommer i klem når du betjener sengen. Det er fare for å bli klemt mellom de bevegelige delene av sengen.
- Se alltid på sengen mens du bruker håndkontrollen.
- Vær forsiktig når du senker sengen fra hevet stilling. Kryp aldri under sengen.
- Vær oppmerksom på klemfaren ved utilsiktet aktivisering av funksjonsknapper, pedaler, sengegrinder m.m.
- Sjekk at sengen kan bevege seg fritt opp og ned, uten å skade sengen eller ting i nærheten av sengen (f.eks. vindusrammer, radiatorer, hyller, lamper osv.)

FALL FRA SENGEN

- Fotgavlen **må** fjernes før sengens utstigningsstilling tas i bruk.
- Ikke etterlat brukeren i sengen i høyeste posisjon.
- Senk alltid sengen før utstigning.
- Bruk sengegrindene.

- Lås alltid hjulene etter transport.
- Ikke klatre over sengegavler og sengegrinder for å komme ut av sengen.
- Kontroller at hjulene er låst før forflytning.




VELTERISIKO

- Aldri transporter sengen i høyeste posisjon på skrånende eller ujevnt underlag.

FEJLBETJENING

- Overlat håndkontrollene kun til personer du vet kan bruke sengen og dens funksjoner.

ELEKTRISK SIKKERHET

- Sengen kan kun kobles til 230VAC-nettet .
- Sjekk at sengen og annet elektrisk utstyr ikke forstyrrer hverandre, men fungerer etter sin hensikt.
- Ved bruk av annet elektrisk utstyr i eller ved sengen, må du sørge for at kabler o.l. ikke kommer i klem.
- Heng håndkontrollen på sengen når den ikke er i bruk slik at den og kablene ikke skades av slag eller støt, faller i gulvet eller kommer i klem.
- Ikke kjør over kabler med sengen.
- Hvis sengen ikke fungerer optimalt eller det er synlige skader på elektriske deler, kontakt Varodd Velferdsteknologi.



Se brukerveiledningen for mer informasjon.

BRUK OG BEGRENSNINGER

Sengen egner seg spesielt godt til sykehjem, hjemmetjeneste, institusjoner for funksjonshemmede m.m.

Sengen er kun beregnet for voksne brukere med en fysisk størrelse på:

HØYDE: Min. 146 cm og maks 205 cm (standard)


VEKT: 40 kg - 185 kg


BMI: Body Mass Index på 17 eller mer.


MADRASS: 12 cm.


 Maks løfteevne må **IKKE** overskrides (Safe Working Load/SWL = 250 kg).

 Overhold sengens driftsintervaller i henhold til aktivisering og pauser. Driftsfrekvens (10%): Maks 2 min. PÅ (ON) / 18 min. AV (OFF).

 Personer med fysiske eller psykiske begrensninger skal ikke bruke sengens elektriske funksjoner uten tilsyn, med mindre personalet etter en risikovurdering tillater det og bruker har fått grundig opplæring.

 = 185 kg

 = 250 kg

 = 185 kg

DAGLIG RENGØRING

Følgende tørkes av med standard rengjøringsmidler og en oppvridd fuktig klut:

- Synlig smuss og kontaminering.
- Overflater som er i kontakt med brukeren (eks. håndkontroller, sengegrind og sengegavl).
- Områder der støv og skitt naturlig samler seg.

Områder som vaskes tørkes deretter av med en tørr og ren klut.


Rengjøringsmidlene som brukes:

- Må ikke være sterkt alkalisk.
- Må ikke inneholde etsende preparater.
- Må ikke endre sengens overflatestruktur eller plastens klebeevne.
- Må ikke være fettdeleggende.

Sengen kan desinfiseres med alkohol og produkter med lav konsentrasjon av klor.


 Sengen må **IKKE** rengjøres med høytrykkspyler!

 Ved rengjøring av sengen skal produsentens vaskeanvisning følges!

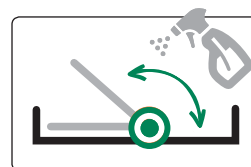

FEILSØKING

	SYMPTOM	MULIG ÅRSAK	HÅNTERING
1	Seng reagerer ikke når man bruker håndbetjening.	Håndbetjening er ikke koblet til sengen.	Seng skal til service. Kontakt servicetekniker eller Varodd Velferdsteknologi.
		Håndbetjening er defekt.	Bruk tilbakestillingsfunksjon. Se <i>Nullstilling ved feil</i> nedenfor. Hvis resetingen ikke fungerer, trenger sengen service. Kontakt en servicetekniker eller Varodd Velferdsteknologi.
		Funksjoner er låst.	Sjekk om det er lys i «hengelås»-symbolet for gjeldene funksjon på personalbetjeningen. Lys indikerer at funksjonen er låst. Låst opp ved å trykke på «nøkkel»+funksjon».
2	Seng avgir en pipetone, men kjører når man trykker på håndbetjening.	Sengen er ikke koblet til strøm og batteriet begynner å bli lavt.	Sjekk strømforsyningen og koble sengen til strøm.
3	Seng avgir en pipetone og kjører ikke når man trykker på håndbetjening.	Sengen er ikke programmert til å kjøre den aktiverte posisjonen.	Aktiver en annen funksjon eller gå tilbake til «flat» posisjon for å kjøre ønsket funksjon.
		Sengen er ikke koblet til strøm og batteriet er utladet.	Sjekk strømforsyningen og koble sengen til strøm.
4	Senger kjører i en «ulogisk» retning når man endrer fra en posisjon til den neste.	Sengen regulerer seg selv slik at den ikke blir skadet ved overgangen fra en funksjon til den neste.	La funksjonen kjøre ferdig og fullføres.
5	Alle lamper på personalebetjening lyser eller blinker.	Styring er frosset.	Bruk reset-funksjonen. Se <i>Nullstilling ved feil</i> nedenfor.
6	Hjulene kjører selv om bremsene er aktivert.	Bremser må justeres.	Sengen skal til service. Kontakt servicetekniker eller Varodd Velferdsteknologi.
7	Madrassens fotende vipper mot gulvet ved utstigning.	Madrassen er ikke festet korrekt i fotenden.	Følg Madrassguidens «Steg 4» i denne hurtigguiden.
8	Sengegrinden kan ikke låses mens den er hevet.	Svart utløserknapp er løsnet og er feilmontert.	Skrut ut utløseren og snu spaken inne i røret. Eller kontakt en servicetekniker eller Varodd Velferdsteknologi.
9	Sengen lager en merkelig lyd når den reguleres.	Motoren er skadet.	Seng skal til service. Kontakt servicetekniker eller Varodd Velferdsteknologi.
		Seng er overbelastet.	
		Noe sitter fast i sengen.	
		Kontrollboks er defekt.	
		Kabel er ikke korrekt koblet til kontrollboks.	
	Håndbetjening er defekt.		
10	Sengens liggeflate er skjev når den kjøres i flat posisjon.	Sengen er eller har vært overbelastet.	
11	Sengen har ujevn bevegelse.	Sengen eller de elektriske delene er eller har vært overbelastet.	
12	Sengen må ofte resettes.	Mulig defekt på tilkoblet enhet.	

 Hvis det er tvil om sikkerheten, må sengen ikke brukes! Kontakt en servicetekniker og ikke bruk sengen før den er kontrollert.

 Se service- og brukerveiledning for mer informasjon.


NULSTILLING VED FEIL (RESET)

Hvis sengen ikke fungerer som den skal, kan den tilbakestilles ved hjelp av bruker- eller personalbetjeningen.


TILBAKESTILLINGSGUIDE

- Tryk samtidig i begge sider på anden øverste knaprække på brukerbetjeningen eller "hånd" og "nøgle" på personalebetjeningen. Der lyder nu et konstant lydsignal i ca. 10 sekunder.
- Bliv ved med at trykke på knapperne også efter lydsignalet er stoppet.
- Sengen kører nu alle motorer ud i deres ydre positioner. Dette kan tage op til halvandet minut. Når sengen er færdig slutter den i en særlig position og kvitterer med 2 "bip".



Sengen er nå tilbakestilt og klar til bruk.

 Dersom det er gjentatt behov for tilbakestilling, må på sengen på service.

BRUKERBETJENING 1

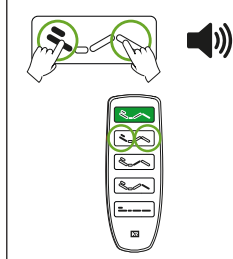

PERSONALEBETJENING

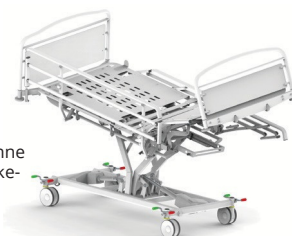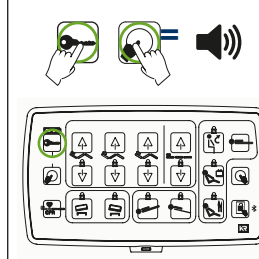

► Sengen stanser i denne posisjonen når tilbakestillingen er fullført.