


Hurtigmanual

Vocatex3 Standard og Plus

CANTEC



Vocatex3 Standard

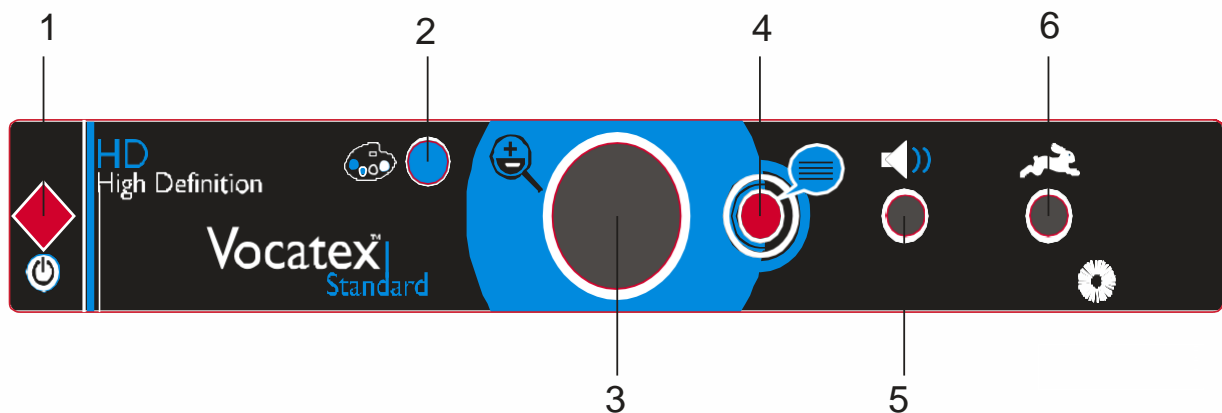

1- AV/PÅ

2- Kontrastfarger og kolonnesikte

3- Forstørrer hjul/ Vri venstre for mindre- Høyre for større


4- opplesningsknapp. Trykk kort og den leser teksten midt i bildet.

5- Volum/ lesestemmer. Vri for volum- Trykk og vri for endre lagrede stemmer

6- Lesehastighet



Vocatex3 Plus

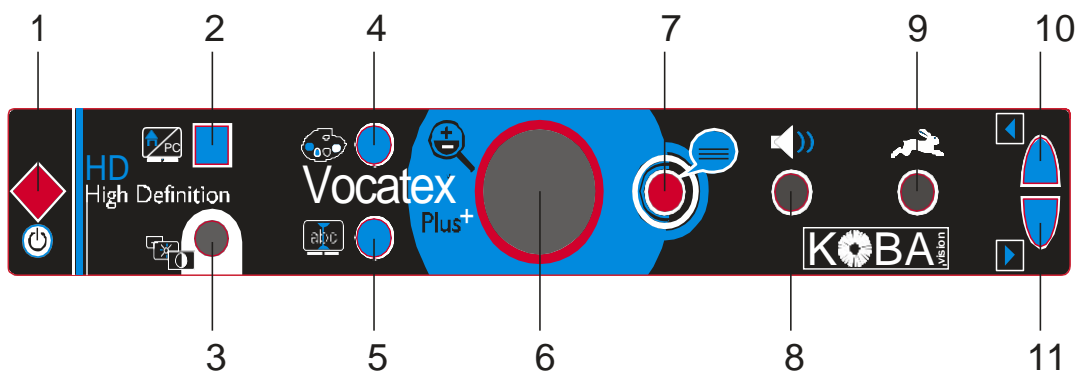

- 1- AV/PÅ
- 2- Bytte skjermbilde om andre enheter er tilkoblet
- 3- Lysregulering på skjerm
- 4- Kontrastfarger i positiv/ negativ. Trykk og hold for å endre farge i modus.
- 5- Kolonnesikter. Hjelper deg å sikte på rett kolonne for opplesing.
- 6- Forstørrer hjul/ Vri venstre for mindre- Høyre for større
- 7- opplesningsknapp. Trykk kort og den leser teksten midt i bildet.
- 8- Volum/ lesestemmer. Vri for volum- Trykk og vri for endre lagrede stemmer
- 9- Lesehastighet
- 10-Gå tilbake i ord eller setning. Kort trykk for ord, trykk og hold for setninger
- 11-Gå fram i ord eller setninger. Kort trykk for ord, trykk og hold for setninger

Cantec AS

Postadresse:
Postboks 626, 1411 Kolbotn
Besøksadresse:
Sofiemyrveien 2, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

bestilling@cantec.no
www.cantec.no