

CANTEC

- helping people

Komme i gang



Prodigi Duo

Cantec AS

Postadresse:
Postboks 626, 1411 Kolbotn
Besøksadresse:
Sofiemyrveien 2, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00


bestilling@cantec.no
www.cantec.no

KOMME I GANG


1. Løft Baseenheten ut av esken ved hjelp av håndtaket, og plasser den på en flat og jevn overflate.




2. Midtpunktet i skjermen skal helst være i høyde med øynene dine, og på en avstand av ca 40 cm. For å finne den optimale plasseringen, skyv den opp eller ned, vinkle den forover eller bakover, og vri den til høyre eller venstre.

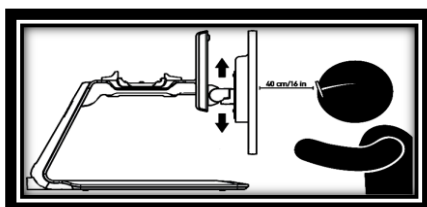

3. Koble strømadapteren til strømkabelen, og deretter kontakten til strømmettet.

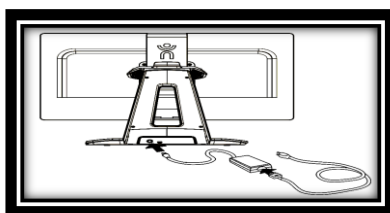

4. Plasser din Prodigy Nettbrett i docking-stasjonen med skjermen opp, og overkanten bakover. Trykk de to klemmene sammen for å koble den til.

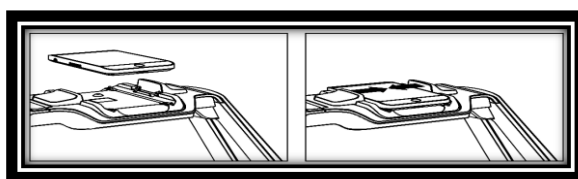

5. Trykk På/Av knappen på Baseenheten for å slå den på. Systemet bruker ca 1 minutt på å slå seg på. Deretter starter den interaktive veiviseren automatisk. Følg veiviseren steg for steg for å lære hvordan du kan bruke Prodigy Duo, og tilpasse innstillingene til dine personlige behov.

