

Hurtigtaster for MagniLink S (med og uten OCR)

Forstørring og kontrast

Pil opp	Øk forstørringen
Pil ned	Reduser forstørringen
Pil venstre	Reduser kontrast
Pil høyre	Øk kontrast

F1	Fargefarge
F2	Positivt høykontrastbilde
F3	Negativt høykontrastbilde

Bilde

F5	Lagre bilde
Skift + F5	Ta et kjapt bilde
F6	Vis tatt bilde
Skift + F6	Vis siste bilde
Ctrl + F	Fryse kamerabilde

Video

Ctrl + F5	Starte/stoppe videoopptak
Ctrl + Skift + F5	Starte/stoppe videoopptak raskt
Ctrl + F6	Vis tatt videovideo
Skift + Ctrl + F6	Vis siste video

Referanselinje

Ctrl + pil venstre	Referanselinje venstre/opp
Ctrl + pil opp	Referanselinje venstre/opp
Ctrl + pil høyre	Referanselinje høyre/ned
Ctrl + pil ned	Referanselinje høyre/ned

Bildedeling, rotering og fokus

F8	Delt skjerm bilde
Ctrl + A	Deaktiver/aktiver "alltid øverst"
Ctrl + M	Minimer til oppgavelinjen
Ctrl + R	Roter kamerabildet med klokka
Skift + Ctrl + R	Roter kamerabildet mot klokka
Ctrl + I	Speilvend kamerabilde
Ctrl + J	Aktiver/Deaktiver autofokus

Oppstart og innstillinger

Ctrl + Alt + S	Globale snarveidkommandoer
F9	Åpne programinnstillinger

MagniLink S sammen med ZoomText og SuperNova

Skift + pil venstre/høyre	Juster bildedeling i vertikalt delt bilde
---------------------------	---

Skift + pil opp/ned	Juster bildedeling i horisontalt delt bilde
---------------------	---

Hurtigtaster for MagniLink S med OCR

F4	Skann og les
Ctrl + F4	Skann og legg til tekst
V	Veksle mellom kameravisning og tekstvisning
B	Visningsmodus
1	Start/stopp lesing midlertidig
2*	Stopp lesing
3	Les forrige
4	Les neste
5	Veksle lesemodus (tegn, ord og linje)
6	Reduser lesehastigheten
7	Øk lesehastigheten
8	Reduser lydnivå
9	Øk lydnivå
0	Bytt stemme

Ctrl + C	Kopier tekst
Ctrl + V	Lim inn tekst
Ctrl + Skift + V	Lim inn og legg til tekst
Alt + F6	Åpne tekstdokument

