



HURTIG GUIDE: HVORDAN BRUKE HIP'SAFE?

**WWW.HELITE.COM
WWW.HIP-SAFE.NO**

**TAKK FOR AT DU VALGTE HIP'SAFE FOR Å
BESKYTTE DEG I DAGLIGLIVET.
HER VIL DU FINNE ALL INFORMASJON DU
TRENGER FÅR Å BRUKE PRODUKTET.**

Hip'Safe Team



PRODUKT BESKRIVELSE

Hip'Safe, kommer klar til bruk.

	<p>Beltet: Hip'Safe</p>
	<p>Spennen: for å åpne og lukke beltet. Grønt lys tennes automatisk når spennen lukkes.</p>
	<p>Yttertrekket: for å beskytte systemet. Lett komfortabelt og vaskbart. Kommer med to så du har et å bruke mens det andre er til vask</p>
	<p>Laderen: for lading av batteriet.</p>
	<p>CO2 patronen: For å fylle airbagene i tilfelle fall. For engangs bruk. må byttes etter aktivering.</p>

HVORDAN AKTIVERE HIP'SAFE ?

1 Lukk beltespennen



Plasser beltet over hoftene og lukk spennen for aktivere, PÅ.

Et grønt LED lys og et «Beep» indikerer at systemet er aktivert PÅ.

2 Sjekk riktig posisjon av beltet



Pilen over «UP» symblet skal peke opp.

3 Plassere beltet



Roter og sentrer beltet. (spennen bak og pilen foran og sentrert)

4 Ta av beltet



Åpne spennen og ta av beltet

ADVARSEL : FEIL POSISJON

Beltet virker ikke i følgende posisjoner



Beltet er ikke sentrert.



Beltet er ikke rotert. (Spennen skal være bak)



Beltet er montert opp ned (Pilen skal peke opp)



VIKTIG :

**Du skal aldri lukke spennen
når beltet ikke er i bruk.
(risiko for uønsket utløsning)**

HVORDAN JUSTERE BELTET?

1 Fjern yttertrekket



Fjern yttertrekket helt.

2 Juster beltet

! Justeringen finnes på baksiden av beltet.



Plasser justering stroppen i riktig posisjon for justering-trekk i spennen for justering til riktig størrelse. (se også video)

3 Skifte av yttertrekk



Plasser yttertrekket over beltet. Sjekk at «UP» symbolene passer overens : gult mot gult // rød mot rød.



Lukk trekket ved å følge lukke knappene.



HVORDAN LADE HIP'SAFE?

En lader er inkluderte i pakken.

Lavt batterinivå : En rød lampe vil lyse og flere «beep beep beep» indikerer at batteriet må lades.



1 koble til laderen



Koble laderen i kontakten på spennen.



2 koble fra laderen



En grønn lampe indikerer at batteriet er fulladet og beltet er klart til bruk.



VIKTIG :
Spennen må aldri være koblet når beltet lades.

HVORDAN SETTE OPP HIP'SAFE ETTER ET FALL?

1 Åpne beltet



Fjern yttertrekket.



Åpne lommen.

2 Fjern den brukte CO2 patronen



Koble fra patronen.



Skrupatronen ut fra holderen.



Fjern den brukte patronen.

3 Tøm airbagene



Press sammen airbagene for å få ut all luft.

4 Fold og plasser airbagene



Rull airbagene med begge hender, fold fra topp til bunn.



VIKTIG:

Hvordan rulle sammen airbagen:
Den blå siden skal rulles inn og den hvite ut



RIKTIG FOLDING
den hvite siden ut.



FEIL FOLDING
den blå siden er ut.

5 Lukke airbag lommen



Start fra hjørnet og følg kanten.



Gjenta operasjonen på den andre siden.

6 Sette inn ny CO2 patron



Ta en ny patron.



Trekk ledningen gjennom hullet i den svarte plastikk sylindren.



Skru på plass den nye patronen.




VIKTIG :

Patronene må skrues helt inn i sylindren.
Du må aldri koble til ledningen før patronen er skrudd helt inn i den svartesylindren.



RIKTIG

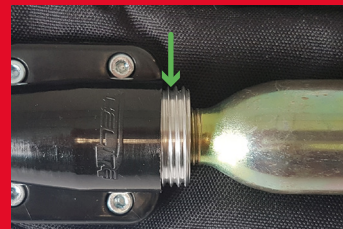

FEIL



Koble til ledningen.

7 LUKKE BELTET



Lukk lommen.



Lukking av yttertrekket.
Start fra mitten og følg trykk knappene

**FOR YTTERLIGGERE
INFORMASJON, SE VÅR BRUKER
MANUAL ELLER SE VÅRE
INSTRUKSJONS VIDEOER PÅ**

WWW.HIP-SAFE.NO

WWW.HELITE.COM





CONTACT-OSS !



@HIPSAFEHELITE



HIPSAFE@HELITE.COM



WWW.HELITE.COM

WWW.HIP-SAFE.NO

AV



airbag technology expert