


## 1. Sengens kontrollfunksjoner og indikatorer

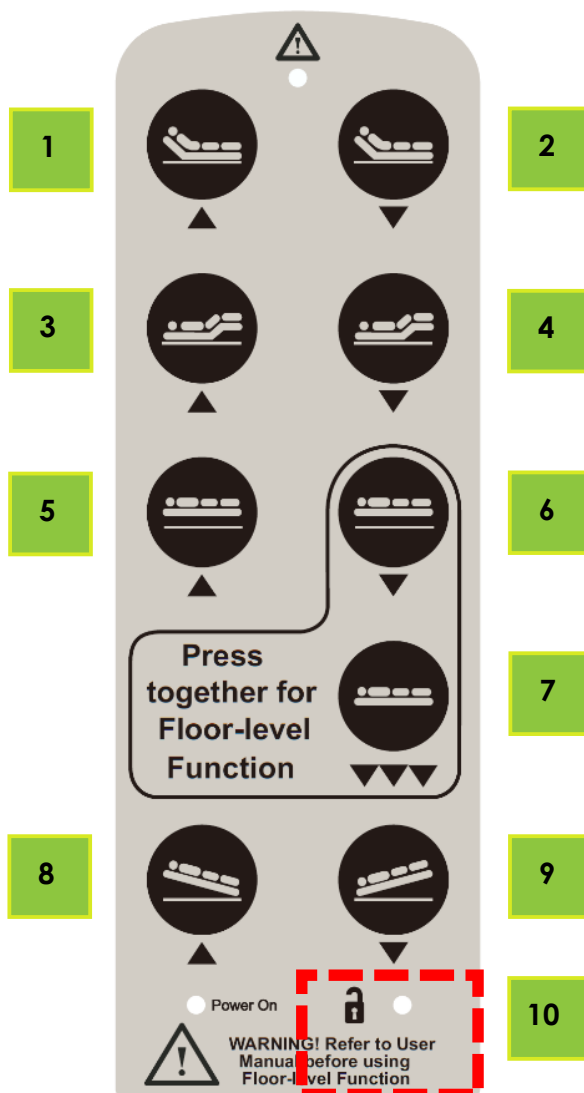

|   |    |   |
|---|----|---|
| 1 | 2  | Ryggstøtte – Heve / Senke   |
| 3 | 4  | Benstøtte - Heve / Senke  |
| 5 | 6  | Seng - Heve / Senke   |
|   | 7  | Sikkerhetsknapp til gulvnivå-funksjon (skal trykkes inn samtidig med knapp nummer seks) |
| 8 | 9  | Omvendt Trendelenburg- og Trendelenburg-funksjon  |
|   | 10 | "Stryke over område" for sikkerhetsnøkkel/låse-indikator                                |

Varodd  
Velferdsteknologi AS  
Rigedalen 41  
4626 Kristiansand  
Tlf: 38 14 48 00  
hjelpemidler@varodd.no  
www.varodd.no

Power On-lampen på håndkontrollen lyser ORANGE, når sengen tilkobles strøm og tennes. Når strømmen kobles til, og Power On-lampen lyser, vil håndkontrollen være i "Låst" tilstand. Låseindikatorlampen (10) lyser ikke, og alle funksjoner er låst.

Funksjonene kan låses opp ved hjelp av sikkerhetsnøkkelen. Denne nøkkel sitter fast på kablet til håndkontrollen. Håndkontrollen aktiveres ved at sikkerhetsnøkkelen strykes over den nederste delen av håndkontrollen som vist med den røde stiplede kassen på diagrammet. Det er forskjellige funksjonsnivåer som kan låses opp, avhengig av hvor mange ganger nøkkelen strykes over håndkontrollen. Funksjonsnivåene er:


1. Første stryk – Håndkontrollens låseindikator lyser GRØNT. Knapp 1 til 8 aktiveres, hvilket omfatter Ryggstøtte, Benstøtte, Gulvnivå-funksjon og Omvendt Trendelenburg. MERK: Trendelenburg-funktionen (knapp 9) forblir låst.
2. Andre stryk – Håndkontrollens låseindikator lyser ORANGE. Alle 9 knapper er nå aktivert, inklusive Trendelenburg. Håndsettet låses automatisk etter en forhåndsinnstilt lengde, hvis det ikke brukes. Låseindikatoren på håndkontrollen slukkes, og alle funksjoner låses.
3. Tredje stryk – håndkontrollens låsestatusindikator lyser ikke. Håndkontrollen er nå helt låst.

MERK: Hvis pasienten ikke kan betjene sengen på sikkert vis, skal håndkontrollen låses med sikkerhetsnøkkelen straks etter hver gang den har blitt brukt. (Sikkerhetsnøkkelen skal kanskje strykes over to ganger for å låses helt. Se 1 – 3 ovenfor. En total låsing bekreftes ved at låseindikatoren slukker.)


**Sikkerhetsstop-posisjon** – Sikkerhetsstop-posisjonen er den posisjonen som sengen stopper når sengen senkes ved hjelp av knapp 6. Madrassplattformens høyde er ca. 20 cm. Se avsnitt 9 vedrørende bruk av gulvnivå-funksjonen.

## 2. Bruk av bremsene på hjulene

Alle fire hjul kan låses ved å trykke på den nederste delen av håndtaket på hjulene ned; de kan låses opp ved å trykke den øverste delen av håndtaket på hjulene ned. Pass alltid på å låse hjulenes bremses når sengen er i bruk, monteres eller demonteres, slik at sengen ikke kan flytte på seg ved et uhell.

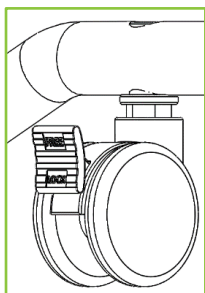

Bremse låst

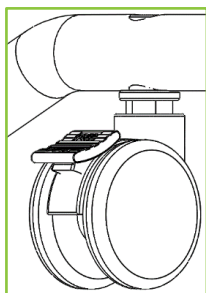

Bremse låst opp

## 3. Flytning og stillings-endring

### ADVARSEL

Forflytning eller posisjonsending SKAL utføres av en kompetent person.

Alle funksjoner SKAL testes og godkjennes av en kompetent person etter forflytning eller posisjonsending.

Kun den strømforsyning som leveres med sengen må brukes.

Sengen må ikke flyttes i gulvnivå-posisjonen.

Sengen må ikke flyttes og sengens stilling må ikke endres hvis det er en servicemedarbeider eller en pasient i sengen.

Sengen må ikke flyttes når strømforsyningen er tilkoblet en stikkontakt.

1. Sørg for at sengen er i sikkerhetsstopp-posisjonen (se avsnitt 8 og 9).
2. Koble strømmen fra.
3. Fest håndkontroll, strømforsyning og alle ledninger for å forhindre at der forekommer skader.
4. Lås opp hjulene, og flytt sengen.
5. Når sengen har blitt flyttet, eller sengens stilling er blitt endret, låses alle hjul som beskrevet i avsnitt 11, og det utføres en komplett funksjonsjekk som beskrevet i avsnitt 10.

Varodd  
Velferdsteknologi AS  
Rigedalen 41  
4626 Kristiansand  
Tlf: 38 14 48 00  
hjelpemidler@varodd.no  
www.varodd.no