

VEA VELA Blues 210

VARIANT: ALB

Manual. nr. 105752



VIKTIG! Den elektriske rullestolen må lade i 12 timer før den kan brukes.

NÅR DU TAR RULLESTOLEN I BRUK

:: Slå på rullestolen med I/O – knappen.

FØR DU KJØRER RULLESTOLEN

:: Setetilt/vinkelen må stå i vannrett stilling (nøytral).

:: Setet må alltid være senket til laveste posisjon av hensyn til din sikkerhet før forsering av hindringer, kjøring på skrått underlag, eller i høy hastighet.

INN- OG UTSTIGNING

:: Slå alltid av rullestolen før inn- og utstigning.

:: **S**eteløft og -tilt kan være til god hjelp ved inn- og utstigning.

SIKKER KJØRING

:: Rullestolen må ikke kjøres skrått på et hellende underlag, da helling til siden øker risikoen for farlige situasjoner.

KJØRING VIA JOYSTICK

:: Slå rullestolen på ved å trykke på I/O knappen.

:: Reguler hastigheten med opp/ned knappen. Hastighetsindikatoren lyser gult (1-5 punkter, avhengig av hastighet).

:: Styr rullestolen med joystick i den retningen du ønsker å kjøre.

Stort utslag = kraftig akselerasjon og høy fart.


Lite utslag = svak akselerasjon og lav fart.

Nedfellbare arm-
lene, høyde- og
breddeinnstillbar

Rygghøyde og -vinkel,
innstillbar ALB-
korsryggstøtte

Setehøyde,
elektrisk

Frikobling (2 stk)
under kappen

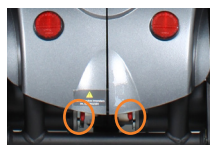

Fotplate,
oppklappbar,
vinkelinnstillbar



I/O - På og av

Horn

Hastighet ned

Hastighet
opp

Setehøyde
(innstilles med joystick
frem/tilbake)

Joystick



LADING AV RULLESTOLEN

:: Batteriindikatoren er innebygd i joystick. Ved fullt ladet batteri lyser de fargede lysdiodene: grønn, gul og rød.

SLIK LADER DU STOLEN (STANDARD OPLADER)

:: Batteri bør lades hver natt.

:: Laderen er helautomatisk, og regulerer ladestrøm etter behov.

1. Stolen parkeres og slås av (I/O knappen)
2. Ladestøpselet settes i kontakten foran på styreboksens underside.
Merknad! Rullestolen kan ikke slås på under lading.
3. Bjælken i det lille display på toppen av laderen viser, at ladning er i gang.
4. Batteriet er fulladet, når lampen på laderen lyser grønt.

Advarsel! Dekk ALDRI laderen når den er koblet til strøm.

Mere informasjon om bruk av stolen, feilsøking og vedlikehold finnes i Bruksanvisningen og på www.vermundlarsen.no.
Informasjon om tilbehør: Kontakt VELA.