



Lightwriter SL50

Hurtigguide

Art. Nr: 1740200

NO 4.0

VELKOMMEN TIL DIN LIGHTWRITER



Lightwriter SL50 er en rask og enkel måte å kommunisere på.

Din Lightwriter kan ha beskyttelsesfilm på displayene når den leveres. Du bør fjerne beskyttelsesfilmen før du tar Lightwriter i bruk.



Eskens innhold

Kontroller at alt er med når du åpner esken:

Medfølgende deler

- Lightwriter SL50



- Minnepinne



- Fingerguide-sett



- Verktøysett



- Reservetaster



- Ethernet-kabel



- Lader



- Veske med displayåpning



Medfølgende dokumenter

- Brukerveiledning
- Hurtigguide (dette dokumentet)

Lad batteriet

Før du bruker Lightwriter første gang, sett i laderen. Du kan bruke Lightwriter mens den lader.

Første gang du lader Lightwriter må den lade i cirka **12 timer** før batteriet er full ladet. Etter dette bør Lightwriter **regelmessig lades i 3-4 timer** for at den skal vare en hel dags bruk. Vi anbefaler at man lar den lade om natten slik at den er klar til bruk om morgenen.



Inngang for lader

Ladelys

Slå på Lightwriter

For å slå på Lightwriter trykk på **Av-og-på-knappen**



Det tar noen sekunder før Lightwriter starter.

Hvis du ikke bruker Lightwriter på en stund eller trykker på en vilkårlig tast, vil displayet slå seg av og gå inn i **Hvilemodus**.

Trykk på hvilken som helst tast for å vekke den opp, og du kan fortsette der du slapp.

For å slå av, hold ned **Av-og-på-knappen**



i 3 sekunder (til du hører et pip).


Begynn å snakke

Når du slår på Lightwriter, er den første skjermen du ser **Taleskjermen**.




Lightwriter-tastaturet kan stort sett brukes på samme måte som et vanlig tastatur for å skrive ord og setninger.















Ettersom du skriver vil en linje med ordforslag vises under hovedskjermen.

Trykk **Enter**  og Lightwriter sier ordene du har skrevet høyt, i tillegg til å vise dem på **Partnerdisplayet**.

Ettersom du skriver vil du merke at det dukker opp ordforslag nederst på skjermen. Trykk på tilhørende **tall-tast** for å bruke et ordforslag. For at ordforslag skal fungere, må Tallmodus **NumLock** være slått av.

Trykk på **Shift**  for å bruke noen av de røde symbolene på tastene.

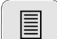
Tastefunksjoner

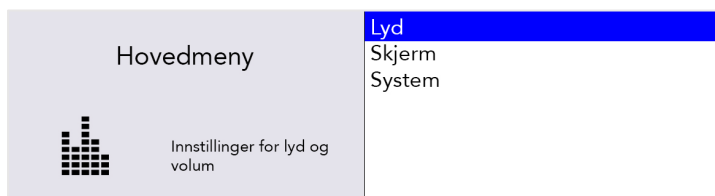
| | | | |
|--|---------------|---|-----------------------------|
|  | Av-og-på |  | Symboler |
|  | Enter |  | Valuta (Shift og 3) |
|  | Meny |  | Tall |
|  | Tallmodus |  | Venstre og høyre piltast |
|  | Shift |  | |
|  | Slett |  | Lyd |
|  | Union (Alarm) |  | |

Velg oppsett for Lightwriter

Du trenger bare noen få innstillinger for å konfigurere Lightwriter med dine personlige preferanser.

Bruk menyene

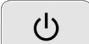
For å åpne standard innstillinger i **Brukermenyen**, trykk på **Meny** 



 *Tips: Finn alternativer for Avansert meny ved å trykk på Shift-Meny.*

Bruk **Venstre**  og **Høyre**  piltast for å bla gjennom alternativene.

Fra enhver meny, trykk **Enter**  for å velge, eller **Av-og-på-knappen**

 for å kansellere.

Lagre dine grunnleggende innstillinger

Stemme – Gå til **Shift-Meny** > **Stemme** > **Velg stemme**. Her finner du et utvalg mannlige og kvinnelige stemmer å velge blant. Trykk **Enter** for å bekrefte ditt valg.




Talevolum – Gå til **Meny** > **Lyd** > **Mixer** > **Talevolum**. Velg blant volumnivåer fra 0 til 10 og trykk **Enter** for å bekrefte.

Tastetrykkvolum – Gå til **Meny** > **Lyd** > **Mixer** > **Tastetrykk**. Velg blant volumnivåer fra 0 til 10 og trykk **Enter** for å bekrefte.

Dato og klokkeslett – Dato og klokkesett skal stille seg inn automatisk. Men hvis du ønsker å endre dem, gå til **Shift-Meny** > **Klokkeslett og dato**

Skannehastighet – Gå til **Shift-Meny** > **Skanning** > **Skannehastighet**. Her kan du stille inn hastigheten som tastene skannes med.

Skannelyd – Her kan du stille inn hvilken lyd du vil ha når tastene skannes. **Shift-Meny > Skanning > Skannelyd.**

 *Tips: Snarvei til redigering av **Mastervolum** ved å trykke på  og   tastene.*

Oppdater programvaren

Det er viktig å holde Lightwriter-programvaren oppdatert slik at enheten fungerer sikkert og godt. Oppdateringer kan inneholde viktige feilrettinger (bug fixes), sikkerhetsoppdateringer og forbedrede funksjoner.

Du kan bruke en internettforbindelse for å oppdatere programvaren når som helst. Alt du trenger å gjøre er å sette en ethernet-kabel inn i Lightwriter og den andre enden i ruterens din.




En sky som nedlastingssymbol indikerer at du laster ned nye oppdateringer. Så snart nedlastingen er fullført, vil du bli bedt om å starte på ny. Oppdateringen er nå fullført.

Sett i switchene (Kun skanning)

Plugg de to bryterne inn i Port 1 og 2.










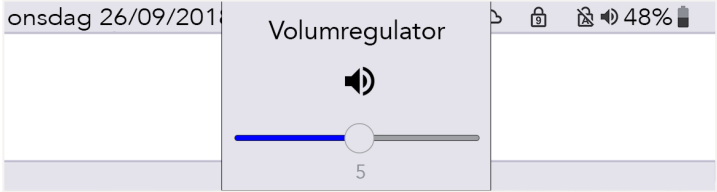






 *Tips: Du kan også skanne med en bryter, eller ved å bruke hvilken som helst tast på tastaturet (se mer informasjon i Brukerveiledningen).*

Trykk på bryteren i **Port 2** for å bevege deg gjennom de uthevede radene eller tastene. Bruk bryteren i **Port 1** for å velge uthevet rad, og så en gang til for å velge uthevet tast.

Trykk på **en tast** for å gå tilbake til vanlig tastatur.

Snarveier

| | |
|------------------|---|
| AV | Hold ned Av-og-på-knappen  i 3 sekunder (til du hører et pip) |
| PÅ | Trykk på Av-og-på-knappen  |
| HVILEMODUS | Hold Av-og-på-knappen  nede i 1,5 sekunder. Trykk på hvilken som helst tast for å vekke den opp igjen. |
| VELG MENYELEMENT | Trykk Enter  |
| | |
| GÅ UT AV SKJERM | Trykk på Av-og-på-knappen  |
| SLETT TEKST | Når du skriver tekst, vil Av-og-på-knappen  tømme hele tekstlinjen. |
| VOLUM | Trykk og hold nede Lyd-tasten  kombinert med Venstre  eller Høyre  piltast for å regulere volumet opp og ned.  |
| MUTE | Trykk på Lyd-tasten  hvis du trenger å dempe Lightwriter, selv når den holder på å snakke. Trykk på Lyd  igjen for å slå av demp. |
| TVUNGEN OMSTART | Hvis du har behov for en tvungen omstart, hold Av-og-på-knappen  nede i 10 sekunder – til displayet slår seg av og så blinker og slår seg på igjen. |
| ALARM* | Trykk og hold inne Union  inntil alarmen starter. |

* Må aktiveres i Innstillinger.

Finn ut mer om Lightwriter ved å lese Brukerveiledningen.

1740200_Quick Guide_SL50_NO Sep 2023



Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige
Telefon +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se



ABILIA